

Gebruikershandleiding - Nederlands



Wendy 3

REF



11000510	160kg / 353lbs
11000530	160kg / 353lbs
11000550	160kg / 353lbs
11000570	230kg / 507lbs
11000590	230kg / 507lbs
11000610	230kg / 507lbs
11000630	230kg / 507lbs
11000650	230kg / 507lbs
11000670	230kg / 507lbs

MD

CE UK
CA

IFU nr.: 34000120 v1.0_NL 20230316

Inhoudsopgave

Over deze handleiding.....	4
1 Beoogd gebruik, gebruiker en omgeving.....	5
2 Contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen	6
3 Wendy overzicht	8
4 De Wendy gebruiken.....	17
5 Onderhoud	21
6 Het oplossen van problemen	24
7 Technische gegevens.....	25
8 Onderdelenlijst	28
9 Lijst van compatibele tilbanden	34
10 Opslag en Vervoer	35
11 Levensduur van het product	35
12 Garantie.....	35
13 Tabel met symbolen.....	36
14 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC).....	37
15 Het rapporteren van een incident	39
United Care	39

Over deze handleiding

Wij hopen dat dit product aan uw verwachtingen voldoet of deze overtreft.

Deze handleiding is bedoeld om gebruikers bekend te maken met de passieve tillift Wendy. Het bevat informatie over wat de Wendy is en hoe deze moet worden gebruikt. Ook wordt technische informatie gegeven over onderdelen, onderhoud en service. Nieuwe gebruikers zijn verplicht deze handleiding te lezen. Gebruikers die bekend zijn met het hulpmiddel kunnen secties overslaan, maar het wordt aanbevolen om op de hoogte te zijn van de informatie in deze handleiding.

Deze handleiding is van toepassing op de volgende producten:

Product	Referentienummer
Wendy 3, 160kg met 2-punts juk	11000510
Wendy 3, 160kg met elektrisch 4-punts juk	11000530
Wendy 3, 160kg met balansjuk	11000550
Wendy 3, 230kg met 2-punts juk	11000570
Wendy 3, 230kg met elektrisch 4-punts juk	11000590
Wendy 3, 230kg met balansjuk	11000610
Wendy 3 verhoogd, 230kg met 2-punts juk	11000630
Wendy 3 verhoogd, 230kg met elektrisch 4-punts juk	11000650
Wendy 3 verhoogd, 230kg met balansjuk	11000670
Wendy 3, 160kg met kinderjuk	11000800

1 Beoogd gebruik, gebruiker en omgeving

De Wendy 3 is een mobiele tillift die, samen met goedgekeurde accessoires, zorgverleners helpt bij het tillen en/of verplaatsen van patiënten met weinig tot geen spierfunctie in zittende of liggende positie over korte tot middellange afstanden binnenshuis, zoals van de ene naar de andere kamer. Tilliften verminderen het risico op letsel voor zorgverleners in de tilsituatie. Te gebruiken door zorgverleners die de gebruiksaanwijzing kunnen lezen en begrijpen.

De Wendy 3 is beoogd te gebruiken voor/door:

- Zorgvrager/patiënt: Personen bij bewustzijn met weinig of geen spierfunctie die zorg van een zorgverlener nodig hebben. De zorgvrager heeft weinig tot geen mogelijkheden om met eigen kracht te helpen bij de transfers. De zorgvrager hoeft niet in staat te zijn om zelf rechtop te gaan zitten of te gaan liggen. Het zijn personen met een lichaamsgewicht van >20 kg en een lichaamslengte van >80 cm.
- Zorgverleners met een medische opleiding: zorgverleners met een medische opleiding van verschillende niveaus, die het hulpmiddel bedienen en een patiënt/zorgvrager met een lichamelijke beperking helpen met een transfer of mobiliteitstraining. Zij hebben kennis van de beoogde medische indicatie en hoe een patiënt/zorgvrager te benaderen. Zij zijn geletterd en kunnen de gebruiksaanwijzing lezen en interpreteren.
- Zorgverleners zonder medische opleiding: leken zonder medische opleiding, die het apparaat bedienen en een patiënt/zorgvrager met een lichamelijke beperking bijstaan na een producttraining. Zij zijn geletterd en kunnen de gebruiksaanwijzing lezen en interpreteren, hebben van United Care of DHG een gecertificeerde training gekregen over de bediening van het hulpmiddel.
- Servicepersoneel: technisch onderlegd personeel van professionele zorginstellingen of in de thuiszorg dat assisteert bij reparaties van het hulpmiddel. Het servicepersoneel heeft training gehad van United care / DHG gecertificeerde trainers hoe het hulpmiddel gerepareerd moet worden.
- United Care / DHG Servicepersoneel: technisch onderlegd United Care / DHG personeel met expertise in het repareren en onderhouden van het hulpmiddel.

De Wendy 3 is bedoeld voor gebruik in de thuiszorg en de professionele gezondheidszorg.

- De thuiszorgomgeving is beperkt tot huishoudelijke binnenruimten, met uitzondering van badkamers, sauna's, zwembaden en andere ruimten met een hoge temperatuur en vochtigheid. De bedrijfsomstandigheden zijn +5°C tot +40°C, RH van 15%-90% atmosferische druk van 700hPa - 1060hPa.
- Professionele zorginstellingen omvatten langdurige zorg (woonzorg-, revalidatie- en geriatrische instellingen), klinieken, instellingen voor beperkte zorg, ziekenhuizen (patiëntenkamers, spoedeisende hulp, intensive care, operatiekamers behalve in de buurt van hoogfrequente chirurgische apparatuur).

2 Contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen



LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.

Het niet in acht nemen van de volgende aandachtspunten en de verdere beschrijvingen in deze handleiding kan leiden tot gevaarlijke situaties. Onjuist en onzorgvuldig gebruik kan schade veroorzaken aan de Wendy, en ook leiden tot gevaarlijke situaties. Stel in dergelijke situaties het hulpmiddel buiten gebruik en neem contact op met de leverancier.

Contra-indicaties


- Het apparaat mag niet worden gebruikt voor patiënten/zorgvragers boven het maximumgewicht dat op het hulpmiddel, de etiketten van het hulpmiddel en deze gebruikershandleiding is aangegeven.

Voorzorgsmaatregelen

- Behandel het hulpmiddel met zorg en zorg voor een schone, nette werkomgeving.
- Controleer de toestand en de functies van het hulpmiddel regelmatig.
- Service en onderhoud van het hulpmiddel is alleen toegestaan door aantoonbaar bevoegde personen. De levensduur van het hulpmiddel kan door ondeskundig onderhoud worden verkort.
- Het vervangen van constructiedelen van het hulpmiddel is alleen toegestaan door aantoonbaar bevoegde personen.
- Bediening van het hulpmiddel is alleen toegestaan door aantoonbaar bevoegde personen.
- Het opladen van de accu moet altijd gebeuren in een goed eventileerde, droge ruimte.
- Laders moeten worden aangesloten volgens de installatiehandleiding en moeten minstens eenmaal per jaar worden gecontroleerd.
- Controleer bij het verplaatsen van het hulpmiddel altijd of de ruimte waar de transfer plaatsvindt vrij is van obstakels. Controleer ook onder bedden en/of (rol)stoelen waar de poten van het hulpmiddel moeten komen. Het hulpmiddel mag niet vastlopen of vast blijven zitten.
- Het hulpmiddel moet periodiek en ten minste eenmaal per jaar worden geïnspecteerd.
- Meld defecten aan het hulpmiddel altijd aan de leverancier.
- Controleer bij het tillen altijd of er voldoende ruimte boven en rond het hulpmiddel is. Controleer bij het passeren van een deurkozijn altijd of er voldoende ruimte is boven de hefarm.
- Bewaar de handleiding op een toegankelijke plaats voor de gebruikers van het hulpmiddel.
- Indien de maximale belasting tussen lift, juk en tilband verschilt, moet altijd de laagste maximale belasting worden gebruikt.

Waarschuwingen

- Laat de patiënt/zorgvrager nooit zonder toezicht achter tijdens een transfer.
- Gebruik het hulpmiddel alleen met goedgekeurde accessoires. (Als u een ander type tilband wilt gebruiken, neem dan altijd contact op met United Care).
- Het bevestigen van de clips van een tilband aan het juk moet zorgvuldig gebeuren. Een onjuiste bevestiging van een clip kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Gebruik voor service en reparatie uitsluitend originele onderdelen die door United Care zijn geleverd.
- Gebruik het hulpmiddel niet als het defect is. Als er een rode sticker met "afgekeurd" op het hulpmiddel zit, mag het hulpmiddel ook niet worden gebruikt.
- Het hulpmiddel mag op geen enkele wijze worden gemodificeerd.
- Tijdens het gebruik van het hulpmiddel mag geen onderhoud worden uitgevoerd.
- Indien door verkeerd gebruik of vervoer vervormingen aan de lift zijn ontstaan, mag deze niet meer worden gebruikt en moet hij naar de leverancier worden teruggestuurd.
- Het hulpmiddel mag niet worden achtergelaten of bewaard in een vochtige of natte omgeving.
- Het hulpmiddel mag niet met stoom worden gereinigd.
- Het hulpmiddel mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
- Het hulpmiddel mag niet worden gebruikt op hellende oppervlakken met een hoek van meer dan 5 graden.
- Houd handen, benen en voeten altijd uit de buurt van de bewegende en inklappende delen.
- Het hulpmiddel is veilig voor zorgverleners om vast te pakken en te bedienen op onderdelen die zijn aangegeven met de blauwe pijlen hieronder.
- Het hulpmiddel is veilig voor patiënten/zorgvragers om te zitten en te grijpen op onderdelen die worden aangegeven door de groene pijlen hieronder.
- De hefmotor is uitsluitend bedoeld voor het heffen en neerlaten van het hulpmiddel. Hij mag nooit worden gebruikt als steun, handvat of duw/trekstang, zoals aangegeven door de rode pijlen hieronder.

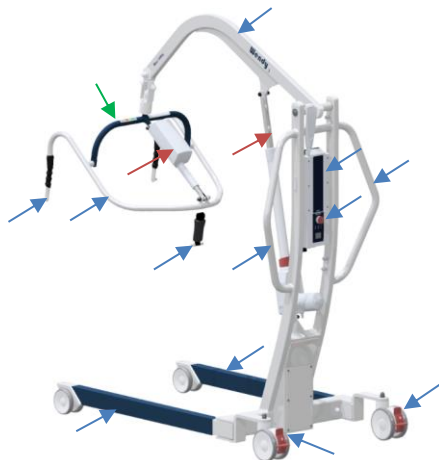

3 Wendy overzicht

De volgende onderdelen worden in de volgende subhoofdstukken uitvoeriger beschreven.



Nr.	Onderdeel	Hoofdstuk
1	Controlebox	3.1
2	Noodknop	3.1.1
3	Handbediening	3.2
4	Liftmotor	3.3
5	Accu	3.4
6	Frame	3.5
7	Wielen (4x)	3.6
8	Potenspreid Motor	3.7
9	Juk	3.8

A	Label met serienummer
B	Maximum gewicht sticker
C	Service controle sticker

Hoe leest u het UDI-nummer (serienummerlabel)?	
(01)	87206181430134 (11) 230103 (21) 2202298
(01)	Identificatienummer van het hulpmiddel, GTIN
(11)	Productiedatum, JJMMDD
(21)	Serienummer: de eerste 2 cijfers zijn het jaartal (YY), de laatste 5 cijfers zijn het volgnummer.

Serienummer label

Wendy 3



Max Load

160 kg

Tot. Weight

215 kg

(01) 8 7206181 43013 4 (11) 230103 (21) 2202298

REF

11000530


Rev. A

SN

2202298

3.1 Controlebox

De motoren voor tillen, kantelen en spreiden worden bestuurd door de controlebox, die zich tussen het frame bevindt, aan de achterzijde van de lift. De accu's die de stroom leveren, zitten bovenin de controlebox. De handbediening, de motoren en het netsnoer worden aangesloten in het onderste deel van de controlebox. De controlebox dient voor de besturing van de lift, de eindstop en de bescherming van de motoren.

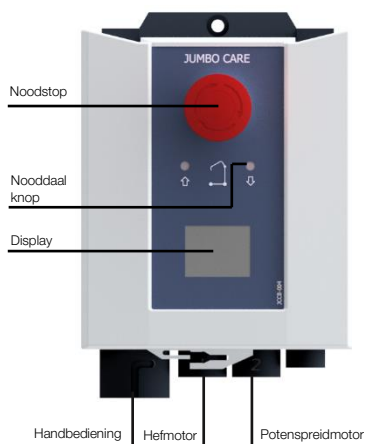

De rode noodknop wordt gebruikt om de lift aan en uit te zetten, en om in geval van nood de stroomtoevoer uit te schakelen. Onder deze knop bevindt zich de elektrische noodbediening die de lift in geval van nood kan laten zakken.

3.1.1 Noodknop

Door op de rode noodknop te drukken, wordt de stroom uitgeschakeld en stopt de lift onmiddellijk met bewegen. De noodknop wordt ook gebruikt om de lift aan en uit te zetten.

Druk op de rode knop om de noodstop te activeren. Om de noodstop op te heffen, draait u de rode knop met de wijzers van de klok mee.



Druk op de noodknop als u de lift wegzet. Zo kan het langzame leeglopen van de accu's worden beperkt.

3.1.2 Elektrische noodstop

De noodbediening naar beneden wordt gebruikt wanneer het systeem, afgezien van de controlebox en de accu, een storing vertoont. Wanneer deze wordt ingedrukt, wordt de motorrem uitgeschakeld en wordt de resterende spanning gebruikt om de hefarm te laten zakken. Dit werkt alleen als de accu op de lift is geplaatst. Om de noodstopfunctie in te schakelen, steekt u de punt van een pen, potlood of een ander puntig voorwerp in de opening boven het ↓ - symbool.



3.1.3 Display

Het display op de controlebox geeft de gebruiker informatie over de volgende indicaties:




Accu indicatie:

Een volledig gekleurd pictogram betekent dat de accu volledig is opgeladen. Om lege accu's te voorkomen, is het raadzaam deze op te laden zodra de capaciteit minder dan de helft bedraagt. Dit verlengt de levensduur van de accu.



Gebruik en onderhoudsindicatie:

Als de omhoog-omlaag knop kort wordt ingedrukt, verschijnt de gebruiks- en onderhoudsindicatie. Hier leest u meer informatie over hoeveel de lift is gebruikt en wanneer onderhoud nodig is.

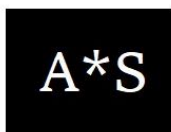

Cycli lift motor:

Dit geeft aan hoeveel cycli de liftmotor heeft gemaakt. Eén cyclus van de liftmotor wordt geteld voor elk gebruik van minstens 5 seconden met meer dan 1,5 A stroomafname en een retourtijd van minstens 2 seconden.



Gebruik liftmotor:

Hier kunt u aflezen hoeveel de liftmotor is gebruikt. Het geeft een goede indicatie hoeveel de motor gebruikt is. Het wordt aangegeven in Ampère maal het aantal seconde dat de hefarm omhoog en omlaag is gegaan.



Maximaal hefvermogen:

Hier kunt u aflezen hoe vaak de lift meer dan de maximale hefcapaciteit heeft getild.



Inspectiedatum teller:


Dit laat zien wanneer de lift voor het laatst is geïnspecteerd. Bijv. 90/- betekent dat de lift 90 dagen geleden is gekeurd. Het is mogelijk een onderhoudsinterval in te stellen, bijv. 90/360 betekent dat de lift over 270 dagen moet worden gekeurd. Wanneer de teller 360 dagen bereikt, gaat het service lampje op de handbediening branden. Na inspectie zal de servicemonteur de teller opnieuw instellen.

3.2 Handbediening

De lift kan worden bediend met een handbediening en met de controlebox. Dankzij het flexibele snoer op de handbediening kan de zorgverlener naast de zorgvrager staan tijdens het tillen. De handbediening wordt gebruikt om:

- De lift omhoog en omlaag te bewegen
- Kantelen van het juk te kantelen (alleen van toepassing op elektrisch juk)
- De ruimte tussen de poten aan te passen


De bedieningsknoppen worden hieronder getoond:

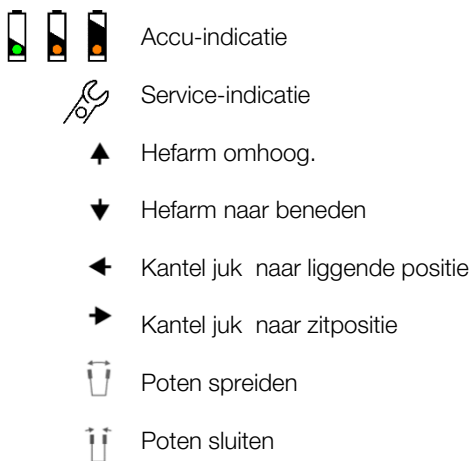

Aan de achterkant van de handbediening zit een haak om hem aan de lift te hangen. Ga altijd voorzichtig om met de handbediening. Te hard aan het snoer trekken kan de handbediening beschadigen.

3.3 Hefmotor

De Wendy 3 is uitgerust met een sterke, robuuste en stille motor met een kogelomloopspindel en eindschakelaars. De motor is verbonden met de controlebox, die een handbediening heeft om de lift te bedienen. Er is een rode nooddaalknop op de motor, die gedraaid kan worden om de hefarm te laten zakken in geval van storing of nood. Trek de rode beugel omhoog om de hefarm te laten zakken. Deze functie vereist altijd enig gewicht op de hefarm om te kunnen werken.

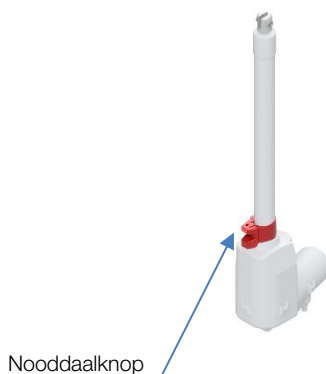

3.4 Accu

Er zijn twee soorten oplaadbare accu's beschikbaar. Loodhoudende (Pb) accu's en Lithium-ion (Li-ion) accu's. De lift wordt standaard geleverd met één Pb-accu. Alle accu's hebben de eigenschap dat wanneer de accu bijna leeg is, de lift altijd nog minimaal één keer kan worden gebruikt met het resterende vermogen. Pb-accu's gaan redelijkerwijs twee tot drie jaar mee. Li-ion accu's hebben een langere levensduur, zijn lichter, milieuvriendelijker en kunnen langer stilstaan. De zelfontlading is minimaal.



De Li-Ion accu gaat in slaapstand na een week niet te zijn gebruikt en niet te zijn opgeladen. Hij kan uit de slaapstand worden gehaald door hem op de lader te leggen.

De accu heeft een eenvoudig bevestigingsmechanisme. Aan de achterkant van de accu zit een handvat waarmee de accu gemakkelijk kan worden vervangen.



Zorg er altijd voor dat de accu voldoende is opgeladen voordat u de lift gebruikt.

3.4.1 Levensduur van de accu

Het aantal hefbewegingen dat met een volledig opgeladen accu kan worden gemaakt, hangt af van de duur van de hefbewegingen, het getilde gewicht en de conditie van de accu.

Een accu die lange tijd niet wordt gebruikt, loopt langzaam leeg. Pb-accu's kunnen ongeveer zes maanden ongebruikt blijven voordat de capaciteit wordt aangetast. Li-ion accu's kunnen langer ongebruikt blijven dan Pb accu's. Het wordt aanbevolen om beide typen eenmaal per week op te laden. Li-Ion accu's gaan langer mee dan Pb accu's. Bij intensief gebruik kan de Li-ion wel vier tot vijf keer langer meegaan. De sterkte en het laadgedrag van beide zijn gelijk. Om problemen te voorkomen, wordt aanbevolen de Pb-accu om de twee jaar te vervangen. En de Li-ion om de zeven jaar te vervangen.



Een loodaccu te veel ontladen is schadelijk voor zijn capaciteit.

3.4.2 Acculader

Accu's van Wendy kunnen worden opgeladen met de meegeleverde acculader. Deze acculader bevindt zich apart van de lift. De accu's worden op dezelfde manier op de lader geplaatst als op het controlebox van de lift. Beide accu's, Pb en Li-ion, kunnen met dezelfde lader worden opgeladen. De Li-ion accu's hebben een ontwerp dat ervoor zorgt dat dezelfde acculader kan worden gebruikt. Het wordt aanbevolen de lader aan de muur te bevestigen. Dit voorkomt schade aan lader, snoer en accu door schuiven, vallen etc. Ook is het duidelijk waar de lader zit zodat deze niet zoek raakt.

3.4.3 Opladen van de accu

Om de langste levensduur van de accu's te garanderen, is het belangrijk de accu's regelmatig volledig op te laden. Het wordt aanbevolen dit minstens één keer per week te doen. Op de controlebox ziet u de accu-indicator waarmee u de capaciteit van de accu kunt controleren.



Controleer na elke transfer de accu-indicator. Wanneer de capaciteit minder dan 25% bedraagt, wordt geadviseerd de accu op te laden voor verder gebruik.

Laad de accu op volgens onderstaande procedure:

- Sluit het netsnoer van de oplader aan op het stopcontact. Het indicatielampje "aan" gaat branden.
- Haal de accu uit de lift en plaats hem op de lader. Het opladen van de accu begint automatisch. Tijdens het laden brandt het "laad"-lampje.
- Wanneer de accu volledig is opgeladen, dooft het "laad"-lampje. Verwacht een oplaadtijd van ongeveer 6 uur.

Tip: Regelmatig opladen van de accu's voorkomt problemen en verlengt de levensduur.

3.5 Frame

Het frame bestaat uit meerdere aan elkaar gelaste stalen delen voor een stevige en stijve constructie. Het frame is voorzien van een witte poedercoating voor een nette afwerking van het oppervlak.



Gebruik de lift niet wanneer er zichtbare scheuren of vervormingen in het frame zijn. De structurele integriteit kan aangetast zijn en het gebruik van de lift in deze toestand kan tot gevaarlijke situaties leiden.

3.6 Wielen

De lift heeft vier zwenkwielen. De achterste wielen zijn geremd, zodat de lift niet kan rollen of draaien. Bedien de rem met de punt van de voet. Doe dit altijd voorzichtig. De wielen hebben een zeer lage rolweerstand door de kogelgelagerde draaipunten. Het verplaatsen van de lift vanuit stilstand kost de minste moeite wanneer de wielen in de rijrichting staan.



Ontgrendeld



Vergrendeld



Controleer altijd de werking van de remmen en of de wielen intact zijn.

3.7 Potenspreid motor

Wendy 3 is uitgerust met een motor die het spreiden en sluiten van de poten mogelijk maakt. De motor is een lineaire elektrische actuator die de poten spreidt voor mobiliteit en positionering onder bijvoorbeeld een stoel of bed. De poten kunnen worden versteld met de knoppen op de handbediening.



Voer transfers uit met de poten in gesloten positie om schade aan de lift, de gebruiker of de omgeving te voorkomen.



Zorg dat er voldoende ruimte is om de poten te spreiden. Als de poten vast komen te zitten, kan er schade ontstaan aan de lift of de omgeving.


3.8 Tiljuk

De Wendy 3 is uitgerust met een juk. Het juk is een constructie waaraan de tilband is bevestigd waarin de patiënt/zorgvrager zich bevindt.. Het juk is verbonden met de hefarm door middel van een koppelstuk (cardan). Deze koppeling zorgt ervoor dat het juk vrij kan draaien en kantelen, wat zorgt voor een rustige transfer door balans. Er zijn drie soorten jukken beschikbaar voor de Wendy 3:

- Elektrisch juk
- Balans juk
- Twee-punts juk


3.8.1 Elektrisch juk

Het elektrisch juk kan de patiënt/zorgvrager in zowel zittende als liggende positie brengen door het juk te verstellen met behulp van een elektrische actuator. Hete juk wordt bevestigd met clips. Deze clips maken deel uit van de tilband en kunnen worden bevestigd aan de verbindingpunten van het juk.

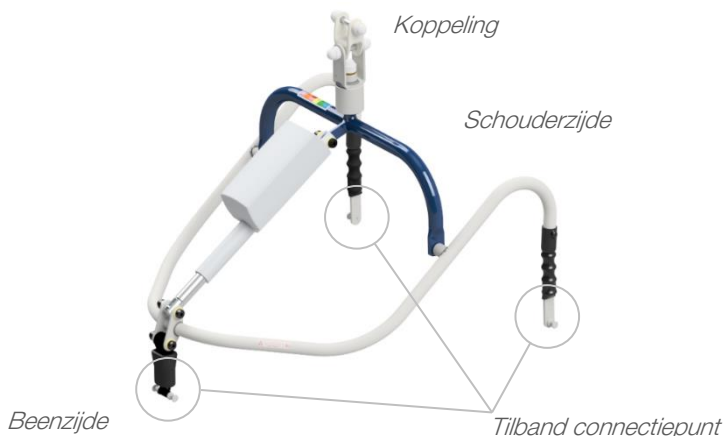

3.8.2 Balansjuk

De balansjuk kan de patiënt/zorgvrager zowel in een zittende als in een liggende positie brengen door de zorgvrager in de gewenste positie te brengen. Het juk zorgt ervoor dat de positie van de zorgvrager door middel van balans wordt vastgehouden. De tilband wordt bevestigd met behulp van clips. Deze clips maken deel uit van de tilband en kunnen worden bevestigd aan de verbindingpunten van het juk.

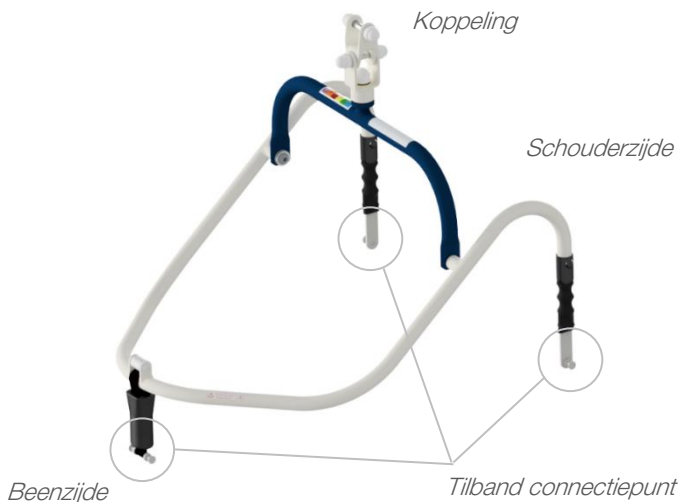

3.8.3 Tweepuntsjuk

Het tweepuntsjuk wordt gebruikt in combinatie met tilbanden met lussen. Deze lussen kunnen worden verbonden met de haken van het tweepuntsjuk. Door de verschillende lengtes van de lussen kan de zorgvrager zowel liggend als zittend worden opgetild.



3.9 Lichaamsdelen of weefseltypes die in contact komen met delen van de lift

Zie onderstaande figuur als referentie.

Patiënten/zorgvragers:

Het is niet de bedoeling dat de patiënten met het hulpmiddel zelf in contact komen. Zij bevinden zich in een tilband, die aan de verbindingpunten (1) is bevestigd. Tilbanden worden in deze afbeelding niet getoond en worden beschouwd als toegepaste onderdelen.

Zorgverleners en servicepersoneel:

- Handsen komen in contact met de verbindingpunten (1) bij het bevestigen van de tilband (blootgestelde huid)
- Handsen bedienen handbediening (2) (blootgestelde huid)
- Handsen kunnen het juk geleiden en slingeren voorkomen (3) (blootgestelde huid)
- Handsen drukken het hulpmiddel op de leuning (4) (blootgestelde huid)
- Voeten activeren wielremmen op de wielen (5) Gebruikers worden geacht schoenen te dragen.
- Onderhoudspersoneel mag al het bovenstaande hanteren en plastic behuizingsdeksels met de hand openen (6) (blootgestelde huid)



4 De Wendy gebruiken

4.1 Voor gebruik

De inspectie en controles voor gebruik moeten worden uitgevoerd door een opgeleide professionele zorgverlener of servicemedewerker, niet door een leek. Voor elk gebruik van de Wendy moet u de volgende stappen volgen:

1. Visuele controle van de Wendy. Er moet worden gecontroleerd of de volgende zaken voorkomen;
 - Scheuren of barsten in het frame
 - Vervorming van het frame
 - Vervorming van de poten
 - Beschadigde zwenkwielen of remmen
 - Beschadigd tiljuk
 - Beschadigde duwbeugel
 - Schade aan het wiel

Als één van deze punten van toepassing is, moet het product worden uitgeschakeld en buiten gebruik worden gesteld. Neem contact op met de serviceafdeling of United Care.

2. Plaats de accu in de Wendy.
3. Schakel de Wendy in door de noodknop met de klok mee te draaien. Dit moet een gemakkelijke en krachtloze beweging zijn.
4. Controleer de accustatus op de accu-indicator op het controleboxje door kort op de knop omhoog of omlaag te drukken.
5. Controleer de hoog - laag functie
6. Controleer de werking van de pootspreider.
7. Controleer de werking van het juk.
8. Controleer de beweeglijkheid in alle richtingen.
9. Controleer de handbedieningskabel op tekenen van slijtage.
10. controleer of de markeringen op de handbediening samenvallen met de heffunctie.



De Wendy 3 is klaar voor gebruik. Zorg altijd voor een nette en schone werkomgeving. *Gebruik de lift of accessoires niet als de conditie ervan onvoldoende is. Neem bij twijfel contact op met de leverancier of United Care.*

4.2 De tilband bij de patiënt/zorgvrager aanbrengen

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tilband voor informatie over het aanbrengen van de tilband.

4.3 Bevestiging van de tilband aan het juk


1. Plaats de lift in de buurt van de patiënt/zorgvrager. Spreid zo nodig de poten door op
2. de  - knop op de handbediening te drukken
3. Plaats het juk boven de romp van de patiënt/zorgvrager.
4. Laat de hefarm zakken tot een hoogte waarop de clip gemakkelijk aan het juk kan worden bevestigd. Gebruik zo nodig de remmen.
5. Kantel het juk indien nodig naargelang de positie van de patiënt/zorgvrager met de  of  - knop op de handbediening.
6. Bevestig de clips aan het juk. Zorg ervoor dat u de clips aan de juiste kant van het juk bevestigt. Volg de rechter of linker instructies hieronder, afhankelijk van welke clips worden gebruikt.



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de tilband gebruikt. Het is ESSENTIEEL dat u volledig begrijpt hoe u de tilband correct moet ophangen. Controleer de tilband altijd op schade en slijtage voor gebruik.


UCP clip (C):

1. Houd de strip van de clip met één hand vast, en trek het grote gat van de clip over de kop van het ophangpunt, controleer of de band (waar de clip aan de tilband is bevestigd) niet gedraaid is.
2. Neem de band onder de clip van de tilband en trek hem naar beneden.
3. Trek aan de clip van de tilband zodat het ophangpunt in de beveiliging valt. Het ophangpunt is nu vergrendeld in het gat bovenaan de clip.

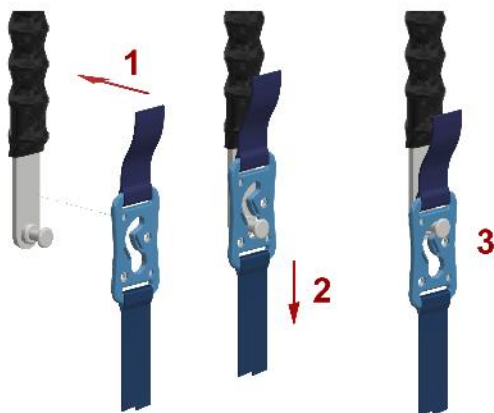

iQ clip (Q):

1. Voordat u de clip aanbrengt (en verwijdert), moet u ervoor zorgen dat er geen spanning op de tilband staat. Houd de clip met één hand vast en duw met de duim de sluiting open. U kunt de clip ook over de pen drukken in plaats van deze eerst te openen. Controleer of de band, waarmee de clip aan de tilband is bevestigd, niet gedraaid is.
2. Haak de clip over het ophangpunt en trek hem naar beneden. De clip klikt op zijn plaats.
3. Nu zit de clip vast en geborgd. Door de spanning op de band kan de clip nooit loskomen. Halve bevestiging is hier niet meer mogelijk.

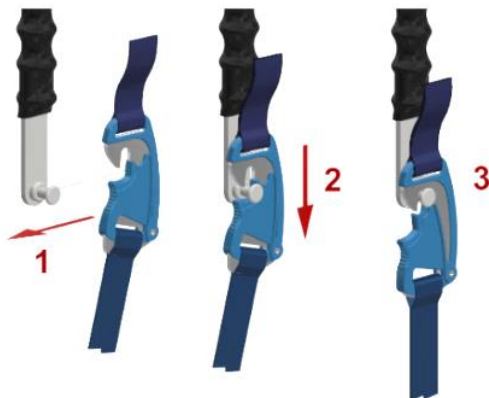

Controleer altijd dubbel of de clips goed aan het juk zijn bevestigd!

Lussen (L):

1. Plaats de lift in de buurt van de patiënt/zorgvrager. Spreid zo nodig de poten door op
2. De  -knop op de handbediening te drukken.
3. Plaats het juk boven de romp van de patiënt/zorgvrager.
4. Laat de hefarm zakken tot een hoogte vanwaar de lussen gemakkelijk aan het juk kunnen worden bevestigd door de  - knop op de handbediening in te drukken.
5. Bevestig de lussen van de tilband aan de haken. Zorg ervoor dat de lussen aan de beenzijde kruislings worden aangebracht.
 - a. Gebruik voor de zitpositie de lange lussen voor de benen en de korte lussen voor de schouders.
 - b. Gebruik voor de liggende positie de korte lussen voor de benen en de lange lussen voor de schouders.



Controleer altijd dubbel of de lussen goed aan het juk zijn bevestigd!

4. Een transfer maken

1. Zorg ervoor dat de tilband wordt aangebracht volgens de instructies in de gebruikershandleiding van de tilband.
2. Bevestig de tilband aan het juk volgens 4.3.
3. Ontkoppel de wielremmen, indien deze nog ingeschakeld zijn. (Zonder de remmen zal de lift zijn ideale hefpositie vinden).
4. Til de patiënt/zorgvrager op tot ongeveer de helft van de maximale hoogte door op de ▲ - knop van de handbediening te drukken.
5. Verplaats de lift met behulp van de duwstang aan de achterkant van de lift. (Bij voorkeur sluit u de poten door op de ⚡ - knop op de handbediening te drukken).
6. Ga bij het draaien niet aan de achterkant van de lift staan. Ga in plaats daarvan aan de zijkant staan en gebruik zowel de duwstang als de hefarm om de lift te draaien.
7. Verplaats de lift naar de gewenste plaats.
8. Kantel zo nodig het juk naar de bestemmingspositie van de patiënt/zorgvrager door op de ◀ of ▶ - knop van de handbediening te drukken.
9. Spreid of sluit zo nodig de poten door op de ⚡ of ⚡ - knop van de handbediening te drukken.
10. Laat de tilarm zakken totdat de lift niet langer belast wordt met het gewicht van de patiënt/zorgvrager en de tilband vrij is van spanning.
11. Maak de tilband los van het juk.
12. Verwijder de tilband van de patiënt/zorgvrager volgens de instructies in de handleiding van de tilband.



Zorg er bij het verplaatsen van de lift voor dat het pad vrij is van obstakels.



Gebruik de lift niet als het hanteren, verplaatsen of draaien meer kracht kost dan beschreven. Laat het hulpmiddel in dat geval controleren door de Technische Dienst.



Houd altijd rekening met de veiligheid van de patiënt/zorgvrager wanneer u de lift bedient.

4.5 Bedieningskrachten

De bedieningskrachten bij gebruik volgens de instructies mogen de waarden in onderstaande tabel niet overschrijden:

Bediening Controle	Maximaal vereiste kracht
Knoppen voor handbediening	0,2 kg / 2N
Noodknop controlebox	0,3 kg / 3N
Noodneer motor	10 kg / 100N
Zwenkwielen remmen	10 kg / 100N
Verplaatsen/bedienen van de lift	5 kg / 50N

5 Onderhoud

De Wendy 3 is zo ontworpen dat het onderhoud tot een minimum kan worden beperkt. Geadviseerd wordt het onderstaande onderhoudsschema te volgen:

- Dagelijks en wekelijks onderhoud kan worden gedaan door zorgverleners.
- Halfjaarlijks onderhoud moet worden uitgevoerd door de technische dienst.
- De jaarlijkse inspectie en eventuele reparatie daarvan dient te worden uitgevoerd door United Care via de Periodieke Inspectie Overeenkomst (PIO), of een ander aantoonbaar geautoriseerd bedrijf.



Onderhoud of wijzigingen moeten altijd worden uitgevoerd door een persoon die daartoe bevoegd is. Onbevoegde veranderingen, reparaties of wijzigingen aan het hulpmiddel kunnen leiden tot letsel of defecten aan het hulpmiddel. Indien onderdelen van het hulpmiddel een ander onderhoud, reiniging of reparatie vereisen dan beschreven in dit deel van de handleiding, neem dan contact op met United Care of een erkende wederverkoper.

5.1 Dagelijks onderhoud

De volgende handelingen kunnen dagelijks worden uitgevoerd door de gebruikers van de Wendy 3 (en tussen het gebruik door indien nodig). Probeer nooit service- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren terwijl de lift in gebruik is.

De lift

Controleer of alle onderdelen van de lift aanwezig zijn, zoals handbediening, accu's, enz.

De tilbanden

Controleer voor gebruik altijd of de tilband schoon is en voldoet aan de instructies van de fabrikant.

Accu's

Controleer na gebruik of de accu moet worden opgeladen.



Neem bij twijfel over de toestand van de lift altijd contact op met de technische dienst van United Care!

Het hulpmiddel kan dagelijks en tussen gebruik door worden gereinigd met een normaal huishoudelijk schoonmaakmiddel. Indien desinfectie vereist is, gebruik dan een product dat bestemd is voor de reiniging van dergelijke producten. Gebruik een reinigingsmiddel met maximaal 5% alcohol of maximaal 1% salicylzuur. Het product is niet bedoeld voor sterilisatie of reiniging met stoom.

5.2 Wekelijks onderhoud

De volgende handelingen kunnen wekelijks door zorgverleners worden uitgevoerd.

De lift

- Controleer de werking van de lift en de werking van de noodstop.
- Controleer of alle beweegbare delen gemakkelijk en stil bewegen.
- Controleer de leesbaarheid van de etiketten met het serienummer en de maximale belasting.
- Controleer de aanwezigheid van een handleiding, snelle instructiekaart en logboek.

De tilband

Reinig en inspecteer de tilband volgens de instructies van de fabrikant.

Accu's

Het wordt aanbevolen alle accu's ten minste eenmaal per week op te laden (ook wanneer ze niet worden gebruikt).

5.3 Halfjaarlijks onderhoud

Onderstaande lijst geeft een overzicht van het onderhoud dat de technische dienst elk half jaar kan uitvoeren aan de Wendy 3. Controleer of:

1. De tilband(en) is (zijn) veilig te gebruiken na inspectie volgens de instructies van de fabrikant.
2. De noodstopfunctie werkt zoals bedoeld.
3. De noodverlaging werkt zoals bedoeld.
4. De controleboxfunctie werkt zoals bedoeld.
5. De bewegingen van alle bewegende delen van de lift verlopen soepel en geruisloos.
6. De pootspreider werkt zoals bedoeld.
7. De plastic onderdelen die de werking of de veiligheid van het hulpmiddel kunnen beïnvloeden zijn niet beschadigd
8. De wielen draaien gemakkelijk en de rem werkt naar behoren.
9. Alle bouten zitten goed vast en zitten niet los.
10. De accu's laden goed op en de behuizing is in goede staat.
11. De bekabeling heeft geen zichtbare schade.
12. De acculader werkt zoals bedoeld en er is geen schade aan de kabels.
13. Maak de lift grondig schoon:



Indien de lift niet voldoet aan één of meer van de bovenstaande punten, moet de lift tijdelijk buiten gebruik worden gesteld en moet contact worden opgenomen met United Care.



Service en onderhoud aan de lift is alleen toegestaan door aantoonbaar bevoegde personen.

5.4 Jaarlijks onderhoud

Volgens de regelgeving moet een hulpmiddel eenmaal per jaar worden gekeurd. Dit kan gebeuren door United Care of een andere erkende instantie. United Care biedt de mogelijkheid om uw lift eenmaal per jaar grondig te laten keuren, door middel van de Overeenkomst Periodieke Keuring. De eerstvolgende keuringsdatum is te vinden op het servicechecklabel (zie afbeelding). Dit label zit altijd op de Wendy 3, vlakbij het serienummerlabel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met United Care.



Het label van de onderhoudscontrole geeft de datum aan waarop de volgende periodieke inspectie van de Wendy 3 moet worden uitgevoerd.



Ook laders moeten volgens de geldende voorschriften eenmaal per jaar worden gekeurd.



Service en onderhoud aan de lift is alleen toegestaan door aantoonbaar bevoegde personen.



Als onderstaande reparatietabel de klacht niet oplost of in geval van twijfel, gebruik de lift/tilband dan niet en neem contact op met United Care.

United Care zal op verzoek schakelschema's, onderdelenlijsten, beschrijvingen, kalibratie-instructies of andere informatie ter beschikking stellen die geautoriseerd onderhoudspersoneel kunnen helpen bij de reparatie van die onderdelen die door United Care als repareerbaar zijn aangemerkt. Neem contact op met United Care als een dergelijke situatie zich voordoet.

5.5 Vervanging/verwijdering van onderdelen

Alle onderdelen die worden vervangen of verwijderd (inclusief accu's) moeten op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd of gerecycled. Het is ook mogelijk om deze onderdelen aan te bieden aan de monteur of in te leveren bij United Care. Wij zorgen ervoor dat alle onderdelen milieuvriendelijk worden verwerkt.



6 Het oplossen van problemen



Als onderstaande reparatietabel de klacht niet oplost of in geval van twijfel, gebruik de lift/tilband dan niet en neem contact op met de service of United Care.

Klacht	Mogelijke oorzaak	Actie
De lift werkt niet	• Accu verkeerd/niet geplaatst. • Accu bijna leeg. • De handbediening is niet goed aangesloten in de controlebox. • Noodstop uit. • Controlebox of accu kapot	• Plaats de accu terug. • Controleer het accuniveau en laad zo nodig op. • Controleer of de stekker van de handbediening goed is aangesloten op het controleboxje. • Draai de noodknop rechtsom. • Neem contact op met service of United Care
De lift gaat niet omhoog of omlaag.	• Motor niet goed aangesloten op de controlebox of splitter. • Motor of controlebox defect	• Steek het motorsnoer goed in de juiste poort van de controlebox (Poort1) of splitter (CH1). • Neem contact op met service of United Care.
Elektrisch juk werkt niet	• Motor niet goed aangesloten op de controlebox of splitter. • De koppeling is vuil aan de binnenkant. • Motor of controlebox defect	• Steek de juiste stekker van het motorsnoer in de juiste poort van de controlebox (Poort1) of splitter (CH3). • Draai het juk een paar keer rond. • Neem contact op met service of United Care.
De potenspreider werkt niet	• Motorstekker niet goed aangesloten op de controlebox • Motor(en) of controlebox defect	• Sluit de motorsnoeren goed aan op de juiste poorten van het controleboxje (Poort2). • Neem contact op met service of United Care.
Potenspreider(s) zitten los	• Pootverstelling, kogelgewricht of draadstang zijn gebroken.	• Neem contact op met service of United Care.
De lift kraakt	• Drooglopen van de lagers.	• Gebruik een beetje penetrerende olie. • Neem contact op met service of United Care.
De lift heeft weinig kracht	• Accu bijna leeg • Accu slecht • Motor slecht	• Accu opladen • Gebruik een nieuwe of andere accu • Neem contact op met service of United care
Accu snel leeg	• Accu slecht	• Gebruik een nieuwe of andere accu • Vervang de slechte accu

7 Technische gegevens

7.1 Specificaties elektrische componenten

Algemene specificaties	Wendy standard model		Wendy Verhoogd model
Gewicht van het hulpmiddel	55 kg		65 kg
Maximale tilbelasting	160 kg	230 kg	230 kg
Totaal maximumgewicht	215 kg	285 kg	295 kg
Geluidsniveau	Max 42 dB(A)		

Hefmotor		
Spanning	24V= (dc)	
stroom	10 A max.	
Beschermingsgraad	IPX4	
Duwkracht	7,5 kN max. (160 kg)	10 kN max. (230 kg)
Bedrijfscyclus	10%	

Potenspreider motor	
Spanning	24V= (dc)
Stroom	2,8 A max.
Beschermingsgraad	IPX4
Duwkracht	1 kN max.
Bedrijfscyclus	10%

Control box	
Spanning	24V= (dc)
Stroom	10 A max.
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfscyclus	10%

Lader	
Spanning	100-240 V~ (ac) (prim.), 28,5V= (dc) (sec.)
Frequentie	50/60 Hz (primair)
stroom	400 mA (primair)
Wattage	37-53 W (secundair)


Handbediening	
Beschermingsgraad	IPX4
Type	4 of 6 functies

Accu	
Spanning	24V= (dc) 2,9 Ah (2x 12V= (dc))
Frequentie	50/60 Hz (primair)
Stroom	400 mA (primair)
Wattage	37-53 W (secundair)
Beschermingsgraad	IP65

7.2 Maatvoering


7.2.1 Wendy 3 standaard

Alle afmetingen zijn in mm, 1246x662x1350 (lxbxh)

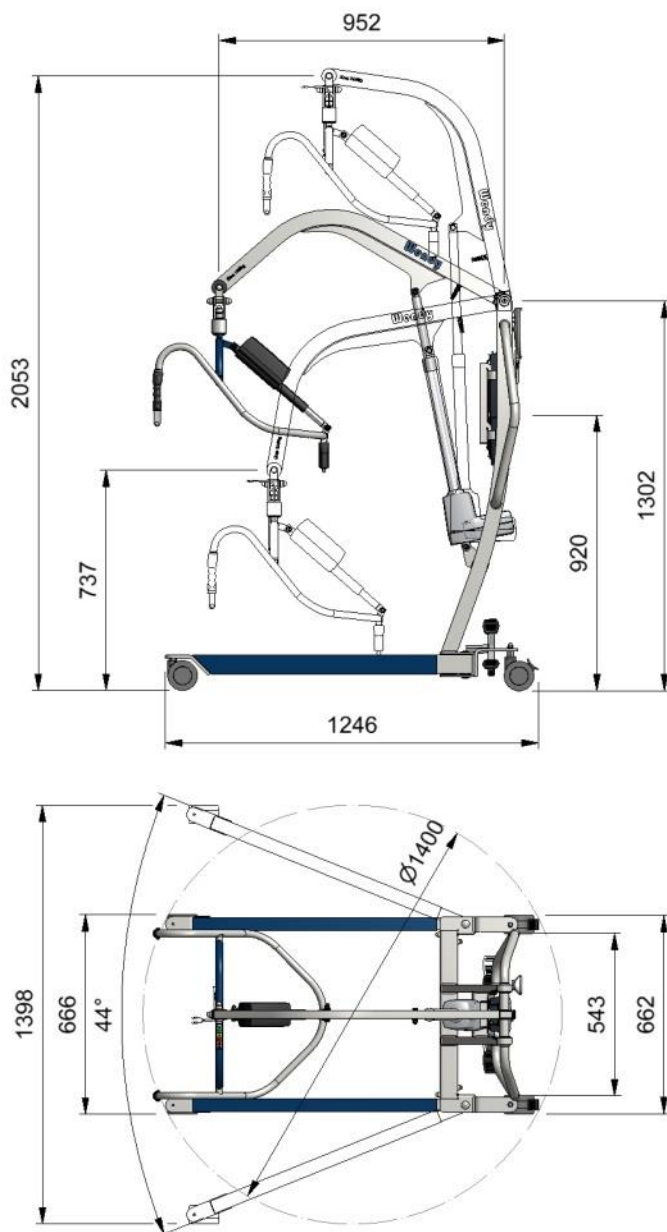

7.2.2 Wendy 3 verhoogd model

Alle afmetingen zijn in mm

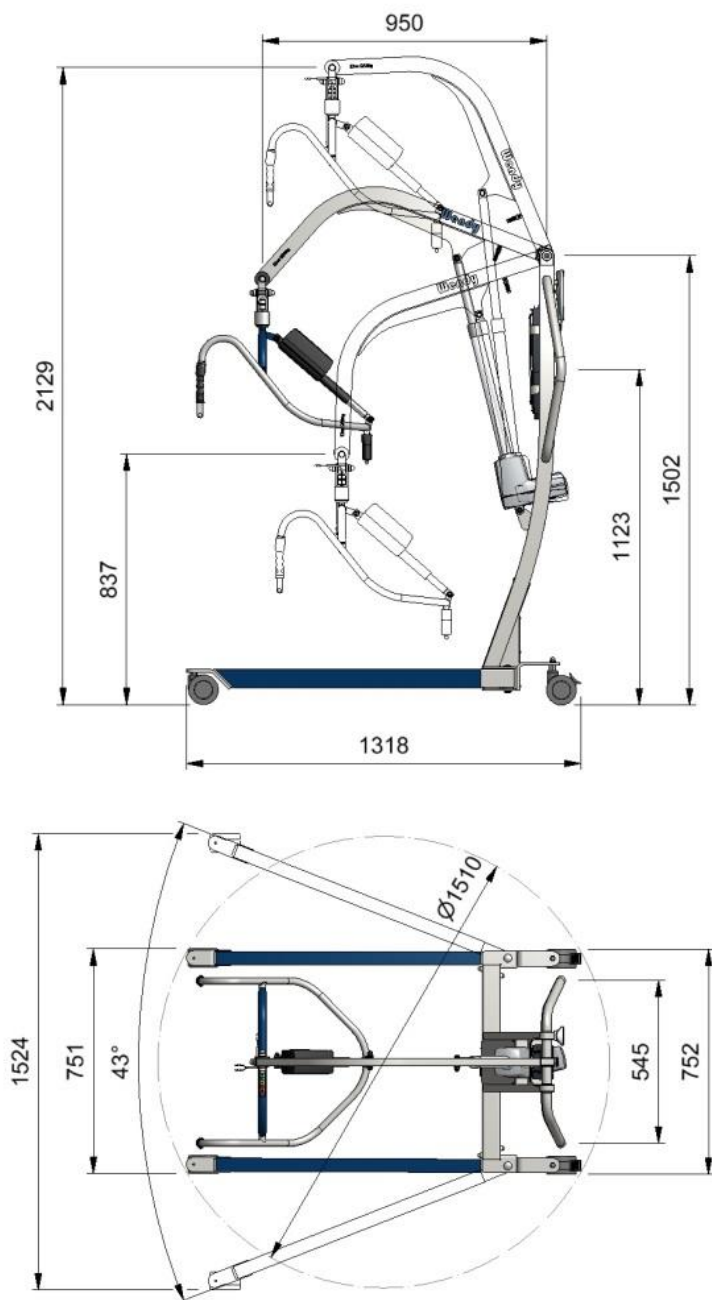


8 Onderdelenlijst

8.1 Onderdelenlijst Lift





*Alle bouten en moeren zonder eigen borging of met borgringen die draadborging nodig hebben gebruik schroefdraadborgmiddel (kleur blauw, middelsterk 11101110). De relevante onderdelen zijn aangeduid met * op de tekening hieronder.*

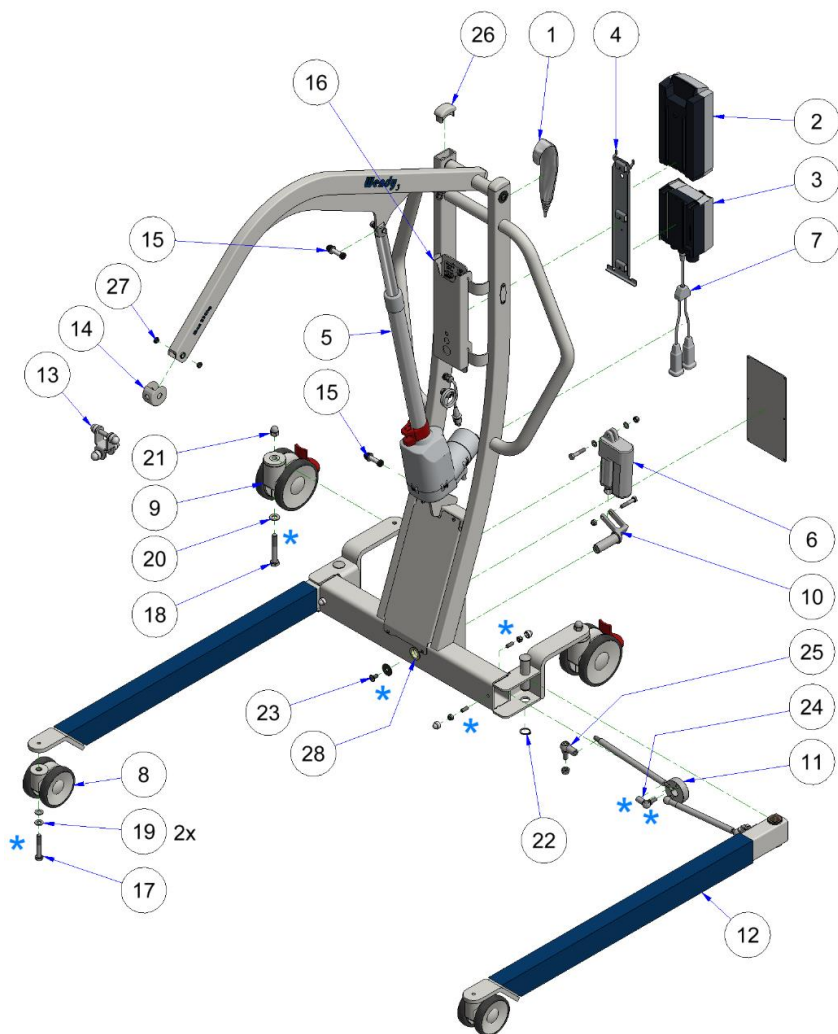

Nr.	Naam	Art. nr.
1	Handbediening, 4F, Jumbo Care Handbediening, 6F, Jumbo Care	11101530 11101531
2	Accu (Pb) Accu (Li-ion)	31101070 31101071
3	Controlebox, 6F, Jumbo Zorg	11101501
4	Montageplaat CB	11100360
5	Hefmotor, Wendy 160kg Hefmotor, Wendy 230kg	11101261 11100511
6	Poetenspreider motor	11100800
7	Motor splitter kabel	11100612
8	Zwenkwiel Ø100	22100170
9	Zwenkwiel Ø125 met rem	22100181
10	Gegoten pootverstellingsas	11300591
11	Excentrisch mechanisme compleet (eenzijdig)	11400460
12	Pootkap (standaard) Pootkap (verhoogde Wendy)	11100436 11101420
13	Koppelingsset (compleet)	11400130
14	Hefarm eindkap	11100230
15	Bevestigingsboutset 30 (2x)	11400440
16	Tilband ribben doos	11202030
17	Zeskantbout M10x60	11100300
18	Zeskantbout M12x75	10101860
19	Sluitring M10	11100220
20	Sluitring M12	14100090
21	Dopmoer M10	11100710
22	Borgring Ø22	11100550
23	Galv. Zeskantbout M8x20	11100650
24	Kogelgewricht M8	11100150
25	Kogelgewricht M10	11100140
26	Eindkap halfmond 50x25x3	10202380
27	Glijlager Ø10xØ11x5, flens	11101820
28	Glijlager Ø22xØ25x8, flens	11101810


8.2 Onderdelijst (elektrische) 4-punts juk

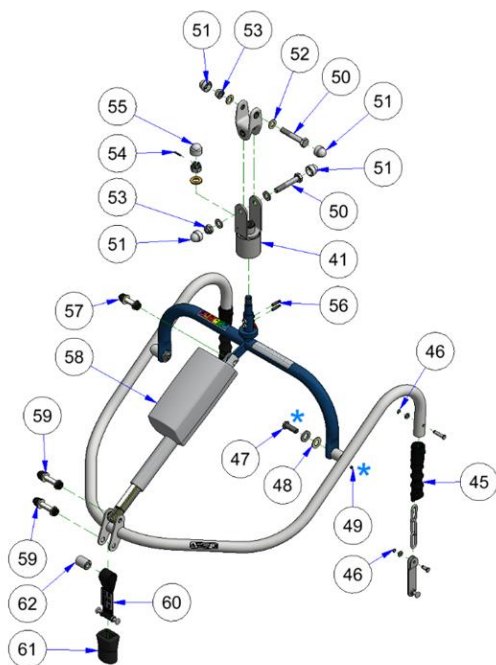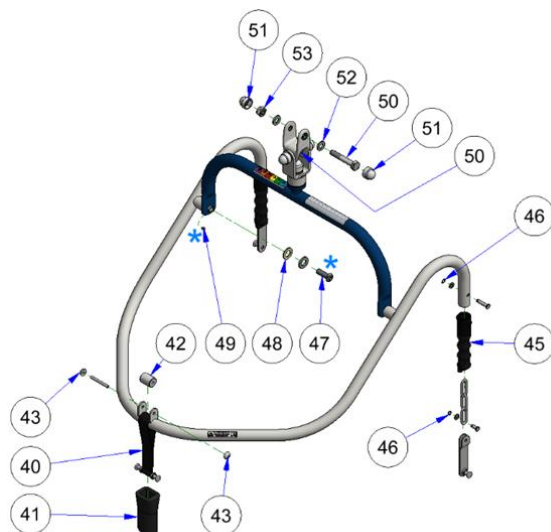

* Schroefdraadborgmiddel [11101110](#)

Nr.	Naam	Art. Nr.
40	Riem met dubbele haak	22300090
41	Beschermhoes (schuimrubber) 8,5cm	32100440
42	Rubberen hoes	32201400
43	Bus	32200830
44	Snelsluiting Ø5	32101920
45	Rubberen hoes	32201400
46	Circlipschacht Ø6	32101740
47	Lage kogelkopschroef M10x30	32101730
48	Vlakke sluitring Ø24xØ12x1,5	32102530
49	Stelschroef met punt M5x6	11100560
50	Zeskantbout M10x60	11100300
51	Deksel wit M10	32103200
52	Sluitring M10	11100220
53	Borgmoer M10	11100250
54	Klempin Ø3x16	11100620
55	Deksel wit M12	11101120
56	Koolborstel	32100720
57	Boutenset 26mm	11400390
58	Actuator La28	32100200
59	Boutenset 34mm	11400430
60	Riem met dubbele haak - kort model	22300210
61	Beschermende hoes (schuim) 6,5cm	32100440
62	Rotatiebus	22200550


8.3 Onderdelijst 2-punts juk

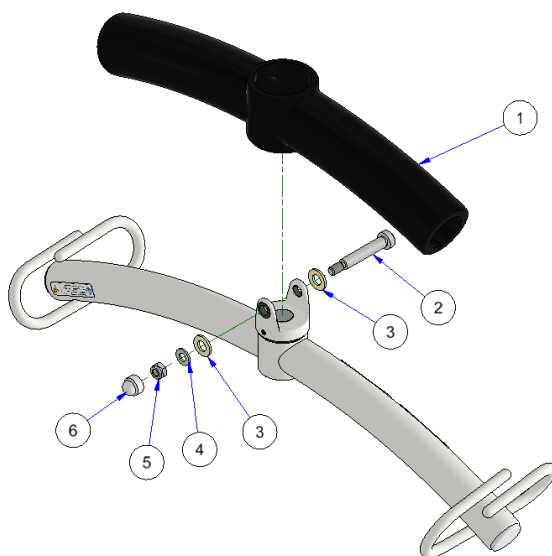

Nr.	Naam	Art. nr.
1	Beschermkap (zwart)	32109301
2	Pasbout M8xØ10x50 12.9 ISO7379	11101890
3	Sluitring M10 nylon DIN 125	32102520
4	Sluitring M8 elvz DIN 125	20100090
5	Borgmoer M8 elvz DIN 985	12100710
6	Afdekkap M8 wit	17103630

8.4 Onderdelenlijst Lader

Acculader compleet 32106680

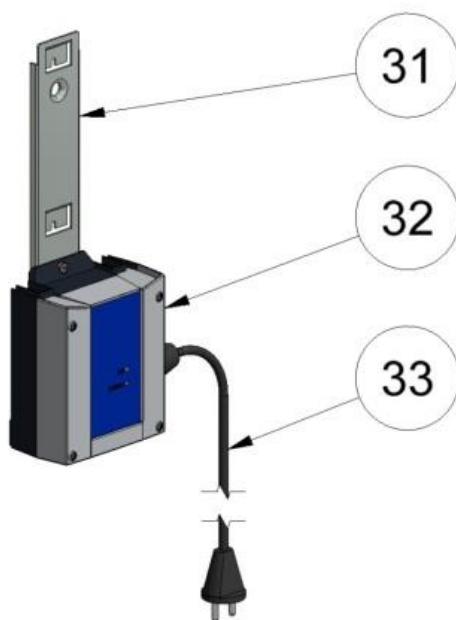


Nr.	Naam	Art. Nr.
31	Montagebeugel	11100340
32	Acculader	31101040
33	Netsnoer	11100350

9 Lijst van compatibele tilbanden

De onderstaande tabel toont alle tilbanden die compatibel zijn met de Wendy 3. De tekens (X en Y) aan het einde van het artikelnummer verwijzen respectievelijk naar de maat en de jukverbinding.

X = Maat: : 0-6
Y = Jukverbinding : C = UCP-Clip
Q = iQ-Clip
P = Lussen


Kleur	Code	Maat	Kruin-staartbeen hoogte
Paars	0	XXS	45-60 cm
Bruin	1	XS	60-80 cm
Rood	2	S	80-87 cm
Geel	3	M	85-90 cm
Groen	4	L	90-97 cm
Blauw	5	XL	95-102 cm
Oranje	6	XXL	102-106 cm

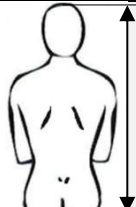

Tilband type	Art. Nr.	Opmerkingen
Standaard tilband Polyester	3010905 XY	De standaard tilband wordt gebruikt voor korte transfers. Er wordt geadviseerd dat de patiënt/zorgvrager niet langer dan een half uur in deze tilband zit.
Standaard nettilband Polyester Netstof	3010904 XY	De netstof bevat kleine gaatjes, waardoor deze niet absorberend is en snel droogt.
Standaard Ezeslyde tilband Polyester zijde	3010150 XY	De polyesterzijde is een dunne en gladde stof die het aanbrengen van de tilband vergemakkelijkt. Ideaal voor rolstoelgebruik.
Tilband voor de hele dag Polyester 3D stof	3010910 XY	De All-Day tilband is een comfortabele tilband waarin de patiënt/zorgvrager de hele dag kan verblijven. Dit is mogelijk door de ademende stof en de naadloze binnenkant.
Comfort voor de hele dag Polyester & Bamboe stof	3010187 XY	De stof is een combinatie van bamboe- en polystervezels. Door de toegevoegde bamboe vormt de tilband zich om het lichaam voor een comfortabel gevoel.
Toilet tilband deLuxe Polyester	3010960 XY	De toiletband wordt gebruikt voor toiletactiviteiten. Toiletbanden zijn alleen bedoeld voor patiënten/zorgvragers met voldoende schouderfunctie en rompstabiliteit.
Anti-spasme Net tilband Polester Netstof	3010193 XY	Deze tilband heeft een speciale vorm waarmee een transfer in foetushouding mogelijk is.
All-Day Anti-spasm tilband Polyester 3D stof	3010902 XY	Hetzelfde als de Anti-spasm Net tilband, maar door het verschil in stof kan de patiënt/zorgvrager de hele dag in deze tilband blijven.
Amputatie Net tilband Polyester Netstof	3010154 XY	Deze tilband wordt gebruikt voor patiënten/zorgvragers met een enkele of dubbele beenamputatie. De beenbanden zijn dus korter dan die van andere tilbanden
All-Day Amputatie Tilband Polyester 3D stof	3010155 XY	Hetzelfde als de Amputatie Net tilband, maar de stof maakt het mogelijk dat de patiënt/zorgvrager de hele dag in de tilband blijft.
All-Day Amputation comfort tilband Polyester & Bamboe stof	3010158 XY	De toegevoegde bamboe stof maakt deze tilband extra comfortabel omdat de tilband zich om het lichaam vormt.

10 Opslag en Vervoer

- Niet nat opslaan.
- Laad de accu's niet op in een natte omgeving.
- Niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen bewaren.
- Niet bewaren met scherpe voorwerpen.
- Niet opslaan bij hoge temperatuur, hoge druk en hoge vochtigheid. De tilbanden moeten worden vervoerd en opgeslagen bij een temperatuur van 5 °C tot 50 °C en een normale vochtigheidsgraad van 10 % tot 85 %. De luchtdruk moet tussen 50 en 110 kPa liggen.
- Laat de hefarm in de laagste stand zakken wanneer u het hulpmiddel opbergt of vervoert. Het hulpmiddel is niet bedoeld om te worden gedemonteerd of opgevouwen.

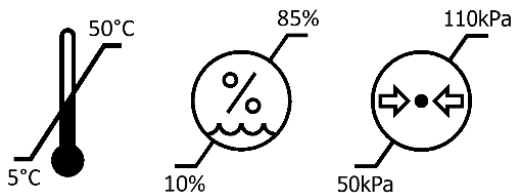

11 Levensduur van het product

Voor de Wendy 3 wordt een levensduur van tien jaar verwacht bij normaal gebruik en regelmatig onderhoud. Voor tilbanden is dit twee jaar. De totale levensduur is afhankelijk van gebruik, onderhoud en opslag van het product.

12 Garantie

United Care Products geeft 1 jaar garantie op de Wendy 3. United Care Products geeft geen garantie op onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage of onzorgvuldig gebruik (zoals wielen en accu's). Verder geldt de garantie niet voor schade of gebreken die aan de Wendy 3 kunnen ontstaan door verkeerd of oneigenlijk gebruik en reparaties door derden. De beoordeling ligt bij United Care Products of bij een door United Care Products aan te wijzen vertegenwoordiger. United Care Products behoudt zich het recht voor wijzigingen in het product aan te brengen die afwijken van hetgeen in deze handleiding is beschreven. Hiervoor hoeven wij geen verantwoording af te leggen.

13 Tabel met symbolen

	Product voldoet aan alle wettelijke eisen voor CE-markering.		Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis
	Medisch hulpmiddel		Elektrische apparatuur van klasse II
	Algemene waarschuwing		Maximaal toelaatbaar gewicht/belasting van de patiënt/zorgvrager.
	Wettelijke fabrikant		Geeft het totale maximumgewicht van het hulpmiddel en de patiënt/zorgvrager aan.
	Type BF, volgens de graad van bescherming tegen elektrische schokken.		Zie de instructiehandleiding
	WEEE-symbool Mag niet bij het huisvuil.		Geplaatst naast een aanvullend bord. Geeft aan dat het bord een verplichte actie is.
	Bedrijfscyclus: 2 min in actieve modus (ON) 18 min in ruststand (OFF)		Staat van opslag en vervoer druk bereik: 50kPa-110kPa
	Lees de handleiding		Staat van opslag en vervoer vochtigheidsbereik: 10% - 85%
	Referentienummer		Staat van opslag en vervoer temperatuurbereik: 5°C - 50°C
	Serienummer		Droog houden
	Product voldoet aan alle wettelijke eisen voor producten die in Groot-Brittannië worden verkocht.		weerstand tegen omgevingselementen. IPX4 - Beschermt tegen spatwater, ongeacht de richting.
	Waarschuwing, hoogspanning		Pak de actuator niet vast.

14 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

De Wendy 3 is getest op naleving van de huidige wettelijke normen met betrekking tot het vermogen om EMI (elektromagnetische interferentie) van externe bronnen te blokkeren. De Wendy 3 is getest volgens IEC60601-1-2 Editie 4. Sommige procedures kunnen elektromagnetische storingen helpen verminderen, zoals het in acht nemen van de beoogde omgeving.

Beoogde omgeving: Thuiszorgomgeving en professionele gezondheidszorgomgeving.

Uitzonderingen op bovenstaande beoogde omgeving zijn de volgende: Nabij HF-chirurgische apparatuur en in een RF-afgeschermd ruimte van een ME-SYSTEEM voor beeldvorming door middel van magnetische resonantie.



Indien het hulpmiddel stopt met werken, zich op een onverwachte manier gedraagt, of onbedoeld beweegt als gevolg van mogelijke elektromagnetische storingen of interferenties, moet het hulpmiddel worden uitgeschakeld. Het moet opnieuw worden ingeschakeld en de werking ervan moet worden gecontroleerd voordat het wordt gebruikt. Als het probleem blijft bestaan, moet het hulpmiddel in een andere ruimte of omgeving worden gebruikt. Als er andere apparatuur wordt gestoord, moet de werking ervan worden gecontroleerd voordat het hulpmiddel weer wordt gebruikt.



Gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld met andere apparatuur moet worden vermeden omdat dit kan leiden tot een onjuiste werking. Indien dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur worden geobserveerd om te controleren of zij normaal functioneren.



Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij 30 cm (12 inch) bij enig deel van de Wendy 3 worden gebruikt, inclusief de door de fabrikant gespecificeerde kabels. Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur verslechteren.



Het gebruik van andere accessoires, transducers en kabels dan die welke door de fabrikant van deze apparatuur zijn gespecificeerd of geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en een onjuiste werking tot gevolg hebben.

Emissietest	Naleving
RF-emissies CISPR 11	Groep 1
RF-emissies CISPR 11	Klasse B
Elektromagnetische emissies IEC 61000-3-2	Klasse A

Spanningsschommelingen/flikkering IEC 61000-3-3	Voldoet
Immunitetest	IEC60601-1-2 Editie 4 Testniveaus en conformiteit
Schommelingen IEC 61000-4-5	$\pm 0,5 \text{ kV}$, $\pm 1 \text{ kV}$
Spanningsdips IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cyclus Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315°. 0 % UT; 1 cyclus en 70 % UT; 25/30 cycli Enkele fase: bij 0
Spanningsonderbrekingen IEC 61000-4-11	0 % UT; 250/300 cyclus
Elektrostatische ontlading IEC 610004-2	$\pm 8 \text{ kV}$ contact $\pm 2 \text{ kV}$, $\pm 4 \text{ kV}$, $\pm 8 \text{ kV}$, $\pm 15 \text{ kV}$ lucht
Geleide storingen geïnduceerd door RF-velden IEC 61000-4-6	Thuiszorgomgeving 3V 0,15 MHz - 80 MHz 6V in ISM en amateurbanden tussen 0,15 MHz en 80 MHz 80% AM bij 1 kHz
Uitgestraalde RF-elektromagnetische velden IEC 61000-4-3	Thuiszorgomgeving 10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM bij 1 kHz
Nabijheidsvelden van draadloze RF-communicatieapparatuur IEC 61000-4-3	385 MHz - 27 V/m 450 MHz - 28 V/m 710, 745, 780 MHz - 9 V/m 810, 870, 930 MHz - 28 V/m 1720, 1845, 1970, 2450 MHz - 28 V/m 5240, 5500, 5785 MHz - 9 V/m
Elektrische snelle overgang/burst IEC 61000-4-4	$\pm 2 \text{ kV}$ 100 kHz herhalingsfrequentie
NOMINALE netfrequentie Magnetische velden IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz of 60 Hz

15 Het rapporteren van een incident

In geval van een ernstig incident met het product waarbij de zorgverlener of gebruiker betrokken is, dient het incident te worden gemeld aan United Care of Direct Healthcare Group. Binnen de Europese Unie dient de zorgverlener ook melding te maken bij een bevoegde instantie in de betreffende lidstaat.

United Care

Het uitvoeren van transfers in de gezondheidszorg vergt grote inspanningen van vele partijen en vooral van zorgverleners veel deskundigheid.

United Care is een bedrijf dat zich met diensten en producten richt op mensen die dagelijks betrokken zijn bij de uitvoering van transfers. Uitgangspunt is de mobiliteit van de patiënten/zorgvragers - samen met zorgverleners werken wij aan oplossingen die de mobiliteit van de patiënt/zorgvrager behouden en/of verbeteren. Door aan te sluiten bij en gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden van de patiënt/zorgvrager wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van zorg en een verbetering van de kwaliteit van het werk voor de zorgverlener.

United Care levert hiervoor de volgende producten/diensten:

- Actieve mobiele liften
- Passieve mobiele liften
- Sta-op-hulpmiddelen
- Plafondliften
- Douchestoelen
- Douchebrancards
- Accessoires voor transferhulpmiddelen
- Training en advies

Met haar visie, diensten en producten is United Care een uitstekende partner in de samenwerking met zorgverleners en zorgontvangers.



Medische hulpmiddelen klasse I.



Het product voldoet aan de eisen van de
Verordening medische hulpmiddelen 2017/745.



United Care B.V.
Bremenweg 5
9723 TC Groningen
Nederland
+31 (0)50 3050980
Info@unitedcare.nl
www.unitedcare.nl

Vertegenwoordiger VK:

Direct Healthcare Group
Withey Court, Western Industrial Estate,
Caerphilly CF3 1BF, Verenigd Koninkrijk
44 (0) 800 043 0881
www.directhealthcaregroup.com
Info@directhealthcaregroup.com



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY



Moving Health Forward