

Bruksanvisning
2016-11-30

CuroCell S.A.M.[®] Switch
Statisk antidecubitusmadrass

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001649



7 33 1345 070 117



Innhold

Viktige sikkerhetsforskrifter	3
Introduksjon	4
Produktbeskrivelse	5
Installasjon og oppstart	6
Rengjøring og rekondisjonering	9
Oppbevaring	10
Vedlikehold	11
Feilsøking	11
Teknisk beskrivelse	12
Reservedeler	14
Ekstraustyr og tilbehør	15
Garanti	16
Annen informasjon	17
Egne notater	18

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les alle instruksjonene før bruk

ADVARSEL! For å minimere faren for brann, elektrisk støt eller personskader.

1. Produktet må kun brukes til det det er tiltenkt for iht. beskrivelsen i denne håndboken. Produktet må heller ikke kombineres, monteres eller repareres med andre deler (for eksempel pumpe og madrass), tilbehør eller reservedeler enn de som er beskrevet i denne håndboken eller i annen dokumentasjon fra Care of Sweden.
2. Pumpen må ikke brukes i våtrom eller på steder hvor den kan komme i kontakt med vann eller annen væske. Du må aldri håndtere en pumpe som har kommet i kontakt med vann eller væske. Trekk umiddelbart ut støpselet, og send pumpen til autorisert servicetekniker for service.
3. **MÅ IKKE** brukes i nærheten av eller i kontakt med brannkilder / varme overflater, slik som ild, glødende sigaretter eller varme lamper. Produktet er branttestet, men kan skades ved kontakt med brannkilder.
4. Produktet må plasseres og brukes slik at det ikke blir klemt eller skadet. OBS! Vær spesielt oppmerksom på faren for klemskader når det brukes sengegrind.
5. Produktet må ikke brukes hvis strømledningen eller støpselet er ødelagt, hvis pumpens deksel er skadet eller hvis den ikke fungerer normalt. Kontakt servicetekniker for gjennomgang og reparasjon.
6. Kontroller regelmessig produktets funksjon ved hjelp av «hand check», se punkt 3.4. Kontroller også at komfortinnstillingen er korrekt innstilt i samsvar med tabellen på pumpen.
7. Hvis produktet brukes av brukere som krever spesielt tilsyn, for eksempel barn, må bruken overvåkes kontinuerlig.
8. Madrassen er beskyttet med hygienetrek. Ikke bruk andre heldekkende plasttrekk i kombinasjon med madrassen. Trekkets evne til å slippe gjennom damp kan påvirkes.
9. Hygienetrekket er væske- og lufttett, men er dampgjennomtrengelig (damp transporteres bort). Sørg for at brukeren posisjoneres slik at luftveiene holdes frie.
10. Unngå skader på hygienetrekket som følge av skarpe gjenstander.
11. Hvis trekket har sidehåndtak, skal disse brukes til å løfte selve madrassen. All annen bruk skjer på eget ansvar og dekkes ikke av garantien.

1. Innledning

CuroCell S.A.M.® er en statisk luftmadrass som kan brukes i alle typer omsorgsmiljøer. Den er meget funksjonell og kostnadseffektiv.



Les alltid bruksanvisningen før bruk.

1.1 Generell informasjon

Dette systemet er et medisinteknisk produkt som er CE-merket i samsvar med MDD 93/42/EEC. I følge Läkemedelsverkets forskrifter om medisintekniske produkter plikter produsenten å rapportere uhell og hendelser. Vi setter derfor pris på at eventuelle ulykker og hendelser som gjelder våre produkter blir rapportert til Care of Sweden umiddelbart. Systemet er blant annet testet og godkjent i samsvar med følgende standarder: EN 60601-1, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126.

1.2 Tiltent bruk

CuroCell S.A.M.® Switch kan brukes i alle typer omsorgsmiljøer for å forebygge trykksår, samt som hjelpemiddel ved behandling til og med kategori 2⁽¹⁾. Anbefalt brukervekt er inntil 200 kg.

Den er tilgjengelig som overmadrass (CuroCell S.A.M.® Switch, CuroCell S.A.M.® Switch CF10) som legges på eksisterende madrass og som kombimadrass (CuroCell S.A.M.® Switch CF16) som legges rett på sengebunnen.

Vi anbefaler at brukerens liggstilling endres regelmessig. Tidsintervallet må vurderes av ansvarlig personell basert på brukerens status, diagnose og allmenntilstand.

Madrassen må rengjøres mellom hver bruker.

OBS!

- Ved bruk med posisjoneringsputer må du lese putenes bruksanvisning slik at brukeren plasseres på riktig måte.
- Ved all bruk i kombinasjon med evakueringslaken er det personellet som har ansvaret for at evakuering kan utføres på en sikker måte.
- Vær oppmerksom ved manøvrering av eventuelle sidegrinder/beskyttelse på sengen slik at madrassen ikke kommer i klem og blir skadet.
- Madrassen skal ikke løftes mens brukeren ligger på den eller brukes til andre former for transport enn ved eventuell evakuering ved hjelp av evakueringslaken.
- Husk at madrassen under er viktig for produktets funksjon.
- Madrassen skal ikke brukes i forbindelse med røntgenundersøkelser. Dette på grunn av faren for uklare bilder eller artefakter i bildet som kan føre til diagnosefeil.

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

1.3 Øvrig informasjon

Handlingsplan trykksår

Vi anbefaler en strukturert og planlagt arbeidsmåte for å få best mulig resultater ved bruk av disse produktene. I vår retningslinje «Handlingsplan trykksår» er det eksempler som kan anvendes ved bruk av produktene våre.

Madrassguiden

Denne guiden gir deg som er personell og koordinator en veiledning ved valg av madrasser fra Care of Sweden. CuroCell S.A.M.® Switch er en madrass i funksjonsgruppe B. Denne informasjonen finner du på nettsiden vår www.careofsweden.se, og du kan også bestille den via kundeservice, se kontaktinformasjon på siste side.

2. Produktbeskrivelse

2.1 Pumpe – forside

1. Betjeningspanel



2. Tilkopling av slanger.

– bakside

1. Henger

2. Hovedstrømbryter (side)

Brukes for å slå pumpen på/av.
Grønt lys indikerer at pumpen er på.

3. Strømledning



2.2 Betjeningspanel

Komforthjul


Hjulet justerer lufttrykket i madrassen. Når hjulet vrir med urviseren, øker lufttrykket i madrassen. Hvis hjulet vrir mot urviseren, reduseres lufttrykket i madrassen.

Egnet lufttrykk stilles inn med hjulet (1–8). Veiledende verdi finner du i tabellen på pumpen.



2.3 Madrass

1. Celler/vifte
2. Slanger
3. Slangeholder
4. Koplinger med tilbakeslagsventiler
5. Luft-/tilkoplingssslanger

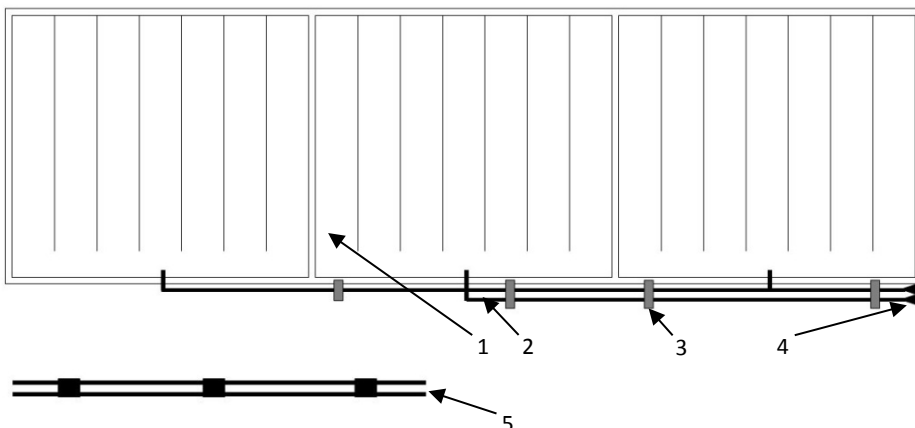

2.4 Øvrige deler

Hygienetrekk

Indre trekk Soft (tilbehør CuroCell S.A.M.® Switch)

Transport- og oppbevaringsveske (tilbehør)

Pumpeveske (tilbehør)

Integrert skumkjerne (kun CuroCell S.A.M.® Switch CF16)

3. Installasjon og oppstart

3.1 Installasjon

Ved utpakking må du kontrollere at ingen deler har blitt skadet. Hvis det oppdages skader, må du kontakte Care of Sweden før produktet tas i bruk.

1. Legg madrassen på eksisterende madrass, og fest strikkene rundt den.

Merk! Hvis madrassen har integrert skumkjerne (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), legges madrassen rett på sengebunnen. Fest madrassen i sengebunnen ved hjelp av båndene på trekket i sengens bevegelige deler.

2. Kople slangene til madrassen. Disse skal koples til i fotenden av madrassen ved å åpne hygienetrekket. Lukk glidelåsen når de er koplet til.

3. Heng pumpen på sengegavlen ved fotenden, eller plasser den på et flatt og stabilt underlag. Plasser strømledningen slik at man ikke risikerer å snuble i den, kjøre over den med sengens hjul og slik at den ikke kommer i klem når sengen heves eller senkes.



Merk!

Pumpeveske er tilgjengelig som ekstrautstyr.

4. Koble til luftslangene fra madrassen på siden av pumpen.

5. Kontroller at pumpens strømbryter står på «0» (av). Sett støpselet i godkjent stikkontakt (220 V).



OBS! Re opp sengen med laken for bedre komfort.

3.2 Oppstart



OBS! Les alltid bruksanvisningen før bruk.



1. Start pumpen ved å trykke på «1» (på) på siden av pumpen. Det grønne lyset tennes.
2. Nå begynner pumpen å fylle madrassen med luft.
3. Når madrassen er full, er den klar til bruk. Dette tar normalt 15–20 minutter.
4. Still inn egnet trykk ved hjelp av komforthjulet (1–8). Anbefalinger basert på brukervekt er angitt i tabellen på pumpen. Innstillingen gjøres mens brukeren ligger på madrassen.
5. Kontroller innstilt trykk ved hjelp av en såkalt «hand check», korrigjer ved behov. Se punkt 3.3 og 3.4 for mer informasjon.
6. Når trykket er innstilt som ønsket, har du to muligheter.
 - a) Kople luft-/tilkoplings slangene fra madrassen, og slå deretter av pumpen. Madrassen har tilbakeslagsventiler som sørger for at luften ikke lekker ut av madrassen. Ønsket trykk beholdes.
 - b) La pumpen være tilkoplet og i drift konstant.

Merk!

- Madrass og pumpe skal kontrolleres regelmessig. Kontroll av madrass gjøres ved hjelp av såkalt «hand check» (se punkt 3.4). Ved behov kan du (kople til pumpen og) justere trykket ved hjelp av pumpen.
- Hvis pumpen ikke er konstant tilkoplet, anbefaler vi at du hver uke kopler til pumpen og gjentar punkt 6 og 7 under punkt 3.2.

3.3 Komfortinnstilling

Madrassens lufttrykk kan justeres etter ønske om komfort. Du må alltid kontakte lege eller ansvarlig personell for å finne egnet innstilling.

kg		
0-20	1	2
30-50	2	3
60-70	3	4
80-90	4	5
100-120	5	6
130-150	6	7
160-180	7	8
190-200	8	8

OBS!

- Ved all bruk hvor sengens hodeende heves, må trykket økes med minst ett trinn.
- Når kun deler av madrassen belastes, for eksempel ved amputerte brukere, bør trykket økes med ett til to trinn.
- Anbefalt brukervekt er inntil 200 kg.

3.4 Hand check, kontrollere innstilt trykk

Hand check brukes for å kontrollere at madrassen er korrekt innstilt. Dette skal gjøres regelmessig, for eksempel en gang per arbeidsskift, samt ved posisjonsendring eller ved endring av komfortinnstillingen.

Åpne trekket. Stikk inn en flat hånd under cellene under setemusklene. Kontroller at brukeren ikke når helt til bunnen, men at det er litt margin til madrassen under. Vi anbefaler en til to fingres margin.

Hvis marginen er for liten, må komfortinnstillingen økes ett nivå. Vent i ti minutter, og gjennomfør en ny hand check.



3.5 Tømming av luft (HLR)

Ved hjerte- og lungeredning (HLR) tømmes madrassen ved å kople luftslangene til madrassen uten å kople de til pumpen. Samme prosedyre brukes for å tømme madrassen etter bruk.



3.6 Lavt trykk

Se avsnittet feilsøking punkt 7 ved unormalt lavt lufttrykk.

ADVARSEL!

Hvis lufttrykket forblir lavt, må du kontrollere madrass og slanger for skader. Reparer ved behov, eller kontakt Care of Sweden eller autorisert servicetekniker.

4. Rengjøring og rekondisjonering

Det er viktig å følge anvisningene nedenfor før produktet brukes igjen til en ny bruker. Konsulter den hygieneansvarlige eller Care of Sweden for hjelp og instruksjoner hvis du er i tvil.

4.1 Rengjøring

PUMPE

ADVARSEL!

Du må ikke åpne pumpehuset – fare for elektrisk støt. Service og vedlikehold skal utføres av Care of Sweden eller autorisert servicetekniker. Pumpen må ikke bli våt eller nedsenkes i væske.



Tørk av pumpen med en fuktig klut og en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. Hvis det skal brukes et annet middel, må man velge et som ikke påvirker plasten på pumpehuset.

MADRASSTREKK



Rengjør trekket med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. Avføring og blodflekker må fjernes umiddelbart med kaldt vann. Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.



Trekk som består av flere deler, må deles før vask. De ulike delene skal vaskes sammen med liknende farger.



Rengjøringsmidler som inneholder klor og fenoler, kan påvirke PU-overflaten negativt og bør unngås. Hvis det likevel brukes klor, anbefaler vi en blanding på maks. 1 %.

INDRE TREKK SOFT (tilbehør)



Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.

4.2 Rekondisjonering

PUMPE

Se instruksjon i punkt 4.1.

MADRASS

1. Kople slangene fra pumpen, og tøm madrassen for luft. Kople luftslangene til madrassen.
2. Fjern trekk. Se punkt 4.1 for rengjøring av trekk. Hvis produktet har skumpute, må den tas ut og rengjøres separat.
3. Flytt madrassen til et rent og egnet sted for vasking.
4. Tørk av cellene, alle slangene og HLR-ventilen med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.
5. Tørk av arbeidsflatene med et rengjørings- eller desinfiseringsmiddel som er egnet for dette formålet.
6. Monter madrassen. Hvis celler av en eller annen grunn har løsnet fra slangene, må disse monteres igjen som vist i tegningen under punkt 2.3.

SKUMPUTE (CuroCell S.A.M.® Switch CF16)



Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70%, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.

Klem vannet forsiktig ut. La skumkjernen tørke på et varmt, godt ventilert sted, beskyttet mot direkte sollys. Skumkjernen må være helt tørr før den brukes på nytt.

OBS!

Kontroller hygienebeskyttelsen ved hver rengjøring. Hvis beskyttelsen er skadet, må den repareres eller skiftes ut. Kontroller også pumpen, slangetilkoplingene og strømledningen ved rengjøring. Skadde deler må byttes ut eller repareres.

5. Oppbevaring

Madrass og pumpe oppbevares best i produktets veske (tilbehør). Håndter sammenpakket produkt varsomt. Ikke legg noe tungt på det.

6. Vedlikehold

1. Kontroller at strømledningen og støpselet er hele og uten riper.
2. Kontroller at madrassbeskyttelsen er hel og at trekk og luftceller er korrekt montert.
3. Kontroller at det kommer luft fra utgangene på pumpen.
4. Kontroller at ingen slanger eller koplinger er ødelagt eller klemt.

Kontakt Care of Sweden hvis du har behov for reservedeler.

7. Feilsøking

Problem	Løsning
Pumpen starter ikke	Kontroller at strømledningen er koplet til en stikkontakt. Kontroller at det ikke har gått en sikring.
Brukeren bunner (ligger gjennom)	Det kan hende at komfortinnstillingen er feil. Juster trykket, i samsvar med innstillingstabellen, og vent i noen minutter. Kontroller igjen ved hjelp av en «hand check», se punkt 3.4. OBS! Pumpen må koples til madrassen først.
Madrassen ligger ikke i ro	Kontroller at madrassen er festet til underliggende madrass ved hjelp av strikkene. Hvis madrassen har integrert skumkjerne (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), må den festes i sengebunnen, i sengens bevegelige deler.
Pumpen bråker, eller det er merkbare vibrasjoner	Kontroller måten pumpen er festet i sengen. Resonans i sengens deler kan oppstå. Fjern pumpen, og hør om du legger merke til en forskjell. Kan utbedres ved at pumpen plasseres på flatt og stabilt underlag, eller ved å legge et håndkle mellom pumpe og seng. Pumpeveske (tilbehør) kan også brukes.

Hvis du ikke fant svar på spørsmålet ditt her, kan du kontakte Care of Sweden eller en autorisert servicetekniker.

8. Teknisk beskrivelse

8.1 Teknisk spesifikasjon

PUMPE		SPESIFIKASJON
Modell		CuroCell S.A.M.®
Spenning		220–240 V, 50 Hz
Strømforbruk		0,05 A
Sikringstype		T1AL, 250 V
Mål (l x b x h)		25 x 12,5 x 8,5 cm
Vekt		1,4 kg
Omgivelsesmiljø	Temperatur	Drift: 10-40 °C
		Oppbevaring: –15-50 °C
		Frakt: –15-70°C
	Fuktighet	Drift: 10-90 % ikke-kondenserende
		Oppbevaring: 10-90 % ikke-kondenserende
	Atmosfærisk trykk	700–1013,25 hPa
Klassifisering		Klasse II, type BF, IP21
MADRASS		SPESIFIKASJON
Modell		CuroCell S.A.M.® Switch / CuroCell S.A.M.® Switch CF10 / CuroCell S.A.M.® Switch CF16
Mål (b x l x h)		80/85/90/105/120 x 200/210 x 10/16 cm
Vekt		2,6 kg (85 x 200 cm) / 8,1 kg (85 x 200 cm)

OBS! Care of Sweden forbeholder seg retten til å endre produktets spesifikasjoner uten ytterligere forvarsel.

ADVARSEL!

Følg bruks- og vedlikeholdsanvisningene for å forebygge både personskader som skader på produktet eller annet utstyr.

8.2 Merking

Produktet er merket med produktnavn, produksjonsdato, artikkelnummer, størrelse, vedlikeholds- og vaskeråd samt EAN-nummer. Den har også anvisninger for opp/ned og hode/føtter. I tillegg har den en rute for egen merking (for eksempel avdelingsnummer og navn).

8.3 Symbolforklaring



Artikkelnummer



Produzent

XXXX-XX-XX

År-Måned-Dag



Plassering av føtter



Les bruksanvisningen



Funksjonsgruppe



CE-merket i samsvar med
MDD 93/42/EEC



Resirkulering



Må ikke kastes i
husholdningsavfall, følg
instruksjoner for
resirkulering



Anbefalt brukervekt



Brukerinformasjon – kategori



Plasseres rett på
sengebunnen



Plasseres på eksisterende
madrass



Motvirker gnisninger



Hælfunksjon



Tåler ikke maskinvask



Maskinvask 70 °C



Maskinvask 95 °C



<1%
Klor



Tørketromling



Må ikke tørkes i
tørketrommel



Drypptørring



Må ikke strykes



Ikke kjemisk vasking



Avtørring



Klasse II-utstyr
(dobbeltsisolert)




Type BF



IP-klasse (kapslingsgrad)



Temperaturområde

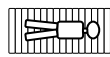

Madrassen skal brukes
med brukeren liggende i
lengderetningen

9. Reservedeler

Til CuroCell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF10

Trekk Steel, blått

Art.nr.	Størrelse
294-080200	80 x 200 cm
294-080210	80 x 210 cm
294-085200	85 x 200 cm
294-085210	85 x 210 cm
294-090200	90 x 200 cm
294-090210	90 x 210 cm
294-105200	105 x 200 cm
294-105210	105 x 210 cm
294-120200	120 x 200 cm
294-120210	120 x 210 cm

Til CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Toppdel Olivia, grå

Art.nr.	Størrelse
431-080200	80 x 200 cm
431-080210	80 x 210 cm
431-085200	85 x 200 cm
431-085210	85 x 210 cm
431-090200	90 x 200 cm
431-090210	90 x 210 cm
431-105200	105 x 200 cm
431-105210	105 x 210 cm
431-120200	120 x 200 cm
431-120210	120 x 210 cm

Underdel CuroCell

Art.nr.	Størrelse
CC-905610	80 x 200 cm
CC-905611	80 x 210 cm
CC-905612	85 x 200 cm
CC-905613	85 x 210 cm
CC-905614	90 x 200 cm
CC-905615	90 x 210 cm
CC-905616	105 x 200 cm
CC-905617	105 x 210 cm
CC-905618	120 x 200 cm
CC-905620	120 x 210 cm

Cellepakke inkl. slangesett, tilbakeslagsventiler med hurtigkopligng

Art.nr.	Størrelse
CC-250510	80 x 200 x 10 cm
CC-250511	80 x 210 x 10 cm
CC-250513	85 x 200 x 10 cm
CC-250514	85 x 210 x 10 cm
CC-250516	90 x 200 x 10 cm
CC-250517	90 x 210 x 10 cm
CC-250518	105 x 200 x 10 cm
CC-250519	120 x 200 x 10 cm

Art.nr.	Beskrivelse
CC-250101-E3	CuroCell S.A.M.®, pumpe uten hurtigkopligng.
CC-908034	Slangesett, inkl. kopligngsslange

Hvis du har behov for andre reservedeler, kan du kontakte Care of Sweden.

10. Ekstraustyr og tilbehør

10.1 Ekstraustyr

Indre trekk Soft

Til brukere som er veldig følsomme, kan man velge indre trekk Soft, som gir enda bedre komfort (medfølger i CuroCell S.A.M.® Switch CF10 og CuroCell S.A.M.® Switch CF16). Cellepakken plasseres i det indre trekket med den myke skumsiden vendt opp.

Kraftig transportveske

Transport- og oppbevaringsveske.

Trekk

Med sveisede sømmer.

10.2 Tilbehør

Til CuroCell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF10

Indre trekk Soft

Art.nr.	Størrelse
CC-928040	80 x 200 cm
CC-928041	80 x 210 cm
CC-928043	85 x 200 cm
CC-928044	85 x 210 cm
CC-928046	90 x 200 cm
CC-928047	90 x 210 cm
CC-928048	105 x 200 cm
CC-928050	105 x 210 cm
CC-928049	120 x 200 cm
CC-928051	120 x 210 cm

Art.nr.	Størrelse
---------	-----------

CC-9091	Kraftig transport- og oppbevaringsveske til CuroCell S.A.M.® Switch
CC-9093	Kraftig transport- og oppbevaringsveske til CuroCell S.A.M.® Switch CF 10
58-900909	Kraftig transport- og oppbevaringsveske til CuroCell S.A.M.® Switch CF16
CC-9098	Pumpeveske, svart

Til CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Indre trekk Soft med lomme for skumpute

Art.nr.	Størrelse
CC-928060	80 x 200 cm
CC-928061	80 x 210 cm
CC-928063	85 x 200 cm
CC-928064	85 x 210 cm
CC-928066	90 x 200 cm
CC-928067	90 x 210 cm
CC-928068	105 x 200 cm
CC-928070	105 x 210 cm
CC-928069	120 x 200 cm
CC-928071	120 x 210 cm

10.3 Annet tilbehør

For best mulig komfort anbefaler vi at det brukes tilbehør fra Care of Sweden, siden produktene våre er utformet for å kunne brukes sammen. Hvis du har behov for tilbehør eller ønsker mer informasjon om produktene våre, kan du kontakte Care of Sweden eller se nettsiden vår www.careofsweden.se.

11. Garanti

11.1 Omfang

Dette CuroCell® leveres med 2 års garanti mot produksjonsfeil. Garantien dekker ikke normal slitasje eller ved skader som oppstår på grunn av uforsiktig eller feil bruk og vedlikehold.

11.2 Service og vedlikehold

CuroCell®-madrassen er medisintekniske produkter i samsvar med MDD 93/42/EEC, som skal brukes forebyggende og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår. Derfor anbefales det at produktet regelmessig leveres til service og kontroll for å sikre at funksjoner og ytelse opprettholdes. En pumpe som vedlikeholdes på riktig måte, arbeider bedre og holder lenger, som andre tekniske apparater.

I produktets forventede levetid vil enkelte slidedeler i pumpen trenge service fra en autorisert servicetekniker for å sikre god funksjon og ytelse. Omfang og hyppighet avhenger av hvor mye produktet brukes.

Service og vedlikehold skal alltid utføres av Care of Sweden eller autorisert servicetekniker. Det må kun brukes reservedeler som Care of Sweden har godkjent. Bruk av andre reservedeler fører til at garantien ikke lenger gjelder.

Feil eller mangler som betegnes som garantifeil, blir utbedret uten kostnad. Reklamasjon må gjøres til Care of Sweden før produktet eventuelt returneres.

11.3 Levetid

Madrassens forventede levetid er 5 år.

12. Annen informasjon

12.1 Demontering og kildesortering

Nesten alle materialer i CuroCell®-produktene, unntatt enkelte deler i pumpene, kan energigjenvinnes ved forbrenning ved egnede forbrenningsanlegg.

Pumpe: Brukte CuroCell®-pumper skal ikke demonteres, men leveres til miljøstasjon. Kildesorteres som «Elektronisk avfall».

Madrass: Brukt CuroCell®-madrass leveres til miljøstasjon. Kildesorteres som «Brennbart avfall».

Care of Sweden oppfyller produsentansvaret ved å være tilknyttet REPA-registeret og El-kretsen AB. Kontakt Care of Sweden for mer informasjon.

12.2 Retur/reklamasjon

Kontakt Care of Sweden **før** produktet eventuelt returneres. Ved feil som faller under produktgarantien betaler Care of Sweden returen, i andre tilfeller må kunden betale returen selv.

13. Egne notater



Produsent/produsert av

care of sweden
Supporting Life

Kontakt:

Telefon: +46 (0) 771 106 600

Faks: +46 (0)325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internett: www.careofsweden.se

**Akutte henvendelser etter kontortid
(hverdager 16.30–22.00 og helger 08.00–17.00):**

Telefon: +46 (0)325-101 11

Postadresse:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo, Sverige

Besøksadresse:

Fabrikgatan 5A
514 33 Tranemo, Sverige

Fraktadresse:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo, Sverige