

# Mega™ 18040

## Mega™ 18040 TUKITYYNY



Mega™18040 on hygieniapäällisellä varustettu tukityyny.

*Oikein suoritettuna asentohoidolla edistetään hengitystä ja verenkiertoa, estetään nivelten virheasentojen syntymistä sekä iho/kudosvaurioiden syntyä. Kuntoutumisen perustana on onnistunut asentohoitto.<sup>1</sup>*

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



### YLEISKUVAUS

Mega™18040 on hygieniapäällisellä varustettu tukityyny.

### KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Tuotteiston käyttötarkoitus on toimia apuna terveydenhoidon ammattihenkilön suunnittelemassa asentohoidossa.

Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

### KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääikinnällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

### INDIKAATIOT

Toimia asentohoidon tukena erilaisten kliinisten käyttöaiheiden tarpeen mukaan terveydenhuollon ammattilaisten arvioimana ja ohjeistamana.

### VASTA-AIHEET

Tukityynyjä ei saa käyttää suorassa kosketuksessa mihinkään potilaan kehonosiin, joissa voidaan havaita painehaava.

### TUOTETURVALLISUUS

Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääikinnällinen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisusmateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Tuotteen paloluokitus on SL 1.<sup>2</sup>



### VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy  
Haukilahdenkatu 4  
00550 Helsinki  
p. 0306 40 40 40  
asiakaspalvelu@medimattress.fi  
tilaus@medimattress.fi  
www.medimattress.fi

# Mega™ 18040

## Mega™ 18040 TUKITYYNY

### SISÄTYYNYN OMINAISUUDET

Tukityynyssä on viskoosisekoitteinen sisäpäällinen, joka sisältää Durablend™-tyynyäytteen (sekoitus 80 % PU-vaahdotomuovi, 20 % silikonoitu PES). Sisäpäällisen toisella pitkällä sivulla on vetoketju.

### HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Hygieniapäällisen materiaali on joustavaa, neste<sup>-3</sup>, lika- ja eritetiivistä<sup>4</sup> PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys<sup>5</sup>. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus<sup>6</sup>. Tyynyn toisella pitkällä sivulla on perinteinen vetoketju.

### PÄÄLLISVARIANTIT

Medicase® (vakiopäällinen)  
Medicase® KS (kuumasaumattu)

### KOKO JA PAINO

Vakiokoko: 40 x 180 cm  
Paino: 1950 g



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



### TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYS-OHJEET

Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuina on arvioitu seuraavasti:

- Sisukset: viisi (5) vuotta
- Päälliset: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää energijakeena tai sekajätteisiin.

### TAKUU

Kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.

### HOITO- JA PESUOHJE

Hygieniapäällisen pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioidulla pesuliuksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä huuhtelupyhinta ja kuivaus.

Pyöhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyhinta pidentää tuotteen käyttöikää.

Sisätyyny täytteenen sekä hygieniapäällinen erikseen voidaan pestä pesukoneessa. Kuumadesinfiointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.



### LÄHTEET

<sup>1</sup>Kilpinen S., Laine M. & Lehmonen T. Asentohoitoa asento-  
hoitotyynyllä. 2016. Saatavilla: [http://urn.fi/URN:NBN:-  
fi:amk-201604134249](http://urn.fi/URN:NBN:-<br/>fi:amk-201604134249).

<sup>2</sup>Testattu EN ISO 12952 - 1: 2010 & EN ISO 12952 -2:2010 tai vastaa-  
van mukaisesti.

<sup>3</sup>Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

<sup>4</sup>Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti

<sup>5</sup>Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

<sup>6</sup>Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.

### VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy  
Haukilahdenkatu 4  
00550 Helsinki  
p. 0306 40 40 40  
[asiakaspalvelu@medimattress.fi](mailto:asiakaspalvelu@medimattress.fi)  
[tilaus@medimattress.fi](mailto:tilaus@medimattress.fi)  
[www.medimattress.fi](http://www.medimattress.fi)