

# Mega™ Q

## Mega™ Q TUKITYYNY



*Mega™ Q on hygieniapäällisellä varustettu kaarevan mallinen tukityyny.*

*Oikein suoritettuna asentohoidolla edistetään hengitystä ja verenkiertoa, estetään nivelten virheasentojen syntymistä sekä iho/kudosvaurioiden syntyä. Kuntoutumisen perustana on onnistunut asentohoitto.<sup>1</sup>*

*Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.*



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



### YLEISKUVAUS

Mega™ Q on hygieniapäällisellä varustettu kaarevan mallinen tukityyny.

### KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Tuotteiston käyttötarkoitus on toimia apuna terveydenhoidon ammattihenkilön suunnittelemassa asentohoidossa.

Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

### KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääikinnällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

### INDIKAATIOT

Toimia asentohoidon tukena erilaisten kliinisten käyttöaiheiden tarpeen mukaan terveydenhuollon ammattilaisten arvioimana ja ohjeistamana.

### VASTA-AIHEET

Tukityynyjä ei saa käyttää suorassa kosketuksessa mihinkään potilaan kehoon, joissa voidaan havaita painehaava.

### TUOTETURVALLISUUS

Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääikinnällinen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisusmateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Tuotteen paloluokitus on SL 1.<sup>2</sup>



### VALMISTAJA / MYynti

MediMattress Oy  
Haukilahdenkatu 4  
00550 Helsinki  
p. 0306 40 40 40  
asiakaspalvelu@medimattress.fi  
tilaus@medimattress.fi  
www.medimattress.fi

# Mega™ Q

## TUKITYYNY

### SISÄTYYNYN OMINAISUUDET

Tukityyntyssä on viskoosisekoitteinen sisäpäällinen, joka sisältää Durablend™ -tyynyttäytteen (sekoitus 80 % PU-vaahтомуovi, 20 % silikonoitu PES). Sisäpäällisessä on vetoketju mahdollista tyynyttäytteen käsittelyä varten.

### HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Hygieniapäällisen materiaali on joustavaa, neste-<sup>3</sup>, lika- ja eritetiivistä<sup>4</sup> PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys<sup>5</sup>. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus<sup>6</sup>. Päällisen saumarakenne on ommeltu ja sen ulkokaarella on perinteinen vetoketju.

Mega®Q on saatavilla myös kuumasaumatulla Medicase® hygieniapäällisellä.

### PÄÄLLISVARIANTIT

Medicase® (vakiopäällinen)

Medicase® KS (kuumasaumattu)



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



### KOKO JA PAINO

Vakiokoko: 27 x 80 cm

Paino: 1150 g

### TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYS-OHJEET

Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuina on arvioitu seuraavasti:

- Sisukset: viisi (5) vuotta
- Päälliset: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää energijakeena tai sekajätteisiin.

### TAKUU

Kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.

### HOITO- JA PESUOHJE

Hygieniapäällisen pintapyyhintä peseväällä ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä huuhtelu-pyyhinta ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikää.

Sisätyyny täytteenen sekä hygieniapäällinen erikseen voidaan pestä pesukoneessa. Kuumadesinfointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.



### LÄHTEET

<sup>1</sup>Kilpinen S., Laine M. & Lehmonen T. Asentohoitoa asentohoitotyöryhmillä. 2016. Saatavilla: <http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604134249>.

<sup>2</sup>Testattu EN ISO 12952 - 1: 2010 & EN ISO 12952 -2:2010 tai vastavaan mukaisesti.

<sup>3</sup>Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

<sup>4</sup>Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti

<sup>5</sup>Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

<sup>6</sup>Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.

### VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy  
Haukilahdenkatu 4  
00550 Helsinki  
p. 0306 40 40 40  
[asiakaspalvelu@medimattress.fi](mailto:asiakaspalvelu@medimattress.fi)  
[tilaus@medimattress.fi](mailto:tilaus@medimattress.fi)  
[www.medimattress.fi](http://www.medimattress.fi)