

BRUKERMANUAL

# AutoSlide


SystemRoMedic





### Bruk

Flytting til og fra bilsete

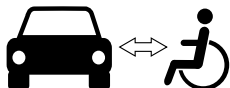

### Merk

Bruk alltid sikkerhetsbeltet.



### Vedlikehold

Bruk ikke skyllemiddel.

Følg vaskeanvisningen.



### Funksjonskontroll




### Visuell inspeksjon

Skal utføres før hjelpemiddelet tas i bruk og deretter jevnlig, spesielt etter vask.

Kontroller at sømmer, håndtak og spennen er hele og fri for skader.

## Mekanisk belastning

Test spennens funksjon og håndtak og kontrollere at de tåler tung belastning. Ved tegn på slitasje skal hjelpemiddelet kasseres.

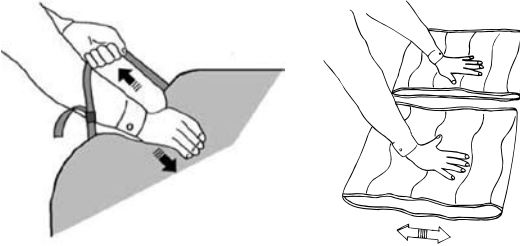

## Plassering

AutoSlide plasseres med den mindre sitteputens ru overflate mot setet (1). Feste båndet rundt ryggstøtten, dra ordentlig til (2).





handicare

Handicare AS  
Øreveien 37  
Postboks 163  
1501 Moss

Tlf: 03250  
Faks: 69 24 45 00  
post@handicare.no  
www.handicare.no

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside [www.handicare.no/bolig](http://www.handicare.no/bolig)