

Toalettstol Columbi® Voyager

Bruksanvisning

1 Innstilling

Toalettstolen har ingen innstillingsmuligheter.

2 Høydejustering

Toalettstolen har ingen høydejustering.

3 Ved bruk

Ved bruk av toalettfunksjonen fjernes lokket på potten slik at denne er åpen.

Legg lokket på plass etter bruk.

4 Tømming

Potten tømmes ved å trekke den ut bakover, ta tak i håndtaket bak på potten og sett på lokket. Løft i bøylen på lokket, frakt til tømming og tøm ut innholdet.

5 Potten skal rengjøres etter bruk

6 Sørg alltid for at potten er på plass når toalettfunksjonen skal brukes

7 Dersom feil oppstår, kontakt HandiCare ASA

8 Brukervekt inntil 125 kg

Monteringsanvisning

Toalettstol Columbi® leveres ferdig montert og trenger ingen monteringsanvisning.

Stolen slås sammen ved å ta tak i ryggbøylen og løfte toalettsetet i forkant.

Vedlikeholdsbeskrivelse

1 Rengjøring

Toalettstolen kan rengjøres ved 85° i 3 minutter i vaskemaskin. Fjern først puten.

Rengjøres med Soilax spearhead eller tilsvarende rengjøringsmiddel.

Toalettstolen tåler høytrykkspyling, men unngå å spyle direkte på ryggbøylen.

2 Ettersyn

Produktet trenger ikke periodisk ettersyn.

Ved klargjøring for gjenbruk vises til pkt 1 Rengjøring.

Leverandør:

HandiCare ASA - Øreveien 37, 1533 Moss - Postboks 5043, 1503 Moss

Telefon: +47 6924 4400 - Telefaks: +47 6924 4500

E-post: post@handicare.no - www.handicare.no