

Dusj- og toalettstol Erfurt

Dusj- og toalettstol Berlin

Vi gratulerer med valget av den nye dusj- og toalettstolen. Stolen er et godt hjelpemiddel på badet og toalettet og er bare beregnet for kjøring innendørs.

Kontroller produktet ved mottagelsen

Sjekk at emballasjen er ubeskadiget og at produktet er komplett. Dersom det er grunn til reklamasjon, vennligst kontakt HandiCare ASA eller transportøren.

Montering

Produktet leveres delvis montert og ferdigstilles slik:

1. Løft stolens understell ut av emballasjen samt rygg og sete
2. Plasser ryggen i ryggrorene på seterammen
3. Sving benstøttene ut, skyv ned og fell fotplatene i posisjon.
4. Trekk ut låsepinnen på armlenet og sving dette opp og forbi stoppfestet på ryggen.
Trekk deretter armlenet frem igjen til låsepinnen låser i seterammen
5. Trykk ned setet på seterammen
6. Dusj- og toalettstolen er nå klar til bruk

Bruk med bekken eller bøtte

7. Bekken eller bøtte skyves inn bakfra i fastmontert bekkenfeste under setet

Rengjøring og ettersyn

Bruk vanlige rengjøringsmidler uten slipeeffekt. Alle bevegelige deler er vedlikeholdsfrie. Produktene kan rengjøres med høytrykkspyler. Fjern først puten på modell Berlin. Denne rengjøres og desinfiseres på vanlig måte.

Reparasjon

Ved eventuell reparasjon bruk kun originale deler. Kontakt HandiCare ASA for reservedeler til produktene.

Produktfakta:

Bredde 57 cm
Lengde 88 cm
Høyde 101 cm
Setedybde 43 cm
Setebredde 45 cm
Bredde mellom armlener 47,5 cm
Frihøyde for toalett 43 cm
Setehøyde Erfurt 51 cm
Setehøyde Berlin 55 cm
Hjul 12,5 cm
Største brukervekt 100 kg
Vekt modell Erfurt 11,9 kg
Vekt modell Berlin 14,9 kg