


BRUKERMANUAL

COMBI GAMMA TILT

Dusj- og toalettstol

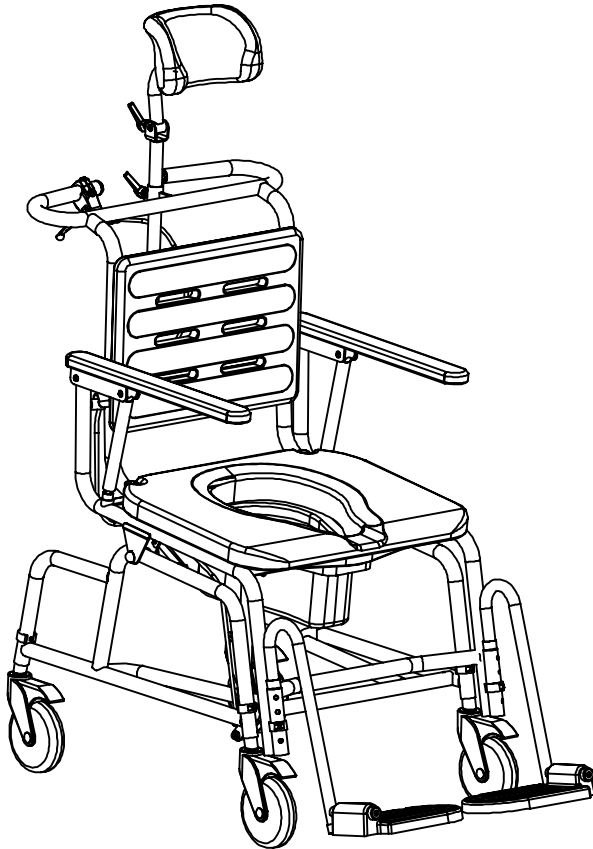

Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk.

Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj- og toalettstol Combi Gamma Tilt med trinnløs tiltfunksjon av rygg og sete, fra 5° forover til 25° bakover.

Både stol og hjul er produsert i rustfrie materialer. Stolen leveres med nakke- støtte og fotstøtter.

Bruksområder

Stolen har mange bruksmuligheter. Den kan benyttes både som dusj- og toalettstol og til innendørs transport. Ved forflytninger er det en hjelp at stolen kan justeres i riktig høyde og at armlener kan slås opp.

Dessuten er stolen ideell når forflytninger skjer ved hjelp av personløfter, fordi stolens sete og rygg kan vippe litt bakover for å "ta imot" brukeren.

Tiltfunksjonen brukes også i mange andre situasjoner, for eksempel ved hårvask og personlig hygiene. Brukere som ikke er i stand til å sitte riktig og sikkert i en vanlig dusj- og toalettstol, vil sitte bedre og tryggere når stolen er vippet litt bakover.

Sete, rygg og armlener er laget av sort polyurethan. Materialet er mykt, behagelig og øker samtidig sikkerheten for at brukeren ikke skal gli ut av stolen.

Montering

Ryggen: Klipsene som sitter i understellet bak setet, tas ut og rygglenet settes ned i hullene. Klipsene settes i og trykkes helt inn.


Sete, bekkenfeste og bøtte - se også skisse av bekkenfestet: Bekkenfestet kan sløyfes dersom bekken eller bøtte ikke skal brukes.

Demontering: Sete, bekken eller bøtte fjernes. Den bakerste delen av bekkenfestet løftes opp, (se a) før de tynne delene tas ut av hullene i understellets forreste del (se b1 og b2). Setet legges på igjen. Sørg for at knottene på setets underside sitter innenfor stålrammens område, dvs. at de ikke hviler på selve stålrammen.

Montering: Setet fjernes. Bekkenfestets to tynne deler stikkes inn i hullene, bak på den forreste tverrgående del av understellet. Ved bruk av "oval bøtte" (følger med stolen), skal bekkenfestet monteres i det innerste sett med hull (se b1 og b2). Ved bruk av andre bøtter eller bekken monteres bekkenfestet i de ytterste sett med hull (se c1 og c2). Deretter trykkes den motsatte ende av bekkenfestet ned på den tverrgående del av understellet (se a), og setet settes på som beskrevet under "demontering". Bøtten kan nå skyves på plass bakfra på stolen - med eller uten lokk.

Fotstøtter: Fotstøttene monteres ved å sette disse ned i holderne slik at de faller i hakk over klipsene.

Bekkenfeste - sett ovenfra

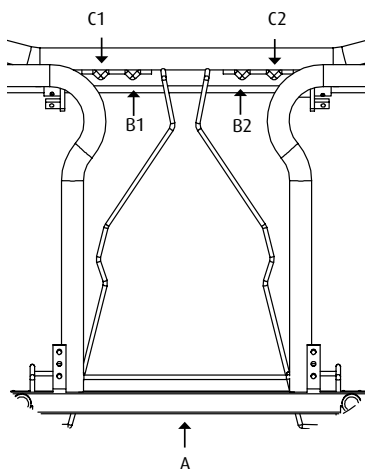

Individuell tilpasning

Høydeinstilling: Stolen stilles i forskjellige høyder ved hjelp av klipsene på bena. Klipsene tas ut og ønsket posisjon velges. Vær oppmerksom på at alle fire ben innstilles i samme høyde og at alle fire klips trykkes helt inn i stålrøret igjen.

Nakkestøtten: Nakkestøtten kan høydereguleres og vinkelreguleres i loddrett plan. Håndtakene til dette løsnes og ønsket høyde og vinkel velges. Stram deretter håndtakene godt til igjen.

Fotstøtter: Fotstøttene kan stilles inn i fire forskjellige høyder med eller uten fiksering.

Uten fiksering: Fotstøtten tas opp. Klipsene tas ut og ønsket posisjon velges. Sørg for at klipsene trykkes helt inn igjen. Fotstøtten settes ned og skal falle i hakk over klipsen. Uten fiksering kan fotstøttene svinges ut til siden.

Med fiksering: Hold på fotstøtten og ta klipsen ut. Ønsket posisjon velges, og når klipsen settes på holderen, skal klipstappen gå gjennom fikseringshullet i fotstøtten.

Combistolens tiltfunksjon: Husk alltid å låse alle hjul før tiltfunksjonen brukes. Stolen vipres ved hjelp av en gasspatron som utløses når man trykker på håndtaket.

Betjening bakfra: Når man benytter tiltfunksjonen bakfra, skal hjelperen bruke ryggens håndtak til å styre stolens bevegelser bakover og forover.

Betjening fra siden: Når man benytter tiltfunksjonen fra siden, anbefales det at hjelperen tar tak i ryggen for å styre stolens bevegelser bakover, og å trykke med håndflaten på setet, når stolens bevegelse skal styres forover. Håndtaket slippes når ønsket posisjon er oppnådd.

Vær oppmerksom på at tiltfunksjonen forover er lettest når det sitter en bruker i stolen og virker som motvekt. Hvis stolen skal vipres forover og det ikke sitter noen i den, er det lettest å betjene den fra siden. Man har da mulighet for å trykke med håndflaten på setet som motvekt.

Stolen kan vipres 5 grader forover og 25 grader bakover. Mange vil ha lettere for å sette seg og reise seg hvis stolen vipres litt fremover.

Vedlikehold

Både stol og hjul er laget i rustfrie materialer og kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler uten slipende eller etsende virkning. Vasketemperatur maks. 85°C, tåler høytrykkspyling.

Sete, rygg og bekkenfeste kan tas av og rengjøres.

Husk å løfte den bakerste delen opp før de to tynne delene tas ut av hullene.

Vær oppmerksom på at delene monteres korrekt igjen.

Viktig

- Maksimal belastning: 150 kg.
- Når kombistolen ikke brukes til transport og når tiltfunksjonen brukes, skal hjulene være låst.
- Ryggen er kun beregnet til å tas av ved transport av stolen uten bruker. Husk å kontrollere at de to ryggklipsene er satt helt inn , når ryggløset monteres igjen (sitter i understellet bak setet).
- Tiltfunksjonen må ikke brukes uten nakkestøtte.
- Tiltfunksjonen må kun utløses av en hjelper - ikke av den personen som sitter i stolen.
- Mellom armlenenes loddrette teleskoprør og stolens loddrette rør foran, er det risiko for å klemme seg når armlenene slås opp
- Hvis hjulene demonteres eller kombistolen skal høydejusteres, er det viktig at hjulene monteres / høydeinnstilles riktig; dvs. alle i samme høyde. Husk å trykke klipsene helt inn igjen.
- Når bekkenopphenget demonteres, skal man løfte den bakerste delen opp før de to tynne delene tas ut av hullene. Følg nøye beskrivelsen under ”montering”.
- Kontroller regelmessig at klipsene (ved hjul, rygg og fotstøtter) er i god stand og sitter riktig. Sjekk at alle håndtak er strammet godt til.

Innholdet i denne brukerveiledningen er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser fra Handicare AS. Handicare AS påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan finnes i denne brukerveiledningen. Alle produktene som er nevnt i denne brukerveiledningen, er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Handicare AS.



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig

Tlf: 03250
Faks: 69 24 45 00
post@handicare.no
www.handicare.no