

BRUKERMANUAL

# DUSJKRAKK GULVSNURRE



## **Bruksanvisning dusjstol Gulv Snurre**

Kan leveres både med og uten utsparing i setet.

GulvSnurre er en kombinasjon av Kulan dusjstol og Snurre badekarsete. Stolen står på 4 ben med et dreibart sete for hver 90. grad, og gir brukeren mulighet til å dreie setet for f.eks. å komme i posisjon foran vask og speil. Spaken trykkes lett ned og frigjør setelåsen. Armbøylene bidrar til trygge forflytninger til og fra setet. Helsveiset konstruksjon i hvit, slitesterk pulverlakk.

### **Bruksområde**

Dusjstol Gulv Snurre er ment til bruk i baderom.

Den kan brukes til å sitte på foran håndvasken eller inne i dusjen/dusjkabinettet.


Dusjstolen forenkler forflytningen fra for eksempel rullestol.

Når forflytningen er gjennomført, skyver man bare enkelt på låsespaken montert på siden av setet og svinger hele setet i ønsket posisjon. Låsespaken kan monteres på begge sider av setet.

Dette er for å forenkle bruk for flest mulig funksjonshemninger og størst mulig sikkerhet/komfort.

## Montering

Se skisse

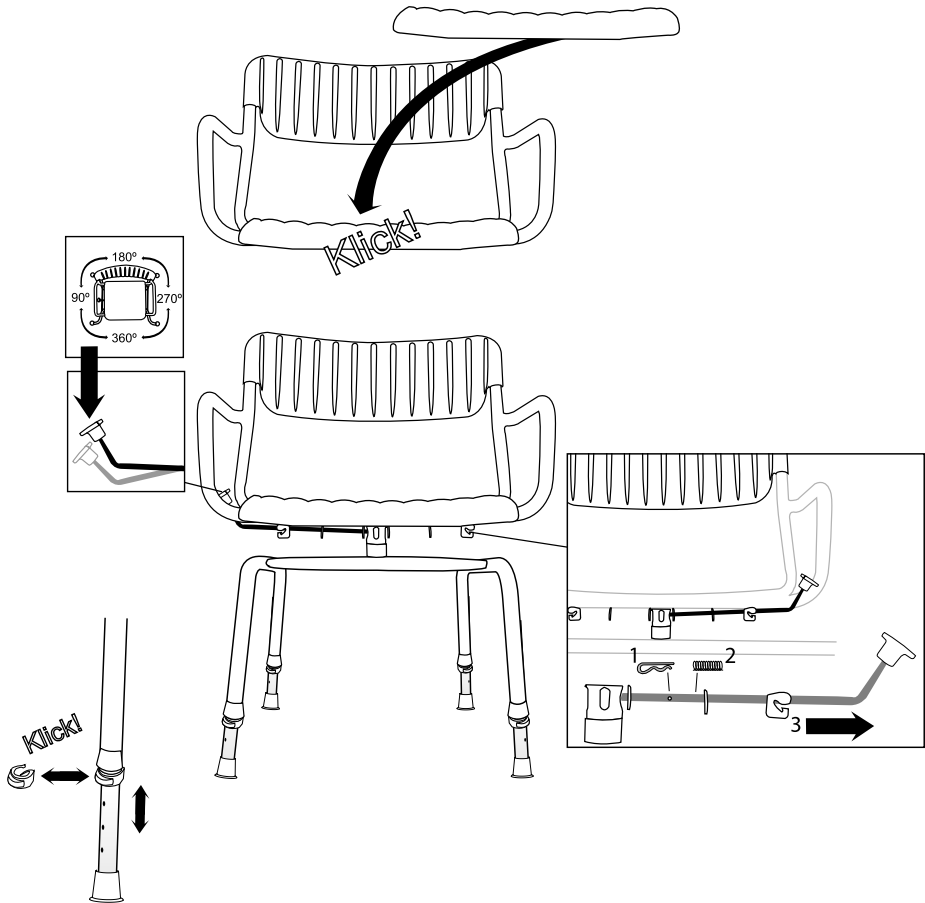

## Vedlikehold

Tørkes av etter bruk. Vasketemperatur maks 85 grader celsius, kan høytrykks-pyles.

Bruk vaskemidler uten slipende virkning.

## Viktig

Maksimal belastning 130 kg.

For optimal sikkerhet anbefales det å kontrollere doppskoene (Gummibeskyttelsen mot karet) jevnlig og skifte ved behov.

## Tekniske spesifikasjoner

Sete størrelse	D40x43 cm
Høyderegulerbar	45-55 cm
Høyde sete til armbøyle	17 cm
Bredde mellom armbøylar	51 cm
Største bredde	55 cm
Vekt	7,1 kg
Største brukervekt	130 kg



**handicare**

Handicare AS  
Øreveien 37  
Postboks 163  
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside [www.handicare.no/bolig](http://www.handicare.no/bolig)

Tlf: 03250  
Faks: 85 02 88 22  
[post@handicare.no](mailto:post@handicare.no)  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)