

BRUKERMANUAL

EasyGlide

SystemRoMedic





Beregnet bruk

EasyGlide brukes til sittende overflytning mellom rullestol og seng, toalett eller bilsete.



Vedlikehold

EasyGlide rengjøres med overflatedesinfisering.

Desinfisering gjøres med følgende midler:

70% etanol, 45% isopropanol eller Virkon 1% etc.



Maks vekt


135 kg ved 10-20 cm avstand. Se under.



Funksjonskontroll



Kontroller holdbarheten på EasyGlide ved å bøye platen forsiktig. Platen skal ha spenst og kjønes fast. Kassere hjelpemiddelet dersom fastheten har avtatt.

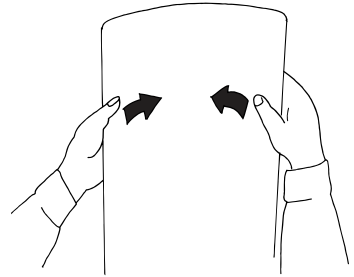

EasyGlide i bruk:



Plassering



Fjerning

EasyGlide brukt sammen med andre produkter:





EasyGlide & FlexiBelt



EasyGlide & FlexiBelt



EasyGlide, FlexiBelt
& FlexiMove

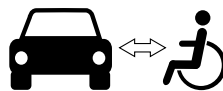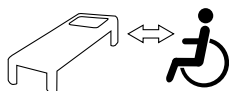

handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig

Tlf: 03250
Faks: 69 24 45 00
post@handicare.no
www.handicare.no