

3031



Batteriladeren er i samsvar med:

Batteriladdaren överensstämmer med:

Batteriladeren er i overensstemmelse med:

The batterycharger complies to following regulation:

93/42/EEC

Medical device directive

IEC 601-1

Medical electrical equipment, safety

IEC 601-1-2

Medical electrical equipment, EMC

IEC 12184

Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers

IEC 529-IPX1

Ingress protection

NS-EN1441

Risk analysis

ISO 7176-14

Power and control systems for electric wheelchairs

Bruksanvisning Ladac 3031 batterilader til rullestol

N

Laderen skal stå på gulv eller henge i veggbraketten. Koble til ladeplugg og nettkontakt. Laderen starter/stopper automatisk ved til/frakobling av rullestolen. Derfor kan nettkontakten alltid stå i.

Feilsøking

Nettkontakt og ladeplugg tilkoblet:

Ingen lamper lyser: Kontroller nettkontakt og ladeplugg

Rød lampe blinker: Tilkall servicetekniker

Laderen må ikke tildekkes!!

Laderen kan benyttes til:

Ventilregulerte rekombinasjonsbatterier

Gelébatterier

Åpne bly/syre batterier

Ladeforløpet tilpasses automatisk batteriet i rullestolen.

Miljøvern:

I konstruksjonen av laderen er det lagt vekt på å oppnå en høy virkningsgrad.

Laderen er resirkulerbar.

Tekninske data


Nettspenning	230	VAC
Nettfrekvens	50	Hz
Ladestrøm	10	A
Ladespenning	28,8 - 32	VDC
Vedlikeholdsspenning	26,6	VDC
Anbefalt batteristørrelse	24 - 90	Ah
Effektforbruk	350	W
Dimensjoner (HxBxD)	210x250x100	mm
Tetthetsgrad	IPX1	
Vekt inkl. veggbrakett	2,7	kg

ADVARSEL:

GASS - Under lading kan det utvikles knallgass som er meget eksplosjonsfarlig og en liten gnist er nok til å antenne den. Hold derfor aldri sigaretter, glør eller lignende i nærheten av batteriet.

SYRE - Syren i batteriet er etsende og angriper tøy, metall og lakk. Hvis man søler syre, skal man vaske og skylle rikelig med vann. Syresprut i øynene er skadelig, skyll rikelig med vann å oppsøke lege.

GIFT - Bly og andre kjemikalier som blir brukt i batterier er meget farlige. Vask hud og hender godt etter arbeid med batterier

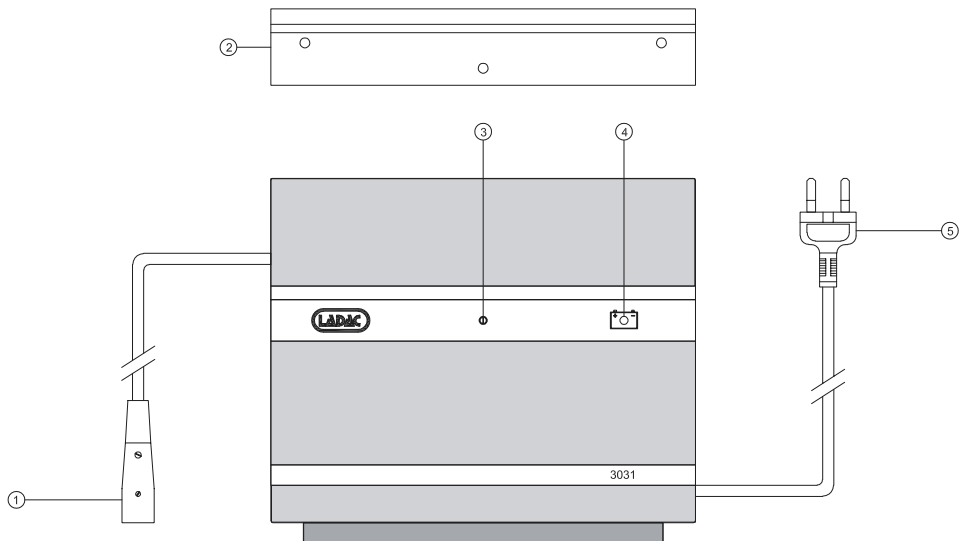

Punkt	Benevnelse	Forklaring
1	Ladeplugg:	Pluggen er tilpasset rullestol
2	Festebrakett:	Festes på vegg
3	Nettindikator:	Lyser grønt når laderen er i drift
4	Batteri indikator:	Gul - Lader Grønn - Sluttloading Grønn blinkende - Ferdigladet Rød - Feil
5	Nettkontakt (støpsel):	Tilkobles 230V/50 Hz stikkontakt



