

Brukermanual

Dynalife



ROLLATOR DYNALIFE

GENERELT

Rollator Dynalife er en moderne 4-hjuls rollator i aluminium med meget gode trilleegenskaper. Leveres som standard med trådkurv, ryggbånd, serveringsbrett og krykkeholder. Standardfarge sølv.

Rollatoren skal ikke benyttes som en rullestol eller annet hjelpemiddel.

Innhold:

Montering	side 2
Bremser - bruk	side 3
Rengjøring vedlikehold	side 4
Gjenbruk	side 4
Bremser - justering	side 4
Bremser - bytte av wire	side 6

1. Sett understellet på gulvet og plasser de 2 kjørehåndtakene ned i rammen (bilde A).
2. Still håndtakene i passende høyde og lås med medfølgende skrue, skive og mutter (bilde B).
Trekk rattet godt til. Kontrolleres periodisk også under bruk.

Ikke plasser håndtakene høyere enn sikkerhetsmerket angir!

- 3 Plasser kurven over nedre stag og trykk ned setet.
- 4 Kurven fjernes før rollatoren legges sammen.



A



B

BREMSER

Rollatoren bremses på begge hjul ved å trykke håndtakene lett opp med passende kraft (bilde C).

Parkeringsbremsen aktiveres ved å trykke bremsehåndtakene ned (bilder D eller E) og utløses ved å trekke håndtakene opp. Det skal høres et klikk. Det anbefales at parkeringsbremsen er aktivert når rollatoren ikke er i bruk.

Parkeringsbremsen skal alltid være inntrykt når bruker setter seg på setet.



C



D



E

RENGJØRING/ VEDLIKEHOLD

UTFØRT AV BRUKER

For at din rollator skal fungere best mulig til enhver tid kreves det et visst vedlikehold.

Smuss og skitt tørkes av regelmessig etter behov med vanlig rengjøringsmiddel og vann.

1. Kontroller at bremsene fungerer som de skal. Kontroller at smuss og skitt på bremses og hjul ikke reduserer bremseeffekten.
2. Kontroller jevnlig alle muttere, bolter og skruer og stram disse ved behov.

KLARGJØRING VED GJENBRUK


Ved gjenbruk skal følgende kontrolleres:

1. Understellet skal ikke være skadet eller skjevt.
2. Påse at kjørehåndtak, bremsehåndtak, sete, ryggband og hjul er ubeskadiget og at rollatoren kan legges enkelt sammen.
3. Kontroller at kjørebremser og parkeringsbremser fungerer feilfritt. Juster bremses om nødvendig og skift wire ved behov.
4. Kontroller at alle hjulene er godt fastskrudd.
5. Rollatoren høytrykkspyles eller rengjøres med vanlige rengjøringsmidler.


JUSTERING AV BREMSER

Dette kan gjøres på 2 måter:

1. Stram bremsen ved å skru strammeskruen (A) utover mot wiren. Skru låsemutteren mot håndtaket etter endt justering.

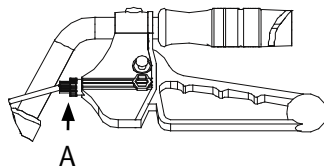



2. Dersom strammingen i pkt. 1 ikke er tilstrekkelig, skru opp bolt B i pilens retning mot wiren. Dette vil stramme bremsen.

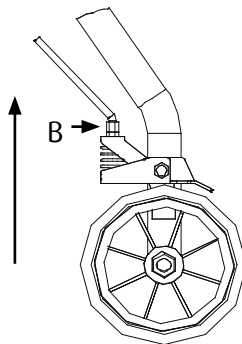

BYTTE AV BREMSEWIRE

Ved bytte av bremsewire kan denne prosedyre følges:

1. Skru ut skru 1 og fjern den defekte bremsewiren.
2. Demonter bremsehåndtaket og sett inn det smale hodet på den nye bremsewiren i hullet på håndtaket.
Plasser den andre enden av bremsewiren i bremseskoenheten på hjulet.
3. Hold nede bremseskoen til den trykker på hjulet. Stram wren med tang og skru inn feste-skruen på siden.
4. For å innstille bremsewiren, se pkt. 1 Justering av bremser.

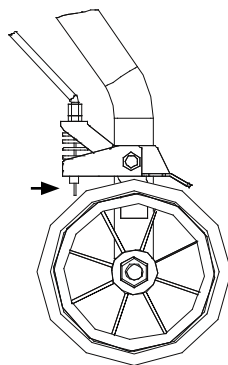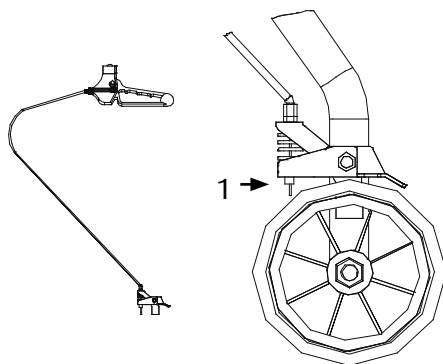

Garanti: Denne garantien gjelder for alle nye OS rollatorer/gåbord solgt gjennom autoriserte Handicare AS-forhandlere.

2 års garanti for varen gjelder fra leveringsdato. Handicare AS garanterer at varen skal være fri for feil både med hensyn til materiale og utførelse, og oppfylle alle krav spesifisert i salgsbrosjyren. Handicare AS garanterer gratis reparasjon, vedlikehold og bytte av eventuelle defekte deler, forutsatt at dette har inntruffet under normal bruk som beskrevet i brukermanualen.

All reklamasjon, bytting av deler og service som skal dekkes under nedenforstående begrensede garanti, må presenteres Handicare AS skriftlig innen 45 dager etter hendelsen for å oppnå kompensasjon.

Ekskludering og begrensning

- Utstyr som er tilpasset av andre enn Handicare AS eller en representant fra Hjelpemiddelsentralen, blir ikke dekket av denne garantien.
- Dekk, slanger og salmakerarbeid er ikke dekket av denne garantien.
- Enhver ødeleggelse på tilleggsutstyr blir ikke dekket av denne garantien.
- Utstyr som er uforsvarlig behandlet eller brukt på en måte som strider mot retningslinjene i vår brukermanual, vil ikke bli dekket av garantien.

Fremgangsmåte ved garantisaker

Utstyr som viser seg å ikke fungere tilfredsstillende, skal returneres til den autoriserte Handicare AS-forhandler som man kjøpte utstyret fra. Forhandleren vil foreta nødvendig reparasjon og service. Handicare AS vil gjøre sitt ytterste for å forsyne forhandleren med nødvendige deler for å fullføre reparasjonen, men garantien dekker verken frakt av utstyr til og fra forhandleren eller erstatning for kjøperens rullestol mens den blir reparert.

Dersom kjøperen ikke kan levere tilbake utstyret til den autoriserte Handicare AS-forhandleren som solgte det, skal kjøperen kontakte Handicare AS' hovedkontor tlf. 6924 4400 i Norge for å få navnet på en autorisert forhandler som kan foreta garantireparasjonen. Kjøperen skal ha klart for seg modellnummer, serienummer, kjøpedato og beskrivelse av utstyrets feil ved all kontakt med forhandleren.

Advarsel: Innholdet i denne brukermanualen er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser fra Handicare AS. Handicare AS påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan finnes i denne brukermanualen. Alle produktene som er nevnt i denne brukermanualen, er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Handicare AS.



PB 163, 1501 Moss
Tlf: 6924 4400, faks: 6924 4500
E-post: post@handicare.no
www.handicare.no