



Smartsit er et patentert ryggsystem som gir økt komfort, bedre stabilitet og trykkfordeling. Ryggen kan tilpasses i dybde og kurvatur. Smartsit har også innebygget regulerbare sidestøtter som kan tilpasses i størrelse og form. Sidestøttene gir også mulighet for asymmetriske innstillinger.

Smartsit ryggen kan stilles inn og reguleres med brukeren i stolen.

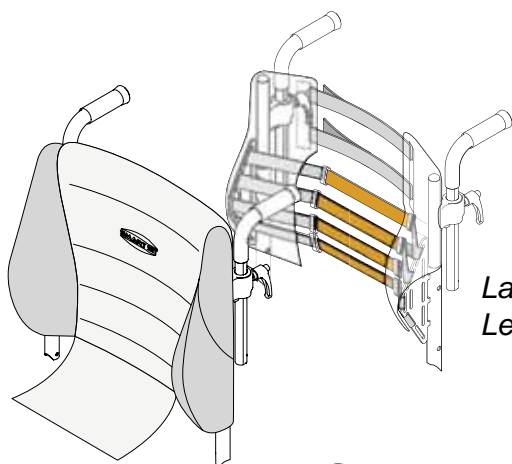


Lav rygg,
Legend 2

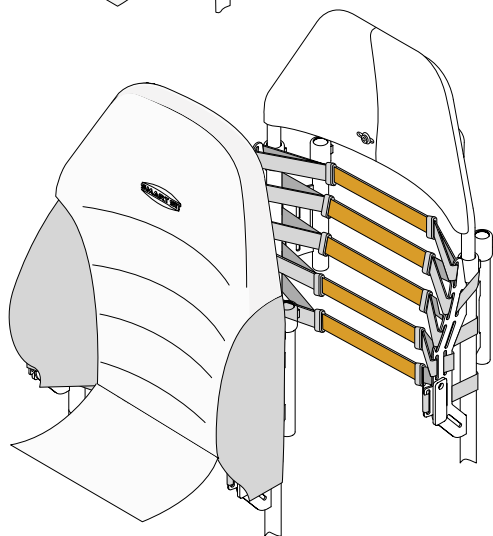


Høy rygg,
Eligo 2 og Emineo

- 1** Tilpasninger på nivå 1 krever generell kompetanse i tilpasning av rullestoler
- 2** Tilpasninger på nivå 2 krever erfaring og høy kompetanse i tilpasning av rullestoler
- 3** Tilpasninger på nivå 3 krever erfaring og spesialkompetanse i tilpasning av rullestoler


Brukermanual

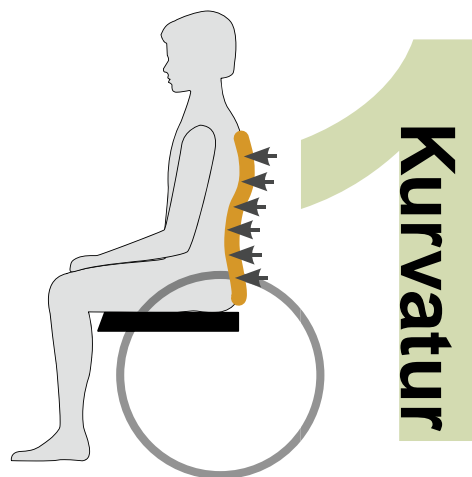

Tilpass ryggen etter ulike krumninger (kyfoser). Disse tilpassningene er tilstrekkelige for de fleste brukere

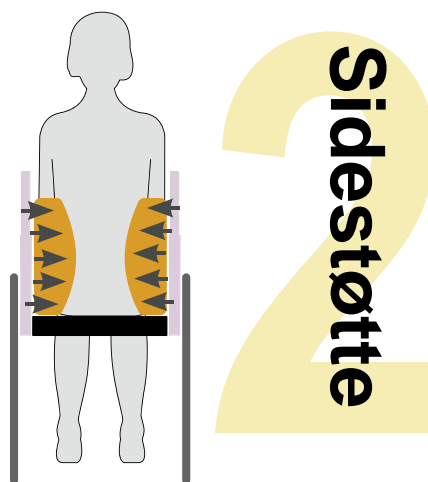


Oppnå bedre sideveis stabilitet komfort gjennom å gi sidestøttene ulik form og størrelse

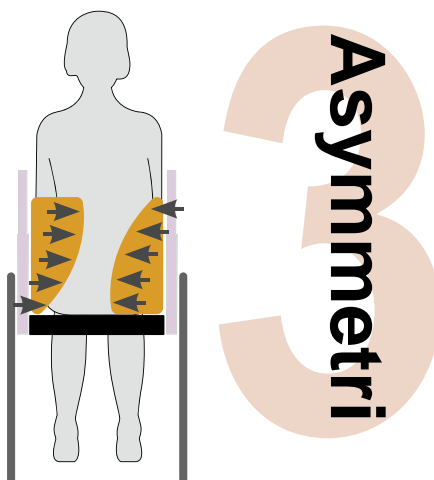

Utfør mer avanserte tilpasninger gjennom asymmetrisk innstilling av ryggen

Justere ryggens kurvatur


Ryggenes kurvatur kan tilpasses naturlige krumninger og kyfoser som på en vanlig velcroygg. Disse tilpasningene bør gjøres av personer med generell kompetanse i tilpasning av rullestoler.

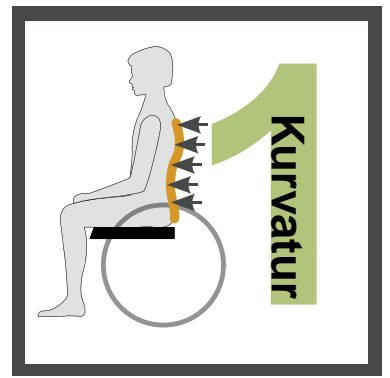


Før du justerer smartsittryggen;

Påse at setedybde og ryggvinkel er korrekt, se fremgangsmåte i brukermanualen. Still eventuelt rygg høyden, se fremgangsmåte på siste side.

- Slakk alle velcrobåndene litt før du begynner å justere ryggen. Start justeringen med nederste velcrobånd, og jobb deg oppover
- Stram eller løsne velcrobåndene slik at brukeren oppnår maksimal komfort og støtte

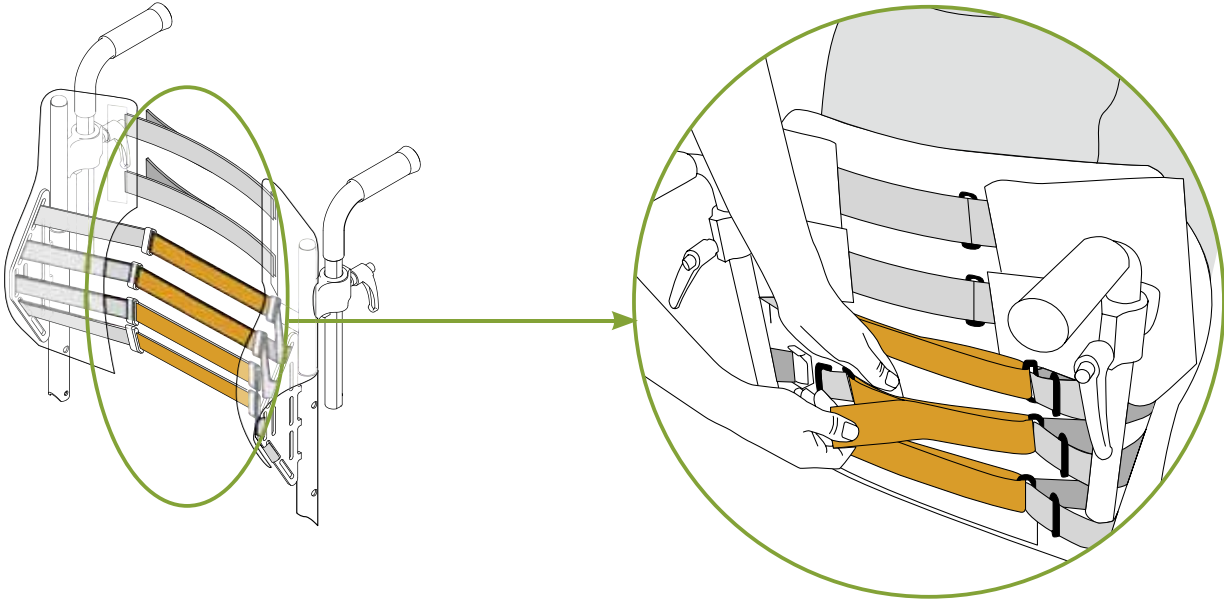

- Den høye Smartsit ryggen er utstyrt med en todelt topplate som kan justeres i dybden
- Dybden justerer du ved å løsne låserattet på baksiden og skyve platene inn- eller utover. Hold igjen i bakkant av platene når du trekker til låserattet igjen
- Påse at kurvaturen på platene følger kurvaturen på båndet nedenfor slik at trykket blir jevnt fordelt

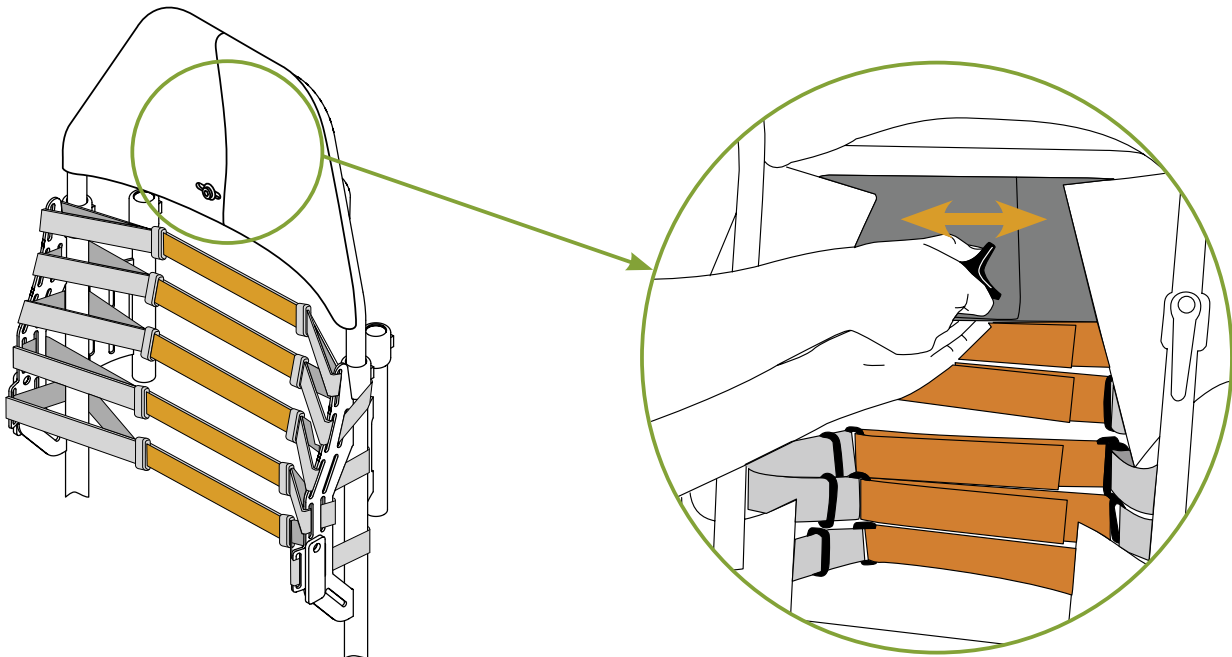

Påse at seteputen ligger riktig. Seteputens plassering har avgjørende betydning for komfort og stabilitet. Antall sett med stropper på din stol, kan variere fra illustrasjonene.

Justere sidestøttene



Oppnå bedre sideveis stabilitet og komfort gjennom å gi sidestøttene ulik form og størrelse. Disse tilpasningene bør foretas av personer med erfaring og høy kompetanse på instilling av rullestoler.

Hvert bånd i sidestøttene er formet som separate triangler som kan gis ulike former

Juster form og størrelse på sidestøttene ved å:


- Løse opp, eller stramme båndene som utgjør sidestøttene
- Tre båndene på en annen måte gjennom sidestøttebrakettene
- Stramme eller løsne de orange velcrobåndene

Etterjuster de oransje velcrobåndene etter at du har justert sidestøttene.

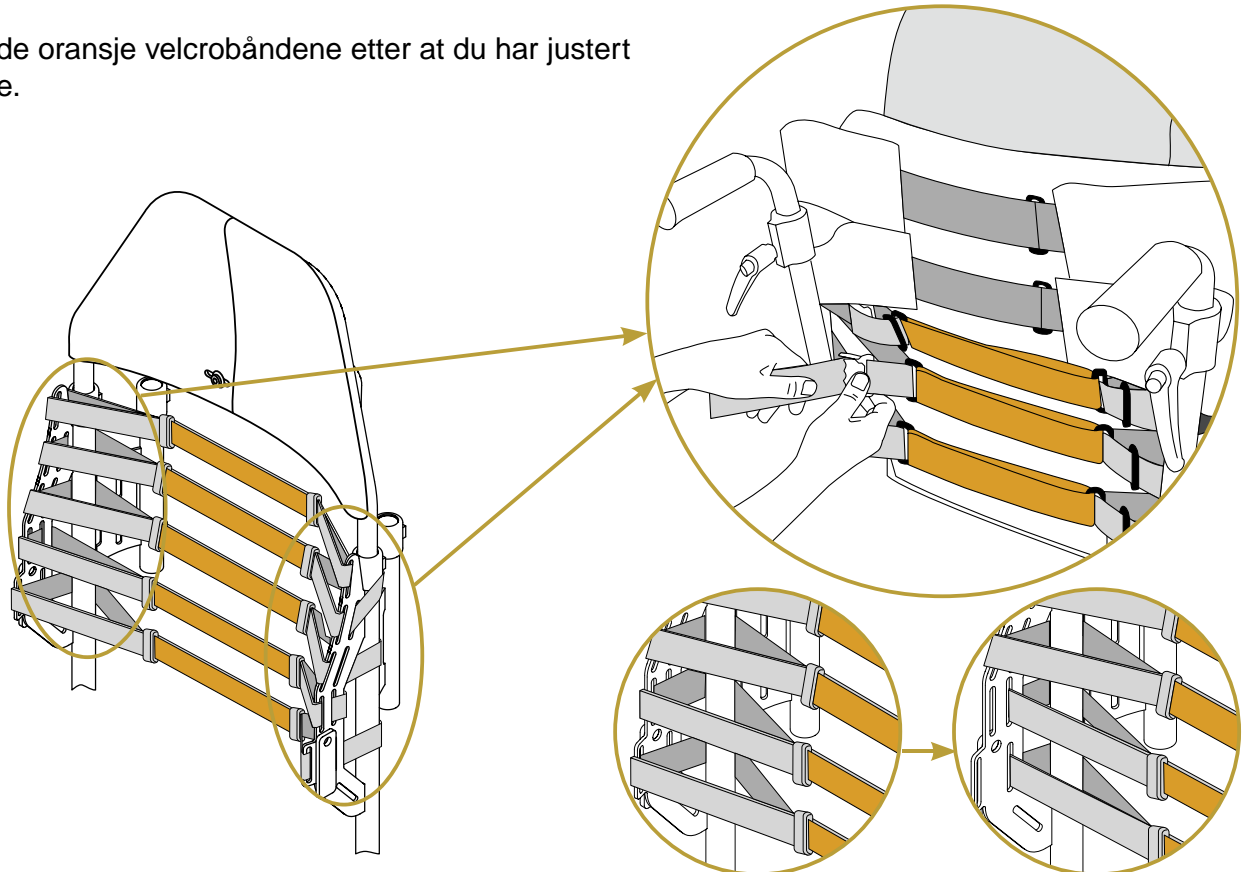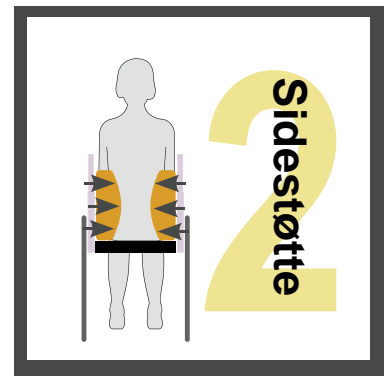

Trianglene er gjort mindre ved å tre båndene gjennom andre slisser i sidestøttebraketten.



Prinsippet ved Smartsit ryggen, sett ovenfra

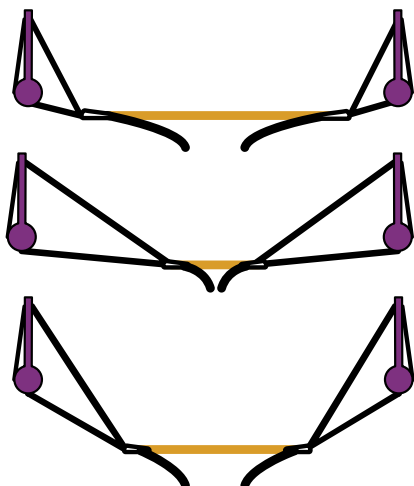

- Små triangler gir plass og støtte til den bredere delen av ryggen
- Store triangler gir plass og støtte til den smalere delen av ryggen
- Strammingen av de oransje velcrobåndene er med på å bestemme formen på trianglene, samtidig som det avgjør hvor dyp ryggen skal være

Justere sidestøttene asymmetrisk

Utfør mer avanserte tilpasninger gjennom asymmetrisk innstilling av ryggen. Disse tilpasningene bør foretas av personer med erfaring og spesialkompetanse på innstilling av rullestoler.

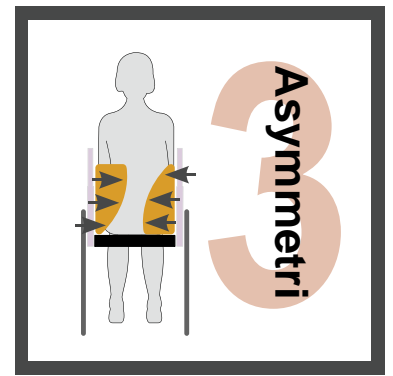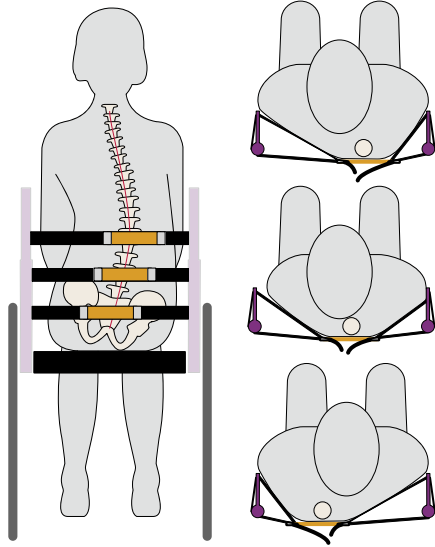

Benytt justeringsmulighetene som er beskrevet på foregående sider til å justere ryggen asymmetrisk.


Figuren viser eksempel på en asymmetrisk formet rygg med ulik størrelse og form på trianglene.

Justering av rygg høyde

Lav rygg (Legend 2)

- Løsne ryggoverdraget og øvre del av velcroyggen for å komme til ryggørret. Ryggørret har en skala (A) som viser rygg høyden
- Løsne skruen (B) på begge ryggørre med en 4 mm umbrakonøkkel
- Hev eller senk ryggen til ønsket høyde, skru til skruene igjen og legg over ryggoverdraget


Sammen med den lave ryggen følger et ekstra sett med stropper som kan monteres hvis ryggen skal benyttes i en høy posisjon. Hvis ryggen skal justeres lavt, kan det være nødvendig å fjerne et sett med stropper.

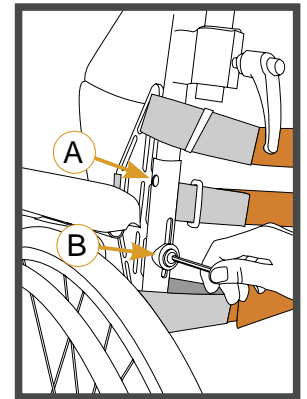

Lav rygg

Høy rygg (Emineo og Eligo 2)

- På Eligo 2 må du ta av ryggdekselet før du kan justere rygg høyden
- Løsne ryggoverdraget for å komme til ryggørret. Hvis du skal justere rygg høyden mens brukeren sitter i stolen, må du først ta opp den delen av ryggoverdraget som ligger under seteputa og legge den oppå seteputa slik at ryggen fritt kan dras oppover uten å bli hinderet av ryggtekstilene
- Løsne skruen (C) på begge sider av ryggen med en 4 mm umbrakonøkkel
- Dra øvre del av ryggen opp, eller nedover. (Hvis ryggen har vært i øverste posisjon, må du løse ut snaplåsen før du kan justere den nedover)
- Skru til skruene igjen og fest ryggtekstilene, og eventuelt ryggskallet på Eligo 2

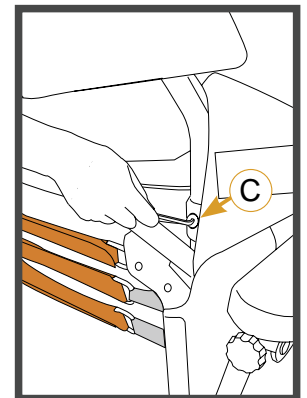

Høy rygg

Slå sammen Legend 2 med Smartsit rygg

- Løsne den delen av setetrekket som ligger under seteputa og skyv den ned mellom setetrek og rygg setet
- Ta tak i bakkant av seterørene og trekk oppover slik at rørene går fri av sidestøttene. Da unngår du at seterørene hekter i ryggoverdraget

