

BRUKERMANUAL

TOALETSTOL HCDA



1.	Innholdsfortegnelse	2
2.	Gratulerer med valget	2
3.	Viktig om bruken	2
4.	For sikkerhetens skyld	3
5.	Konfigurasjon	4
6.	Montering	8
7.	Rengjøring og vedlikehold	19
8.	Tekniske data	21
9.	Garanti	22
10.	Notater	23

2. Gratulerer med valget

Vi gratulerer deg med valget av HCDA. Denne bruksanvisningen hjelper deg å montere toalettstolen og gir gode råd for å eliminere risikoen for uhell.

3. Viktig om bruken

Toalettstolen er beregnet for kortere eller lengre toalettbesøk. Underlaget bør være jevnt og ikke for mykt når bruker skal forflyttes i stolen. Plastbøtten med lokk er utstyrt med muligheter for å nøytralisere lukt. Seteplaten uten hull er standard for bedre sittekomfort når toalettsetet ikke brukes.

Vær oppmerksom på at største brukervekt er 120 kg.

4. For sikkerhetens skyld

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk for første gang.

- Alle deler må kontrolleres før stolen tas i bruk
- HCDA skal kun brukes når ledsager triller stolen
- Skal kun brukes til forflytning av personer
- Brukes over relativt korte avstander pga. manglende fjæring i setet
- Sitt tilbakeleent i stolen slik at bruker ikke tipper forover
- Unngå å bøye for langt fremover og til siden, for eksempel for å plukke opp gjenstander fra gulvet, på grunn av fare for at stolen kan tippe
- Bruk armlenene for støtte ved oppreisning eller tilkall personell for hjelp
- Unngå totalbelastning av hele kroppen på høyre eller venstre armlene ved oppreisning
- Tilpass høyden på leggstøtten
- Legg ikke føttene på badekarkanten eller toalettet. Risiko for at stolen tipper
- Bær ikke stolen med pasienten sittende
- Kjør ikke stolen på meget ujevnt underlag, i sterk hellning eller i trapp
- Sett alltid på bremsen når stolen står stille med bruker i stolen

5 Modell HCDA

Dette er standardkonfigurasjonen for toalettstoler av denne type.

1. Kjørehåndtak
2. Ryggstøtte med polster
3. Seteplate
4. Bøtte i plast med lokk
5. Lås for armlene
6. Brems bakhjul
7. Forhjul uten brems
8. Armlener
9. Toalettsete
10. Lås for benstøtter
11. Benstøtte
12. Fotplate



6 Montering

Toalettstolen leveres delvis montert. Den videre montering er enkel og krever ingen spesialkunnskaper. Gå frem på følgende måte:

1. Ta alle deler ut av kartongen (fig.2). Sørg for at det er god nok plass rundt deg.
 2. Fjern klipsene på rørene på understellet (fig. 4).
 3. Plasser ryggørene i rørene på understellet (fig. 4) og sett på plass klipsene.
- ⓘ Kontroller at disse er satt korrekt på.
4. Sving armlenene ned til disse låses automatisk. Du hører et tydelig klikk (fig. 6)
 5. Test ved å trykke armlenet ned.
 6. Legg seteplaten (1) på toalettsetet (fig. 7).
 7. Hekt begge benstøttene på plass.
 8. Hekt leggstroppen på leggstroppbøylen og tilpass lengden på stroppen.

HCDA er nå montert og klar til bruk.



Fig. 2

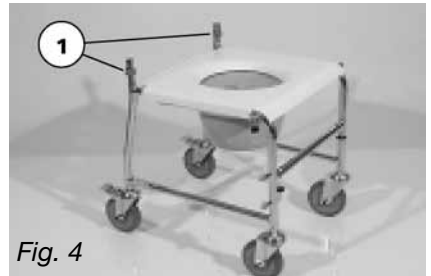


Fig. 4



Fig. 6



Fig. 7

6.1 Brems på hjul

Det er brems på de 2 bakre hjulene. (fig. 10) for å låse stolen på underlaget.

6.1.1 Sett på bremsen

Trykk ned stopperen på hjulet med foten (fig. 10).

6.1.2 Frigjør bremsen

Frigjør bremsen ved å trykke ned utløseren foran på hjulet (fig. 10).

Dersom du skal bremse stolen skal begge bremsene aktiveres.



Fig. 10

6.2 Sentralbrems

Sentralbremsen låser forhjulene og stolen er låst på alle hjul.

6.2.1 Sett på sentralbremsen

- Trekk låsespaken (fig. 12) 1 opp og deretter ned så langt den går (fig. 13).

6.2.2 Frigjør sentralbremsen

- Frigjør bremsen ved å løfte låsespaken opp så langt det går (fig. 12)
- Slipp låsespaken ned (fig. 14)

6.2.3 Flytt bremsespaken

1. Trekk låsespaken (fig. 12) opp og frem så langt det går (fig. 13)
2. Fjern mutteren (fig. 12) og trekk Låsespaken opp av holderen.
3. Stikk låsespaken nedenfra og gjennom høyre/venstre holder. Skru mutteren på plass (fig. 13)



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

6.3 Armlener

Armlenene kan felles ned ved sideforflytning (15).

Vær oppmerksom på:

- Når armlenene felles ned, vær oppmerksom på eventuelle hindringer bak stolen.
- Hold i den ytre delen av armlenepolstret.
- Ikke kjør stolen uten at armlenet er låst.
- Ikke løft stolen i armlenene.

6.3.1 Felle ned armlenet

Låsepinnen må trekkes ut når armlenet skal felles ned (fig. 16).

6.3.2 Felle opp armlenet

Låsepinnen går automatisk i stilling når armlenet felles opp (fig. 17).
Kontroller at den er låst ved å trykke armlenet ned.



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17

6.4 Benstøttene

Ikke løft eller bær stolen i benstøttene.

6.4.1 Leggbåndet

Leggbåndet (fig. 18) er festet på leggbåndsbøylene som sitter på benstøtterøret.

Velcrobåndet på baksiden av leggbåndet kan tilpasses.

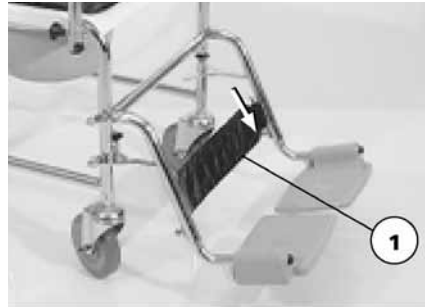


Fig. 18

6.4.2 Slå opp fotplatene

Fjern leggbåndet og ta bena bort fra fotplatene.

Det kan være nødvendig å slå opp fotplatene for å gi plass for føttene (fig. 19), for eksempel dersom man ønsker å kjøre stolen fremover ved hjelp av bena.

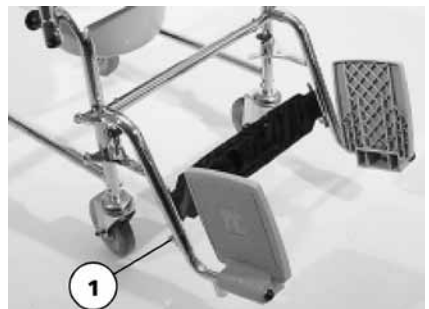


Fig. 19

6.4.3 Benstøttene til siden

For å komme lettere inn og ut av stolen samt helt inntil toalettet kan fotstøttene svinges til side etter at disse er slått opp (fig. 20). Løft låsepinnen (fig. 20) opp og sving fotstøttene til side. Løsne leggbåndet (fig. 20).

6.4.4 Ta bort benstøttene

Ta bort leggbåndet og slå opp fotstøttene. Løft opp låsepinnen (fig. 20), sving benstøttene ut og løft opp (fig. 21).

6.4.5 Feste fotbrettet igjen

Fotbrettet settes på plass ved å hekte det på leggbåndsøylen (fig. 20) og svinge det frem. Du vil høre et klikk når det er på plass.

6.4.6 Justere høyden på fotbrettet

Løsne skruen på baksiden av benstøttene (fig. 23) og still disse i ønsket høyde. Sjekk største lengde som er avmerket på røret. Stram skruen.



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 23

6.5 Toalettbøtte

Bøtten kan tas ut for tømning og rengjøring. (fig. 24).
Toalettsetet og bøtten desinfiseres.

6.5.1 Lokk og luktfjerner

Lokket kan oppbevares i holderen bak setet (fig. 24). Vann kan helles i kanten mellom bøtte og lokk for å hindre lukt.

6.5.2 Fjerne bøtten

Løft bøtten litt opp og trekk ut mot ryggen (fig. 24).

6.5.3 Sette inn bøtten

Skyv bøtten inn under toalettsetet med eller uten lokk (fig. 25).
Lokket kan også plasseres i holderen bak setet (fig. 25).



Fig. 24



Fig. 25

6.6 Polstret seteplate

Den avtagbare polstrede seteplaten (fig.27) er heldekkende og er beregnet for kortere transport.

6.6.1 Ta bort toalettsetet

Toalettsetet kan enkelt fjernes ved å løfte det opp.

6.6.2 Sette toalettsetet på plass igjen

Trykk toalettsetet (fig. 26) med bekkenholderen ned på seterammen (Fig. 27).
Kontroller at setet sitter på plass.



Fig. 26



Fig. 27

7 Rengjøring og vedlikehold

7.1 Sete og ryggtrekk

Kan ikke maskinvaskes/høytrykkspyles! Rengjør rygg og sete med varmt vann. Flekker kan fjernes med svamp eller myk børste. Ikke bruk så mye vann at trekket blir gjennomvått. Skyll med rent vann og la det tørke naturlig. Kan desinfiseres med vanlige desinfeksjonsmidler. Følg bruksanvisningen for denne prosedyren.

Seteplaten og fotbrettene er laget av kvalitetsplast. Disse rengjøres jevnlig med standard rengjøringsmidler. Det kan benyttes Incidin 0,25-0,5% konsentrat, 4% Sagrotan oppløsning for desinfisering av setet – eller lignende produkter.

Finishen på HCDA sikrer en optimal beskyttelse mot rustdannelser. Forkrommede rør tørkes med en tørr klut. Kontroller hjulene regelmessig for smuss, hår etc. og at alle bevegelige deler fungerer som de skal.

Nevnte rengjøringsprosedyrer bør utføres regelmessig – spesielt dersom forskjellige brukere benytter produktet.

7.2 Vedlikehold

Produktet bør være gjenstand for årlig produktkontroll for å redusere faren for uhell og uforutsett slitasje. Handicare AS kan utføre en slik kontroll.

8 Tekniske data:

Setebredde	45 eller 48 cm
Lengde	56 cm
Totallengde	99 cm
Totalbredde	65 cm
Totalhøyde	98 cm
Setedybde	43 cm
Setehøyde for HCDA	45 cm - 54*/51 cm
Sete til overkant polster armlene	21*/24 cm
Sete til overkant ryggtrekk	38*/41 cm
Hjuldiameter	12,5 cm
Vekt	14 kg
Største brukervekt	120 kg

*= med seteplate



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no