



Vision High-Low

Brukermanual



Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

Innholdsfortegnelse:

1.	INTRODUKSJON	3
2.	OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV	3
3.	BRUKSOMRÅDE	3
4.	MONTERING	3
5.	BETJENING	4
6.	TEKNISKE DATA	5
7.	TEST AV BORDET FØR BRUK	6
8.	SIKKER BRUK	6
9.	RENGJØRING/ VEDLIKEHOLD	7
	9.1 Rengjøring av understell	7
	9.2 Rengjøring av bordplate, laminat	7
	9.3 Vedlikehold.....	7
10.	FEILSØKING	7
	10.1 Bordet virker løst eller ustabil	7
	10.2 Bordet kan ikke justeres i høyden/skråstilling (oppleves som tungt å justere).....	7

1. Introduksjon

VISION er navnet på den nye serien med høydejusterbare arbeidsbord fra Ropox. Bordene har et tidsriktig og lekkert design. Vi mener at et produkt skal være funksjonelt og lekkert å se på – uansett hvem som skal bruke det. Det kaller vi VISION.



Dette dokument SKAL alltid følge produktet, og være lest av og til rådighet for brukeren

Riktig bruk, betjening og inspeksjon er avgjørende for effektivt og sikkert arbeid.



Dette produktet er høydejusterbart og bruk av produktet kan innebære klemfare. Enhver betjening skal skje av eller under kyndig veiledning av en voksen, som har lest og forstått viktigheten av punkt 8 "Sikker bruk"

Ved betjening av en skråstilt bordplate (senking av bordplaten) kan det oppstå klemfare mellom bordplaten og understellet. Det er derfor ytterst viktig å forsikre seg om at det ikke befinner seg legemsdeler eller andre objekter mellom bordplaten og understellet, idet det her er størst klemfare.

2. Overensstemmelse med EU-direktiv

Dette produkt er CE-merket og bekreftes med det å være i overensstemmelse med de grunnleggende krav vedr. funksjon og sikkerhet i de aktuelle direktiver. Kopi av CE erklæring kan fås ved henvendelse til leverandøren.

3. Bruksområde


VISION er designet for å oppnå en optimal arbeidshøyde for brukeren. Det er et aktivitetsbord og må derfor ikke benyttes som løftebord eller personløfter.

Bordet er til innendørs bruk, under temperaturer og fuktighet i boligen som angitt i punkt 6.

4. Montering

Leveres ferdig montert.

5. Betjening

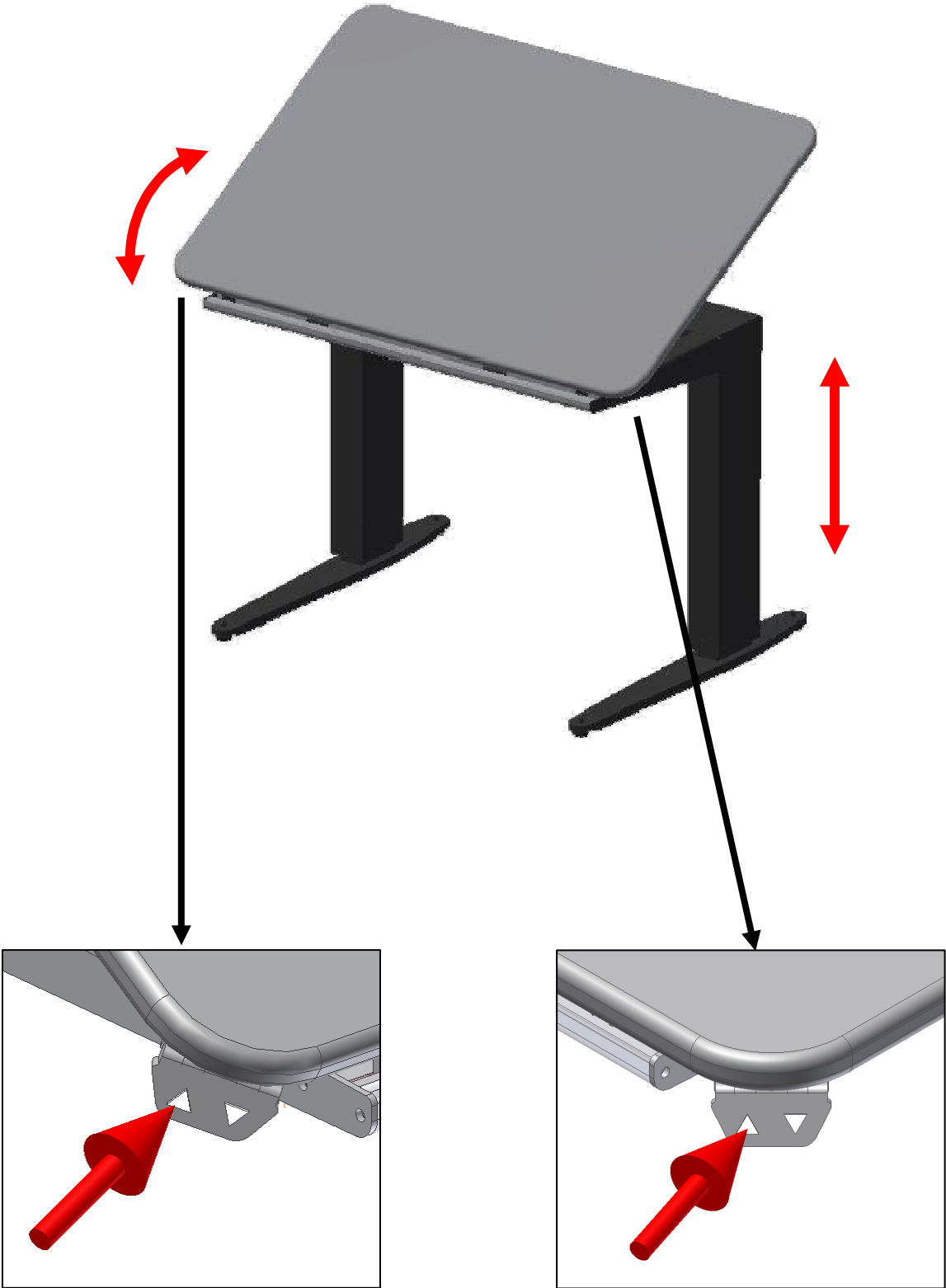

6. Tekniske data

Produktnavn:	Vision High-Low
Varenummer:	Elektrisk: Vision High-Low, 90x60 cm, A 20-60800 Vision High-Low, 90x60 cm, B 20-60801 Vision High-Low, 120x60 cm, A 20-60810 Vision High-Low, 120x60 cm, B 20-60811 Vision High-Low, 90x90 cm, A 20-60812
Høydejustering:	62–132 cm inkl. bordplade
Materiale:	Stål St. 37 Div. kunststoff
Bordplate:	Laminat
Overflatebehandling:	Pulverlakkering, div. farger Chromating
Strømtilførsel:	230VAC / 2,5A / 50 Hz
Standby primær:	1W
Driftsspenning:	24VDC
Intermittens maks.:	Maks. 10 % svarende til 1 min aktiv / 9 min pause
Hastighet:	Ca. 32 mm/sek.
Løftetid vandring 30 cm:	Ca. 10 sek.
Temperatur:	5-45°
Maks. belastning (statisk):	100 kg jevnt belastet over hele bordplaten
Maks. løftekraft under høydejustering (dynamisk):	80 kg
Max. belastning på en skråstilt bordplade (statisk):	30 kg
Max. løftekraft under skråstilling av bordplaten (dynamisk):	4 kg
Produsent:	Ropox A/S, DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 75 05 00 E-mail: info@ropox.dk , www.ropox.dk

7. Test av bordet før bruk

Før bordet tas i bruk, skal det alltid utføres en komplett test av alle bordets funksjoner. Deretter skal det utføres test av produktet minst en gang i året av kompetent personale:

1. Det må ikke være belastning på bordet.
2. Det må ikke være gjenstander el. lign., som kan hindre bordet i å bevege seg innenfor høydeinnstillingsintervallet.
3. Koble til strømmen og kjør bordet i nederste posisjon. Sjekk at bevegelsen skjer på en jevn og kontrollert måte.
4. Kjør deretter bordet i øverste posisjon, og sjekk at bevegelsen er jevn og kontrollert.
Hvis bordet har skråstilt bordplate
7. Utfør en komplett skråstilling av bordplaten. Sjekk at bevegelsen er jevn og kontrollert.

Når alle punkter over er kontrollert, kan bordet tas i bruk.
Se også "Sikker bruk" i punkt 8.

8. Sikker bruk

- VISION High-Low må kun brukes av personer som har lest og forstått denne brukerveiledningen.
- VISION Higj-Low er et aktivitetsbord og må ikke benyttes som løftebord eller som personløfter.
- Bordet må ikke brukes på en måte som innebærer risiko for skade på personer eller eiendom. Den som bruker bordet har ansvaret for at ingen kommer til skade.
- Sørg for at det er tilstrekkelig med plass over og under bordet til at det kan justeres i høyden.
- Bordet må ikke brukes hvis det er oppstått feil eller skade.
- Overbelast ikke bordet og sørg for at belastningsfordelingen er korrekt.
- Ved inspeksjoner, service eller reparasjoner skal bordet ikke være belastet.
- Enhver forandring, som kan påvirke bordets virkemåte eller oppbygning, er ikke tillatt.
- Installasjon, service og reparasjoner må kun utføres av kompetent personale.
- Kun originale reservedeler fra Ropox skal benyttes ved utskifting av deler. Benyttes andre reservedeler kan garantien oppheves.

9. Rengjøring/ vedlikehold

9.1 Rengjøring av understellet

Understellet kan tørkes med en oppvridd klut med lunkent vann og alminnelig rengjøringsmiddel. Det er ikke tillatt å benytte etsende/ slipende væsker eller slipende kluter, børster og svamper.

Etter rengjøring skal understellet tørkes.

9.2 Rengjøring av bordplate, laminat

Laminatplaten rengjøres med en bløt klut godt oppvridd i varmt vann evt. tilsatt flytende oppvaskmiddel uten sulfat, da dette med tiden gir en fettete overflate. Flekker som ikke lar seg fjerne med vann, kan ofte fjernes med en blanding av like deler klorin og vann eller med aceton. Ved bruk av disse rengjøringsmidler må det sørges for utlufting. Merk også at understellet ikke tåler berøring med disse midler.

Flekker etter sprit tusj fjernes ved hjelp av alminnelig husholdningssprit. Blyantskrift fjernes ved hjelp av et mykt viskelær. Ved tvil vedrørende andre flekker, prøv først på et ikke synlig sted, idet visse produkter kan skade laminatet, f.eks. svovlsyre etc. Visse kjemikalier, blekk og sterkt fargende fruktsafer kan, hvis det sitter på platen i lengere tid, gi misfarging, fordi fargepigmentene binder seg til overflaten.

Bruk aldri stålull, skurepulver og lignende slipende materialer, eller rengjøringsmidler som etterlater en hinne på overflaten.

Etter hver rengjøring anbefales det å vaske av med en klut oppvridd i rent vann, og deretter tørke av med en tørr klut.

9.3 Vedlikehold



Inspeksjoner, service og reparasjoner skal utføres av kompetent personale

Bordet er vedlikeholdsfritt. Smøring av bevegelige deler er foretatt for bordets levetid. Av sikkerhetsmessige og driftsmessige årsaker anbefaler vi et årlig ettersyn av bordet:

- Kontrollér at alle skruer er festet.
- Kontrollér at bordet kan bevege seg fritt og uhindret fra nederste til øverste posisjon uten problemer.

Kun originale reservedeler fra Ropox skal benyttes ved utskifting av deler. Benyttes andre reservedeler kan garantien oppheves.

10. Feilsøking

10.1 Bordet virker løst eller ustabil

- Skruene som holder bordet sammen, er ikke festet ordentlig.
- Fest alle bordets skruer, se monteringsveiledningen.

10.2 Bordet kan ikke justeres i høyden/skråstilling (oppleves som tungt å justere)

- Sjekk at det ikke er belastning på bordet.
- Sjekk bordet for fysisk overbelastning eller fysiske skader.



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.dk

Forhandler i Norge:



handicare

Telefon 03250

www.handicare.no