


11. Styreboks R-net

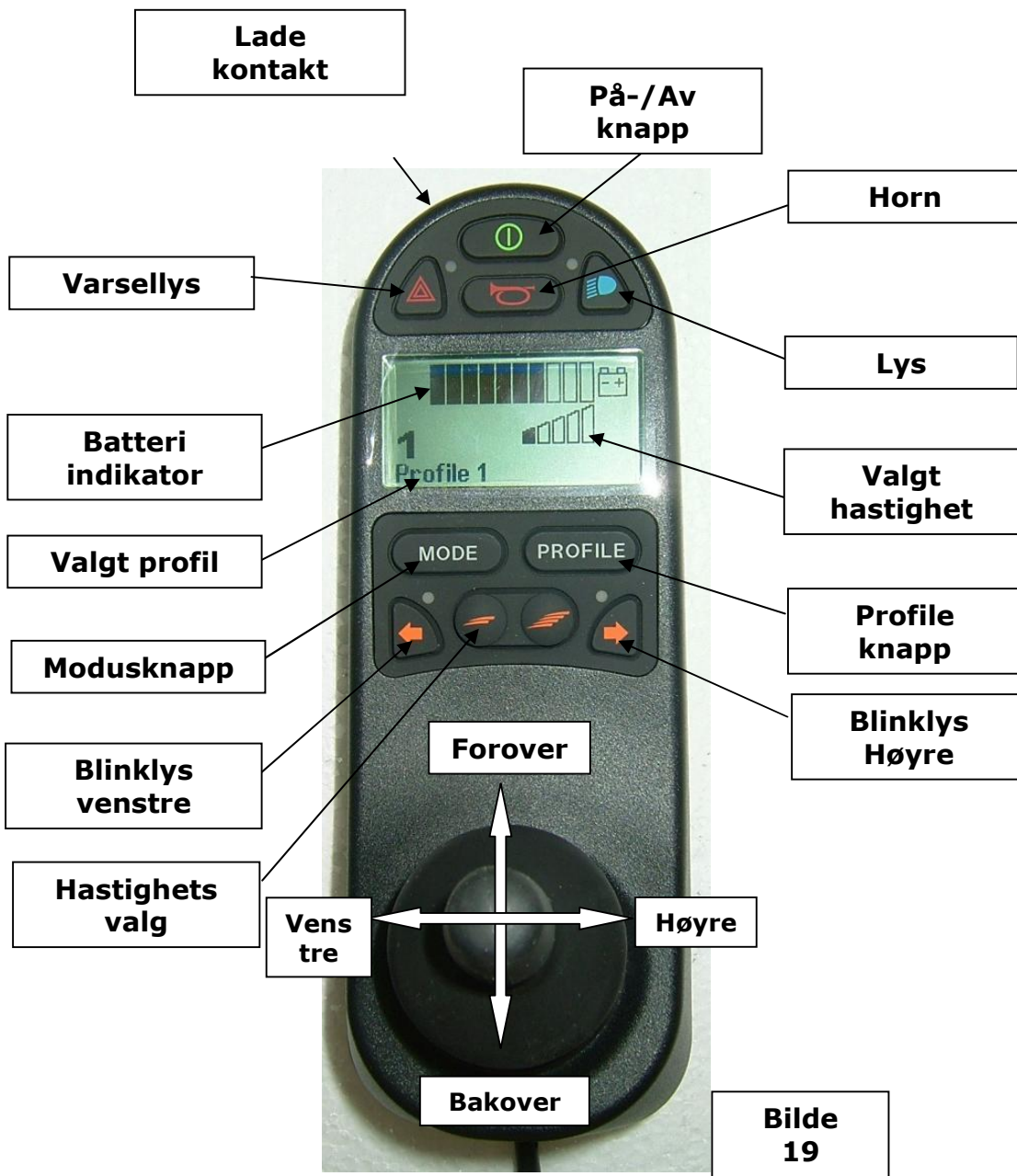

Advarsler:

- Unngå å slå på styreboksen og spesielt joysticken.
- Vær forsiktig så du ikke kjører styreboksen inn i hindringer.
- Påse at kablene ikke skades.
- Ikke la styreboksen bli fuktig eller tilsølt med mat eller drikkevarer. Hvis den blir fuktig eller tilsølt, må du rengjøre den så raskt som mulig.
- Rengjør alltid styreboksen med en klut fuktet i utvannet rensemiddel. Bruk aldri slipemidler eller spritbaserte rensemidler.

11.1. Sikkerhetsnøkkel



20

En sikkerhetsfunksjon er bygd inn i LEVO combi til å låse joystick-modulen for å forhindre uautorisert bruk.

Låsing: Trykk på On/Off-knappen i 2 sekunder, til du hører et pip. Skyv styrespaken forover til du hører et pip. Deretter flytter du styrespaken bakover til du hører et nytt pip. Rullestolen er nå låst. Rullestolen kan nå ikke kjøres og ståfunksjon eller andre funksjoner er deaktivert.

Låse opp: Trykk på På/Av-bryter, og en lås vises på skjermen. Skyv styrespaken fremover til du hører et pip. Deretter flytter du styrespaken bakover til du hører et pip.

Rullestolen kan nå kjøres og ståfunksjonen og andre funksjoner, er aktivert igjen.

11.2. På / Av bryter

Trykk en gang på bryteren for å slå den på, og et nytt trykk for å slå den av igjen. (Se bilde 19).

11.3. Batteriindikator

Batteriindikatoren lyser når styreboksen er slått på. (se bilde 19). Indikatoren viser deg hvor mye strøm det er igjen på batteriene. (Se også kapittel 16.1 "lading av batteriene"). Den angir også eventuelle feil. Du finner flere detaljer i kapittel 22.

11.4. Joystick

Med joysticken styrer du rullestolens retning og hastighet. Den brukes også til å velge ulike modusfunksjoner (se bilde 19).

Skyv joysticken forover når du skal kjøre forover. Jo lenger du skyver den fra midtstilling, desto raskere vil rullestolen gå. Når du slipper joysticken, vil rullestolen stoppe og aktivere bremsene.

Dra joysticken bakover for å kjøre bakover. Når du skyver joysticken til høyre, vil rullestolen svinge til høyre. Når du skyver joysticken til venstre, vil rullestolen svinge til venstre.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du velger de ulike modusfunksjonene, kan du se kapittel 11.6

11.5. Hastighetsvalg

Displayet viser gjeldende hastighetsinnstilling for rullestolen. Det er fem hastighetsinnstillinger. Én lampe lyser ved laveste hastighet, og fem lamper lyser for raskeste hastighet.

Du endrer hastighet når rullestolen har stoppet ved å trykke én gang på modusknappen (MODE) og deretter føre joysticken til høyre for øke hastigheten (flere lamper lyser) eller til venstre for å redusere hastigheten (færre lamper lyser).

Du kan også endre hastigheten mens du kjører ved å trykke på modusknappen (MODE). Hastigheten vil da øke med ett trinn. Du kan øke til maksimal hastighet ved å trykke flere ganger på modusknappen (MODE) til alle de fem lampene lyser. Hvis du trykker enda en gang på modusknappen (MODE), vil rullestolen automatisk gå over til laveste hastighet.

Den maksimale hastigheten er 10/8/6 km/t. Den laveste kjørehastigheten (én lampe lyser) er ca. 40 % av høyeste hastighet.

Av sikkerhetsårsaker anbefaler vi at du endrer hastighet når rullestolen står stille.


11.6. Modusfunksjoner

Ståfunksjon (standard)



21

LEVO combi er utstyrt med ståfunksjon på sete og rygg som lar brukeren få en best mulig og komplett god ståstilling (Se bilde 21).

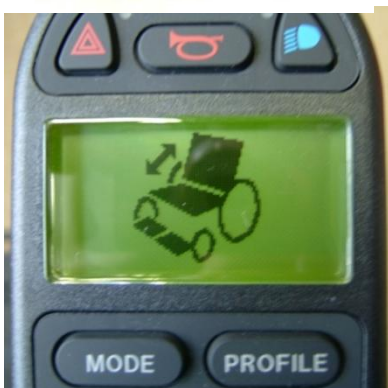

21b

For å betjene ståfunksjonen, med rullestolen stillestående, trykk MODE knappen (se bilde 19) inntil en rød indikator lys tennes på rullestolsymbolet. Skyv joystick til venstre eller høyre side inntil indikatorlyset er på setet og på ryggen på rullestolsymbolet. På denne måten velger du funksjonen for ståfunksjon.

For å heve sete, skyv joysticken fremover. For å senke sete, skyv joysticken bakover. For å stoppe i en valgt posisjon, slipp joystick pinnen. For å komme opp i full ståposisjon, skyv joystick forover til mekanismen stopper automatisk av seg selv. For å senke sete igjen, bare skyv joystick bakover mot deg selv.

Seteløft



LEVO combi leveres med en seteløft som hever setet 15 cm (se bilde 22).

Med rullestolen stoppet betjener du seteløften med modusknappen (MODE) (se bilde 19) til det røde lyset tennes i setesymbolet. På denne måten velger du modusen for seteløften. Når indikatorlampen lyser i setesymbolet, er seteløften aktivert.



Du hever setet ved å skyve joysticken forover. Du senker setet ved å dra joysticken bakover. Du kan stoppe i en hvilken som helst sittehøyde ved å slippe joysticken. For å sitte så høyt som mulig skyver du joysticken forover til mekanismen automatisk slår seg av. Du senker setet igjen ved å føre joysticken mot deg.

Hvile- og liggestilling



LEVO combi leveres med hvile- og liggefunksjon. Når du aktiverer denne funksjonen, vil ryggen lenes bakover samtidig som fotplaten løftes opp (se bilde 23).

Du betjener hvile- og liggemekanismen ved å trykke på modusknappen (MODE) (se bilde 19) til det røde lyset tennes i rullestolsymbolet. Vipp joysticken til venstre eller høyre til det bare lyser rødt i ryggsymbolet. På denne måten velger du modusen for hvile- og liggefunksjonen.



Du lener ryggen bakover og løfter fotplaten ved å føre joysticken bakover. For å komme tilbake i sittestilling eller i en mer oppreist stilling, skyver du bare joysticken forover. Du kan stoppe i en hvilken som helst stilling ved å slippe joysticken. Hvis du vil legge deg helt ned i horisontal stilling (se bilde 24; inkludert valgfri vipp av armlener), fører du joysticken bakover til mekanismen automatisk slår seg av.



For å sette deg i oppreist stilling igjen, skyver du bare joysticken forover.

(Disse handlingene bør kun utføres når rullestolen står stille.)

For å oppnå enkel forflytning i liggende stilling (f.eks. fra seng til rullestol eller omvendt) bruker du seteløften til å sette rullestolen i samme høyde som det du skal forflytte deg til eller fra.

Liggende til stående



Med denne tilleggsfunksjonen kan du komme deg fra liggende til stående stilling. Du aktiverer denne funksjonen ved å trykke på MODE knappen en gang. (se bilde 19). (se bilde 19) til det røde lyset tennes i rullestolsymbolet. Skyv joysticken noen ganger til venstre eller høyre til du har bilde 25 (til venstre) på displayet. På denne måten kommer du deg opp fra liggende til stående stilling.



Når du skal komme deg i stående stilling, løfter du ryggen og sete samtidig ved å skyve joysticken forover. Når du skal komme deg i liggende stilling eller en mindre oppreist stilling, fører du bare joysticken bakover. Du kan når som helst stoppe bevegelsen ved å slippe joysticken. For å komme i helt oppreist stilling (se bilde 21) skyver du joysticken forover til mekanismen automatisk slår seg av. For å komme i liggende stilling igjen, fører du bare joysticken bakover. (Disse handlingene bør kun utføres når rullestolen står stille.)

Sete tilt



Med valgfri setetilt (bare mulig med seteløft eller på modeller med tilstrekkelig plass mellom seteplate og batterideksel) kan du senke seteplaten i bakkant for å få en mer stabil stilling under kjøring (se bilde 26).

Gjør følgende for å tilte setet. Trykk på modusknappen (MODE) til det røde lyset tennes i setesymbolet. Nå er seteløften aktivert. Skyv joysticken forover til maksimal setehøyde er nådd og mekanismen automatisk slår seg av. Deretter fører du joysticken til venstre eller høyre til det lyser i sete- og ryggsymbolene. Når du så fører joysticken bakover, vil seteplaten senke seg i bakkant. Slipp joysticken når du føler du har oppnådd en god

sittestilling. Denne mekanismen slår seg automatisk av når seteplaten berører batteridekselet. Setet har da nådd sin maksimale tiltevkinkel.

Hvilestilling med setetilt



Denne hvilestillingen er svært komfortabel når du skal lese, lytte til musikk, se på fjernsyn eller bare slappe av. Denne funksjonen kan bare betjenes når rullestolen har seteløft og funksjon for bakoverlening av rygg (når setehøyden er høy, er funksjonen begrenset uten seteløften). (Se bilde 27.)

En komfortabel setetilt er utgangsposisjonen for en god hvilestilling. Se kapitlet "Setetilt" hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du tilter setet. Sjekk at rullestolsymbolet lyser rødt. Hvis det ikke lyser rødt, trykker du på modusknappen (MODE) (se bilde 19) til den røde lampen lyser i setesymbolet. Før joysticken til venstre eller høyre til det bare er ryggsymbolet som lyser. På denne måten velger du bakoverlening av ryggen. Vipp joysticken bakover for å komme i hvilestilling. Når du sitter i en komfortabel sittestilling, slipper du joysticken.

11.7. Lys

Lysutstyret på **LEVO combi** inkluderer to hvite frontlys og to røde baklys i tillegg til fire blinklys.



Lys

Trykk på lysbryteren (se bilde 19) når du kjører under dårlige lysforhold.

Viktig! Vær klar over at bruk av lys påvirker batterikapasiteten.

Blinklys

Trykk på høyre blinklysbytter når du skal svinge til høyre. Etter at svingen er utført, ta av blinklyset ved å trykke på knappen på nytt. (se bilde til venstre)

Trykk på venstre knapp når du skal svinge til venstre. Etter at svingen er utført, avslutt blinkingen med å trykke på venstre knapp en gang til. (se bilde til venstre)

Varsellys

Trykk på knappen for å aktivere varselblinker (se bilde til venstre) når du må parkere på fareutsatte steder. Alle 4 blinklysene vil da blinke samtidig. Kontroller med jevne mellomrom at lysene virker som de skal.