

Kjørerampe AeroLight Xtra

Art.nr. AX6, AX9, AX12, AX15, AX18, AX21, AX24


Bruksanvisning

Før bruk

- Fjern all emballasje og kontroller at ingen skader har oppstått på skinnen under transporten.
- Les nøye igjennom bruksanvisningen og merknadene før du bruker skinnene.
- Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
- På hver skinne finnes et merke som angir hvilken maksimal last rampen får belastes.

Plassering

- Bruk begge håndtakene når du bærer rampen.
- Sørg for at underlaget er fast og stabilt (både oppe og nede).
- Kontroller at rampen er lang nok til å dekke hindringen. Rampen er designet for å håndtere stigninger mellom 1:4 og 1:20 (avhengig av sikkerhetsaspekter og brukerkrav).
- Plasser rampen med "leppen" hvilende stabilt på det øvre underlaget og med hengslet sentralt på den valgte retningen (bilde A). "Leppens" unike design holder rampen på plass.
- Åpne rampen (bilde B og C).
- Om nødvendig bruk håndtakene til å åpne rampen (bilde D).
- Sørg for at rampen ikke flyttes under bruk og kontroller at rampen ligger stødig hver gang den benyttes.

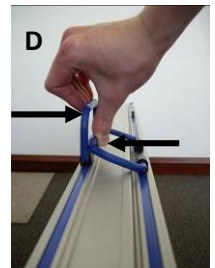

Vedlikehold og rengjøring

- Dersom rampen blir skadet eller svært glatt skal den ikke benyttes (kontakt leverandøren).
- Rampene kan rengjøres med alle normalt tilgjengelige rengjøringsmiddel og lufttørkes før bruk.