



Instruktion för Repose Hälavlastning

Fyllning

1. Ta bort Repose från röret och sätt ihop de båda rören så att de formar en pump.
2. Anslut pumpens ventil till ventilen på Repose - Tryck fast den.
3. Blås upp Repose tills du hör luftutsläpp från pumpventilen.
4. Täck ventilen på Repose med hjälp av den solida änden av den 8-formade ventilhatten.
5. Vänd på Repose med ventilen riktad från patienten.
6. Fäst Repose runt benet med magnetspannet.

OBS! Kontrollera Repose dagligen för att säkerställa korrekt luftnivå. Vid osäkerhet tag av Repose och upprepa enligt punkt 1 – 6.

Tömning på luft

7. För in den öppna änden av den 8-formade ventilhatten i Repose ventil.
- Nu kan luften lämna ventilen så att Repose töms.
8. Rulla upp Repose med början från punkten längst bort från ventilen. Fortsätt tills all luft har tömts.
9. Rengör Repose och låt den torka. Förvara Repose i pumpröret.
10. Passa ihop de båda rören och rotera det yttre röret tills det klickar fast.

Begränsningar för användning

Repose lämpar sig inte i följande fall:

- Repose lämpar sig inte för personer som inte får fullständig hälavlastning eller när den inte passar foten/benet pga exempelvis deformitet.

Försiktighetsåtgärder

- Vid försämrad hudstatus bör klinisk expertis rådfrågas. Avbryt användningen om detta rekommenderas.
- Undvik direktkontakt med vassa föremål.
- Förvaras oåtkomligt i luftfyllt skick från spädbarn och småbarn
- Förvaras oåtkomligt från husdjur

REPOSE KAN RENGÖRAS OCH ÅTERANVÄNDAS



Repose kan rengöras med tvål eller rengöringsmedel och vatten och kan desinficeras enligt reglerna om infektionskontroll för standardmadrasser. Alkohol & fenolbaserade desinficeringsmedel ska inte användas. Låt den torka före användning eller förvaring.

Repose tillhandahålls med en tillverkningsgaranti på 12 månader från avsändningsdatum.

VIKTIGT MEDDELANDE

Kontrollera produkten dagligen för att säkerställa korrekt luftnivå. Vid ev. osäkerhet tag av Repose och upprepa fyllningen av luft enligt punkt 1-6.

Förvaras på avstånd från direkt värme och vassa föremål.