

LECKEY[®]

Squiggles Stander
Brukermanual

~~LECKEY~~
Squiggles





Squiggles Stander er designet for å tilby den støtte barnet trenger i en oppreist, fremoverlent eller bakoverlent, stående stilling. Squiggles Stander bygges opp av moduler. Det kan velges mellom understell med føtter, understell med svinghjul eller understell med drivhjul. Stativet er utviklet for bruk på skolen eller hjemmet. Denne brukerveiledningen viser hvor raskt, sikkert og lett det er å bruke funksjonene på Squiggles Stander. Manualen for sikkerhet og vedlikehold vill sikre at brukeren kan ha glede av produktet lenge.



Innhold

- 01 Tilsiktet bruk
- 02 Samsvarserklæring
- 03 Garantibetingelser
- 04 Skriftlig oversikt over endringer og inspeksjoner utført på produktet
- 05 Skriftlig oversikt over de personer som er opplært i korrekt bruk av produktet
- 06 Sikkerhetsinformasjon
- 07 Hvordan pakke ut og montere produktet
- 08 Tilpassing av putene
- 09 Tilpassing av funksjonene
- 10 Hyppige tilpassinger i daglig bruk
- 11 Anvisning for vask og vedlikehold
- 12 Daglig ettersyn
- 13 Årlig ettersyn
- 14 Gjenbruk av Leckey produkter
- 15 Service
- 16 Teknisk informasjon

1. Tilsiktet bruk

Squiggles Stander er en stå-ramme utviklet for barn med funksjonshindre i alderen 1-5 år til bruk hjemme eller i klasserommet. Stå-rammen kan brukes enten på et understell med føtter, med svinghjul eller med drivhjul. Understellet med føtter og understellet med svinghjul er utviklet til bruk inne på avrettede flater. Understellet med drivhjul er utviklet for bruk både innendørs og utendørs. Maks. brukervekt, uavhengig av hvilket understell man velger, er 22 kg.

2. Samsvarserklæring

James Leckey Design Ltd som produsent med eneansvar deklarerer at Squiggles Stander samsvarer med kravene i 93/42/EF, retningslinjene for det Medisinske Direktivet 2002 og EN 12182 Tekniske hjelpemidler for handikappede. Produktet oppfyller generelle krav og testmetoder.

3. Garantibetingelser

Garantien gjelder bare når produktet brukes i de omgivelser og til de formål det er laget for, og at alle produsentens anbefalinger følges (se også generelle betingelser for salg, levering og betaling). En to års garanti gis på alle produkter og deler produsert av Leckey.

4. Skriftlig oversikt over endringer og inspeksjoner utført på produktet

Dette Leckey produktet er klassifisert som et medisinsk utstyr, klasse 1 og skal derfor kun tilbys, tilpasses og klargjøres for gjenbruk av en teknisk kompetent person som er opplært i å bruke produktet. Leckey anbefaler at det fortløpende gjøres en skriftlig nedtegnelse av alle tilpassinger, ettersyn ved gjenbruk og årlige ettersyn på produktet.

5. Skriftlig oversikt over de personer som er opplært i korrekt bruk av produktet

Dette Leckey produktet er klassifisert som et medisinsk utstyr, klasse 1, og Leckey anbefaler derfor at foreldre, lærere og andre omsorgspersoner som benytter produktet skal gjøres oppmerksomme på følgende kapitler i denne brukermanualen, av en teknisk kyndig person:

Kapittel 6

Sikkerhetsinformasjon

Kapittel 10

Hyppige tilpassinger i daglig bruk

Kapittel 11

Anvisninger for vask og vedlikehold

Kapittel 12

Daglig ettersyn

Leckey anbefaler at det fortløpende gjøres en skriftlig nedtegnelse av de personer som er opplært i korrekt bruk av produktet.

6 Sikkerhetsinformasjon



6.1 Les alltid brukermanualen før produktet tas i bruk.



6.2 Brukeren skal aldri forlates uten tilsyn under benyttelse av produkter fra Leckey.



6.3 Kun komponenter godkjent av Leckey skal benyttes på produktet. Produktet skal ikke endres på noen måte. Unnlattelse av å følge anvisningene i brukermanualen kan medføre fare for bruker eller hjelper og gjøre at garantien på produktet oppheves.



6.4 Hvis det oppstår tvil om hvordan produktet skal brukes, eller hvis noen del av produktet ikke virker, må bruken av produktet opphøre og kundeservice hos Handicare eller den lokale distributør kontaktes så raskt som mulig.



6.5 Utfør alle tilpassinger av posisjonering og sikre at disse er tilstrekkelig festet før produktet brukes av et barn. Noen tilpassinger kan kreve bruk av et verktøy som følger med hvert produkt. Plasser verktøy utenfor barns rekkevidde.



6.6 Av sikkerhetsårsaker og for å sikre rett posisjonering skal bekken- og bryststøtten alltid sjekkes før brukeren plasseres i Squiggles Stander.



6.7 Sjekk at alle hjul er låst og vendt bort fra understellet når dette står stille, idet det øker stabiliteten. Dette er spesielt viktig når produktet er i hvileposisjon.



6.8 Sjekk at hendelen for vinkeljustering (mobilt understell) eller låseboltene (fast understell og mobilt understell med drivhjul) er låst og ikke kan justeres ved et uhell, spesielt når produktet brukes av et barn.



6.9 Når Squiggles stander er montert på understellet med svinghjul, anbefales det ikke å flytte produktet over ujevne overflater når det brukes av et barn. Når man bruker understellet med føtter, må barnet løftes ut av produktet før dette flyttes. Forsiktighet og oppmerksomhet skal utvise når barnet plasseres i og løftes ut av produktet.



6.10 Produktet skal ikke plasseres på en hellende flate, med en helning som er større enn 5°. Hjulene må alltid låses.



6.11 Selv om det svingbare understellet har hjul, så er det ikke et mobilitetshjelpemiddel. Brukeren skal alltid plasseres i en oppreist posisjon før produktet flyttes. Plasser en hånd på baksiden av bryststøtten når produktet flyttes



6.12. Produktet er sammensatt av deler som kan innebære fare for kvelning for små barn. Sørg for at låsehendler og bolter som er innenfor barns rekkevidde, er låst til enhver tid.



6.13 Produkter fra Leckey er i overensstemmelse med sikkerhetsbestemmelsene i EN 12182. Fordi produktet inneholder plastikk komponenter, skal det derfor holdes unna alle direkte varmekilder inkludert åpen flamme, sigaretter, elektriske og gassdrevne varmeovner.



6.14 Gjenstander som er varmere enn 40° må ikke plasseres på bordet.



6.15 Vask produktet jevnlig. Benytt ikke vaskemidler med slipeeffekt. Gjennomfør ettersyn med jevne mellomrom for å sikre at produktet fungerer som det skal.



6.16 Produktet er laget for innendørs bruk (med unntak av når det benyttes med understellet med drivhjul) og når det ikke er i bruk skal det lagres på et tørt sted uten ekstreme temperaturer. Produktet fungerer best innenfor temperaturintervallet +5 til +40°C.

Hvordan pakke ut og montere produktet

7

7.1 Folde sammen og slå opp understellet med svinghjul

Understellet med svingbare hjul kan lett foldes sammen for lagring eller transport. For å slå det opp igjen, utløs hendlene (A) ved å presse dem sammen, roter de bakre rørene inntil hendlene går i lås. For å folde understellet sammen utføres samme prosedyre motsatt vei.



Stå-rammen må alltid fjernes fra understellet før dette foldes sammen.



Utvis alltid forsiktighet for å unngå at fingre kommer i klem når understellet foldes sammen og slås opp.

7.2 Feste stå-rammen til understellet

Med Squiggles Stander kan brukeren stå i både fremoverlent, bakoverlent og rett stilling, og det kan velges mellom tre ulike understell; Understell med føtter, understell med svinghjul og understell med drivhjul.



7.3 Feste stå-rammen til understellet med svinghjul

Ta tak i bakre del av bryststøtten med en hånd, trekk ut låsepinnen med den andre hånden og skyv den midtre aluminiumsprofilen på stå-rammen ned i braketten på understellet. Slipp låsepinnen, som klikker i lås når aluminiumsprofilen er helt på plass.



Kontroller alltid at låsepinnen er helt låst før barnet plasseres i Squiggles Stander.

7.4 Feste stå-rammen til understellet med føtter

Løs ut låsepinnen på siden av pedalen ved den mottagende braketten på understellet ved å trekke og rotere den 90°. Press pedalen ned og plasser låsedelen i bunnen av den midtre aluminiumsprofilen på stå-rammen helt nede i den mottagende braketten på understellet. Slipp pedalen, og rammen er låst fast til understellet. Aktiver låsepinnen igjen, slik at pedalen ikke kan presses ned ved et uhell.



Kontroller alltid at pedalen er helt låst før barnet plasseres i Squiggles Stander.



7.5 Feste stå-rammen til understellet med drivhjul

Løs ut låsepinnen på siden av pedalen ved den mottagende braketten på understellet ved å trekke og rotere den 90°. Press pedalen ned og plasser låsedelen i bunnen av den midtre aluminiumsprofilen på stå-rammen helt nede i den mottagende braketten på understellet. Slipp pedalen, og rammen er låst fast til understellet. Aktiver låsepinnen igjen, slik at pedalen ikke kan presses ned ved et uhell. Ta deretter tak i bakre del av bryststøtten med en hånd, trekk ut låsepinnen med den andre hånden og skyv den midtre aluminiumsprofilen på stå-rammen ned i braketten på understellet. Slipp låsepinnen, som klikker i lås når aluminiumsprofilen er helt på plass.



Kontroller alltid at låsepinnen er helt låst før barnet plasseres i Squiggles Stander.




7.6 Feste fjæringen på understellet med drivhjul

Start med å feste fjæringen til understellet med drivhjul. Dette gjøres ved å plassere hullene over hverandre, sett de fire skruene i hullene, og deretter skiver og muttere på skruene. Fest skruene slik at de går igjennom mutteren.

Sett til slutt på plast dekselet og juster til en høyde som passer til størrelsen på drivhjulene. 27" drivhjul: Bunnhullet (B) plasseres over topphullet (C) i fjæringen, skruen settes i hullet og festes med mutteren på den andre siden. 24" drivhjul: Bunnhullet (A) plasseres over topphullet (C) i fjæringen, skruen settes i hullet og festes med mutteren på den andre siden.




Gjenta prosessen på motsatt side for det andre hjulet.

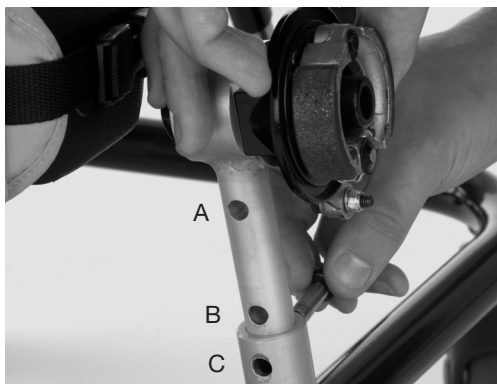

7.7 Montering av hjulbraketten på understellet med drivhjul

Plasser skivene på mutrene, hullene over hverandre og skruene i hullene. Fest skruene. Plasser det blanke metallrøret i rett posisjon, den sorte platen på utsiden og den sorte platen på mutrene på skruene. Fest skruene. Fest skruene.

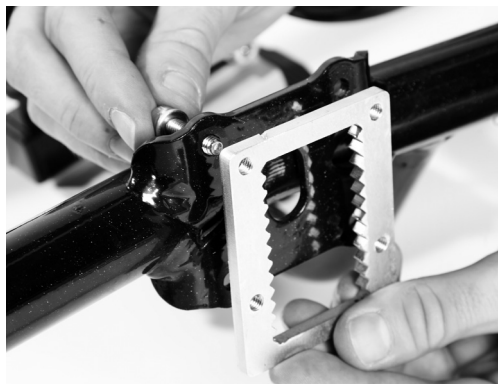

Plasser plastdekselet over det blanke metallrøret, og monter deretter bremsene. Kontroller at skruene er tilstrekkelig festet. Gjenta prosessen på den andre siden.



7.8 Montering av drivhjul

Bremsene må være frigjort for å feste hjulene på understellet. Løft understellet litt opp over bakken mens den sorte knappen i midten av hjulet trykkes inn. Fortsett å holde den sorte knappen inne, sett hjulet på understellet og slipp den sorte knappen. Samme prosess gjentas i motsatt rekkefølge for å ta hjulene av.



Kontroller alltid at hjulene er låst fast til understellet.



7.9 Montering av nakkestøtte

Start med å fjerne plastendeproppen på toppen av røret som hodestøtten skal festes i, øverst på stå-stativet. Åpne deretter låsehendelen ved å trykke inn sikkerhetsknappen og vri deretter på hendelen mens sikkerhetsknappen holdes inne. Plasser røret på nakkestøtten i røret øverst på stå-stativet, finn ønsket høyde og fest med låsehendelen.

Dersom Whitmyer Lynx nakkestøtte skal monteres på stativet, benyttes samme metode som beskrevet over, med det tillegg at det metallfargede plastinnlegget inne i røret øverst på stå-rammen fjernes før nakkestøtten monteres.



Produktet inneholder deler som kan utgjøre kvelningsfare for små barn. Sjekk alltid at låsehendler og bolter som er innenfor barns rekkevidde er ordentlig festet til enhver tid.



7.10 Montering av fotsandaler

Ta sandalene ut av emballasjen, løsne stjernerattene (A) på undersiden av sandalene og ta dem av sammen med metall- og plastskivene. Plasser skruene i sporene på fotplatene, skivene på skruene og skru fast stjernerattene. Sørg for at sandalene ikke beveger seg etter at stjernerattene er festet.



7.11 Montering av bordet

Start med å feste armene på bordet til bordbraketten ved å løsne stjernerattet (A), og plassere tannskivene på innsiden av bordbraketten. Gjenta prosessen på den andre siden. Sjekk at armene er plassert parallelt slik at de går inn i mottakerdelen på stå-rammen.



7.12 Montering av deksel til bordet


Dekselet festet til bordet ved at det legges på bordet og trykkes på plass. Samme prosess gjentas i motsatt rekkefølge for å ta dekslet av.

7.13 Montering av bordet på baksiden og forsiden av stå-rammen

Bordet monteres på Squiggles Stander ved å feste armene på bordet i mottakerdelen på stå-rammen. Når bordet er på plass, festes stjernerattene. Utskjæringen i bordet skal alltid være vendt mot barnet. Sørg for at mottakerdelen på stå-rammen alltid er i høyeste posisjon, når bordet skal monteres på baksiden av stå-rammen slik at barnet kan stå i en fremoverlent stilling.



Utvis forsiktighet for å unngå at barnets hender eller armer kommer i klem når bordet monteres på stå-rammen.

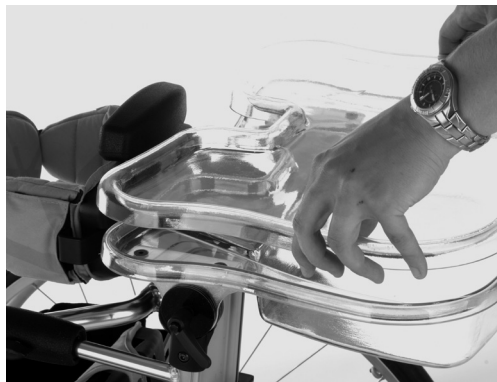


Fremoverlent stilling




7.14 Montering av gripebøyle

Start med å plassere mottakerdelen (D) i sporet på bordet. Fest med stjerneratt (E). Gjenta på den andre siden. Plasser deretter rørene på gripebøylen i mottakerdelene (D) som nå sitter på bordet. Fest med stjerneratt (B).

Bakoverlent stilling

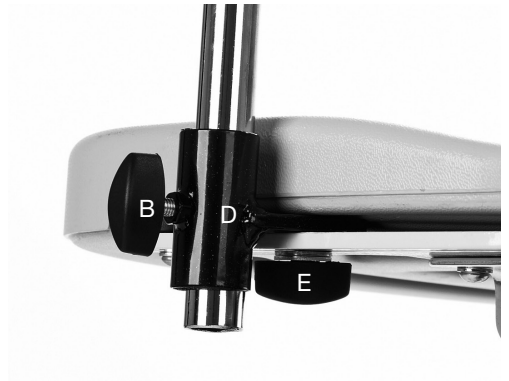


Tilpassing av putene

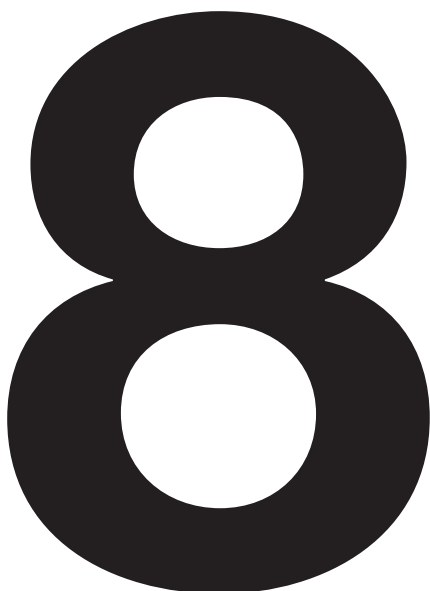


8.1 Bryst- og hofteputer

Plasser puten midt på bryst-/hofteplaten. Fest trykknappen på stoffet til mottakerdelen på bryst/hofteplaten). Legg stoffdelene med velcrobåndet over og under platen og fest velcrodelenene i hverandre.

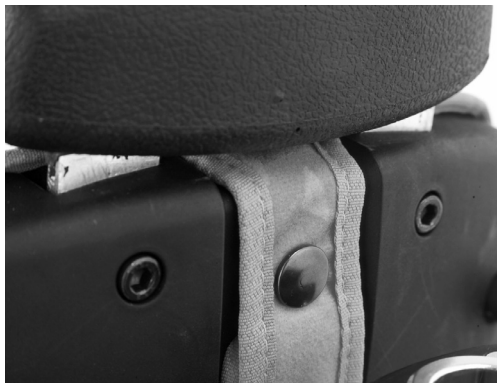


8.2 Sideputer

Sideputene trekkes på plastarmen (de øvre) på stå-rammen med den polstrede siden inn mot midten av stativet, og festes med Velcrobåndene. Husk å trekke plastspennen (A) på armen ut gjennom åpningen som er laget til denne i stoffet i sideputen. Til slutt festes beskyttelsesdelen (B).

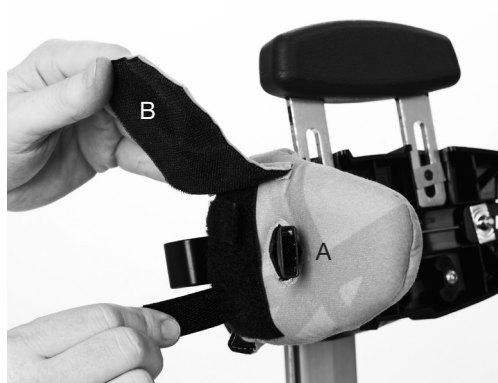

8.3 Bryststøttesele

Bryststøtteselen festes ved å klikke hann delen av plastspennen på selen inn i hunn delen av spennen på sidestøtten.

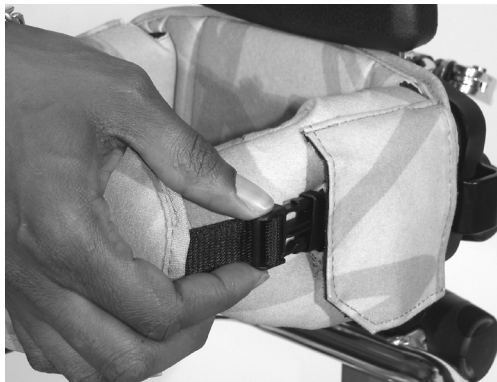

8.4 Bekkensele

Bekkenselen festes ved å trekke selens sider over plastarmene (de nedre) på stå-rammen. Husk å trekke plastspennen på armen ut gjennom åpningen som er laget til denne i stoffet i selen. Fest med Velcro båndene.

Fest så de store Velcrobåndene rundt brukeren.



8.5 Hoftestøttese

Hoftestøttese skal monteres utenpå bekken selen som en ekstra sikkerhet dersom de store Velcrobåndene rundt brukeren blir slitt. Det festes ved å klikke hann delen av plastikkspennen på hoftestøtteselen inn i hunn delen av spennen på sidestøtten.

For å justere trykket åpnes frontpanelet på hoftestøtteselen, båndene justeres til ønsket lengde og frontpanelet lukkes.



8.6 Knestøtteputer

Fest knestøtte putene ved å klikke hann delen av spennen på puten inn i hunn delen av spennen på siden av knestøtten på stå-rammen. Sørg for at åpningen på frontpanelet på puten er plassert nedover som vist.



8.7 Polstret trekk til toppen av stå-rammens midtre aluminiumsprofil

Plasser trekket og fest løkkene rundt tilpassingsskruene.



8.8 Formet nakkestøttepute

For å feste nakkestøtteputen plasseres denne på nakkestøtteplaten, festes med den midtre trykknappen på puten til mottakerdelen på nakkestøtten. Legg stoffdelene med ytterligere to trykknapper over og under platen og fest trykknappene.



8.9 Flat hodestøtte

Hodestøtteputen festes ved å plassere puten midt på hodestøtteplaten, deretter festes den midtre trykknappen til mottakerdelen på nakkestøtten. Legg stoffdelene med ytterligere to trykknapper over og under platen og fest trykknappene.



8.10 Sideputer til den flate hodestøtten

Sideputene trekkes på plastarmen på den flate hodestøtten med den polstrede siden inn mot midten av stativet, og festes med velcrobåndene. Fest beskyttelsesdelen.



Tilpassing av funksjonene

Tilpassing av produktet skal utføres av en teknisk og klinisk kompetent person som er opplært i å bruke produktet. Leckey anbefaler at det fortløpende gjøres en skriftlig nedtegnelse av alle tilpassinger som er gjort av produktet.



9.1 Tilpasse høyden på bryststøtten

Start med å plassere barnet liggende på en matte på gulvet. Mål avstanden mellom barnets føtter og rett under armhulen. Denne avstanden tilsvarer den avstand det skal være mellom bryststøtten og fotplaten.



Tilpass aldri høyden på hovedrammen mens produktet er i bruk.

9.2 Tilpasse høyden på stå-rammen

Høyden på stå-rammen kan tilpasses ved å åpne bolten på baksiden av hovedrammen med det medfølgende verktøyet. Flytt den indre delen til ønsket høyde og fest bolten. En måleskala på den indre delen viser hvilken høyde som er valgt og høyden på de ulike støttene. Det er også en endestopp på den indre delen, når denne når maks. høyde.



9.3 Tilpasse bryst- og hoftestøtten

For å tilpasse bryst- og hoftestøtten roteres tilpassingsskruen (A) med klokken og tilpassingsskruen (B) mot klokken, som vist. Plasser i ønsket høyde og fest skruene. Bryststøtten kan bare justeres i vinkel og i bredde.




Utvis forsiktighet for å unngå at fingre kommer i klem når bryst- og hoftestøtten tilpasses.

9.4 Sidestøtter

Løsne låseknappen (A) for å tilpasse bredden på sidestøtten, og fest ved ønsket bredde. Hvis sidestøttene er festet med en bolt istedenfor en låseknapp, kan disse åpnes med det medfølgende verktøyet.



Utvis forsiktighet for å unngå at fingre kommer i klem når sidestøtten tilpasses.

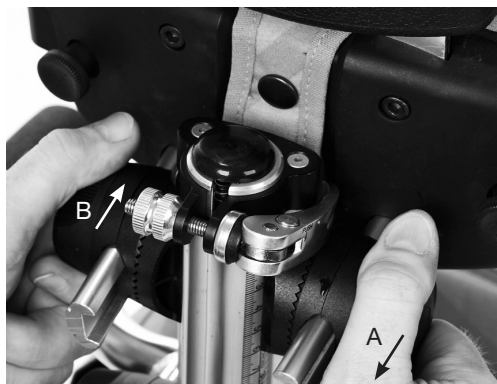

9.5 Tilpassing av bekkenselen

Trekk de store Velcrobåndene rundt brukeren inntil ønsket posisjon er nådd.

9.6 Bryst- og hoftebelte

For å justere bredden på brystbeltet løftes frontdelen opp, båndene tilpasses til ønsket bredde, og frontdelen lukkes igjen.



Sørg for at plastikkspennene er ordentlig lukket når brystbeltet er i bruk.



9.7 Tilpassing av brystbenstøtten

Brystbenstøtten kan heves for å gi mer støtte og hjelpe brukeren til en bedre posisjonering av brystkassen. Dette gjør at bryststøtten kan plasseres lavere, noe som vil gi mer frihet til bevegelse av armene. Støtten tilpasses ved å løsne to skruer på forsiden av brystplaten med det medfølgende verktøyet. Finn deretter ønsket høyde og fest skruene.




Utvis forsiktighet for å unngå at fingre kommer i klem når brystbenstøtten tilpasses.

9.8 Tilpassing av høyde, dybde og vinkel på knestøttene

Hver knestøtte kan tilpasses individuelt. For å tilpasse høyden, dybden og vinkelen på knestøttene åpnes håndskruen (A), ønsket høyde, dybde og vinkel velges, og skruen festes igjen.

For å tilpasse bredden på knestøtten åpnes håndskruen (B), ønsket bredde velges og skruen festes igjen.

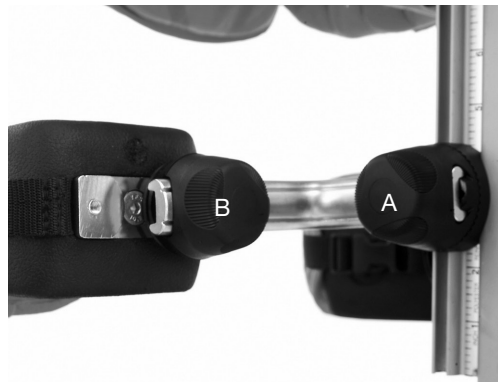

9.9 Kneputer

For å tilpasse kneputene åpnes frontdelen på puten, båndene tilpasses til ønsket lengde og frontdelen lukkes.

Mindre justeringer av knestøttene kan utføres under bruk.

9.10 Tilpassing av flat og formet nakkestøtte

Nakkestøtten skal bare brukes når barnet står i en bakoverlent stilling. For å tilpasse høyden, dybden og vinkelen på den formede nakkestøtten åpnes håndskruene (A), ønsket posisjon velges, og skruene festes igjen.



Utvis forsiktighet for å unngå at fingre kommer i klem når nakkestøtten tilpasses.



9.11 Tilpassing av sidestøttene på den flate nakkestøtten

For å justere bredden løsnes låseskruen (A), sidestøtten plasseres slik at ønsket bredde oppnås, og så festes låseskruen igjen.



9.12 Posisjonering av sandalene

Løsne stjernerattet (A) under fotplaten, velg ønsket posisjon og fest stjernerattet igjen. For å plassere brukerens føtter i sandalene benyttes Velcrobåndene for tær og ankler.



9.13 Tilpassing av vinkelen på fotplaten

Løsne eller feste unbrakbolten for å finne ønsket vinkel.

9.14 Konvertering fra bakoverlent til fremoverlent stilling

For å bytte fra bakoverlent til fremoverlent stilling fjernes nakkestøtten, og bordet flyttes slik at utskjæringen vender mot brukeren. Løsne sandalene og snu dem 180°.




9.15 Konvertering fra fremoverlent til bakoverlent stilling

For å bytte fra fremoverlent til bakoverlent stilling monteres nakkestøtten, og bordet flyttes slik at utskjæringen vender mot brukeren. Løsne sandalene og snu dem 180°.

9.16 Tilpasse høyden på bordet i fremoverlent og bakoverlent stilling

Håndskruene for å justere høyden på bordet finnes på begge sider av den midtre aluminiumsprofilen. Roter håndskruen (A) med klokken og håndskruen (B) mot klokken, velg ønsket høyde og fest skruene.

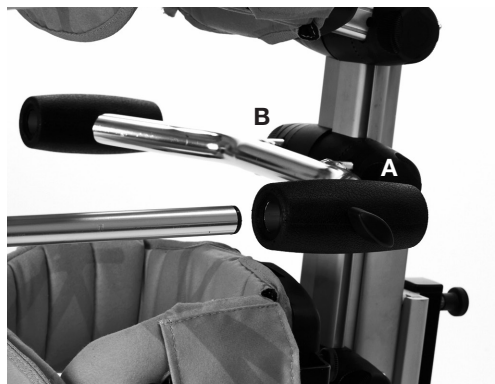

9.17 Tilpasse dybden og vinkelen på bordet

Løsne justeringskruen (C) på begge sider. Plasser rørene i mottakerdelene slik at ønsket dybde oppnås. Fest skruene. For å tilpasse vinkelen på bordet løsnes håndskruen (D) på begge sider av bordet, bordet plasseres i ønsket vinkel og skruene festes.




Bordet skal ikke benyttes for å styre eller dytte Squiggles Stander.



Gjenstander som er varmere enn 40°C må ikke plasseres på bordet.



Bordet skal bare benyttes av brukeren. Ingen må lene seg på bordet eller plassere tunge gjenstander som veier mer enn 8 kg på det.

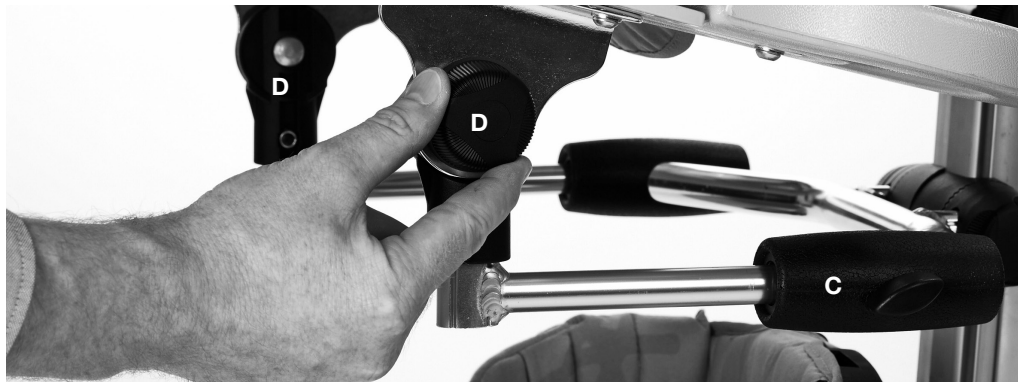

Hyppige tilpassinger i daglig bruk

Foreldre og hjelpere bør opplæres i hvordan hyppige tilpassinger i daglig bruk kan utføres, og gjøres oppmerksomme på sikkerhets sjekken i kapittel 6 av en teknisk og klinisk kompetent person som er opplært i bruken av produktet. Leckey anbefaler at det gjøres en fortløpende nedtegnelse av de personer som er opplært i bruken av produktet.

10

10.1 Forflytning av brukeren inn i og ut av stå-rammen

Utfør det daglige ettersynet beskrevet i kapittel 12 før brukeren plasseres i stå-rammen.

Lås hjulene og sørg for at de vender utover fra understellet for maksimal stabilitet på produktet, før brukeren plasseres i stå-rammen. Sørg for at båndene på bryst- og hoftebelter og på sandalene er åpne og ikke i veien når brukeren skal plasseres i stå-rammen.

Vinkle stå-rammen til en liggende posisjon før brukeren plasseres i stå-rammen, dersom bakoverlent posisjon er ønsket. Dette gjør det enkelt på tilpasse puter og bånd, fordi brukeren ligger på ryggen.



Sjekk alltid beltene før bruk.



10.2 Bryst- og hoftebelte


Åpne spennen på den ene siden, la beltet sitte i spennen på den andre siden. Gjenta prosessen når brukeren skal plasseres i stå-rammen.



Sjekk alltid bryst- og hoftebeltet før andre justeringer foretas.



Sjekk alltid at spennene er ordentlig låst.

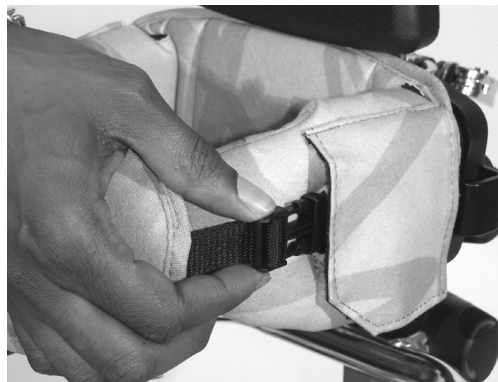

10.3 Kneputer

For å fjerne kneputene, åpnes spennen på den ene siden. La beltet sitte i spennen på den andre siden. Gjenta prosessen når brukeren skal plasseres i stå-rammen.



Sjekk alltid at spennene er ordentlig låst.

10.4 Sandaler

For å plassere brukerens føtter i sandalene, festes Velcro båndene slik at foten holdes på plass. Båndene plasseres over vristen og over tærne.



Hvis barnet har på seg sandaler eller lett fottøy, må båndene på sandalene sjekkes jevnlig for å unngå irritasjon av huden.



10.5 Tilpasse høyden på bordet i fremoverlent og bakoverlent stilling

Håndskruene for å justere høyden på bordet finnes på begge sider av den midtre aluminiumsprofilen. Roter håndskruen (A) med klokken og håndskruen (B) mot klokken, velg ønsket høyde og fest skruene.



10.6 Tilpasse dybden og vinkelen på bordet

Løsne justeringsskruen (C) på begge sider. Plasser rørene i mottakerdelene slik at ønsket dybde oppnås. Fest skruene. For å tilpasse vinkelen på bordet løsnes håndskruen (D) på begge sider av bordet, bordet plasseres i ønsket vinkel og skruene festes.



Bordet skal ikke benyttes for å styre eller dytte Squiggles Stander.



Gjenstander som er varmere enn 40°C må ikke plasseres på bordet.



Bordet skal bare benyttes av brukeren. Ingen må lene seg på bordet eller plassere tunge gjenstander som veier mer enn 8 kg på det.



10.7 Justering av gripebøylen

For å justere dybden på gripebøylen løsnes skruen (E), bøylen stilles inn i ønsket dybde og skruen festes.

For å justere høyden på gripebøylen løsnes skruen (F), bøylen stilles inn i ønsket høyde og skruen festes.


10.8 Vinkeljustering av understellet med drivhjul

Løsne de to plastrattene. Press inn låseknappen og velg ønsket vinkel, slipp låseknappen og fest de to plastrattene.



10.9 Tilpassing av høyden på fjæringen

Hvis det byttes til større drivhjul, må høyden på fjæringen tilpasses. Løsne og fjern bolt og mutter på toppen av fjæringen, flytt hjuladapteret opp til en høyere posisjon, flytt bolten og mutteren og fest ordentlig. Gjenta prosessen for det andre hjulet.

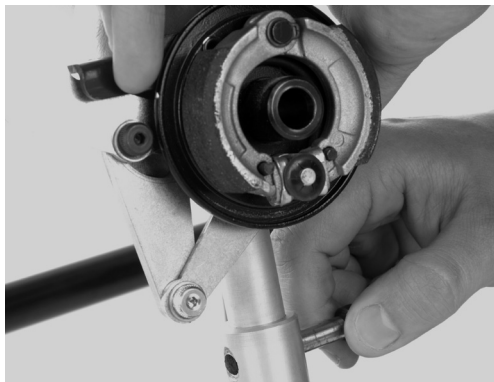

10.10 Montere bremsene

For å låse bremsene til understellet med drivhjul, trykk hendlene ned på en av sidene av understellet. For å låse opp, trykkes hendlene opp.



10.11 Vinkeljustering av understellet med svinghjul

Vinkelen kan justeres mens brukeren er i stå-rammen. Sørg for at brukeren er sikret i rammen ved bruk av bryst og hofteputer. Løs deretter ut låsepinnen ved å trekke i og rotere låsepinnen (A) 90° til den er låst.

Press hendelen (B) ned og plasser stå-rammen i ønsket vinkel. Sørg alltid for at låsepinnen er låst.



Sørg for at bruker og produkt har god avstand til møbler for å hindre kollisjon når vinkelen på stativet justeres.





10.12 Justering av vinkelen på understellet med føtter

Løsne de to plastrattene. Press inn låseknappen og velg ønsket vinkel, slipp låseknappen og fest de to plastrattene.



Juster ikke vinkelen på understellet med føtter mens brukeren er plassert i stå-rammen.

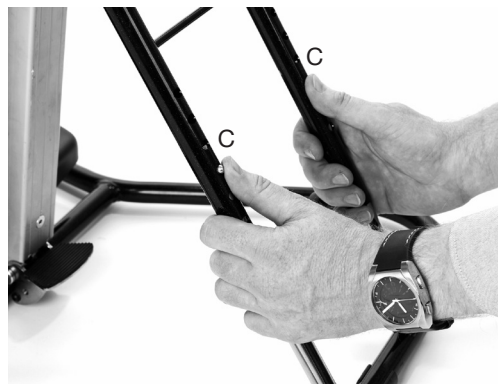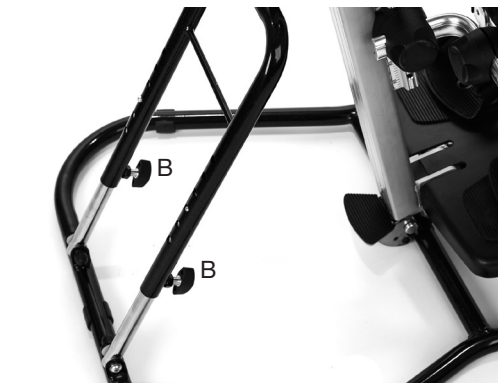

10.13 Folde sammen understellet med føtter for lagring

Understellet med føtter kan foldes flatt sammen når det skal lagres. Fjern stårammen fra understellet. Plasser den ytre rammen i minste posisjon og klikk tverrstangen i den sentrale låsen.



11 Vedlikehold

Når produktet skal vaskes, anbefales det å bruke bare varmt vann og et vaskemiddel uten slipemidler. Bruk ikke organiske løsemidler eller rensemidler.

Polstrede deler og stoff

1. De polstrede delene og stoffet kan vaskes for hånd mens de sitter på produktet. Det anbefales å bruke bare varmt vann og et vaskemiddel uten slipemidler.
2. Den beste vasketeknikken er å tørke av med en fuktig klut og så la stoffet tørke.
3. Flekker må fjernes så raskt som mulig med en absorberende klut, håndkle eller svamp. Rutinemessig vask med såpe, varmt vann og svamp er effektivt for alminnelige flekker og mindre søl. Vær forsiktig med å tilføre for mye vann, idet dette vil få flekker til å spre seg.
4. Antiseptiske vaskemidler kan benyttes på vanskeligere flekker. Disse kan kreve bruk av et mildt løsemiddel som isopropyl alkohol eller mineralsk sprit.
5. Sørg alltid for at produktet er tørt før bruk.

Metall og plastikk komponenter

1. Såpe og vann eller antibakteriell spray kan benyttes til daglig vask.
2. For mer omfattende vask kan en lavtrykks dampvasker benyttes.
3. Bruk ikke løsemidler for å vaske plastikk eller metall komponenter.
4. Sørg alltid for at produktet er tørt før bruk.

12 Daglig ettersyn

(Terapeuter, foreldre og hjelpere)

Det anbefales at produktet ses over daglig av terapeuter, foreldre eller hjelpere for å sikre at produktet er trygt å bruke. Den anbefalte daglige sjekk er beskrevet under.

1. Sjekk at alle skruer og hendler for tilpassing er på plass, og at de låser ordentlig.
2. Sjekk alle polstrede deler for tegn på at de er slitt.
3. Sjekk at alle hjul beveger seg fritt og at de låser ordentlig.
4. Sjekk at alle Velcrobånd låser ordentlig.



Hvis det er noen tvil om produktet er trygt å bruke, eller dersom noen av produktets deler ikke virker, må bruken av produktet opphøre, og kundeservice hos Leckey eller hos den lokale distributøren må kontaktes så raskt som mulig.

13 Årlig ettersyn

(Terapeuter, teknikere, Leckey forhandler)

Leckey anbefaler at alle produkter skal gjennomgå et detaljert årlig ettersyn og når produktet gjenbrukes av en ny bruker. Dette ettersynet skal utføres av en teknisk kompetent person som er opplært i bruken av produktet og skal som et minimumskrav inkludere følgende sjekkpunkter.

1. Sjekk at alle håndskruer, hendler, skruer, muttere og spenner er på plass og erstatt de som eventuelt mangler. Sjekk følgende deler spesielt nøye:
 - a. Låsebolter til nakkestøtte
 - b. Høyde- og vinkeljustering av bryst- og hoftestøtte
 - c. Justeringsskruer og bånd til knestøtte
 - d. Vinkeljusteringen av fotstøtte
2. Sjekk at mekanismene for å folde sammen understellet og for å justere tilten fungerer som de skal. Sjekk også at låsebolten på understellet med svinghjul og understellet med føtter låser ordentlig i låsepedalen.
3. Løft opp understellet for å sjekke hvert hjul individuelt. Sjekk at det beveger seg fritt og fjern eventuell skitt fra gummihjulene. Sjekk at bremsen låser hjulene ordentlig.
4. Gjør en visuell sjekk av strukturen i produktet for å se at det ikke er svakheter ved sveisepunktene på rammen.
5. Leckey anbefaler at de utførte ettersyn nedtegnes fortløpende.



Hvis det er noen tvil om produktet er trygt å bruke, eller dersom noen av produktets deler ikke virker, må bruken av produktet opphøre, og kundeservice hos Leckey eller hos den lokale distributøren må kontaktes så raskt som mulig.

14 Gjenbruk av Leckey produkter

De fleste Leckey produkter blir tilpasset til den enkelte bruker. Før det kan benyttes av en ny bruker, må produktet derfor tilpasses den nye brukeren av en person som er opplært i bruken av produktet.

Et detaljert teknisk ettersyn bør gjennomføres før produktet utleveres til en ny bruker. Ettersynet bør utføres av en person som er teknisk kyndig, og som er opplært i bruken og det tekniske ettersynet av produktet. Kapittel 13 beskriver ettersynet som bør gjennomføres.

Sørg for at produktet er vasket i henhold til kapittel 11.

Sørg for at en ny brukermanual følger med produktet.

Leckey anbefaler at de utførte ettersyn i forbindelse med et gjenbruk nedtegnes fortløpende.



Hvis det er noen tvil om produktet er trygt å bruke, eller dersom noen av produktets deler ikke virker, må bruken av produktet opphøre, og kundeservice hos Leckey eller hos den lokale distributøren må kontaktes så raskt som mulig.

15 Service

Service på alle Leckey produkter skal kun utføres av teknisk kompetent personell som er opplært i bruken av produktet.

Ta kontakt med den lokale distributøren for å få utført slik service.

16 Teknisk informasjon

Produkt- og tilbehørskoder

118-600 Stå-ramme
118-760 Trekk – grønt
118-761 Trekk – oransje
118-762 Trekk – blått
118-763 Trekk – rosa

Understell

118-764 med svinghjul
118-765 med føtter
129-600 med drivhjul
129-601 med drivhjul og fjæring

Tilbehør

Koder med * foran finnes i 4 fargevalg

117-781 Sandaler – små
117-782 Sandaler – medium
118-619 Bord
117-769 Gripebøyle
118-697 Nakkestøtte
*118-753 Formet nakkestøtte
*120-792 Flat nakkestøtte
*120-793 Sidestøtter til flat nakkestøtte
*120-785 Flat nakkestøtte med sidestøtter
129-647 24" drivhjul (par)
129-631 27" drivhjul (par)
129-631 Fjæring
129-629 Transparent bord

Squiggles Stander dimensjoner

Alder (omtrentlig)	1 - 5
Maks. brukervekt	22kg / 48.4lbs
Brukerhøyde Min 730 mm / 28.5 inches	Maks 1100mm / 43.3 inches
Høyde bryststøtte (Avstand fra fotstøtte til armhule) Min 160 mm / 6.25 inches	Maks 820mm / 32 inches
Bredde bryst-/hoftestøtte Min 160 mm / 6.25 inches	Maks 530mm / 20.8 inches
Høyde hoftestøtte (Avstand fra fotstøtte til midten på rumpen) Min 300 mm / 11.8 inches	Maks 530mm / 20.8 inches
Avstand mellom knærnes midtlinje Min 140 mm / 5.5 inches	Maks 215mm / 8.4 inches
Fotstøtte Vinkel fremover 10°	Vinkel bakover 10°
Vekt understell med drivhjul Min 6.1kg / 13.4kg	Uten fjæring og uten hjul 6.1kg Med fjæring uten hjul 8.4kg Med fjæring og med hjul 13.4kg Med hjul 740mm x 740mm
Mål understell med drivhjul	Uten hjul 490mm x 760mm

Tilt på understell med svinghjul 90 - 160°	Tilt på understell med svinghjul 90 - 70°
Høyde på bordet med stå-rammen i fremoverlent stilling Min 555mm / 21.9 inches	Max 825mm / 32.5 inches
Høyde på bordet med stå-rammen i bakoverlent stilling Min 480mm / 18.5 inches	Max 825mm / 32.5 inches
Mål understell med svinghjul (Minimums mål for lagring) Min 5.5kg / 12.1lbs	Bredde 550mm / 21.7 inches Lengde 700mm / 27.6 inches Høyde 300mm / 11.8 inches
Understell med føtter Min 1.5kg / 3.3lbs	Bredde 540mm / 21.3 inches Lengde 690mm / 27.2 inches Høyde 80mm / 2.5 inches
Standard stå-ramme (Minimums mål for lagring) Min 7kg / 15.4lbs	Bredde 380mm / 15.4 inches Lengde 890mm / 26.8 inches Høyde 380mm / 15.4 inches

LECKEY^o

Leckey
19 Ballinderry Road
Lisburn
BT28 2SA
Northern Ireland
United Kingdom

T: 028 9260 0750
E: info@leckey.com
W: www.leckey.com

Distributør: Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Tlf: 03250
www.handicare.no



24 timers
posisjonering for
babyer, barn og
voksne. Søvn,
sitte, stå, gå,
bevegelse, bading
og toalettbesøk.



LS168-05