



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Bure Ortho Bure Space

Bruksanvisning



Bure Ortho

Bure Space

Ortho är speciellt framtaget för Ortopedavdelningen och situationer som kräver extra ben- och gångutrymme för brukaren. Ortho har en kraftig elmotor för eldriven höjdjustering. Den optimala höjden för gåbordet kan därmed ställas in med patienten på plats och gåbordet kan också användas som uppresningshjälp. Ortho finns också i en smal version, Ortho S (finns enbart i version GAS)- maxbredd på stativ endast 65cm.

Bure Space har förutom Orthos fördelar också ett bottenstativ med extra plats för att komma intill rullstol eller liknande. Bottenstativet har breddats och innermåttet har ökats till 67 cm. Bure Space kan fås med elmanövrerad eller hydraulisk höjdjustering.

Contents

1. Höjning och sänkning av stativ	04
2. Sänkning av stativ	04
3. Justering av handtag	04
4. Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor	04
5. Låsning av hjul/ Upplåsning av hjul	04
6. Underhåll	06
7. Generella skötselråd	07
8. Tekniska specifikationer	07

1. Höjning och sänkning av stativ

Frikoppla gasfjädersystemet genom att föra handtaget uppåt (Gaskolven höjer bordet).
Släpp handtaget vid önskad höjd (Gaskolv blockeras).



2. Sänkning av stativ

Frikoppla gasfjädersystemet genom att föra handtaget uppåt. Använd din kroppstyngd för att pressa ned stativet. Släpp handtaget vid önskad höjd (Gaskolv blockeras).



OBS: Handtaget får ej föras nedåt. Risk för att handtaget går sönder.

3. Justering av handtag

Handtagen justeras till önskad position genom att: Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.



4. Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor

För optimalt stöd kan armstödsplattorna justeras i sidled: Ratt lossas, armstödsplattans läge justeras, ratt låses.

5. Låsning av hjul/ Upplåsning av hjul

Hjulen låses genom att fotbromsen trycks nedåt och aktiveras.

Pressa ned den uppstickande delen av bromsen för att lossa bromsen.



6. Underhåll

Rekommenderas minst 1 gång/år.

Kontrollera att/om	Åtgärd
<p>Allmänt Bordet känns stumt/glappfritt. Bordet inte skramlar vid manövrering. Bordet är plant och alla hjul är i kontakt med underlaget. Bordet ej är smutsigt.</p>	Rengör med ljum såpalösning/alkolbaserat rengöringsmedel (ej petroleumprodukter)
<p>Armstödsplattor Armstödsplattor är hela och rena. Breddning armstödsplattor fungerar.</p>	Rengör och byt om skador finns. Komplettera ev. låsrattar/brickor.
<p>Handtag Grepp ej är skadade/smutsiga.</p> <p>Handtagsinställning fungerar.</p>	Rengör med ljum såpalösning (ej petroleumprodukter). Byt handtagsgrepp.
<p>Höjdjustering Höjning och sänkning fungerar. Bordet känns stabilt vid maxinställning. Inget glapp finns mellan vertikalt stativ och bottenstativ. Klämmor för höjdjustering låser. Infästning av elställdon ska vara glappfri. Reglering av höjdjustering me. handtag fungerar. Gaskolven ska löpa mjukt utan vassa ljud.</p>	Byt ev. styrhylsa (i stativ) alt. ändpropp (i kromat rör). Skruva åt låsskruvar Byt klämmor Skruva åt resp. infästningsförband, komplettera med skruv/låsmutter. Byt gaskolv, handtag.
<p>Stativdelar Inga mekaniska skador finns.</p> <p>Inga skrapmärken finns.</p> <p>Ändskydd/bottenstaiv sitter på.</p>	Om skador finns - konsultera GATES kundtjänst. Komplettera med bättringsfärg. Komplettera med nya ändskydd.
<p>Hjul/broms Hjul rullar lätt /slibanan ej är skadad.</p> <p>Hjulen är hårt åtdragna i bottenstativ.</p> <p>Blockeringsbroms fungerar på alla hjul.</p> <p>Handbroms fungerar.</p>	Rengör alt. byt hjul (OBS: hjulen låses alltid i bottenstativ med kemisk låsning alt låsmutter. Hjulen är kapslade och vi rekommenderar inte att de demonteras. Byt istället ut hela hjulpaketet. Skruva åt hjulbult - komplettera med låsmutter alt. Kemisk låsning (modellberoende). Byt hjulpaket. Justera broms alt komplettera med nya hjul.

7. Generella skötselråd

- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov - använd tvållösning/alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
- Produkten kan rengöras i tvättunnel eller motsvarande då elektronik är IP65-klassad. Dock, produkten är ej rostfri vilket gör att rengöring i maskin kan förkorta produktens livslängd.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

8. Tekniska specifikationer

Mått anges för bord med 125 mm hjul.

Art. Nr.	Produkt	Produkt Bredd	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/ Innermått
56-318	Ortho Gas	78cm	150kg	80cm	90-130cm	25-50cm
56-307	Ortho Space Gas	78cm	150kg	79cm	90-130cm	25-50cm
56-318-S	Ortho S Gas	65cm	150kg	79cm	90-130cm	30-45cm

BRUKSANVISNING



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2
Reftele, Sverige
S-330 21

T: 0371-318 00
F: 0371-318 01
E: info@gaterd.se

LIT-00067 Issue 1
Date: January 2020

GATERD.SE