

REF

56-317T-B/0
56-317T-B/0-PS
56-317T-B/0-FKH_R-PSPU-CH
56-317T-B/0-PU-CH
56-317T-FKH_R-PLUS-PU
56-317T/75-PU
56-317T-TK
56-317T-UK
56-317T/100
56-317T/75
56-317T/75-B/0
56-317T/75-FKH_R-PLUS-PU
56-317T/75-PU
56-317T/75-TK
56-318
56-318-BRAKE/0
56-318-B/1
56-318-PU-RED
56-318/75
56-318/75-BRAKE/0
56-318-S
56-318-S/75
56-318-S-B/0
56-318-S-B/1
56-304
56-304-B/0-FKN_R
56-304-B/0-FKH_R-PU
56-304-B/0-FKH_R-PL-PU-R
56-304-B/0-PU
56-304-B/1-PL-PU
56-304-PARSONS-CAN
56-304-PLUS
56-304-PLUS-PU
56-304-PLUS-PU-UK
56-304-PLUS-RED
56-304-PU
56-304-RED
56-304/100
56-304/75
56-304/75-B/0
56-304/75-B/0-FKH_R-PS-PU
56-304/75-B/0-FKN_R-PU
56-304/75-B/1
56-304/75-PLUS
56-304/75-PLUS-PU
56-304/75-PU
56-304L-PU
56-304L-PU-UK
56-307
56-307/100
56-307/75
56-307-B/1-PU
56-307-B/1-PU-RED
56-307-PU
56-307/LOW

Bure Ortho Bure Space

Brugsanvisning

Teknisk manual

Service manual



SWL: 150 kg/ 330 lbs

Bure Ortho

Bure Space

Ortho er specielt udviklet til ortopædiske afdelinger og situationer, der kræver ekstra ben- og gangplads til brugeren. Ortho har en kraftig elmotor til eldreven højdejustering. Den optimale højde til gåbordet kan dermed indstilles med patienten på plads, og gåbordet kan også anvendes som støtte til at rejse sig op. Ortho findes også i en smal version, Ortho S (findes kun i version GAS), maks. bredde på stativet kun 65 cm.

Bure Space har ud over Orthos fordele desuden et bundstativ med ekstra plads til at komme ind til kørestol eller lignende. Bundstativet er udvidet i bredden, og indermålet er udvidet til 67 cm. Bure Space kan fås med elbetjent eller hydraulisk højdejustering.

Indhold

1. Tilsigtet Anvendelse	03
2. Kontraindikationer, Forsigtighedsforanstaltninger og Advarsler	03
3. Hævning og Sænkning af Stativ – EL	04
4. Hævning og Sænkning af Stativ – GAS	04
5. Justering af Greb	04
6. Højre- og Venstrejustering af Armlænsplader	05
7. Låsning af Hjul/Oplåsning af Hjul	05
8. Koblingsdiagram Styreboks	05
9. Opladning af Batteri	06
10. LED på Styreboks og Batteri	06
11. Vedligeholdelse	07
12. Generelle Vedligeholdelsesråd & Rengøring	08
13. Tekniske Specifikationer	08
14. Genvinding/Bortkastning	09
15. Garanti	09
16. Elsystem – Tekniske Data (TiMOTION og Linak)	10
17. Fjernbetjening Plus	10
18. Komponentfortegnelse	11
19. Reservedele	13
20. Tilbehør	14
21. Symboler	14

1. Tilsigtet Anvendelse

Gåborde er kun beregnet til brug indendørs og på et plant underlag. Gåborde er et hjælpemiddel, som sammen med godkendt tilbehør er beregnet til brug ved forflytning fra siddende til stående positioner og gangtræning. Gåborde skal anvendes af personer med nedsat muskelstyrke, som skal kunne stå og udføre enkle benbevægelser. Gåborde skal bruges til at læne sig på, når brugeren går og står under tidlig mobiliseringstræning. Gåborde og tilbehør er beregnet til anvendelse i hjemmesygeplejemiljøer og professionelle plejehospitaler.

2. Kontraindikationer, Forsigtighedsforanstaltninger og Advarsler

Kontraindikationer
Produktet må ikke anvendes af en bruger, hvis vægt overstiger den maksimale brugervægt, der er angivet på produktets etiket.
Forsigtighedsforanstaltninger
Kontrollér, at produktet anvendes på en tør, plan flade.
Kontrollér, at produktet er korrekt monteret/samlet, før den første anvendelse.
Kontrollér produktet, efter at det har været klappet sammen/demonteret ved transport.
Kontrollér højdejustering og benspredningsbevægelser, og efterse indstillingernes eller gasfjedrenes fulde bevægelsesomfang.
Aktivér bremsene, når produktet ikke er i brug.
Kontrollér bremsene før brug.
Inspicér produktet jævnligt for at opdage tegn på skader. Hvis der findes nogen synlige tegn på skade, skal Direct Healthcare Groups kundeservice kontaktes.
Før hver brug af en elektrisk model af produktet kontrolleres det, at den manuelle kontrol ikke viser tegn på slitage.
Kontrollér, at markeringerne på den manuelle kontrol stemmer overens med løftefunktionerne.
Før hver anvendelse af en elektrisk model af produktet kontrolleres batteristatus.
Det er vigtigt aldrig at efterlade brugeren alene under forflytningen.
Garantien gælder kun, hvis reparationer eller ændringer foretages af personale som er autoriseret af Direct Healthcare Group.
Sørg for, at der ikke findes nogen forhindringer eller mennesker i vejen for produktet, når brugeren forflytter sig ved hjælp af produktet.
Batterier skal behandles forsigtigt. Må ikke tabes.
Anvend kun batterier og kabler, der er beregnet til produktet i henhold til producentens anvisninger.
Kontrollér, at potentielt tilbehør, der kan anvendes, er korrekt tilsluttet til enheden før brug.
Lav hastighed anbefales, når produktet anvendes.
Vær forsigtig, så du ikke kører produktet over en tærskel med høj hastighed eller stor kraft. Nærm dig tærskler med lavere hastighed, og gør brugeren opmærksom på det, når I nærmer jer en tærskel.
Opbevar brugsanvisningen sammen med produktet, så den kan bruges som reference ved behov.

Advarsler
Plejeren skal kunne læse og forstå produktets brugsanvisning og brugerinstruktionerne.
Det er vigtigt kun at bruge godkendt tilbehør, der er angivet i brugsanvisningen, for at forhindre, at komponenter løsnes utilsigtet, da dette kan medføre et fald og patientskade.
Manøvrér blidt og forsigtigt, når du arbejder med produktet.
Udfør vedligeholdelse/service af enheden i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen mindst en gang hver 12. måned.
Tilbehøret skal være ordentligt fastgjort. Det bør testes i forhold til brugerens behov og funktionsniveau.
Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af stærke elektriske kraftkilder, som anvendes ved for eksempel diatermi og lignende, så diatermikabler ikke placeres på eller i nærheden af enheden. I tvivlstilfælde bør du rådføre dig med en repræsentant for Direct Healthcare Group.
Når du løfter produktet, må du kun anvende de angivne håndtag. Der skal mindst to personer til for at løfte produktet.
Efterlad aldrig brugeren uden opsyn, når produktet anvendes.
Flyt aldrig produktet ved at trække i indstillingen eller gasfjederen.
Produktet må ikke sænkes ned i vand.
Produktet må ikke efterlades eller opbevares i et miljø med høj luftfugtighed.
Produktet må ikke rengøres med damp.
Produktet må ikke oplades i et vådrum.
Produktet må ikke anvendes udendørs – kun indendørs.

3. Hævning og Sænkning af Stativ – EL

Den ønskede højde justeres med Pil <OP> eller Pil <NED>.

På produkter med Linak har man mulighed for at vælge normal eller hurtigt hastighed (enkelt eller dobbelt pil).

Fjernbetjening/Linak og TiMOTION Plus er desuden udstyret med ladeindikator (lavt, mellem, højt) samt Serviceindikator (se endvidere under "17 Fjernbetjening Plus").



4. Hævning og Sænkning af Stativ – GAS

Frigør gasfjederen ved at føre håndtaget opad (gasstemplet hæver bordet). Slip håndtaget i den ønskede højde (gasstempel blokeres).

Frigør gasfjederen ved at føre håndtaget opad. Anvend din kropsvægt til at presse stativet ned. Slip håndtaget i den ønskede højde (gasstempel blokeres).



5. Justering af Greb

Grebene justeres til den ønskede position ved at: Drejgrebet løsnes, håndtagene justeres, drejgrebet låses.



6. Højre- og Venstrejustering af Armlænsplader

For optimal støtte kan armlænspladerne justeres til siden: Drejeregabet løsnes, armlænspladens stilling justeres, drejeregabet låses.

NB! Bageste beslag på stativ/armlæn kan udskiftes (højre til vestre og omvendt) for at få en anden bredde. Styrepinde på pudens underside/bagkant kan også flyttes. Disse indstillingsmuligheder giver mulighed for individuel tilpasning.



7. Låsning af Hjul/Oplåsning af Hjul

Hjulene låses, ved at fodbremsen trykkes ned og aktiveres. Pres den opstikkende del af bremsen ned for at løsne bremsen.

8. Koblingsdiagram Styreboks

TiMOTION:

For at håndtere koblinger i henhold til nedenstående skal styreboksens dæklåg tages af. Dette gøres ved hjælp af en skruetrækker eller lignende – se speciel afmærkning på styreboksen.

NB! Vær omhyggelig med at slutte kontakter til det rigtige stik eftersom dette ellers kan skade aktuatoren.


1. Udtag til aktuator – hæve/sænke.
2. Udtag til fjernbetjening.
3. Udtag til batterikontakt.
4. Udtag til stikprop. (NB: For at IP-klassen skal gælde, skal stikproppen altid være sluttet til styreboksen).



Linak:

Lemmen til styreboksen åbnes med fingergreb.

1. Udtag til fjernbetjening.
2. Udtag til batteri.
3. Udtag til aktuator op/ned.
4. Udtag til stikprop.

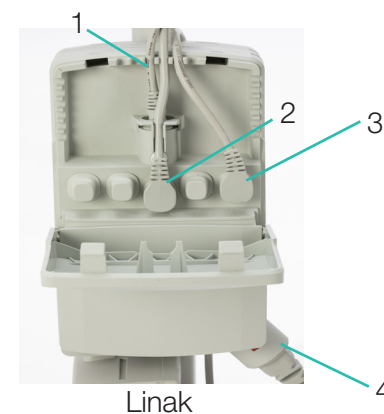

9. Opladning af Batteri

Stikproppen sluttes til 230 V – vægkontakt. Ladningen påbegyndes automatisk.

- o TiMOTION: LED/batteri blinker grønt.
- o Linak: Batteriindikatoren for ”fuldt opladet” blinker gult, indtil batteriet er fuldt opladet.

- Batteriet er af typen Li-ion og ufølsomt over for, hvor længe/hvor tit man lader batteriet. Fuld opladning af et helt afladet batteri tager ca. 24 h.
- TiMOTION: Hvis produktet stilles væk, pga. at det ikke skal anvendes over længere tid (mere end en uge), anbefaler vi, at batterikontakten løsnes fra styreboksen, eller at batteriet slukkes med on/off-knappen. På denne måde elimineres risikoen for, at batteriet ødelægges, da styreboksen forbruger en lille mængde strøm, selv om bordet ikke bruges.

10. LED på Styreboks og Batteri

TiMOTION:

Styreboks – lyser grønt, når der er spænding fra batteri/netudtag.

Batteri:

- Ved ladning blinker LED'en grønt.
- On/Off For at anvende produktet – tryk på <ON>.
- Grøn lampe begynder at lyse/blink.
- Med <OFF> knappen (holdes inde i 5 sek.) kan man slukke for batteriet, hvis produktet ikke skal anvendes gennem længere tid.
- Når batteriet er fuldt ladet, lyser LED'en fast grønt.
- Når batteriet er i normal stilling/drift, blinker LED'en grønt med uregelmæssige intervaller – 0,5 sek. tændt, 4 sek. slukket.
- Når batteriet skal oplades (resterende kapacitet <25 %) blinker LED'en orange/rødt med regelmæssige intervaller – 0,5 sek. tændt, 4 sek. slukket.

NB! Batteriet har en indbygget funktion, som automatisk slukker for batteriet, når den resterende kapacitet er <20 %. LED'en er da slukket. Batteriet skal nu oplades helt, før elektronikken kan anvendes igen.

Linak:

Styrbox – LED lyser grønt ved drift, är släckt då bordet ej används. Då styrboxen är kopplad till elnät lyser LED grønt. Vid körning/kopplad till elnät så lyser LED gult.

Batteri:

- LED'en lyser GULT under opladning (samtidigt med at ladeindikatoren på fjernbetjeningen blinker gult).
- LED'en slukker automatisk, når batteriet er fuldt opladet (det samme gælder ladeindikatoren på fjernbetjeningen).



11. Vedligeholdelse

Anbefales mindst 1 gang/år.

Kontrollér at/om	Foranstaltning
<p>Generelt Bordet føles stift/uden slør. Bordet ikke skramler ved manøvrering. Bordet er plant, og alle hjul er i kontakt med underlaget. Bordet ikke er snavset.</p>	<p>Rengør med lunkent sæbevand/alkoholbaseret rengøringsmiddel (ikke råoliebaserede produkter).</p>
<p>Armlænsplader Armlænsplader er hele og rene. Udvidelse af armlænsplader fungerer.</p>	<p>Rengør, og udskift, hvis der findes skader. Supplér evt. låsegreb/skiver.</p>
<p>Greb Greb ikke er beskadigede/snavsede. Håndtagsindstilling fungerer.</p>	<p>Rengør med lunkent sæbevand (ikke råoliebaserede produkter). Udskift håndtagsgreb. Supplér evt. låsegreb/skiver.</p>
<p>Batteri Kontrollér, at ladekablet er sluttet til styreboks. Kontrollér, at fjernbetjeningen er sluttet til styreboks. Kontrollér, at tilslutninger er foretaget iht. koblingsdiagram. Kontrollér, at batteri, justeringsudstyr og styrebokse ikke sidder/hænger løst.</p>	<p>Supplér med nyt ladekabel; dette skal altid være sluttet til styreboksen (IP65-klasse). Tilslut, evt. supplér med ny fjernbetjening. Se koblingsdiagram i Teknisk manual. Tilspænd, supplér evt. med nye skruesamlinger.</p>
<p>Højdejustering Hævning og sænkning fungerer. Bordet føles stabilt ved maks.-indstilling. Intet slør mellem vertikalt stativ og bundstativ. Klemmer til højdeindstilling låser. Fastgørelse af elektrisk justeringsudstyr skal være uden slør. Regulering af højden med fjernbetjeningen fungerer. El-aktuatoren skal køre blødt og med konstant hastighed.</p>	<p>Udskift evt. styrebøsning (i stativ) eller endeprop (i forkromet rør). Skru låseskruer til. Skift klemmer. Skru relevante monteringsforbindelser til, supplér evt. med skrue/låsemøtrik. Kontrollér, at batteri/fjernbetjening/aktuator er korrekt koblet iht. diagram. Oplad batteriet. Kontakt kundeservice.</p>
<p>Stativdele Der ikke findes nogen mekaniske skader. Der ikke findes nogen skrammer. Endestop/bundstativ sidder på.</p>	<p>Hvis der findes skader – konsulter GATE's kundeservice. Supplér med udbedringsmaling. Supplér med nye endestop.</p>
<p>Hjul/bremser Hjul ruller let /slidbanen ikke er beskadiget. Hjulene er hårdt tilspændt i bundstativet. Blokeringsbremse fungerer på alle hjul. Håndbremse fungerer.</p>	<p>Rengør, eller skift hjul (NB: hjulene låses altid i bundstativet med kemisk låsning eller låsemøtrik). Hjulene er kapslede, og vi anbefaler ikke, at de demonteres. Udskift i stedet hele hjulpakken. Skru hjulboltene til – supplér med låsemøtrikker eller Kemisk låsning (modelafhængigt). Udskift hjulpakken. Justér bremse, eller supplér med nye hjul.</p>


12. Generelle Vedligeholdelsesråd & Rengøring

- Tør gåbord og armlænsplader af ved behov – anvend sæbevand/alkoholbaseret overfladerengøringsmiddel.
- Produktet kan rengøres i vasketunnel eller tilsvarende, da elektronikken er IP65-klassificeret. Dog er produktet ikke rustfrit, hvilket gør, at rengøring i maskine kan forkorte produktets levetid.
- Hvis produktet skal rengøres i vasketunnel/vaskekabinet, anbefales PU-puder.
- Udskift omgående dele, der er itu – skal gøres af kyndigt personale.
- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

13. Tekniske Specifikationer

Mål angives for bord med 125 mm hjul.

Art. Nr.	Produkt	Produkt bredde	Maks. brugervægt	Længde	Højde	Armlæn/ Indv. mål
56-317T/56-317L	Bure Ortho EL	78cm	150kg	80cm	90-130cm	25-50cm
56-304/56-304L	Bure Space EL	78cm	150kg	79cm	90-130cm	25-50cm
56-318	Ortho Gas	78cm	150kg	80cm	90-130cm	25-50cm
56-307	Ortho Space Gas	78cm	150kg	79cm	90-130cm	25-50cm
56-318-S	Ortho S Gas	65cm	150kg	79cm	90-130cm	30-45cm

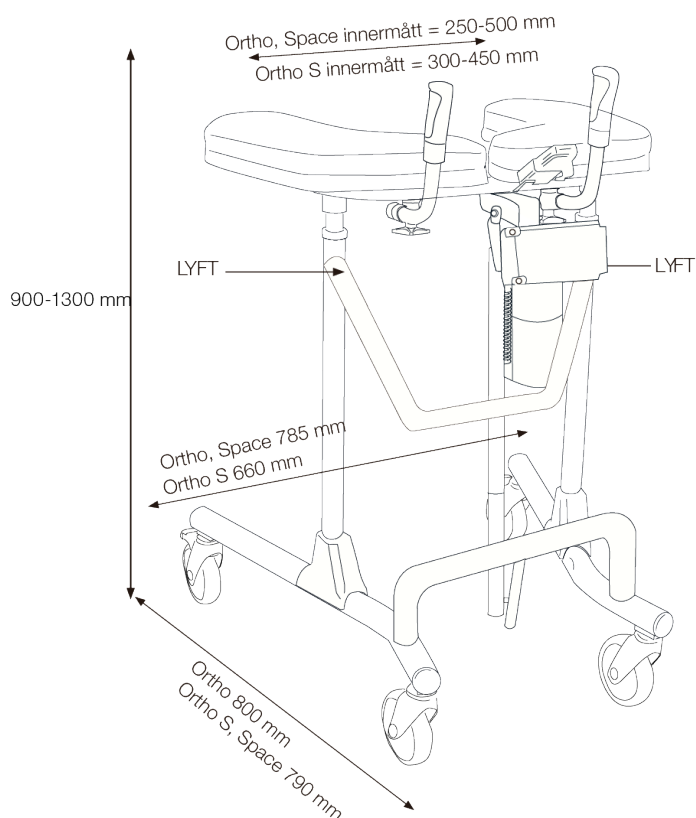

Produktets vægt: 20 kg (Gas: 15 kg)

"LØFT" angiver egnet greb ved løft af gåbordet ved transport.
 NB! Vær mindst to personer ved løft.

14. Genvinding/Bortkastning

Når produktet ikke længere kan anvendes, bør det genvindes i overensstemmelse med love/forordninger for affaldshåndtering i det aktuelle land. Alle elektriske dele inkl. batterier skal fjernes og genvindes som elektriske komponenter. (Spørg den lokale genbrugsplads til råds for at få yderligere information om, hvordan de forskellige materialer i produktet (metal, plast, elektronik) skal genvindes).

15. Garanti

Vi giver to års garanti på evt. fabrikationsfejl (gælder ikke sliddele).

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt venligst:

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com

16. Elsystem – Tekniske Data (TiMOTION og Linak)

Aktuator	Løft	Udvidelse	Løft	Udvidelse
Producent	TiMOTION	TiMOTION	Linak	Linak
Spænding	12 V	24 V	24 V	24 V
Løftekraft		1000 N		1200 N
Trækkraft		1000 N		1200 N
Blokering ved løft	1000 N	1000 N	7 A	3 A
Strømstyrke	6,6 (+/-1,0) A	2,6 (+/-0,4) A	7 A ud/7 A ind	3 A ud/3 A ind
Farve	Sort	Aluminium	Hvid	Hvid
Slaglængde	400 mm	55 mm	400 mm	55 mm
Min. indbygningsmål	605 mm	167 mm	606 +/-2 mm	165 +/- 2 mm
Kapslingsklasse	IP66	IP66	IPX6	IPX6

IEC60601-1 3. udgave

Kontrolboks + Batteri

Producent	TiMOTION	Linak
Spænding	24 V	230 V/24 V
Kapacitet	2,0 AH	2,25 Ah
Kapslingsklasse	IP66	IPX6
Farve	Sort	Hvid
Elsikkerhed	Class II	Class II (Dobbeltisoleret)

IEC60601-1 3. udgave

17. Fjernbetjening Plus

TiMOTION:

**1. Serviceindikator – blinker rødt efter 11 måneders drift. Lyser fast (rødt) efter 12 måneders drift. Indikatoren er en påmindelse om at gennemgå anvisningerne i Vedligeholdelse. Dette bør gøres mindst en gang for hver 12 måneder.

Genopretning: Hold knapperne <2a> + <2b> inde i mindst 30 sekunder.

** Indikatoren slukkes ca. 30 sek. efter, at fjernbetjeningen har været aktiv (batterisparfunktion).



Linak:

Serviceindikatoren lyser fast gult efter ca. 12 måneders brug. Indikatoren er en påmindelse om at gennemgå anvisningerne i Vedligeholdelse (bør gøres en gang for hver 12 måneder).

Genopretning: Hold samtidigt knapperne <Hurtig hastighed op> + <Hurtig hastighed ned> inde i ca. 10 sekunder, til styreboksen giver et bip som kvittering på, at genopretning er foretaget.

Serviceindikatoren blinker gult, når aktuatoren er blevet overbelastet, eller hvis der er opstået en anden kritisk fejl.


Genopretning: Hold knapperne <Lav hastighed op> + <Lav hastighed ned> inde samtidig i ca. 5 sekunder, til serviceindikatoren slukker.




18. Komponentfortegnelse

1	Armlænsplade	12	Mellemstativ	22	Styreboks, (TiMOTION/Linak)
2	Plastskive	13	Skruer	23	Batteri
3	Drejegreb	14	Beskyttelseskappe	24	Holder til fjernbetjening
4	Overstativ	15	Bundstativ	25	Fjernbetjening (TiMOTION, Linak)
5	Monteringsbolt (2 stk.)	16	Endebøsning	26	A Gasstempel
6	Tandskive	17	Hjul		B Håndtag
7	Håndtag+greb.	18	Bolt		C Arm/hus
8	Forkromet rør	19	Skive		D Skruer+skive (2 stk.)+møtrik (montering fornedden, foroven)
9	Klemme	20	Kappe/Grøn		
10	Drejegreb	21	Justeringsudstyr, (TiMOTION/Linak)		
11	Styrebøsning				

GAS

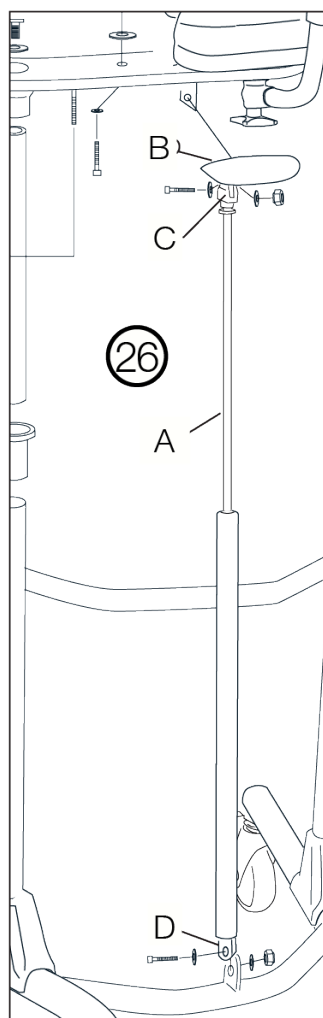

BURE ORTHO/SPACE

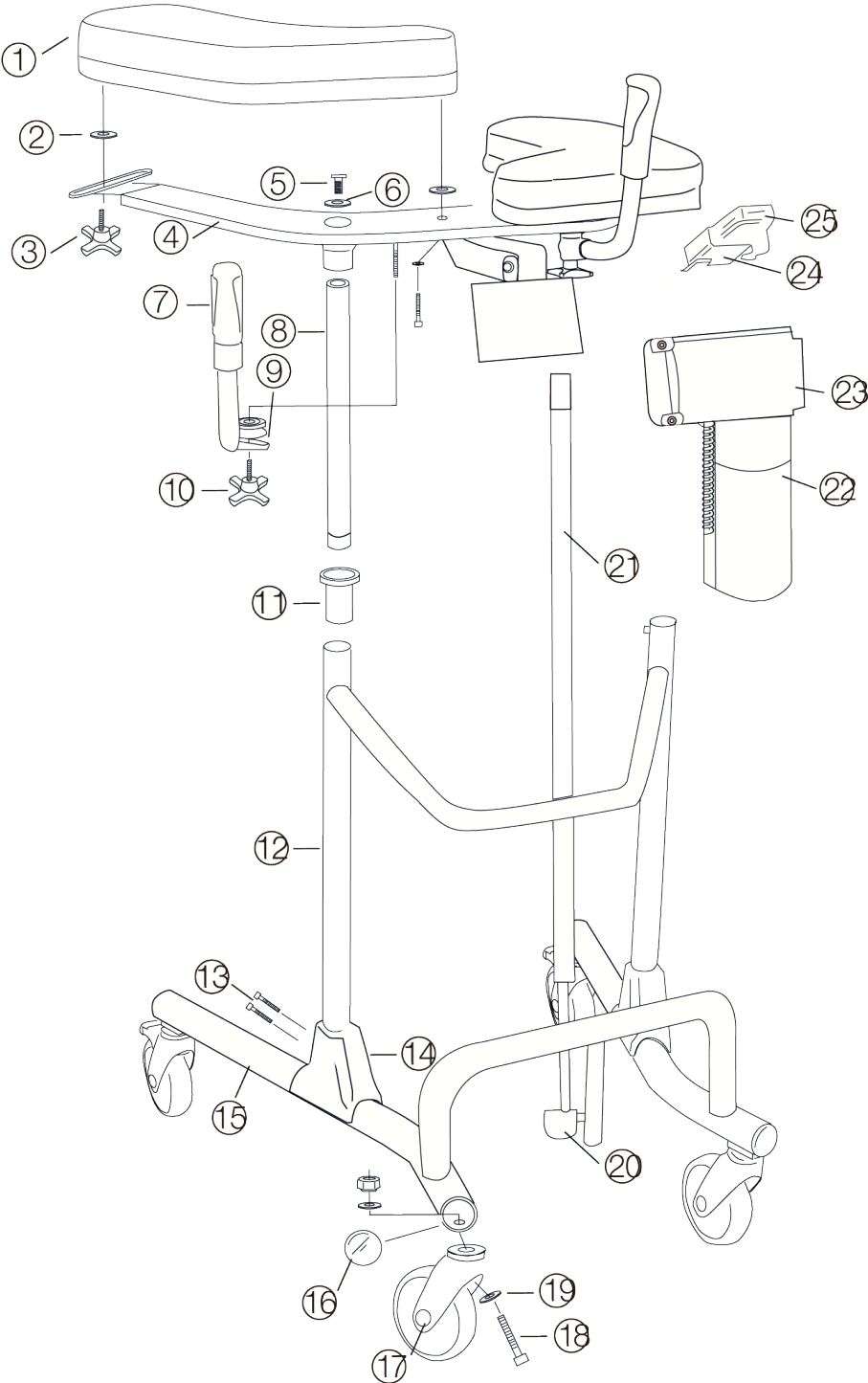

19. Reservedele












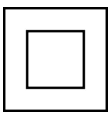

BURE ORTHO/SPACE

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse
1	57-357-R	Armlænsplade højre
1	57-357-L	Armlænsplade venstre
2	57-904	Plastskive/Armlænsudvidelse
3	56-364	Drejegreb til indst. udvidelse af armlænsplader
4	57-356	Overstativ
5	57-816	Monteringsbolt, M10X40
6	57-803	Tandskive
7, 9, 10	56-353	Håndtagsrørsæt (2 par inkl. monteringsgreb/klemmer)
8	58-311	Styrerør med bremsebøsning
10	56-363	Drejegreb til håndtagsindstilling
11	56-340	Styrebøsning
12	57-355	Mellemstativ
13	57-810	Skrue M8X45
14	56-375	Beskyttelseskappe plast
15	57-354	Bundstativ Bure Ortho
15	57-354-S	Bundstativ Bure Ortho S
15	57-373	Bundstativ, Bure Space
16	56-344	Endeafslutning bundstativ, Sort/D45
17	56-361	Ledhjul med bremse 125 mm
-	56-357	Ledhjul med bremse 100 mm
-	56-358	Ledhjul m. bremse 100 mm
-	56-360	Ledhjul u. bremse 125 mm
-	56-387	Ledhjul med bremse 75 mm
18	-	Skrue M10X50
19	57-848	Låseskive Nordloc
20	58-331	Kappe/grøn (TiMOTION)
21	58-377	TiMOTION- Aktuator (Hæve/Sænke)
21	58-398	Linak- Aktuator (Hæve/Sænke)
22	58-373 alt. 58-373/Lion	TiMOTION- Styreboks 220 V
22	58-373/Lion-1	TiMOTION- Styreboks 110 V
22	58-397	Linak- Styreboks
23	58-376	TiMOTION- Batteri
23	58-402	Linak - Batteri
24	57-041-6	Holder til håndkontrol (Linak)
25	58-374-1	TiMOTION- Håndkontrol (Hæve/Sænke)
25	58-411	Loinak Håndkontrol (Hæve/Sænke)
-	56-305	Udbedringsmaling Bure Silver 8
-	58-326	TiMOTION- Strømkabel/Spiral
-	58-326-1	Strømkabel/Spiral UK/EUR TiMOTION
-	58-326-2	Strømkabel/Spiral US TiMOTION
-	58-326-3	Strømkabel/Spiral AUS TiMOTION
-	58-406-EUR/AUS/UK/US	Strømkabel/Spiral grå Linak/TiMOTION
26A	57-007-1	Gasstempel 400 mm, Linak
26B	57-329	Håndtag/Plast
26C	57-008-2	Hus/Alu
27	57-592	Skive pude

20. Tilbehør

Art. Nr.	Beskrivelse
56-339-1-0	Håndbremsetilsætning/to håndtag
56-339-1-1	Håndbremsetilsætning/enhåndsbremse
56-327	Forhøjnings sæt 70 mm
56-333-ortho/space	Ståplade lang, Bure Ortho/Space
56-335	Fastgørelse til dropholder
56-336	Holder til iltflaske
56-337	Sidestøtte, justérbar
56-338	Sæt, dropstativ, komplet
56-389	Blød kurv med fastgørelse
56-061	Fjernbetjening PLUS (TH10) inklusive holder TiMOTION
56-352	Underbensstøtte

21. Symboler

	Produkterne opfylder kravene i den medicintekniske forordning 2017/45 (MDR).		Visuel inspektion
	Medicinteknisk produkt		Læs brugerinstruktionerne
	Advarsel		Produktkode
	Information om producenten		Batch-kode
	Type BF i overensstemmelse med graden af beskyttelse mod elektrisk stød		Produktet må kun anvendes indendørs
	WEEE Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald pga. elektriske komponenter		Klasse II-udstyr, elsikkerhed
	Duty cycle: 2 min. i aktiv stilling (ON), 18 min. i hvilestilling (OFF)		



Medicinteknisk produkt, klasse I

Medicinteknisk produkt, klasse I. Produktet opfylder kravene i den medicintekniske forordning 2017/745 (MDR).

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com