



**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

Omega

Brukerhåndbok



Innhold

1. Introduksjon til Omega-stolen	4	8. Gjenbruk	13
1.1. Hvorfor er det behov for denne typen stol?.....	4	8.1. Moduler.....	13
2. Retningslinjer for garanti	5	8.1.1. Setemoduler	13
2.1. Garanti og ansvar.....	5	8.1.2. Ryggmoduler	13
2.2. Bruk.....	5	8.1.3. Armlenemoduler.....	13
2.3. Når garantien ikke gjelder:.....	5	8.1.4. Benstøtte.....	14
2.4. Når garantien gjelder:	5	8.2. Avhending av stolen	14
2.5. Lovfestede rettigheter.....	5	9. Stell og vedlikehold	14
2.6. Advarsel	5	9.1. Levetid	14
3. Klinisk anvendelse	6	9.2. Periodisk kontroll	14
3.1. Tiltent bruk.....	6	9.3. Rengjøring	15
3.2. Hvem er Omega egnet for?	6	9.3.1. Rengjøring av rammen	15
3.3. Hvem er Omega ikke egnet for?	6	9.3.2. Rengjøring av møbeltrekket	15
4. Produktinformasjon	6	10. Tekniske data	17
4.1. Produktidentifikasjon	6	10.1. Produsentens adresse	17
4.2. Hovedfunksjoner	6	10.2. Maksimal vekt på brukeren.....	17
4.3. Alternativer for trykkhåndtering	7	10.3. Vekt og dimensjoner på stolen	17
4.4. Tilbehør	7	10.4. Produktstandarder.....	17
5. Veiledning for beste praksis	7	10.4.1. Brennbarhetstesting	18
6. Anvisninger for bruk	8	10.4.2. Styrke, stabilitet, holdbarhet, risiko og sikkerhet.....	18
6.1. Generell bruk.....	8	10.4.3. Kvalitet og miljø	18
6.2. Sette opp Omega for bruk.....	8	11. Kundeservice	18
6.3. Hjul	8		
6.4. Sammenkoblet ryggstøtte og variabel setevinkel	9		
6.5. Benstøtte.....	10		
7. Tilbehør	10		
7.1. Skyvbar fotstøtte	10		
7.2. Vektet universalhodestøtte	11		
7.3. Polstret hodestøtte	11		
7.4. Hette	11		
7.5. Magebelte og D-ring	11		
7.6. Bekkenposisjoneringseenhet.....	12		

Viktig:

Les nøye gjennom brukerhåndboken før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Det er pleierens/brukerens ansvar å sørge for at de er fullstendig klar over og er innforstått med alle sikkerhetsanvisninger og andre instruksjoner i denne håndboken, før stolen installeres og tas i bruk.

1. Introduksjon til Omega-stolen

Takk for at du kjøpte en Omega-stol fra Direct Healthcare Group (DHG).

Komfort og sikkerhet er grunnlaget til Omega-stolen og gir en robust, slitesterk stol som tåler krevende og sterke bevegelser, men som likevel gir en trygg og avslappet sitteposisjon.

Omega-stolen ble opprinnelig utformet for pasienter med Huntingtons sykdom og andre nevrologiske tilstander. Over tid har Omega-stolen blitt anerkjent som et verdsatt setesystem for mange andre pleiemiljøer.

1.1. Hvorfor er det behov for denne typen stol?

En utformet rygg og profilert sete sikrer optimal komfort og gir god posisjonering av midseksjonen for aktiviteter som spising og drikking, samtidig som avslapning og søvn oppmuntres av den unike sammenkoblede tilbakelening av rygg og sete.

Når vinkelen til ryggen går nedover, økes vinkelen til setet for å garantere en konsistent sitteposisjon og trygghetsfølelse med høye, brede armlener.

Den faste fotstøtten i skum er sikkert festet til Omega med sterke, fleksible fester som gir full benstøtte. For brukeren som er mer mobil kan benstøtten fjernes, og la brukeren gå lettere ut av stolen. En valgfri skyvbar fotstøtte kan legges til Omega for korrekt, trygg posisjonering av føttene, spesielt når brukeren blir flyttet mens de sitter i stolen uten at benstøtten er på.

2. Retningslinjer for garanti

2.1. Garanti og ansvar

Direct Healthcare Group gir en garanti til kjøperen om at varene som leveres vil være fri for feil i utførelse, design eller materialer i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdato. Rammen til Omega-stolen har en garanti på ti (10) år, unntatt for skade på hjul og stoltrekk. Det anbefales å gjennomføre en årlig vedlikeholdsservice, men det er ikke essensielt.

2.2. Bruk

- Alle produkter fra Direct Healthcare Group er designet etter en høy spesifikasjon for en bestemt brukstype.
- Det er derfor viktig at brukeren velger riktig produkt. Hvis kjøperen har til hensikt å kjøpe produkter til bruk som ikke er godkjent, må kjøper anvende egne ferdigheter og utvise skjønn.
- Ingen ansatte eller agenter i Direct Healthcare Group er autorisert til å anbefale bruk som ikke er godkjent, og kjøperen bør ikke stole på slike anbefalinger.
- Bruksanvisningen bør følges i alle henseender.

2.3. Når garantien ikke gjelder:

- Bruk av feil rengjøringsprodukter som kan skade overflatematerialet.
- Feil vedlikehold som ikke er godkjent av Direct Healthcare Group.
- Endringer på originale produkter gjort av kjøper.
- Feil transportmiddel for produktene.
- Normal bruk og slitasje.
- Bruk som ikke er godkjent:
 - Sitting på stolarmene.
 - Sitting på benstøtten eller fotstøtten.
 - Støte stolen mot mennesker og gjenstander som vegger, dører, senger, bord, stoler, osv.
 - Søl fra mat, urin, ekskrementer og andre ting på stolen og ikke rengjøre den umiddelbart etter sølingen (2 minutter), fører ofte til at stolen begynner å lukte og utgjør en helsefare. Søl trenger også inn møbeltrekk, sømmer og skum.
 - Ofte påføres det overdreven kraft på bevegelige deler av tre og metall på stoler, noe som fører til at de knekker eller blir bøyd.
 - Stoler som påføres støt opp eller ned trapper eller over hindringer når en person som sitter i stolen, forårsaker skade på hjul, rammeverk og møbeltrekk.

2.4. Når garantien gjelder:

Direct Healthcare Group vil:

- Rette opp feilen eller
- Hvis det etter Direct Healthcare Groups mening ikke er mulig å rette feilen, erstatte produktet.

2.5. Lovfestede rettigheter

Ingenting i våre vilkår og betingelser eller i disse retningslinjene skal påvirke forbrukerens lovfestede rettigheter.

2.6. Advarsel

I denne håndboken er advarsler indikert med symboler. Advarselssymbolene er ledsaget av en tekst som indikerer alvorlighetsgraden av faren.



ADVARSEL

Indikerer en farlig situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død hvis den ikke unngås.



FORSIKTIG

Indikerer en farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade hvis den ikke unngås.



VIKTIG

Indikerer en farlig situasjon som kan føre til materielle skader hvis den ikke unngås.

3. Klinisk anvendelse

3.1. Tiltent bruk

Omega er tiltent for bruk i følgende miljøer:

- Omsorgsfasiliteter som pleiehjem og omsorgsboliger
- Sykehusmiljøer
- Hospits
- Bofellesskap
- Privatboliger
- Miljøer med én eller flere brukere

3.2. Hvem er Omega egnet for?

Omega er egnet for følgende brukere:

- Delvis mobile og ikke-mobile brukere som trenger en robust stol som gir ryggstøtte og trykkhåndtering
- Brukere med Huntingtons sykdom eller andre nevrologiske tilstander
- Omsorgsfasiliteter som trenger en generell stol for posisjonering og trykkhåndtering
- Brukere med lav til middels stor risiko for trykksår (stoler utstyrt med Reflexion™-seteskum)
- Brukere med høy risiko for å utvikle eller som har trykksår opp til grad II (stoler utstyrt med Intelli-Gel®-sete) etter en klinisk vurdering
- Brukere med høy risiko for å utvikle eller som har trykksår opp til grad IV (stoler utstyrt med Intelligent Air-sete) etter en klinisk vurdering.
- Brukere med mild til alvorlig kognitiv svikt.

3.3. Hvem er Omega ikke egnet for?

Omega er ikke egnet for følgende brukere:

- Fullt mobile brukere, med mindre de er under tilsyn av helsepersonell i et behandlingsmiljø og etter en klinisk vurdering
- Brukere med kompleks kroppsholdning som krever betydelig støtte

4.3. Alternativer for trykkhåndtering

Trykkhåndtering er ytterst viktig for personer som sitter i lengre perioder. Omega har trykkavlastende skum på alle kontaktflater på stolen, og det finnes ulike alternativer for setemodulen i henhold til brukerens behov.

Hvis du er usikker på om trykkhåndteringen er egnet, kan du søke råd og innspill fra en kvalifisert ergoterapeut, sårbehandler, helsepersonell og/eller representant/forhandler for Direct Healthcare Group før kjøp.

4.4. Tilbehør

Et utvalg av tilbehør er tilgjengelig for bruk med Omega-stolen. Ta kontakt med kundeserviceteamet hos Direct Healthcare Group på **gratisnummer 0800 043 0881** eller din lokale forhandler, for gjeldende priser og tilgjengelighet.

Hvis du er usikker på om noe av tilbehøret er egnet for Omega-stolen, kan du søke råd og innspill fra en kvalifisert ergoterapeut, helsepersonell og/eller representant/forhandler for Direct Healthcare Group før du går til anskaffelse av det.

OM191	Omega skyvbar fotstøtte	OM804	Omega arm løse trekk
OM401	Omega hodestøtte	OM805	Omega benstøtte løse trekk
KB417	Vektet universalhodestøtte i Dartex	KB724	Magebelte (krever D-ringstroppe)
KB418	Vektet universalhodestøtte i møbeltrekkstoff	KB705	Stor bekkenposisjoningsenhet (krever D-ringstroppe)
OM703	Omega hette	KB726	Stor polstret bekkenposisjoningsenhet i vinyl (krever D-ringstroppe)
OM806	Omega 380 Fullt sett av løse trekk	KB719	Stor polstret bekkenposisjoningsenhet i vinyl (krever D-ringstroppe)
OM801	Omega 430 Fullt sett av løse trekk	UL706	D-ringstroppe (lange)
OM807	Omega 510 Fullt sett av løse trekk	KB313	Universalt mobilbrett
OM802	Omega ryggmodul løse trekk		
OM803	Omega sete løse trekk		



FORSIKTIG

Bruk bare tilbehør som er anbefalt av Direct Healthcare Group sammen med Omega-stolen.

4. Produktinformasjon

4.1. Produktidentifikasjon

Hver enkelt stol har et unikt nummer som gjør det mulig å raskt identifisere den. Dette nummeret finnes på undersiden av setemodulen.

4.2. Hovedfunksjoner

Omega-stolen har en rekke funksjoner som gjør at brukeren kan få en god sittestilling.

- Manuell sammenkoblet ryggstøtte og variabel setevinkel
- Vipbart sete på fremre kant
- Robust, slitesterk ramme
- Modulkomponenter på rygg, armlener, sete og benstøtte
- Profilert ryggstøtte og sete
- Avtakbar benstøtte
- Ergonomisk plassert skyvehåndtak



5. Veiledning for beste praksis

For å sikre god praksis når du vurderer å kjøpe en Omega-stol og bruke den effektivt etter anskaffelse, anbefaler vi at følgende veiledning tas i betraktning:

- Søk råd og innspill fra en kvalifisert ergoterapeut, helsepersonell og/eller representant/forhandler for Direct Healthcare Group før første gangs bruk av stolen.
- Det bør vurderes å tilpasse stolens grunnleggende dimensjoner til brukerens størrelse, for å sikre god kroppsholdning, støtte, komfort og sikkerhet. Trykkbehandling, forflytning og håndtering, inkontinens eller infeksjonskontroll bør tas i betraktning, og du bør søke råd fra kvalifisert helsepersonell.
- Miljøfaktorer bør også tas i betraktning og vurderes, og potensielle risikoer eller farer bør identifiseres og tas i betraktning for å ivareta brukernes sikkerhet.
- Når en stol er spesifisert, anbefaler vi at det foretas en risikovurdering for å sikre at den vil være trygg og egnet for brukeren, og for alle som måtte befinne seg i nærheten av stolen. Det er viktig å foreta en regelmessig revurdering av om produktet er egnet for brukeren.
- Alle pleiere som skal føre tilsyn med brukeren må læres opp i trygg bruk av stolen for å sikre at korrekt posisjonering av brukeren blir oppnådd.

6. Anvisninger for bruk

Hensikten med disse anvisningene er å sikre trygg bruk, justering og vedlikehold av Omega-stolen.

Stolen er klar til bruk når den er ferdig installert i riktig posisjon, og alle pleiere/brukere har lest og forstått brukerhåndboken.

Denne brukerhåndboken inneholder ulike veiledninger, og det er operatørens ansvar å sørge for at disse blir fullt ut lest og forstått. Hvis du har spørsmål eller er usikker, kan du ta kontakt med din representant fra Direct Healthcare Group, forhandler eller Direct Healthcare Groups kundeserviceteam på **gratisnummer 0800 043 0881**.

Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.

6.1. Generell bruk

Produkter må **aldri** modifiseres eller endres etter kjøp, annet enn av autorisert personell fra Direct Healthcare Group.

Det er viktig at Omega-stoler brukes på riktig måte. Hvis det er noen tvil om produktets egnethet for en bruker, bør du søke profesjonell rådgivning fra kvalifisert helsepersonell som ergoterapeut, fysioterapeut, sårbehandler eller en forflytnings- og håndteringsspesialist.

Hvis du ønsker å ta opp sikkerhetsfaktorer mer detaljert, kan du ta kontakt med vårt kundeserviceteam på **gratisnummer 0800 043 0881**.

FORSIKTIG
Når stolen er i bruk må du alltid påse at brukerens sikkerhet sjekkes regelmessig, og at brukeren ikke er uten tilsyn i lengre tid.

ADVARSEL
Omega er ikke egnet for bruk av barn. Alle barn som befinner seg i nærheten av stolen, må til enhver tid være under tilsyn.

FORSIKTIG
Armlenene skal aldri slettes på.

ADVARSEL
Ikke skyv stolen opp eller ned trapper eller bratte hellinger, da dette kan føre til at du mister kontrollen.

ADVARSEL
Påse at det ikke er noe til stede som hindrer fri bevegelse av stolen, før stolen tas i bruk.

6.2. Sette opp Omega for bruk

Ved levering av stolen bør emballasjen fjernes forsiktig for ikke å skade møbeltrekket.

Bruksanvisningen bør leses av alle involvert i å bruke stolen.

VIKTIG
Ikke bruk skarpe gjenstander som saks eller kniv for å fjerne plastemballasjen fra stolen, da dette kan skade møbeltrekket.

6.3. Hjul

Florien Elite som standard utstyrt med fire hjul på 100 mm (4") med to svingbare hjul foran og to faste hjul bak, som ikke vil rulle eller svinge når bremsene er koblet inn.

For å **koble inn** hjulbremsene på hjulene med brems, presser du ned den **røde** fremre delen på bremsen.

For å **koble ut** bremsene, presser du ned den hevede toppen av den **røde** delen til den er på nivå med resten av hjulhuset.



ADVARSEL
Påse at hjulbremsene alltid er koblet inn når brukeren er uten tilsyn i stolen.

FORSIKTIG
Sjekk alltid at hjulene er ulåst før du flytter stolen.

ADVARSEL
Påse at hjulbremsene kobles inn når brukeren settes ned i eller tas ut av stolen, for å unngå at stolen beveger seg utilsiktet.

FORSIKTIG
Påse at det ikke er noe til stede som hindrer fri bevegelse av stolen før du kobler ut hjulbremsen og beveger stolen.

Retningsbestemte hjul (ekstrautstyr)

Det høyre bakhjulet er vanligvis det retningsbestemte hjulet, som kan identifiseres av den **grønne** platen. Således kan hjulet låses i retningen «rett frem», noe som gjør det lettere å skyve stolen i en rett linje.

- For å aktivere, presser du ned den **grønne** riflede delen. Skyv deretter stolen fremover for å aktivere retningslåsen. Den vil «klikke» på plass når den er i rett stilling.
- For å deaktivere det retningsbestemte hjulet, presser du ned den øvre kanten av den **grønne** delen til den er på nivå med toppkanten på resten av hjulet.
- Påse at retningslåsen er deaktivert før du manøvrerer stolen på trange steder.
- De andre tre hjulene vil være i låst posisjon (**rød** plate) som ikke vil rulle eller svinge når bremsen er koblet inn.



6.4. Sammenkoblet ryggstøtte og variabel setevinkel

Omega har sammenkoblet sete og rygg-vinkling som muliggjør en dypere sittende stilling da ryggen lenes tilbake samtidig om passende posisjonering av brukerens midseksjon sikres, samtidig som trykk omfordes og posisjon endres.

Ryggstøtte og setevinkel kan justeres manuelt ved å bruke gassbasert justeringshendelen på høyre side av skyvehåndtaket bak på stolen.

For å justere ryggstøtten og setevinkelen, klem forsiktig på hendelen og press hardt nedover med begge hender på skyvehåndtaket for å lene ryggen bakover.

- Når stolen beveges oppover eller nedover kan du når som helst slippe hendelen, og stolen låses i valgt posisjon.
- Løft skyvehåndtaket oppover mens du klemmer på håndtaket for å heve ryggen tilbake til sittende stilling.

FORSIKTIG
Det anbefales å bruke et magebelte eller bekkenposisjoneringseenhet (ekstrautstyr) for brukere som ikke er i stand til å sitte godt.

ADVARSEL
Påse at brukerens hender er borte fra stolryggen når stolen vipper, for å unngå fare for å komme i klem i vippemekanismen.

ADVARSEL
Påse at det ikke er noe til stede som hindrer fri bevegelse av stolen (f.eks. barn, kjæledyr eller harde gjenstander) før du bruker ryggstøtte og variabel setevinkel.



6.5. Benstøtte

Benstøtten er laget av skum og tre. De bakre hjulene på benstøtten har blitt satt inn for å gi bedre mobilitet og manøvrerbarhet.

Benstøtten er standard utstyr med fire 100 mm/4" hjul, med to svingbare hjul bak og to låsbare hjul foran. Hjulene vil ikke rulle eller svinge når bremsene er aktivert.

Benstøtten er festet til begge sider av stolen med sterke gummispenner (Aerolatch) for å sikre at benstøtten er godt festet til stolen, selv under ekstremt stress.

For å feste benstøttens spenne til stolen, må spennefestet på benstøttens stropp dras over brakettfestet som er på stolen. Dette gjelder begge sidene av fotstøtten.



Spennelåsen festes i brakettfestet og spennen må dyttes fremover til den klikker fast mot stolen. Dette bør gi sikkert feste av benstøtten til stolen. Kontroller låsene på begge sidene.

For å løsne benstøtten fra stolen, løft spennelåsen opp, og spennen vil åpne seg og frigjøre benstøtten.

Dette kan utføres på en eller begge sider av stolen.



ADVARSEL

Sørg for at Aerolatch er fullstendig sikret før du bruker benstøtten med stolen.

7. Tilbehør

Et utvalg av tilbehør er tilgjengelig for bruk med Omega-stolen. Ta kontakt med kundeserviceteamet på gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler, for gjeldende priser og tilgjengelighet.

Hvis du er usikker på om noe av tilbehøret er egnet for Omega-stolen, kan du søke råd og innspill fra en kvalifisert ergoterapeut, helsepersonell og/eller representant/forhandler for Direct Healthcare Group før du går til anskaffelse av det.

7.1. Skyvbar fotstøtte

Den skyvbare fotstøtten er utformet for å støtte brukerens føtter når benstøtten ikke er i bruk. For å bruke, dra fotstøtten ut til den er helt forlenget.

For å trekke inn, skyv fotstøtten helt tilbake, hvilket er viktig før en bruker flyttes til eller fra stolen.



FORSIKTIG

Bruk alltid den skyvbare fotstøtten for å støtte brukerens føtter under transport om benstøtten ikke er i bruk.



VIKTIG

Ikke stå på den skyvbare fotstøtten.

7.2. Vektet universalhodestøtte

Den vektede universalhodestøtten kan brukes sammen med Omega-stolen for å gi ekstra komfort, støtte og posisjonering for hodet til brukeren.

Plasser den vektede klaffen over toppen av ryggstøtten, og sett den i riktig høyde i henhold til brukeren. Normalt skal den være like over skuldrene. Vekten i hodestøtteklaffen sikrer at hodestøtten holder seg i posisjon.



7.3. Polstret hodestøtte

Den polstrede hodestøtten dekker over toppdelen av ryggstøtten og gir ekstra komfort og støtte.

Den polstrede hodestøtten bør dras helt ned over toppen av stolen for å unngå at den sklir eller glir.

7.4. Hette

Hetten er et beskyttende deksel som sklir over toppen av hodestøttedelen for å beskytte hodestøttedelen fra overdreven slitasje.

Hetten bør dras helt ned over toppen av stolen for å unngå at den sklir eller glir.

7.5. Magebelte og D-ring

Magebeltet hjelper med å stabilisere bekkenet og posisjonere brukeren mot stolryggen, for å oppnå en god sittestilling og redusere risikoen for vevskader som følge av forskyvning som kan oppstå hvis brukeren har en ustabil kroppsholdning.

Ved bruk av magebelte, må brukeren til enhver tid være under tilsyn i henhold til brukerens evner.

Alle magebelter må justeres riktig for å støtte brukeren tilstrekkelig, uten at det går utover evnen til å puste eller forårsaker ubehag.

Det er viktig at magebeltet ikke sitter løst rundt brukeren og ikke løsner over tid, da dette vil gjøre at bekkenet beveger seg bakover, og fører til at brukeren glir nedover og fremover i stolen, spesielt hvis den er i oppreist posisjon.

Ideelt sett bør D-ringfestene for magebeltet og selve magebeltet monteres på produksjonstidspunktet, men disse kan monteres i ettertid av en opplært representant (se D-ringfeste).

For en effektiv bruk av magebeltet, løsne spennen som fester de to halvdelene av stroppen ved å trykke på knappen på den midtre konsollen, og legg stropene over armlenene eller til siden på setet før du setter brukeren ned i stolen.

Når brukeren sitter i riktig posisjon, fester du sammen de to delene av spennen.

For å justere magebeltet, trekker du i plastbøylen for å holde brukeren på plass, men pass på at brukerens bevegelser ikke blir forhindret. Magebeltet er laget for å trekkes over hoftene i en vinkel på mellom 45° og 60°.

Denne vinkelen bidrar til å opprettholde bekkenet vertikalt, ved samtidig å posisjonere hoftelæddet ned og bakover.



D-ringfeste

Stolen kan være forhåndsutstyrt med D-ringstroppe hvis dette bestilles på produksjonstidspunktet. I så fall vil disse normalt være synlige like ved grensesnittet mellom setemodulen og ryggputen.

I dette tilfellet kan magebeltet festes til D-ringene ved å feste fjærklipsen på enden av magebeltet til den synlige D-ring.

Hvis stolen ikke allerede er utstyrt med D-ringer, bør disse festes til en stiv del av stolens metallramme på hver side av setemodulen, slik at de kan føres gjennom sete- og armmodulene.



ADVARSEL
Hvis magebeltet er for løst, er det fare for at brukeren glir ned eller til en uheldig posisjon. Magebeltet bør sjekkes regelmessig for at det sitter stramt nok. Du må være forsiktig slik at magebeltet ikke strammes for hardt, for å redusere faren for at brukeren blir skadet.

ADVARSEL
Stroppene og plastbeslagene bør sjekkes minst ukentlig for tegn på skade. Hvis noe er skadet, skal magebeltet ikke brukes.

ADVARSEL
Brukeren er i fare hvis magebeltet ikke er riktig spesifisert og tilpasset brukerens særegne behov.

ADVARSEL
Fremstøt, spasmer og kraftige bevegelser, samt at magebeltet delvis løsner, kan eksempelvis føre til skade på brukeren.

7.6. Bekkenposisjoningsenhet

Bekkenposisjoningsenheten brukes til å hjelpe med å posisjonere brukeren trygt mot stolryggen, for brukere med lav muskeltonus eller bekkenkontroll.

Montering av bekkenposisjoningsenheten på stolen

Sørg for at stolen er tom før du monterer bekkenposisjoningsenheten.



Plasser bekkenposisjoningsenheten i stolsetet med spennene pekende mot fronten av stolen, og med klipsene på spennene vendt ned.



Før stroppene gjennom D-ringene på hver side av setemodulen.



Plasser endene av stroppene over armlenene, slik at stolen er klar til at brukeren kan sette seg ned.



Plasser brukeren i stolen med bekkenet godt bakover i setet, og med baken på den bakre kanten av bekkenposisjoningsenheten.



Legg stroppene over brukerens lår og gjennom spennene i hver ende av bekkenposisjoningsenheten, som er plassert mellom bena til brukeren.



Trekk i stroppene slik at de sitter stramt, og lås fast klipsene på spennene. Passformen skal være tett, men ikke for stram og ikke for løs.

FORSIKTIG
Vær forsiktig når du justerer posisjoner, for å unngå at kroppsdeler setter seg fast eller kommer i klem.

ADVARSEL
Brukeren bør sjekkes regelmessig og bekkenposisjoningsenheten justeres for å sikre optimal posisjonering og sikkerhet.

ADVARSEL
Produktet skal bare justeres av en opplært eller ansvarlig person.

ADVARSEL
På grunn av risikoen for kryssinfeksjon, bør dette produktet ikke brukes av mer enn én person.

8. Gjenbruk

Omega-stolen er spesiallaget for den planlagte brukerens behov på produksjonstidspunktet, men med noen endringer og justeringer kan stolen utstedes og brukes på nytt i et pleiemiljø for flere brukere.

Søk råd fra en kvalifisert ergoterapeut, helsepersonell og/eller representant/forhandler av Direct Healthcare Group, før Omega-stolen brukes av en annen bruker som stolen opprinnelig ikke var spesifisert for.

ADVARSEL
Ved ny bruk av stoler, må du ta hensyn til risiko for kryssinfeksjon.

FORSIKTIG
Hvis Omega-stolen brukes i et flerbrukermiljø anbefales det å foreta en risikovurdering av situasjonen på stedet.

8.1. Moduler

Omega-stolen har en slitesterk ramme med en modulær arm, sete og fotstøtte, sammen med en profilert ryggstøtte. Disse komponentene kan kjøpes separat etter behov, enten for å erstatte en slitt modul eller pute, eller for å utstede stolen til en annen bruker.

Ta kontakt med kundeserviceteamet hos Direct Healthcare Group på **gratisnummer 0800 043 0881** eller din lokale forhandler, for gjeldende priser og tilgjengelighet.

8.1.1. Setemoduler

Dimensjonene på setemodulen blir innstilt på produksjonstidspunktet. Omega setemodulene er tilgjengelige i følgende setebredder, 380 mm (15"), 430 mm (17") eller 510 mm (20"), og følgende setelengder, 430 mm (17"), 470 mm (18,5") eller 500 mm (19,5").

Setemodulene er også tilgjengelige med tre nivåer av trykkavlastning:

- Dyna-Tek® Intelligent Air-setepute (for personer med høy risiko for trykksår eller med trykksår opp til grad IV).
- Intelli-Gel® -setepute (for personer med høy risiko for trykksår, eller som har trykksår opp til grad II).

Hvis det trengs en alternativ størrelse på setemodulen fra den opprinnelige spesifikasjonen, kan du kontakte kundeserviceteamet på **gratisnummer 0800 043 0881** eller din lokale forhandler, da dette vil ha innvirkning på stolens rygg-, armlene- og benstøttemoduler.

En opplært tekniker fra Direct Healthcare Group vil måtte komme på besøk for å sette på plass den erstattende setemodulen.

8.1.2. Ryggmoduler

Erstatnings-ryggmoduler kan kjøpes for Omega-stolen. Ta kontakt med kundeserviceteamet på **gratisnummer 0800 043 0881** eller din lokale forhandler for mer informasjon.

En opplært tekniker fra Direct Healthcare Group vil måtte komme på besøk for å sette på plass den erstattende ryggmodulen.

8.1.3. Armlenemoduler

Erstatnings-armlenemoduler kan kjøpes for Omega-stolen. Ta kontakt med kundeserviceteamet på **gratisnummer 0800 043 0881** eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Nødvendige spesifikasjoner til armmodulene for din stol avhenger av lengden på setemodulen som brukes i stolen. Sørg for at setelengden er oppgitt når du legger inn en ordre for erstatnings-armlenemoduler for å sørge for at bestillingen din ikke blir forsinket.

Om setelengden endres fra den originale spesifikasjonen til produsenten, må det tas hensyn til benstøtten da spennetilbehør muligens må flyttes for å imøtekomme en lengre setelengde, men vær oppmerksom på at dette vil gjøre de originale festehullene synlige.

En opplært tekniker fra Direct Healthcare Group vil måtte komme på besøk for å sette på plass erstatningen til armmodulen.

8.1.4. Benstøtte

Du kan kjøpe erstatning for benstøtteputer for Omega-stolen. Setebreddden og setelengden som skal brukes med dem må være spesifisert på produksjonstiden for å sørge for at Aerolatch-spennene kan festes rett til stolen. Ta kontakt med kundeserviceteamet på gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler for ytterligere informasjon.

8.2. Avhending av stolen

Omega-stolen består hovedsakelig av komponenter i metall, plast, tre, skum og stoff. Avhending av hvert enkelt materiale må gjøres i samsvar med miljø- og avfallsforskriftene i det aktuelle landet, og skal kun gjøres etter at stolen er helt demontert.



9. Stell og vedlikehold

Sjekk om det er tegn på skade eller overdreven slitasje hver gang stolen har vært brukt. Om stolen har tegn på overdreven slitasje, ta ut av drift med en gang og kontakt Direct Healthcare Group.

Kundeserviceteamet på gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler, for råd om reparasjon og overhaling.



ADVARSEL

Unnlatelse av å reparere skader eller slitasje kan føre til at brukeren blir skadet.

9.1. Levetid

Stolens levetid ved normal daglig bruk er 10 år. Rammen, unntatt hjulene og forbruksmateriell, har en garanti på 10 år. Møbeltrekket og annet forbruksmateriell som har en garanti på 12 måneder, som hjulene, kan måtte byttes ut innen denne tidsrammen.

Det anbefales at stolen inspiseres av en opplært servicetekniker hvert år, for å sikre en trygg bruk av produktet (se avsnitt 2. Retningslinjer for garanti).



ADVARSEL

Hvis det oppstår feil på stolen må du SLUTTE å bruke stolen, og du må ta kontakt med kundeserviceteamet hos Direct Healthcare Group på gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler for å få råd.

9.2. Periodisk kontroll

Hver gang stolen har vært brukt bør den sjekkes for tegn på skade eller overdreven slitasje, for å sikre at den kan brukes trygt og pålitelig.

Månedlige kontroller skal inkludere, men er ikke begrenset til:

- Skade på kablene eller justeringshendlene.
- Løse eller frakoblede deler.
- Sjekk hjulene for skader og smussdannelser.
- Skader på stoffet på stolen, inkludert tilsmussing av stoffet.

Hvis det er tegn til skader må du SLUTTE å bruke stolen, og du må ta kontakt med kundeserviceteamet hos Direct Healthcare Group på gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler for å få råd om reparasjon og overhaling.

9.3. Rengjøring

Stolen bør holdes ren for å bevare stolens levetid og utseende.

Regelmessig rengjøring er viktig for å minimere risikoen for kryssinfeksjon mellom brukere og pleiere, spesielt i et flerbrukermiljø.



ADVARSEL

Sjekk at stolen fungerer som den skal etter rengjøring.



ADVARSEL

Regelmessig rengjøring er viktig for å minimere risikoen for smitteoverføring mellom brukere og pleiere.



VIKTIG

For å redusere risikoen for smitteoverføring til pleieren, må det alltid brukes beskyttende hansker når stolen dekontamineres og rengjøres.

9.3.1. Rengjøring av rammen

Metallrammen kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.



VIKTIG

Det anbefales ikke å rengjøre stolen med skuresvamp.

9.3.2. Rengjøring av møbeltrekket



VIKTIG

Sjekk typen til møbeltrekket før rengjøring for å sikre at du bruker korrekt rengjøringsmiddel.

Rengjøringsanvisninger for vinyler av type Cadet, Venture, Berkshire og Brookland (ytre overflater)

Disse vinylene har høy ripemotstand og et ensfarget grunnstoff.

Antimikrobiell og soppdrepende. Testet i henhold til AATCC147.

- Regelmessig rengjøring og vedlikehold av stoffet vil opprettholde tilstand og utseende. De fleste flekker kan fjernes ved å tørke dem av.
- Den nye generasjonen mikrofiberkluter er svært effektive med eller uten såpe for generell pleie og vedlikehold.
- Tørk av regelmessig med en fuktig klut for å fjerne støvpartikler og lett tilsmussing.
- Fjern søl umiddelbart (innen 15 minutter) med en absorberende tørr klut.
- For tyngre tilsmussing, kan du forsiktig bruke en myk børste for å unngå skader på overflaten, sammen med lunke såpevann (ikke-alkalisk). Skyll av med rent vann. Tørk av med en absorberende klut.
- Kroppsvæske bør fjernes umiddelbart (innen 15 minutter) med kaldt vann, og deretter rengjøres som beskrevet ovenfor.
- For ekstrem tilsmussing/infeksjonskontroll kan du bruke en 5 % natriumhypoklorittløsning (blekemiddel).
- Må ikke vaskes i maskin eller renses.
- Ikke bruk poleringsmiddel eller løsemidler.

Enduralex® rengjøringsanvisninger for vinyl (ytre overflater)

Enduralex® -kontaktmaterialer er beskyttet av et Produralex-C®-lakkbelegg og er resistent mot daglig slitasje og kontakt med milde syrer, alkali, drikkevarer, husholdningsflekker.

- Bruk varmt såpevann og/eller Haz-tab eller Clor-Clean-løsning og en vanlig klut.
- Gni jevnt i retning av materialets tekstur.
- Skyll deretter med rent vann.
- Kan også damprenses.

IKKE BRUK blekemidler, løsemidler, slipemidler, vokspoleringsmidler eller aerosolspray.

Rengjøringsanvisninger for Dartex (brukerkontaktflater)

Generell veiledning

- Du må være oppmerksom på egenskapene til andre materialer som kan kombineres med Dartex Coatings-stoffer i den siste artikkelen (f.eks. dimensjonsstabilitet, fargebestandighet, vaskeanvisninger).
- Enkelte rynkedannelser på overflaten kan skyldes rengjøringsprosedyrer. Dette har ingen negativ innvirkning på stoffets egenskaper.
- Slipende rengjøringsmidler skal ikke brukes.

Vask og desinfisering

- Overfladisk smuss på belegget kan fjernes ved å tørke over med en myk klut fuktet med vann, som inneholder et nøytralt rengjøringsmiddel. Vanskeligere tilsmussing kan behandles ved å tørke av med alkohol eller terpentinerstatning, etterfulgt av varmt vann og rengjøringsmiddel.
- Rengjøring og desinfisering av belegget på stedet kan gjøres med lunke vann og et nøytralt rengjøringsmiddel eller en natriumhypoklorittløsning (0,1 % eller 1000 ppm tilgjengelig klor).
- Egne desinfeksjonsmidler kan brukes under forutsetning at produsentens anvisninger følges.
- Alle rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler må skylles grundig av, og den rengjorte delen må tørkes før lagring. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til akkumulering av reagens, noe som kan skade polyuretanbelegget, reagere med stolrammen eller gjøre biokompatibiliteten ved Dartex®-stoffet ineffektiv.

Tørking

- Det er viktig at alle deler tørkes grundig etter alle rengjøringsprosedyrer og før lagring.

Oppbevaring

- Lagres på et tørt og kjølig sted. Unngå for høyt trykk og kontakt med materialer som ikke er fargebestandige.

10. Tekniske data

10.1. Produsentens adresse

Direct Healthcare Group

Withey Court, Western Industrial Estate, Caerphilly, Storbritannia, CF83 1BF

Telefon: +44 (0) 800 043 0881

E-post: info@directhealthcaregroup.com

10.2. Maksimal vekt på brukeren

Maksimal vektgrense på brukeren er **150 kg**

Følg brukervektgrensen for Omega-stolen og vær oppmerksom på at garantien blir ugyldig, og brukersikkerheten kan bli kompromittert, hvis vektgrensen overskrides.

10.3. Vekt og dimensjoner på stolen

Element	Vekt (kg)	Mål (mm)
Omega 380 eller 430	47	1370 x 670 x 110
Omega 380 eller 430 + kartong + palle	64	1000 x 800 x 1450
Omega 380 eller 430 benstøtte	13	460 x 670 x 560
Omega 510	49	1370 x 750 x 1060
Omega 510 + kartong + palle	66	1000 x 800 x 1450
Omega 510 benstøtte	14	460 x 750 x 560
Pappkartong	7	1000 x 800 x 1300
Palle	10	1000 x 800 x 150

10.4. Produktstandarder

MHRA-registrering CA000105

10.4.1. Brennbarhetstesting

- BS 7176:2007+A1:2011 (Spesifikasjon for antennelsesmotstand for polstrede møbler for profesjonell bruk, ved testing av kompositter).
- BS EN 1021-1:2014 (Møbler. Vurdering av antenneligheten til polstrede møbler. Antennelseskilde – ulmende sigarett).
- BS EN 1021-2:2014 (Møbler. Vurdering av antenneligheten til polstrede møbler. Antennelseskilde samsvarer med flammeekvivalent).
- BS 5852:2006 (Testmetoder for vurdering av antenneligheten til polstrede sitteanordninger med ulmende og flammende antenneskilder).

10.4.2. Styrke, stabilitet, holdbarhet, risiko og sikkerhet

- BS EN 1022:2005 (Husholdningsmøbler. Sitteanordninger. Fastslåing av stabilitet).
- BS EN 16139:2013 (Møbler. Styrke, holdbarhet og sikkerhet. Krav til sitteanordninger for profesjonell bruk).
- BS EN ISO 14971:2012 (Medisinsk utstyr. Anvendelse av risikostyring for medisinsk utstyr).

10.4.3. Kvalitet og miljø



11. Kundeservice

Dersom du har spørsmål eller skulle oppleve problemer angående oppsett eller vedlikehold av Omega-stolen, kan du kontakte kundeserviceteamet på gratisnummer 0800 043 0881.



Intelligent Pressure Care
Spesialseter
Rental & Service Solutions

Direct Healthcare Group

Withey Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, Storbritannia
CF83 1BF

Tlf.: +44 (0) 800 043 0881

F: +44 (0) 845 459 9832

E: info@directhealthcaregroup.com

Stillehavsasia

Direct Healthcare Group PTY Ltd.
PO Box 562, Wembley
Western Australia 6913

Tlf.: +61 (0) 423 852 810

E: info@directhealthcaregroup.com.au



LIT-00040 Issue 1
Dato: Juni 2018

DIRECTHEALTHCAREGROUP.COM

