


**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

Assortiment drukverlichtende kussens

Gebruikershandleiding

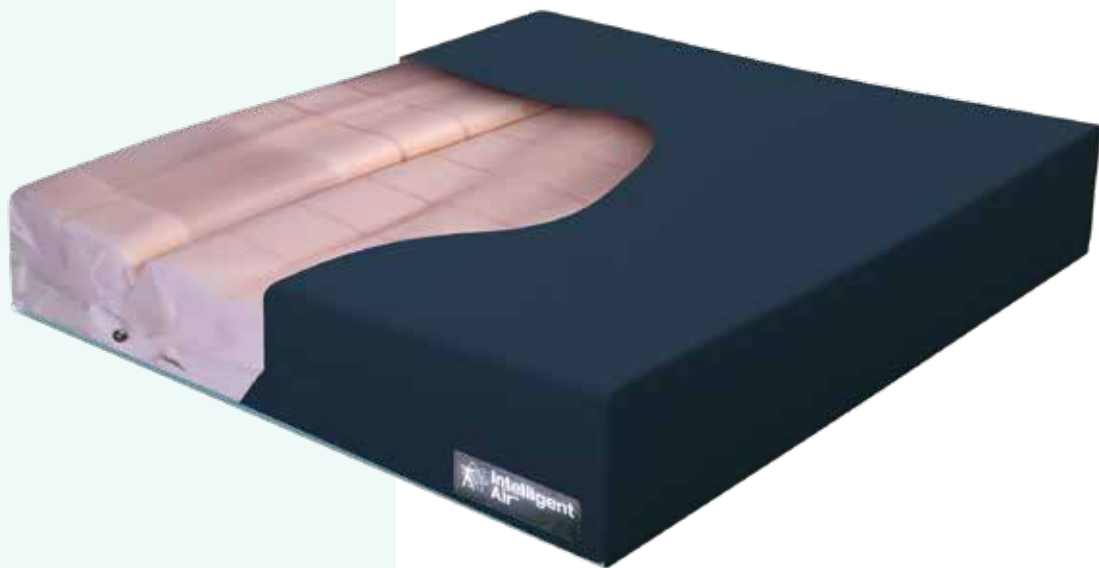

1. Overzicht

1.1 Productbeschrijving

De Dyna-Tek®, Dyna-Flex® en Transfo kussens zijn uniek ontworpen met superieure drukverlichtende eigenschappen.

Onze specialistische ontwerpen maken gebruik vanschium van medische kwaliteit met meerdere dichtheden die zijn ontworpen om de druk op het menselijk lichaam te verminderen. De hoezen zijn gemaakt van een waterdicht, uittrekbaar, vochtdoorlatend materiaal dat is ontworpen om de opbouw van zowel hitte als vocht te voorkomen. Raadpleeg de productdocumentatie voor meer details.

1.2 Symbolen

Waarschuwingen

In deze gebruikershandleiding worden waarschuwingen aangegeven met symbolen. De waarschuwingssymbolen worden vergezeld door een koptekst die de ernst van het gevaar aangeeft.

WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in ernstig letsel of overlijden als deze niet vermeden wordt.

VOORZICHTIG

Geeft een gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in matig of licht letsel als deze niet vermeden wordt.

BELANGRIJK:

Geeft een gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in schade aan eigendommen als deze niet vermeden wordt.

1.3 Symbolengids


		
NIET PRIKKEN OF SNIJDEN	OP DE LIJN DROGEN	NIET BLEKEN
		
NIET STOMEN	VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	NIET STRIJKEN
		
NIET IN DE BUURT VAN VLAMMEN HOUDEN	AANBEVOLEN 80°C	IN DE DROGER OP LAGE STAND, MAX 40°C
		
	ZIE VOOR HET GEWICHTSLIMIET DE TABEL MET TECHNISCHE GEGEVENS	

Gebruikershandleiding Assortiment drukverlichtende kussens

2. Gebruik

2.1 Bedoeld gebruik

Het assortiment van drukverlichtende kussens van Direct Healthcare Group is ontworpen voor zowel voorkoming als behandeling van decubitus en zijn bedoeld om te gebruiken met een stoel/rolstoel met de juiste afmetingen, als onderdeel van een algeheel programma ter voorkoming van decubitus.


 **WAARSCHUWING** Uw dokter dient te bepalen welk kussen voor u geschikt is en die zal ook bepalen wat het meest geschikte preventie- of behandelplan voor decubitus is en welke verpleegkundige procedures relevant zijn.


 **WAARSCHUWING** De volgende gebruikershandleiding moet gebruikt worden samen met de productdocumentatie en geeft u de instructies hoe u het beste resultaat kunt behalen met een van onze drukverlichtende kussens. Indien u echter meer informatie wenst, neem dan contact op met onze klantenservice via +44 (0) 800 043 0881.

2.2 Over de levering van uw nieuwe kussens


! BELANGRIJK Open de buitenste verpakking ten minste 1 uur voor gebruik voor de beste prestaties. Voer alle verpakking af volgens de geldende milieuvoorschriften.


2.3 Uw kussens gebruiken

 **VOORZICHTIG** Zorg voor gebruik van het kussen ervoor dat de stoel geen ruwe randjes heeft die het kussen kunnen beschadigen. Zorg dat de rits dicht is en dat de ritsflap de ritshelemaal bedekt. Vermijd contact met scherpe objecten die het kussen kunnen beschadigen.

 **WAARSCHUWING** Het gebruik van extra lagen tussen het kussen en de patiënt, zoals schapehuiden of andere gelijkwaardige items, kan de effectiviteit van de drukverlichtende eigenschappen van het kussen verminderen of kan inderdaad leiden tot een extra toename van de lichaamstemperatuur die huidmaceratie kan veroorzaken en wordt niet aangeraden. Zoek klinisch advies indien u een extra bedekking anders dan de door de fabrikant meegeleverde hoes bij het kussen wilt gebruiken.

Wees voorzichtig bij het gebruik van mechanische voorwerpen zoals een overbruggingsbord of andere transporthulpmiddelen en zorg dat er geen schade aan de kussenhoes ontstaat door scherpe of beschadigde randen.

 **WAARSCHUWING** Het maximum gebruikersgewicht van uw kussen hangt af van of het kussen goed past bij de patiënt. Zorg dat de billen van de patiënt niet over de randen van het kussen hangen tijdens het zitten, omdat dit betekent dat de patiënt te breed is voor de afmetingen van dit kussen. Kussens zijn beschikbaar in verschillende afmetingen.

 **WAARSCHUWING** Zorg dat het kussen met de juiste kant naar boven en in de correcte richting wordt geplaatst. Volg altijd de instructies op het label van het kussen. Gebruik het kussen niet zonder de door de fabrikant meegeleverde hoes.

2.4 Herpositionering patiënt

! BELANGRIJK Uw drukverdelende kussen biedt niet alleen de beste drukverdelende eigenschappen, maar biedt ook meer patiëntcomfort en een langere levensduur. Echter, om de opbouw van druk te voorkomen die kan leiden tot weefselschade en mogelijke vorming van maagzweren, is het belangrijk dat de patiënt zichzelf herpositioneert of regelmatig wordt geherpositioneerd.

Dit moet gebaseerd zijn op de klinische beoordeling van een gekwalificeerde gezondheidsprofessional die u een geschikt omdraairegime zal voorschrijven.

3. Schoonmaken en onderhouden

De manier waarop het kussen wordt schoongemaakt hangt af van de aard van de bevuilding en de vatbaarheid van de patiënt. Schoonmaken dient te gebeuren voor en na gebruik en tussen iedere patiënt.

3.1 Lichte bevuilding

! BELANGRIJK Bij de afwezigheid van ernstige bevuilding of ongewoon risico zou het verwijderen van vuil en lekkage met schoon warm water, neutraal wasmiddel en handmatige behendigheid voldoende moeten zijn. Echter, indien nodig kan de hoes afgenomen worden met een oplossing van hypochloriet, verdund tot 1.000 ppm beschikbaar chloor. Zorg dat de hoes met schoon water wordt afgespoeld en wordt afgenomen met een niet-schurende doek en grondig gedroogd wordt. Zorg voor voldoende ventilatie.

3.2 Zware bevuilding


! BELANGRIJK In het geval van ernstige bevuilding moet de kussenhoes eerst schoongemaakt worden met schoonmaakmiddel en water en dan met een oplossing van 1% hypochloriet (10.000 ppm). Goed afspoelen met schoon water en een vochtig, niet-schurend doekje voor eenmalig gebruik. Zorg voor voldoende ventilatie. Wegwerphandschoenen en een wegwerpschort dienen gebruikt te worden. Als er spetters kunnen voorkomen dient er ook oog/gelaatsbescherming gedragen worden. Na het verwijderen van de handschoenen moeten de handen gewassen worden.

3.3 Drogen

! BELANGRIJK Zorg dat de kussenhoes goed droog is voordat deze weer om het kussen wordt gedaan. Het is aangetoond dat vochtige omgevingen leiden tot bacteriële groei.

In een gemeenschappelijke omgeving kan het wenselijk zijn om de hoes te wassen nadat deze verwijderd is van de schuimkern. In zulke gevallen moet de hoes gewassen worden op niet meer dan 80 graden. Droog om te voorkomen dat de hoes krimpt deze in de droger op een temperatuur niet hoger dan 40 graden en voor niet langer dan 10 minuten. Hoezen moeten goed worden gedroogd voordat ze weer op het kussen worden gedaan.


3.4 Inspectie

 **WAARSCHUWING** Inspecteer regelmatig de binnenkant en buitenkant van de hoezen en de ritsluiting op tekenen van schade. Als de hoes bevlekt, bevuild of gescheurd is, moet het schuim onderzocht worden op contaminatie. Beschadigde/bevuilde hoezen en schuim moeten gemeld worden bij de afdelingsmanager.

Als de kern van het kussen nat of ernstig beschadigd is, moet het kussen uit de roulatie genomen worden. Wij bevelen aan dat de stoel ook schoongemaakt wordt tussen iedere patiënt.


4. Onderhoud

4.1 Audit

 **VOORZICHTIG** Het is aanbevolen dat een audit van alle kussens op een afdeling ten minste eenmaal per half jaar wordt uitgevoerd. In een gemeenschappelijke omgeving moet na gelijkwaardige periodes en tussen iedere wisseling van patiënt een audit ook overwogen worden. Informatie over hoe een audit uit te voeren op uw kussens, inclusief hoezen, luchtcellen en drukkleppe is beschikbaar via Direct Healthcare Group.

5. Na gebruik

5.1 Opslag

 **VOORZICHTIG** Kussens kunnen beschadigd raken als ze niet correct worden opgeslagen. Het wordt aangeraden uw kussens van de vloer in een schone droge omgeving op te bergen. Sla het kussen niet op in de buurt van hittebronnen zoals elektrisch vuur of radiatoren. Indien mogelijk moet het kussen met een beschermhoes worden opgeborgen.

5.2 Hergebruik

! BELANGRIJK Een schoonmaakregister dient te worden bijgehouden als onderdeel van het schoonmaakstelsel. Het product is geschikt voor herhaaldelijk gebruik. Het aantal keren dat het gebruikt kan worden hangt af van hoe vaak en op welke manier het product gemaakt wordt. Voor hergebruik moet het product grondig schoongemaakt worden in overeenstemming met de voorschriften.

5.3 Afvoeren

! BELANGRIJK Het afvoeren en recyclen van gebruikte apparaten en verpakking moet in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving in ieder land.

6. Kwaliteit en Testen

6.1 Levensduur

Wij verwachten een levensduur tot vier jaar voor deze producten, mits deze gebruikt worden in strikte overeenstemming met het beoogd gebruik zoals in dit document vermeld en aan alle onderhouds- en dienstvereisten voldaan is.

De verwachte levensduur kan verlengd worden als het product zorgvuldig gebruikt en juist onderhouden wordt en dat technische en wetenschappelijke vooruitgang niet resulteren in technische beperkingen. De levensduur kan ook significant verkort worden door extreem of onjuist gebruik. Het feit dat wij een levensduur verwachten voor deze producten resulteert niet in extra garantie.

6.2 Garantietermijnen

Raadpleeg de productdocumentatie van uw kussens voor de garantietermijn. De garantie van uw kussens is geldig van het moment van verzending. Als een defect of fout ontdekt wordt, neem dan contact op met onze klantenservice via +44 (0) 800 043 0881.

6.3 Brandproef

Direct Healthcare Group producten worden aan een onafhankelijke brandproef onderworpen. Hoezen in naleving van BS EN 7175. Kussens zijn in naleving van BS EN 597-1:1995, BS EN 597-2:1995 en, indien van toepassing BS 7176 laag of medium gevaar.

6.4 Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteit is fundamenteel voor het functioneren van het bedrijf, dat opereert binnen de disciplines van BS EN ISO 9001:2008 en ISO 13485:2012. Alle Direct Healthcare matrasproducten hebben het CE-keurmerk, in overeenstemming met de Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

Er is alle inspanning verricht om te zorgen dat de inhoud van deze publicatie helemaal actueel is op het moment van drukken. Als onderdeel van ons continue verbeteringsproces behoudt Direct Healthcare Group zich het recht voor om bestaande modellen op elk moment te wijzigen.

7. Technische gegevens

Product	Garantie	Brandproef	Kwaliteit en kleur	Nominaal bereik dichtheid (kg/m ³)	Nominaal bereik hardheid (N)	Maximum gewicht gebruiker (kg)	Productgewicht (kg)
Dyna-Tek™ gelkussen	2 jaar	BS7176	Blauw	Schuim 34	100	159	3
Dyna-Tek™ kussen	2 jaar	BS7176	Beige RX 36 / 125	34 – 36	125	127	1
Dyna-Tek™ superieur	2 jaar	BS7176	Beige RX 36 / 125 Blauw RX 39 / 200	34 – 36	125	127	1.3
Dyna-Tek™ Posture Visco	2 jaar	BS7176	Wit nvt. Blauw RX 39 / 200	Visco 60 Schuim 38 - 40	Nvt.	178	1.3
Dyna-Tek™ uil	2 jaar	BS7176	Beige nvt.	40 – 45	250 / 260	152	1.3
Dyna-Flex™ kussen	2 jaar	BS7176	Wijnrood	Visco 55 – 60 CME Base 38 – 40	200	152	1
Dyna-Tek™ Profle	1 jaar	BS7176	Lichtblauw	CME-basis38 – 40	200	114	>1
Transfo kussen	2 jaar	BS7177	Wit	40 – 60	N / A	178	2.5
Dyna-Tek™ Intelligent-Air	2 jaar	BS7176	Zwart	38 – 40	120	152	2

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®



VK en Europa

Direct Healthcare Group
Withey Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, UK
CF83 1BF
T: +44 (0) 800 043 0881
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com

Asia Pacific

Direct Healthcare Group PTY Ltd.
PO Box 562, Wembley
Western Australia, 6913
T: +61 (0) 423 852 810
info@directhealthcaregroup.com.au
www.directhealthcaregroup.com