



Les RoMedicClips sont utilisés pour faciliter le positionnement du patient. Ils sont conçus de manière à pouvoir être utilisés sur tous les draps de transfert et la plupart des étriers de levage. Les RoMedicClips s'utilisent par paires et se placent de chaque côté de l'étrier de levage.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



## Contrôle de fonctionnement

### Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



## Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.


Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes.

Utiliser un étrier de levage éprouvé.

## Utilisation des RoMedicClips

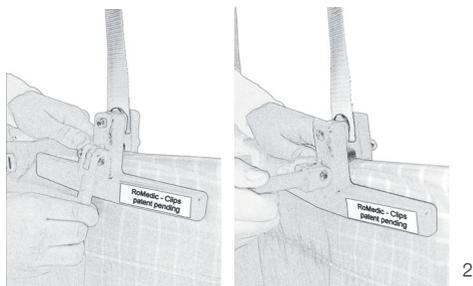

1. Placer d'abord les RoMedicClips sur l'étrier de levage en passant les œillets d'accrochage sur les crochets de l'étrier de levage.

Plier le drap de transfert à l'endroit où le clips devra être placé.

2. Avant le positionnement, enfiler un morceau du côté du drap de transfert dans l'ouverture du clips. Placer le clips aussi près que possible de l'utilisateur, surtout si la hauteur de levage est réduite.

Pincer le drap de transfert entre le clips en faisant passer le levier de blocage de la position ouverte à verrouillée.

La largeur de pincement dans le clips se règle en faisant tourner le levier de blocage.

3. Lever l'auxiliaire de levage dès que le patient est prêt à être positionné. Faire attention pendant cette phase et interrompre la manœuvre si quelque chose semble anormal.

Terminer le positionnement une fois que le patient est en position voulue.

## Conseils d'entretien :

Au besoin, nettoyer les RoMedicClips avec de l'eau chaude ou de l'alcool à brûler.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site [www.handicare.com](http://www.handicare.com) pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB  
Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299  
SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

