

# EasySlide

SystemRoMedic™

**Säker  
och enkel**  
**Förebygger  
trycksår**

**EasySlide** var det allra första hjälpmedlet i SystemRoMedic och sedan 1984 har glidmattan, med stor framgång, använts på sjukhus och sjukhem runt om i världen. Vårt eget unika glidmaterial, ULF (Ultra Low Friction), på glidmattans insida minskar friktionen och gör det möjligt för medhjälparen att, med ett yttre enkelt handgrepp och minimalt med kraft, förflytta brukare på i stort sett vilket underlag som helst. Helt utan onödiga lyft ger EasySlide en skonsam och bekväm förflyttning, både för brukare och för medhjälpare. Efter alla dessa år är EasySlide fortfarande det perfekta och mest populära hjälpmedlet för säkra och enkla överflyttningar och för positionering i säng.



**handicare**



För liggande överflyttning - EasySlide 1030



För positionering  
och liggande överflyttning - EasySlide 1220

## Enkla överflyttningar, både för brukare och för medhjälpare.

EasySlide (190 x 60) används primärt för liggande överflyttning, till exempel mellan säng och röntgen- eller operationsbord, duschkvagnar, bårar eller liknande. EasySlide är också ett mycket effektivt hjälpmedel för vändning av brukare i säng eller på röntgen- eller operationsbord. Vårt eget unika glidmaterial, ULF (Ultra Low Friction), på glidmattans insida minskar friktionen och gör det möjligt för medhjälparen att, med ett ytterst enkelt handgrepp och minimalt med kraft, förflytta brukare på i stort sett vilket underlag som helst. Helt utan onödiga lyft ger EasySlide en skonsam och bekväm förflyttning, både för brukare och för medhjälpare.

- Mjuk, vadderad utsida ger bekväma och skonsamma förflyttningar.
- Glidmaterialet ULF reducerar friktionen under brukaren.
- Skyddsodral och engångsskyddsodral finns som tillbehör.
- Det avtagbara skyddsodralet har kolfiberinlag som minskar den statiska elektriciteten.

## Att kunna vända sig i sängen ökar livskvaliteten.

EasySlide (100 x 70) används i första hand till bara lätt vårdkrävande brukare som behöver kunna vända och förflytta sig i sängen. Den passar bäst på ett strävt underlag.

EasySlide minskar friktionen mot både skuldra och höft vilket, i sin tur, reducerar risken för trycksår. Tack vare de här egenskaperna är EasySlide mycket skonsam för smärtekänsliga brukare men även för medhjälparna som slipper tunga lyft.

EasySlide främjar egenaktiviteten vilket ger ökad livskvalitet för brukaren.

- Mjuk, vadderad utsida ger bekväma och skonsamma förflyttningar.
- Glidmaterialet ULF reducerar friktionen under brukaren.
- Skyddsodral och engångsskyddsodral finns som tillbehör.
- Det avtagbara skyddsodralet har kolfiberinlag som minskar den statiska elektriciteten.





För positionering - EasySlide 1430



För positionering och sittande överflyttning - EasySlide 2020

## Varje trycksår vi kan undvika gör livet lättare för sängbundna personer.

EasySlide (140 x 90) används i första hand till normalviktiga personer, med lätta till svåra funktionshinder, som har svårt att själva medverka vid vändningar. De här personerna ligger oftast permanent i sängen varför det är viktigt att förebygga trycksår. Detta gör EasySlide genom att minska friktionen mot skuldror, höft och huvud vid vändning samtidigt som det är lätt att vända brukaren så ofta som det behövs. EasySlide är mycket skonsam för smärtekänsliga personer och dessutom får medhjälparna en lättare arbetsdag tack vare färre tunga förflyttningar.

EasySlide (200 x 90) har extra mycket vaddering för att ytterligare minska riskerna för trycksår. Vadderingen fördelar trycket över hela kroppen och reducerar tryck, friktion och risken för skjuv mot de speciellt sårbara punkterna: skuldror, höfter, huvud och fötter. Denna version av EasySlide används i första hand till personer som är sängbundna, med svåra eller grava funktionshinder, ofta på intensivvårdsavdelningar. Genom att minska friktionen under brukaren kan vändningarna utföras enkelt och smärtfritt för både brukare och medhjälpare.

- Utsidan är gjord av mikrofibrer som är behagliga mot kroppen. Detta är speciellt viktigt för brukare som ligger permanent i sängen och för brukare med smärtor.
- Insidan är gjord av vårt unika glidmaterial ULF (Ultra Low Friction), som minskar friktionen under brukaren och gör att det krävs mycket lite kraft för att utföra en vändning.
- Dessa material är mjuka, behagliga och lätta och kan därför ligga permanent i sängen.
- Glidmattan fästs med två eller fyra fästband så att den ligger rätt i sängen.
- God hygien är en faktor som också bidrar till förebyggande av trycksår och därför finns skyddsfodral och engångsskyddsfodral som tillbehör.
- Det avtagbara skyddsfodralet har kolfiberinslag som minskar den statiska elektriciteten.
- EasySlide för positionering finns i två längder: 140 cm och 190 cm.



För positionering - EasySlide 1470

## Försvinnande litet hjälpmedel som ger överraskande stora möjligheter.

EasySlide (50 x 60), (50 x 70) och (25 x 60) är förträffliga hjälpmedel för vändning i säng, för positionering högre upp i sängen, för att komma ur sängen eller för överflyttning från säng till rullstol. EasySlide är ett litet, praktiskt hjälpmedel som uppmuntrar och ger stora möjligheter till aktivering. För medhjälparen innebär EasySlide att de onödiga lyften försvinner, vilket skonar både rygg och axlar. EasySlide är även ett smidigt hjälpmedel som gör det lättare, för gravida kvinnor med foglossning och ryggbesvär samt för personer med lätta funktionshinder, att själva kunna vända sig i sängen.

- Mjuk, vadderad utsida ger bekväma och skonsamma förflyttningar.
- Yttermaterialiet finns i två varianter: polyester och mikrofiber. Polyestervarianten är mindre känslig för smuts medan mikrofibervarianten är skönare för en brukare som ligger länge på glidmattan.
- Glidmaterialiet ULF reducerar friktionen under brukaren.
- Skyddsfodral och engångsskyddsfodral finns som tillbehör till EasySlide (50 x 60) och (50 x 70).
- Det avtagbara skyddsfodralet har kolfiberinslag som minskar den statiska elektriciteten.
- EasySlide för positionering och sittande överflyttning finns i tre storlekar.




















EasySlide hjälper brukare att komma högre upp i säng.



## PRODUKTSPECIFIKATION

EasySlide finns i flera olika versioner och storlekar för olika förflyttningssituationer och brukarbehov. EasySlide är tillverkad av mikrofiber (polyester i 2010, 2011, 2015) med vaddering av polyester och ULF (Ultra Low Friction), vårt eget unika glidmaterial. De flesta storlekar kan försees med ett utbytbar skyddsodral som är tillverkat av polyester och som är enkelt att rengöra. Engångsskyddsodral av plast ger ännu bättre hygien och mindre tvätt. Allt sammantaget; efter alla dessa år är EasySlide fortfarande det perfekta och mest populära hjälpmedlet för säkra och enkla överflyttningar och för positionering i säng.

	Art. nr.	Produkt	Beskrivning
<b>För liggande överflyttning</b>  EasySlide 1030	1020	EasySlide	190 x 60 cm
	1030	EasySlide (1020 + 1051)	190 x 60 cm, komplett
	1051	Protective cover	Skyddsodral för 1020, 1030
	1055	Disposable cover	Engångsskyddsodral för 1020, 1030, 2 x 50 st
	1151	Protective cover	Skyddsodral för 1120*, 1130*
	1155	Disposable cover	Engångsskyddsodral för 1120*, 1130*, 2 x 90 st
*1120, 1130 EasySlide (100 x 60), har utgått ur sortimentet			
   			
<b>För positionering och liggande överflyttning</b>   EasySlide 1220    EasySlide 1430   EasySlide 1470	1220	EasySlide	100 x 70 cm
	1230	EasySlide (1220 + 1251)	100 x 70 cm, komplett
	1420	EasySlide	140 x 90 cm, 2 fästband
	1430	EasySlide (1420 + 1451)	140 x 90 cm, 2 fästband, komplett
	1470	EasySlide	200 x 90 cm, 4 fästband
	1480	EasySlide (1470 + 1481)	200 x 90 cm, 4 fästband, komplett
	1251	Protective cover	Skyddsodral för 1220, 1230
	1255	Disposable cover	Engångsskyddsodral för 1220, 1230, 2 x 90 st
	1451	Protective cover	Skyddsodral för 1420, 1430
	1481	Protective cover	Skyddsodral för 1470, 1480
1599	LockingStrap	Fästband, 1 par, reservdel för 1420, 1430, 1470, 1480	
   			
<b>För positionering och sittande överflyttning</b>   EasySlide 2015    EasySlide 2020	2010	EasySlide	50 x 60 cm, polyester
	2020	EasySlide	50 x 60 cm, mikrofiber
	2030	EasySlide (2020 + 2051)	50 x 60 cm, mikrofiber, komplett
	2011	EasySlide	50 x 70 cm, polyester
	2021	EasySlide	50 x 70 cm, mikrofiber
	2015	EasySlide	25 x 60 cm, polyester
	2051	Protective cover	Skyddsodral för 2010, 2020, 2030
	2052	Protective cover	Skyddsodral för 2011, 2021
2055	Disposable cover	Engångsskyddsodral för 2010, 2020, 2030, 100 st	
  			

### Tillbehör



1085      WallRack      75 x 35 x 17 cm

WallRack är ett väggstativ som ger enkel och bekväm förvaring av glidmattor och engångsskyddsodral.

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

**Överflyttning**, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

**Stöd**, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.



**Handicare AB**  
 Veddestavägen 15,  
 Box 640, 175 27 Järfälla  
 Tel: 08-557 62 200  
 Fax: 08-557 62 299  
 www.handicare.se  
 info@handicare.se