


# Quick guide V4+



## Når VENDLET V4+ brukes som sengehest

1. Sengoverflaten må være vannrett.
2. Fjern sengehestene av plast og heng dem på mellomstangen.
3. Løs ut den røde stoppknappen.
4. Trykk på den grønne timerknappen. Timer lyset er grønt og VENDLET V4+ kan brukes i 90 sekunder.
5. Pasienten vendes ved å benytte håndbetjeningen:

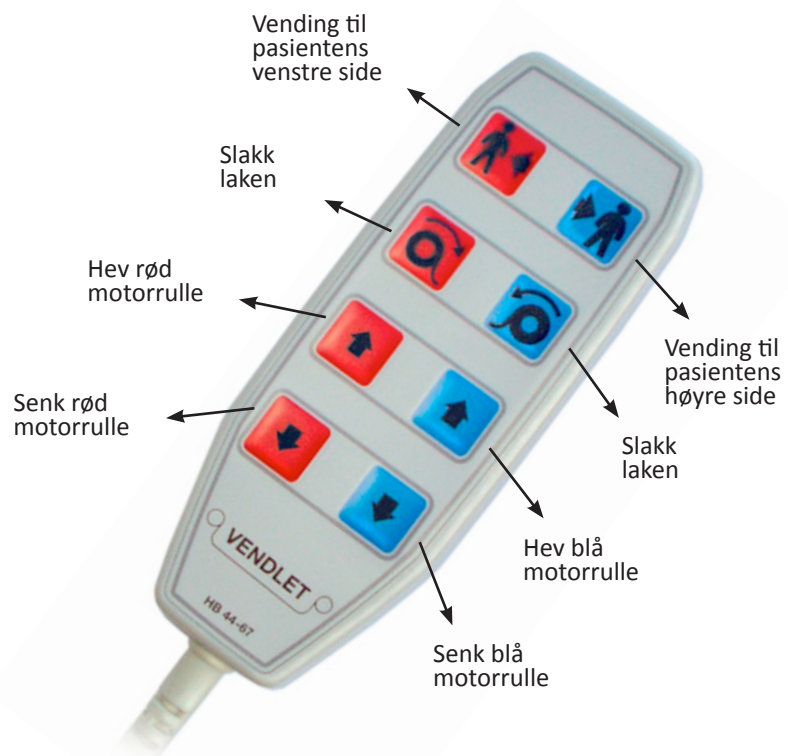

6. Motorrullene kan senkes ved pleie av pasienten i seng.
7. Dersom motorrullene er blitt senket i forbindelse med pleie av pasienten, skal disse heves etter bruk.
8. Monter sengehestene av plast – 2 på hver side. Se veiledning for sengehest.
9. Trykk på den røde stoppknappen.

**Under forflytningen holdes fokus på pasienten.**



**Distributør:**

**Handicare AS**  
Telefon 03250  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)

**VENDLET skal monteres og brukes som beskrevet i manualen.**




# Quick guide V4+

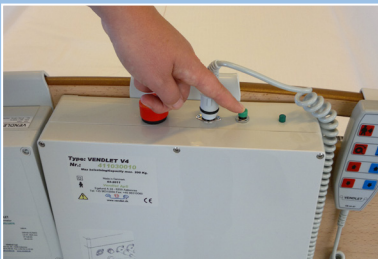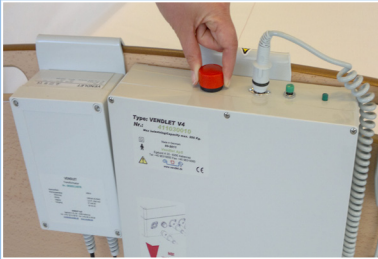

## Når VENDLET V4+ IKKE brukes som sengehest

1. Sengoverflaten må være vannrett.
2. Løs ut den røde stoppknappen.
3. Hev motorrullene på begge sider.
4. Trykk på den grønne timerknappen. Timer lyset er grønt og VENDLET V4+ kan brukes i 90 sekunder.
5. Pasienten vendes ved å benytte håndbetjeningen:

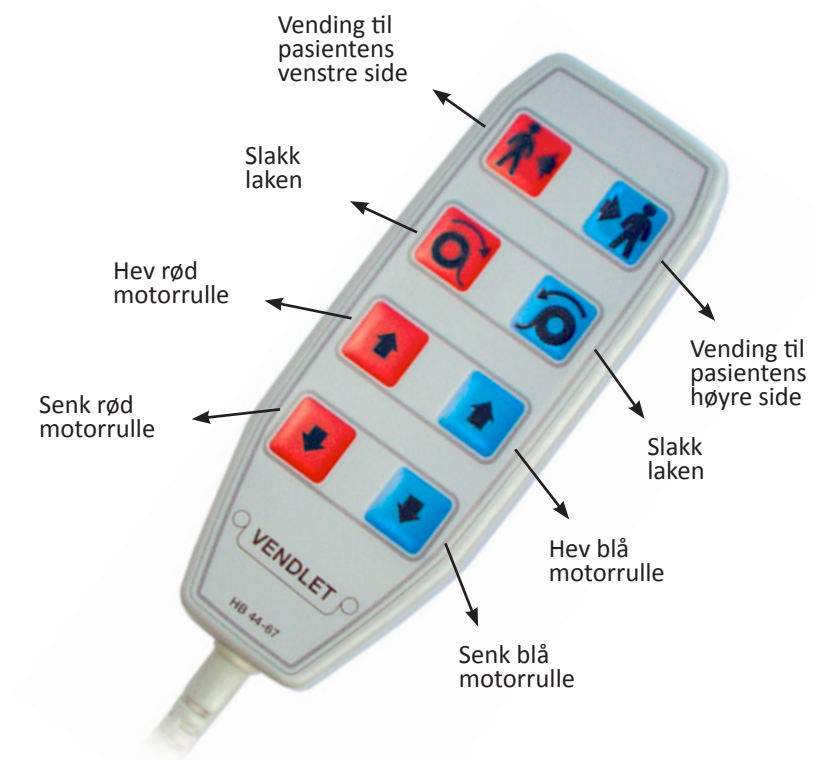

6. Etter vendingen senkes motorrullene på begge sider.
7. Trykk på den røde stoppknappen.

**Under forflytningen holdes fokus på pasienten.**

**VENDLET skal monteres og brukes som beskrevet i manualen.**

**Distributør:**

**Handicare AS**  
Telefon 03250  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)