




Funke Medical AG  
Ährenfeld 10  
46348 Raesfeld  
Tel.: +49-2865-6648  
Fax: +49-2865-8133  
info@funke-medical.de  
www.funke-medical.de  
-GERMANY-

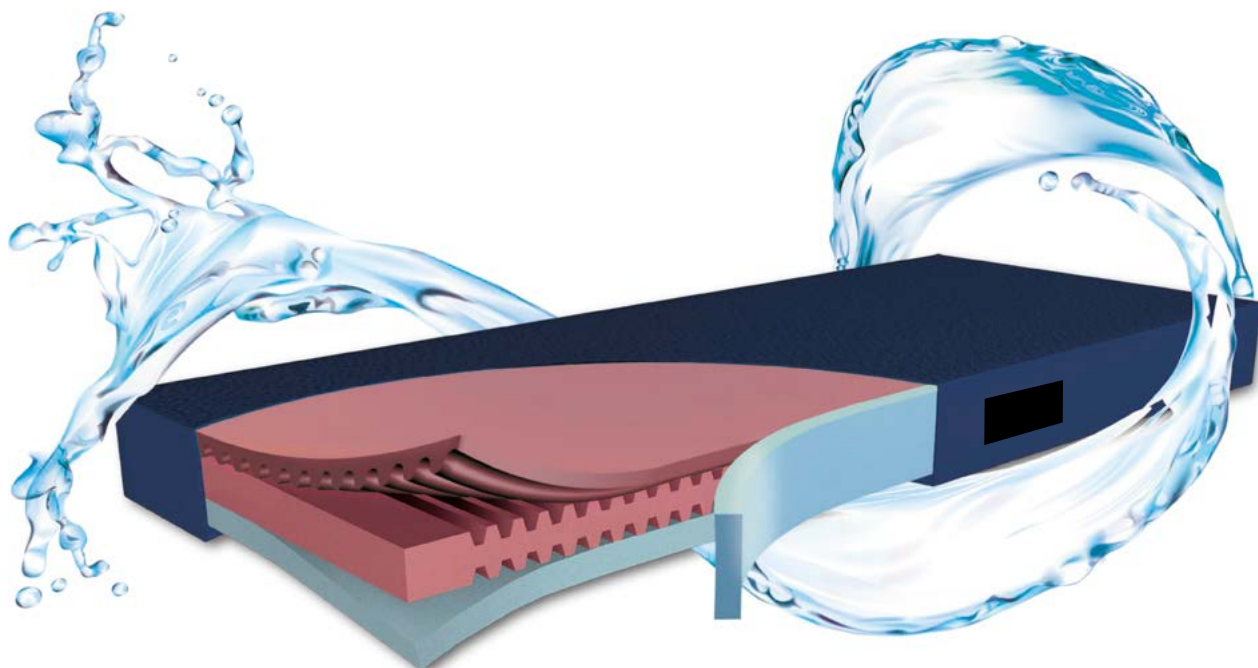

# Hyper Foam 2 Clinic/GATE

## Bruksanvisning

Tryckavlastande skummadrass

Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av produkten.

**PRS**   
Pressure Relieving Solutions

Återförsäljare:

**Direct Healthcare  
Group**

Advancing Movement & Health\*

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 08-557 62 200  
Direct Healthcare Group AB  
Torshamnsgatan 35 | S-164 40 Kista  
info.se@directhealthcaregroup.com  
www.directhealthcaregroup.com

## Produkt

Tryckavlastande skummadrass med blått PU-TEX överdrag med bärhantag, dragkedja och svetsade sömmar.

## Användningsområde

Madrassen kan användas förebyggande och vid behandling av trycksår upp till och med sårkategori 2 samt vid smärterapi.

## Brukarvikt

0 – 150 kg

## Teknisk data

Densitet: Botten 35 kg/m<sup>3</sup> Mellan/Topp 50 kg/m<sup>3</sup>

Material i överdrag: Polyurethane + polyester

Vikt: ca 12 kg (90 x 200 x 15 cm)

### Rengöring och underhåll

Torka av överdraget med desinfektionsmedel (DAX, Virkon, Perform eller liknande).

Vid behov tvätta överdraget i maskin.



Produkten är CE märkt enligt Medical Devices Regulation 2017/745.

## Brandtest

Brandtest enligt SS8760001:2016

## Biokompatibilitet

SS EN ISO 10993-5 ; SS EN ISO 10993-1

## Instruktioner för användning och förvaring

Lägg madrassen direkt på sängbotten med trycket uppåt. Madrassen har ingen särskild huvud/fotända. Förvara madrassen plant i torrt och rent utrymme.

## Säkerhetsanvisningar

Lämplig för sängar med justerbar liggyta.

## Återvinning/Kassering

Madrasserna består till 100% av PU. Lämnas till återvinningsstation och sorteras som brännbart avfall.