

# Vejledning

Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

**BEMÆRK:** Sæt vejledningen tilbage, når du har læst den.

## VED HJERTELUNGEREDNING:

**Sluk for enheden på standbyknappen, og start hjertelungeredning med det samme uden at lukke luften ud af cellerne.**



Tryk på **standbyknappen** for at tænde for enheden og påbegynde tilpasning til driftstilstanden **Normal**. Lad enheden tilpasse sig til driftstilstanden **Normal** uden en patient. Tryk på knappen igen for at slukke for enheden uanset aktiv driftstilstand.



**Aktiver og deaktivér tastaturlås.** Tryk på knappen og hold den inde i tre (3) sekunder for at låse enhedens tastatur, hvis det er nødvendigt. Tryk på knappen og hold den inde i tre (3) sekunder igen for at låse tastaturet op.



**Funktionen til bekræftelse af informationssignaler** slår enhedens informations-signaler fra. **Det hørbare signal bekræftes med et enkelt tryk, mens de visuelle signaler bekræftes ved at holde knappen inde i mindst tre (3) sekunder.** Gør dig bekendt med de forskellige fejlsituationer, der er beskrevet i brugervejledningen. På bagsiden af hurtigvejledningen kan du finde et eksempel på fejlfinding.



Brug driftstilstanden **Normal i alle liggende stillinger**. Det er madrassens grundlæggende driftstilstand, som controlleren automatisk aktiverer ved opstart.



Driftstilstanden **Lydløs** kan vælges i en situation, hvor du vil minimere driften af enhedens styrecykluser og pumpefunktion, f.eks. om natten, når patienten sover. Otte (8) timer efter valg af driftstilstanden **Lydløs** vender enheden automatisk tilbage til driftstilstanden **Normal**.



Driftstilstanden **Liggende** bruges kun til behandling af immobile patienter i **vandret stilling, der ligger på ryggen**. I dette tilfælde tilpasser madrassystemet sig til den lavest mulige trykindstilling. **BEMÆRK: Sørg for, at patienten ligger vandret på ryggen, når du vælger denne driftstilstand.**



Driftstilstanden **Siddende** er beregnet til patienter i siddende stilling. Den bageste del af sengen hæves til en vinkel på mere end 30 grader. En time efter valg af denne driftstilstand afgives et informationssignal, som advarer personalet/brugeren om øget risiko for tryksår.



Driftstilstanden **Fast** gør madrassen hård under behandling. Controlleren genoptager automatisk driftstilstanden **Normal** efter 30 minutter, hvis der ikke foretages et andet valg. **BEMÆRK: Når madrassen gøres hård, mindskes dens trykreduktionskapacitet.**



LED'er fra venstre mod højre: **strømkabel tilsluttet, batteridrift, Bluetooth-forbindelse.**


# Vejledning

Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

**BEMÆRK:** Sæt vejledningen tilbage, når du har læst den.

Eksempel på fejlfinding - lækage i slangesystemet eller de indre celler.

Kontroller luftslangerne.  
Se den aftagelige hurtig-  
vejledning

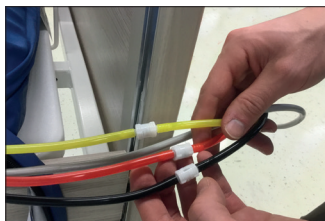

3 s.

1. Controlleren afgiver et hørbart signal, og den tekst, der er vist her til venstre, vises på displayet. LED'erne i et indstillingsområde (som angivet med farver, der svarer til slangernes farver) lyser i orange nuancer.
2. Kontroller først, om Sixtube-tilslutningen, der er tilsluttet controlleren, er låst på plads, og om de påsatte slanger er placeret i holderne.



Optima7080/Optima8590/OptimaBario



OptimaCot/OptimaJuve

3. Åbn slangemuffen, og kontroller, om slangerne mellem cellerne og controlleren er forbundet til tilslutningerne. Kontroller også, at farverne stemmer overens (f.eks. sort på sort).
4. Hvis du konstaterer, at der er løse slanger, skal du forbinde dem til hinanden efter behov. Se brugervejledningen for at få mere detaljerede oplysninger efter behov. Luk herefter slangemuffen.
5. Tryk på knappen til nulstilling af informationssignalet og hold den inde i tre (3) sekunder for at bekræfte signalet. Kontroller, at madrassystemet tilpasser sig korrekt til den valgte driftstilstand.

Hvis informationssignalet ikke ophører herefter, skal du kontakte Carital®-service