

Pikakäyttöohje

Opera II

HUOM! Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

ELVYTYSTILANTEESSA:

Sammuta laite valmiustilapainikkeesta ja aloita elvytys välittömästi tyhjentämättä kennostoa.



Valmiustila-näppäintä painamalla laite käynnistyy. Säätolaitte testaa toimintavalmiuden ja odottaa 15 minuuttia halutun toiminnon valintaa. Mikäli mitään toimintoa ei ole valittu, laite antaa informaatio-signaalin. Painamalla näppäintä uudestaan laite sammuu huolimatta käynnissä olevasta toiminnosta.



Näppäimistön lukitus ja avaus. Painamalla näppäintä kolme (3) sekuntia yhtäjaksoisesti voidaan laitteen näppäimistö lukita tarvittaessa. Painamalla yhtäjaksoisesti uudelleen kolme (3) sekuntia, lukitus purkautuu.



Informaatio-signaalin kuittaustoiminnolla sammutetaan laitteen informaatio-signaalit. **Äänisignaali kuittaautuu yhdellä painalluksella ja visuaaliset signaalit kolmen (3) sekunnin yhtäjaksoisella painalluksella.** Tutustu erilaisiin vikatilanteisiin käyttö-ohjeessa. Pikakäyttöohjeen toisella puolella on esimerkki vianetsinnästä.



Lateral

Valitse **Lateral**-toiminto **potilaalle, joka makaa kyljellään**. Anna laitteen säätää onnistuneesti **Lateral**-toimintoon ennen potilaan siirtämistä makuualustalle. **Lateral**-toiminto huomioi potilaan suuremman uppouman ja säätää sen mukaisesti optimipaineen kennostoihin.



Supine
Prone

Valitse **Supine/Prone** -toiminto **potilaalle, joka makaa selällään tai mahallaan**. Anna laitteen säätää onnistuneesti **Supine/Prone** -toimintoon ennen potilaan siirtämistä makuualustalle. Säätolaitte huomioi potilaan painojakauman ja säätää sen mukaisesti optimipaineen kennostoihin.



Torso

Torso valitaan selin- tai päinmakuuasennossa suoritettavissa operaatioissa, joissa tarvitaan jalkaosan kennoston irrottamista.



Kovetustointi kovettaa kennoston pää- ja keskiosan hoitotoimenpiteiden ajaksi. Laite säätää takaisin odotustilaan 30 minuutin kuluttua ja antaa informaatio-signaalin, mikäli jotain muuta toimintoa ei ole valittu. **HUOM: Kun kennosto kovetaan, sen paineenalennusominaisuudet heikkenevät.**



Ledit vasemmalta lukien: virtakaapeli kytketty, akkukäyttö, Bluetooth-yhteys.



Pikakäyttöohje

Opera II

HUOM! Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

Esimerkki vianetsinnästä - Vuoto letkustossa tai kennostossa

Tarkista ilmaletkut;
katso irrotettava
pikaohje

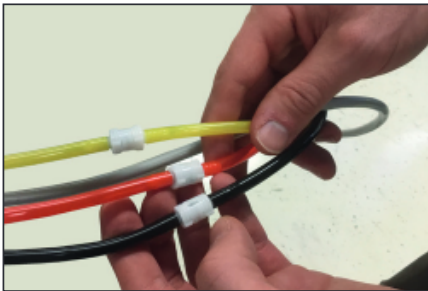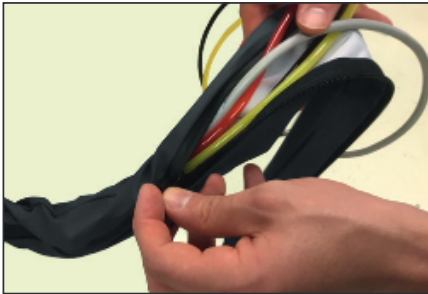

1. Säätlaitte antaa äänisignaalin ja näyttöön tulee oheinen teksti. LED-valot palavat jonkin säätöalueen (osoitettu letkuja vastaavilla väreillä) osalta oranssin sävyisenä.
2. Tarkista ensin onko säätölaitteeseen kytkeytyvä Sixtube-liitin lukittuna paikoillaan ja liittimeen kiinnitettyt letkut kiinnikkeissään.
3. Avaa letkusukka ja tarkista ovatko kennoston ja säätölaitteen väliset letkut kiinni liittimissään. Tarkista myös värien vastaavuus (esimerkiksi musta mustaan).
4. Mikäli havaitset irronneita letkuja, kiinnitä ne toisiinsa asianmukaisesti. Tarpeen tullen katso käyttöohjeesta lisätietoja. Sulje tämän jälkeen letkusukka.
5. Kuittaa informaatio-signaali painamalla informaatio-signaalin kuittauspainiketta yhtäjaksoisesti kolmen (3) sekunnin ajan. Seuraa, että patjajärjestelmä säättyy valittuun toimintoon onnistuneesti.



3 s.

Mikäli informaatio-signaali tämän jälkeen uusiutuu, ota yhteys Carital® -huoltoon.

Arkisin klo 8.30-15.30, puh. 0306 40 40 45

carital®

PKOHJ-H1-05-FI-1.0-18012021