

ReTurn7400™

SystemRoMedic™

Patenterad* konstruktion

Låg uppresningsstege,
passar kortare vuxna
och barn

Aktiverar brukaren

Eliminerar tunga lyft
för medhjälparen



Säker och aktiv uppresning och överflyttning, helt utan tunga lyft

ReTurn7400 är ett enkelt och otroligt effektivt hjälpmedel för uppresning och överflyttning, men det är också ett träningsredskap. ReTurn7400 ger trygg och aktiv uppresning och överflyttning till eller från säng, rullstol eller toalett. ReTurn7400 kan också användas som ett hjälpmedel för positionering längre bak i rullstol eller stol. Förflyttningarna blir enkla och helt utan tunga lyftmoment för medhjälparen. För brukare som fortfarande har en del krafter kvar stimulerar ReTurn7400 det naturliga rörelsemönstret vid uppresning och stärker samtidigt kroppens muskler och funktioner. Detta gör den till ett idealiskt hjälpmedel på en rehab-enhet och en brukare som använder ReTurn7400 i hemmet kan oftast bo kvar hemma längre med assistans av bara en medhjälpare.

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

ReTurn7400



ReTurn7400 och ReTurn7500 har samma stabila bottenplatta vilket gör det möjligt att enkelt byta mellan standardhöjd och låg upprensingsstege för maximal behovstäckning och utnyttjandegrad.

Produktspecifikation

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
7400	ReTurn7400	Överflyttingsplattform, komplett med låg upprensingsstege
7401	Rising ladder, low	Upprensingsstege, låg, för ReTurn7400 med serienummer från 373317697400500001 och för ReTurn7500 med serienummer från 373317697500500001
7501	Rising ladder, standard height	Upprensingsstege, standardhöjd, för ReTurn7500 med serienummer från 373317697500500001 och för ReTurn7400 med serienummer från 373317697400500001
7501i	Rising ladder, standard height	Upprensingsstege, standardhöjd, med en öppning för påhakning av ReTurnBelt, för ReTurn7500 med serienummer från 373317697500500001 och för ReTurn7400 med serienummer från 373317697400500001



Olika modeller av ReTurn ger lösningar för alla situationer och brukare

Den grundläggande tanken bakom ReTurn är att brukarens egen kraft ska tillvaratas och stärkas. Alla modeller av ReTurn bidrar därför till aktivering av brukaren och stimulerar brukaren att använda ett naturligt rörelsemönster.



Ytterligare information om de olika modellerna av ReTurn och alla tillbehör finns på www.directhealthcaregroup.com.

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.

Enkel och ovanligt mångsidig

ReTurn7400 är ett manuellt upprensings- och förflyttningshjälpmedel som är mycket enkelt att förstå och använda, både för brukaren och för medhjälparen. ReTurn7400 är också en ovanligt mångsidig produkt som kan användas på flera olika sätt för att säkert och effektivt assistera en brukare vid upprensning och positionering i sittande samt vid kortare förflyttningar inomhus. ReTurn7400 är dessutom ett mycket bra träningsredskap och därmed ett utmärkt hjälpmedel i rehabiliteringsprocessen.

ReTurn7400 har en låg upprensingsstege som passar för kortare vuxna brukare och för barn. Den fungerar också bra vid speciella vårdssituationer som till exempel på en röntgenavdelning. ReTurn7400 är avsedd för brukare som väger max 150 kg.

Otroligt lättmanövrerad

ReTurn7400 har en unik, patenterad* konstruktion som gör överflyttingsplattformen otroligt lättmanövrerad. ReTurn7400 kör, svänger och roterar lätt och smidigt på alla underlag, även i begränsade utrymmen. Det är enkelt att positionera hjälpmedlet perfekt intill en säng, rullstol eller toalettstol och det krävs minimalt med påskjutningskraft för att förflytta ReTurn7400, även med en tyngre brukare.

Stabil och säker bottenplatta

Den låga tyngdpunkten och den stora understödsytan, med hjul i alla hörn, gör bottenplattan stabil och säker. Två stora, fasta och låsbara centrumhjul mitt för upprensingsstegen gör ReTurn7400 lätttrullad och riktinstabil medan svivelhjulen i hörnen bidrar till den enkla manövreringen.

Upprensingsstegen ger utrymme för naturligt rörelsemönster och närhet

ReTurn7400 är utrustad med en upprensingsstege som är helt öppen nertill medan den övre delen erbjuder många olika greppmöjligheter, inklusive ett centralt kraftgrepp. Upprensingsstegen lutar framåt, bort från brukaren, och ger brukaren gott om utrymme och möjlighet att komma riktigt nära hjälpmedlet för att kunna "klättra" och/eller dra sig uppåt samtidigt som han reser sig upp. Brukaren får också stöd av stegen under ståträning och förflyttning. Konstruktionen ger bra arbetsutrymme även för medhjälparen som kan vara nära och hjälpa till med att stödja brukaren från olika håll. Underbensstöden kan justeras i både höjd- och sidled. De kan också vinklas, vilket gör det enkelt att, vid varje tillfälle, individanpassa inställningarna efter brukarens längd och andra förutsättningar. Denna funktion gör det dessutom möjligt för flera individer att använda samma ReTurn7400. ReTurn7400 är enkel att montera ihop och ta isär för transport och förvaring.

Teknisk information

SWL	150 kg
Total höjd	995 mm
Bottenplatta, längd x bredd x höjd	685 mm x 570 mm x 40 mm
Vikt	16,5 kg

*) Patent: SE-0300528-7

Gemenskapsformgivningskyddad: RCD-529631-1

Tillbehör

Genom att kombinera ReTurn7400 med olika tillbehör kan brukaren få ytterligare stöd samt ökad trygghet och säkerhet vid upprensning, ståträning och förflyttning. Valet av tillbehör styrs av den aktuella situationen samt av brukarens behov och funktionsnivå.

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
6031--6038	ReTurnBelt**	Storlek XXS--XXXL
6133--6136	ReTurnBelt, avspritningsbart material	Storlek S--XL
6233--6236	ReTurnBelt, engångsmaterial	Storlek S--XL
6061	SupportStraps	Tillbehör för bälten
7250	HeelStrap	Hälband
7215	Padding for leg support	Polstring för underbensstöd
0954	Bag	Väska

**) Patent: SE-0401517-8

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com