



# QUATTRO<sup>®</sup> acute

## Tekniske spesifikasjoner

### MOTOR

Bredde	346 mm
Høyde	258 mm
Dybde	156 mm
Vekt	4,0kg
Syklusvarighet	16 min.

### MADRASS

Lengde*	1980 mm
Bredde*	900 mm
Dybde	240 mm
Vekt	12,5kg
Indre konstruksjonsmaterialer	PU-luftceller
Trekkmateriale	PU-belagt elastisk nylon
Ant. celler	27
Maks. vekt for bruker	250 kg
Min. vekt for bruker	Ingen

\* Andre størrelser finnes på forespørsel

**Quattro<sup>®</sup> Acute**-madrassene gir unik DEEP CELL THERAPY™ for forebygging av trykksår og behandling av de pasientene som er mest avhengige av hjelp.

Den aktive 1-i-4-cellesyklusen støtter 75 % av pasientens kropp til enhver tid. I grupper på fire celler er tre fylt av luft mens den fjerde cellen tømmes så mye for luft at trykket fordeles og fremmer reperfusjon av vevet. 1-i-4-cellesystemet kan også gi pasienten bedre komfort og gjøre vedkommende mindre oppmerksom på bevegelsene fra støtteoverflaten.

DEEP CELL THERAPY™ sørger for at cellene i **Quattro<sup>®</sup> Acute** kan veksle med lavere innvendig trykk. Dette minimerer trykket mot pasientens hud og subkutane vev gjennom syklusen.

TISSUEgard™ lar pasienten delvis nedsenkes og innsvøpes i støtteoverflaten og dermed redusere trykket mot pasientens hud. Trykkdifferansen mellom de fulle og tomme cellene bidrar til å redusere tilknyttet skjærspenning.

Kombinasjonen av det vanntette og fuktgjennomtrengelige elastiske trekket og madrassens lave lufttap bidrar til å håndtere hudens mikroklima.