



# QUATTRO<sup>®</sup> plus

## Tekniske spesifikasjoner

### MOTOR

Bredde	346 mm
Høyde	258 mm
Dybde	156 mm
Vekt	4,0kg
Syklusvarighet	16 min.

### MADRASS

Lengde*	1950 mm
Bredde*	880 mm
Dybde	180 mm
Vekt	9,4kg
Indre konstruksjonsmaterialer	PU-luftceller
Trekkmateriale	PU-belagt elastisk nylon
Ant. celler	30
Maks. vekt for bruker	200 kg
Min. vekt for bruker	Ingen

\* Andre størrelser finnes på forespørsel

**Quattro<sup>®</sup> Plus**-madrasssystemet kan brukes til alle pasienttyper og kombinerer en aktiv 1-i-4-cellesyklus med TISSUEgard, Ortho-Differential Support og elastisk trekk for å gi pasienter trykkavlastning for forebygging og behandling av pasienter som står i fare for å få, eller som allerede har, trykksår.

Den aktive 1-i-4-cellesyklusen støtter 75 % av pasientens kropp til enhver tid. I grupper på fire celler er tre fylt av luft mens den fjerde cellen tømmes så mye for luft at trykket fordeles og fremmer reperfusjon av vevet. 1-i-4-cellesystemet kan også gi pasienten bedre komfort og gjøre vedkommende mindre oppmerksom på bevegelsene fra støtteoverflaten.

TISSUEgard™ lar pasienten delvis nedsenkes og innsvøpes i støtteoverflaten og dermed redusere trykket mot pasientens hud. Trykkdifferansen mellom de fulle og tomme cellene bidrar til å redusere tilknyttet skjærspenning.

Ortho-Differential Support gir madrassen fastere ytterkanter for ekstra støtte og enklere pasientforflytning mens den midtre delen av madrassen er mykere.