



QUATTRO[®] plus

Tekniska specifikationer

STRÖMENHET

Bredd	346 mm
Höjd	258 mm
Djup	156 mm
Vikt	4,0 kg
Cykeltid	16 min

MADRASS

Längd*	1 950 mm
Bredd*	880 mm
Djup	180 mm
Vikt	9,4 kg
Inre konstruktionsmaterial	PU-luftceller
Överdragsmaterial	PU-belagd elastisk nylon
Antal celler	30
Maxvikt för brukaren	200 kg
Minimivikt för brukaren	Ingen

* Olika storlekar finns tillgängliga på begäran

Madrasssystemet **Quattro[®] Plus** är lämpligt för alla typer av patienter. En aktiv 1-av-4-celcykel i kombination med TISSUEgard, Ortho-Differential Support och det multielastiska överdraget ger både förebyggande och behandlande tryckavlastning till patienter som riskerar att drabbas av, eller redan har, trycksår.

Den aktiva 1-av-4-celcykeln innebär att 75 % av patientens kropp alltid har stöd av tre uppblåsta celler, medan den fjärde cellen töms på tillräckligt med luft för att omfördela trycket och underlätta reperfusion i vävnaden. 1-av-4-systemet kan även förbättra patientens komfort och göra att hen störs mindre av rörelser i stödytan.

TISSUEgard™ gör det möjligt att delvis sänka ned och omsluta patienten i stödytan, vilket minskar trycket på patientens hud och minskar tryckskillnaden mellan uppblåsta och tömda celler. På så sätt minimeras de skjuvkrafter som kan uppstå.

Ortho-Differential Support innebär att madrassens ytterkanter är hårdare vilket underlättar patientförflyttningar och ger extra stöd, samtidigt som mittdelen av madrassen är mjukare.