

# Laken for alle situasjoner

SystemRoMedic™




- Glidelaken
- Stikklaken
- Glidestikklaken
- Inkontinenslaken
- Madrassbeskytter mm


**DHG**  
Moving Health Forward

# Veiledning for laken


Velg riktig glidesone på lakenet avhengig av brukerfunksjon.

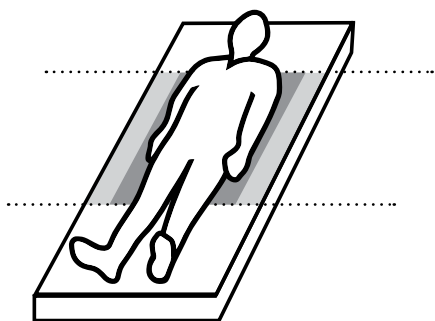

**Glidesone for hofte:** For mer aktive/lettere brukere som bare trenger glidefunksjon på hofte nivå.

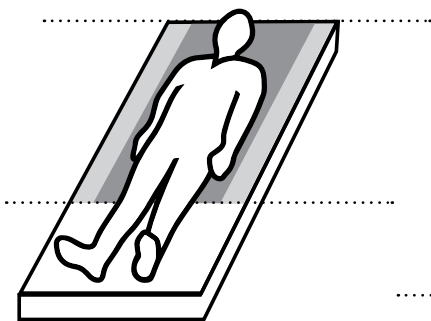


**Glidesone for hode-hofte:** For mindre aktive/tyngre brukere som trenger glidefunksjon fra hofte nivå og opp.

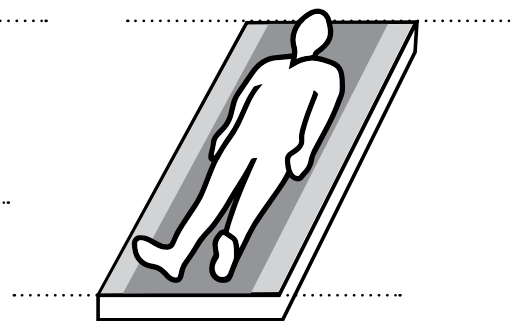

**Glidesone for hode-føtter:** For brukere som er passive/trenger mer intensiv pleie og der glidefunksjon er nødvendig for hele kroppen.

Velg riktig glidelaken etter sengebredde.

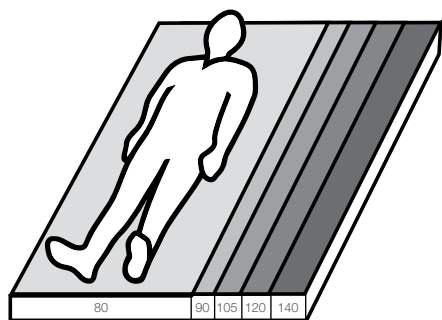

80 cm 31,5"	<b>90 cm</b> <b>35,4"</b>	105 cm 41,3"	120 cm 47,2"	140 cm 55,1"
----------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sengebredde

Madrassmålene er viktige for å kunne optimalisere glideflaten til lakenet og stimulere brukerens aktivitet.

Det finnes ingen anbefalt madrassbredde for våre stikkklakener og glidestikkklakener.

Finn riktig funksjon.



## Inkontinestrekk

Inkontinestrekken er et vaskbart laken som legges oppå et vanlig laken og/eller annet sengetøy. Inkontinestrekken er tilgjengelig med eller uten glideflate under. Materialet er svært absorberende og fordeler væske over en stor flate.



## Håndtak

N Noen glidestikkklakener har også håndtak som kan festes til personløftere. Det gjør det enklere i forhold til posisjonering, intimhygiene og å feste løfteseler.



## Strikk


Glidelaken med dette symbolet har en strikk som trekkes rundt madrassen. Andre laken har sidedeler som dyttes inn under madrassen.

## Vedlikeholdsinstruksjoner


Ta hensyn til vedlikeholdsinstruksjonene når du velger produkt.



## Velg riktige kombinasjoner.

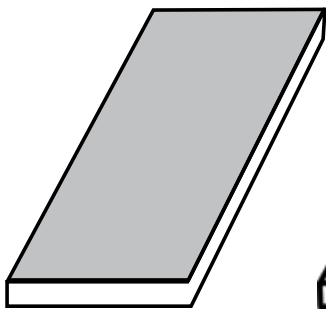


**Madrastrekk** med barrierelag. Legges oppå madrassen.

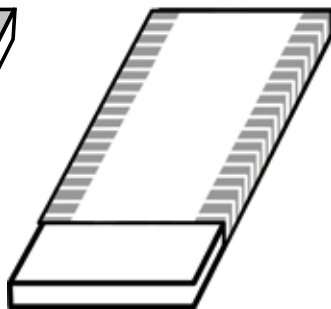

**Glidelaken.** Sateng i midtdelen og sklissikkert materiale i sidedelene. Forflytning skjer i mønsterets retning.



**Glidelaken + stikkklaken.** Forenkler vending og demper varmen fra satengen i glidelakenet. Forflytning skjer i mønsterets retning.

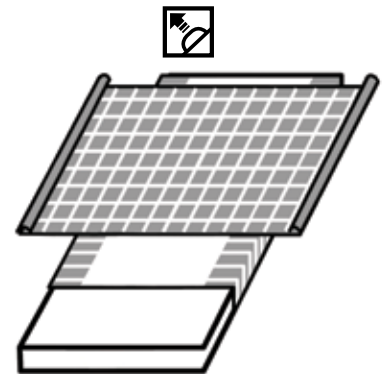

**Glidelaken + glidestikkklaken.** Begge lakenene har glideflater både nederst og øverst. Forflytning skjer i mønsterets retning.


## Slik brukes kombinasjonene



For pasienter som klarer å snu seg selv, er det ofte tilstrekkelig med et glidelaken som gir bedre gil i de områdene der dette er nødvendig.



En kombinasjon av glidelaken og stikkklaken brukes når brukeren er mindre aktiv, tyngre og har større behov for hjelp.

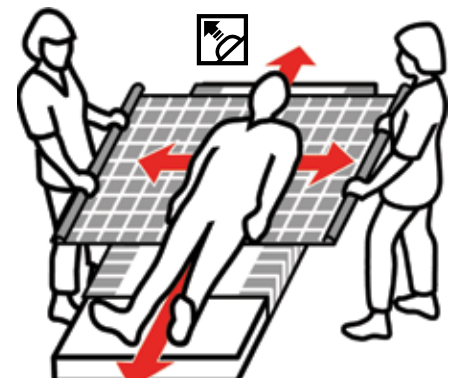

Kombinasjonen av glidelaken og glidestikkklaken brukes når brukeren er passiv, tyngre og har større behov for hjelp. Denne kombinasjonen brukes ofte sammen med en personløfter, under stell og ved applisering av løfteseil.

## Finn riktig laken.

Eksempel fra produktlisten:

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	HMS nr.
1661	WendyLett	120	120	120	95	Grå- og hvitstripet	Glidelaken	Mulig info	HMS nr. xxxxx

Produktnavn  
 Lakenet er egnet til denne sengebredden  
 Måll (lengde + bredde)  
 Sone/glideflate  
 Produktfarge  
 Produktfunksjon  
 Annen info  
 Spesielle egenskaper  
 Laken + glidesone på madrassen

WendyLett, produktutvalg




WendyLett  
Glidelaken  
side 5




WendyLett 2Way  
Stikklaken  
side 6



WendyLett 4Way  
Glidestikklaken  
side 7

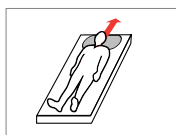

WendyLean  
putevar  
side 8

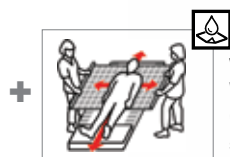

WendyLett Inco-serien  
WendyLett 4Way, Inco  
Glidestikklaken  
side 7



EasyRoll, produktutvalg




EasyRoll  
Glidelaken  
side 9-11




EasyRoll 2Way  
Stikklaken  
side 12




EasyRoll 4Way  
Glidestikklaken  
side 13

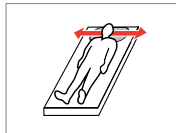

EasyRoll putevar  
side 15

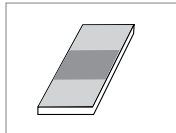

EasyRoll underlag  
og madrassbeskytter  
side 16-18

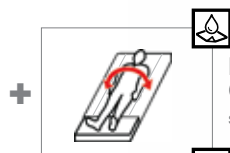

EasyRoll  
Glidelaken, Inco  
side 11



EasyRoll Inco 2Way  
Glidelaken  
side 12




EasyRoll 4Way  
Glidestikklaken, Inco  
side 13

WendyLett-produktene er våre patenterte høykvalitetssystemer som er utformet for å gjøre det lettere å forflytte høyere opp i sengen, vending og mindre reposisjonering i sengen. Sammen utgjør Direct Healthcare Groups tre WendyLett-lakener et nøye gjennomtenkt system med glide- og stikkklakener som utfyller hverandre og bidrar til å gjøre dagliglivet lettere for både brukere, helsepersonell og private omsorgspersoner.

## WendyLett glidelaken

WendyLett er et glidelaken av sateng. Glidningen skjer sideveis, i stripenes retning. WendyLett er beregnet på brukere som har problemer med å snu seg i sengen. WendyLett har en glatt midtdel, noe som betyr at svært lite energi trengs for å snu pasienten. Det er veldig lett for brukerne å gli sidelengs, men de blir stanset av et sklisikkert materiale i sidedelene, slik at de ikke glir ut av sengen.

Materialet hindrer også at brukeren glir nedover i sengen. Når WendyLett ikke er i bruk, kan det foldes rundt madrassen som et vanlig laken med den glatte overflaten i midten av sengen. For brukere som trenger mer hjelp kan WendyLett kombineres med WendyLett 2Way stikkklaken eller WendyLett 4Way glidestikkklaken. WendyLett er tilgjengelig i flere forskjellige versjoner og størrelser.

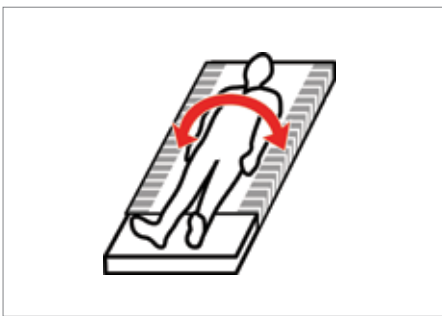


## Produktoversikt for WendyLett glidelaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Laken	Lengde på laken	Glidesone	HMS nr.
1609	WendyLett	80-90	100	200	60	Hvitt	Glidelaken		■	.....	■	1609
1614	WendyLett	80-90	140	200	60	Hvitt	Glidelaken		■	.....	■	1614
1629	WendyLett	80-90	100	200	60	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		■	.....	■	1629
1634	WendyLett	80-90	140	200	60	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		■	.....	■	1634
1641	WendyLett	90	200	90	70	Grå- og hvitstripet	Glidelaken	☒	■	.....	■	1641
1639	WendyLett	105	200	200	70	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		■	.....	■	1639
1651	WendyLett	105	200	105	80	Grå- og hvitstripet	Glidelaken	☒	■	.....	■	1651
1667	WendyLett	120	100	220	100	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		■	.....	■	1667
1668	WendyLett	120	140	220	100	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		■	.....	■	1668
1669	WendyLett	120	200	220	100	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		■	.....	■	1669
1661	WendyLett	120	200	120	95	Grå- og hvitstripet	Glidelaken	☒	■	.....	■	1661
1671	WendyLett	140	200	140	110	Grå- og hvitstripet	Glidelaken	☒	■	.....	■	1671
1681	WendyLett	-	200	365	70	Grå- og hvitstripet	Glidelaken	Ekstra bred for valgfri plassering av glideflaten	■	.....	■	1681

**Materiale:** Polyester, bomull, sateng


**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.

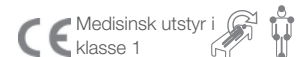

## WendyLett 2Way stikklaken

WendyLett 2Way er et stikklaken som er lagd av et materiale som er tilpasset til WendyLett glidelakener. Glidningen foregår sidelengs, i stripenes retning, noe som vil si at brukeren ikke glir nedover i sengen.

WendyLett 2Way plasseres oppå WendyLett glidelaken. Kombinasjonen gjør det lett for pleieren å snu brukeren sidelengs. WendyLett 2Way er tilgjengelig i flere forskjellige versjoner og størrelser.

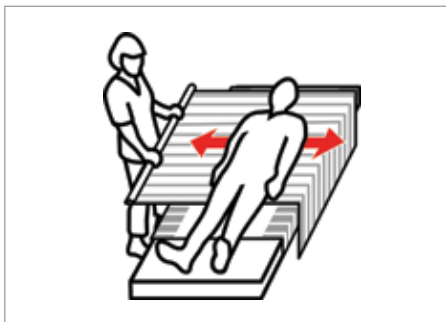

### Produktoversikt for WendyLett 2Way glidelaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Arnet	Glideretning
1620	WendyLett 2Way	-	90	180	-	Hvitt	Stikklaken		HMS nr.
1631	WendyLett 2Way	-	100	200	-	Grå- og hvitstripet	Stikklaken		HMS nr.
1636	WendyLett 2Way	-	140	200	-	Grå- og hvitstripet	Stikklaken		HMS nr.

**Materiale:** Polyester, bomull, sateng

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøyknær. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.



CE Medisinsk utstyr i klasse 1



#### Våre WendyLett-produkter

- Tynt høykvalitetsstoff som puster
- Egnet for brukere med risiko for å utvikle trykksår
- Mønster som tydelig viser glideretningen



## WendyLett 4Way glidestikklaken

WendyLett 4Way er et glidestikklaken som kan kombineres med et WendyLett glidelaken for å gjøre forflytning lettere både sideveis og opp/ ned i sengen, slik rutemønstret viser. WendyLett 4Way plasseres oppå WendyLett glidelaken.

Kombinasjonen muliggjør posisjonering i fire retninger og gjør det dermed

lettere å vende i sengen, repositionere høyere opp i sengen og mindre repositionering når pasienten ligger i sengen, selv med store, tunge eller helt passive brukere. WendyLett 4Way er tilgjengelig i mange versjoner og størrelser.



### Produktoversikt for WendyLett 4Way glidestikklaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning
1657	WendyLett 4Way	-	140	190	-	Grå- og hvitute	Glidestikklaken	2 x 7 håndtak	
1637	WendyLett 4Way	-	140	200	-	Grå- og hvitute	Glidestikklaken		
1647	WendyLett 4Way	-	200	200	-	Grå- og hvitute	Glidestikklaken		
1652	WendyLett 4Way	-	140	260	-	Grå- og hvitute	Glidestikklaken	Bredere madrass	

**Materiale:** Polyester, bomull, sateng

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.




### Produktoversikt for WendyLett 4Way Inco glidestikklaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning
1648	WendyLett 4Way, Inco	-	75	200	-	Grå- og hvitute	Glidestikklaken	Ekstra stoff på begge sider	
1649	WendyLett 4Way, Inco	-	140	120	-	Grått	Glidestikklaken	2 x 7 håndtak	

**Materiale:** Polyester, bomull, sateng


**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.

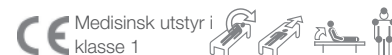

WendyLett 4Way med håndtak, Art. nr. 1657

## WendyLean

De patenterte håndtakene som trekker seg inn igjen i trekket av seg selv, er ikke den eneste fordelaktige funksjonen ved dette putevaret, men de er praktiske når du skal hjelpe en bruker å flytte seg høyere opp i sengen eller til sittende posisjon på sengekanten. Undersiden av putevaret er laget av myk sateng som gjør det svært enkelt både å posisjonere puten og å trekke den inn under skuldrene for å heve brukerens overkropp. Stripene viser glideretningen.

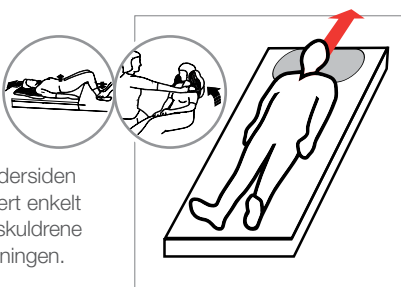

- Glatt sateng med håndtak som trekker seg inn i trekket av seg selv

## Produktoversikt for WendyLean

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning
1680	WendyLean	-	50	60	-	Grå- og hvitstripet	Putevar	2 håndtak	HMS nr.

**Materiale:** Overside: Polyester/bomull Bakside: Bomull/polyester Underside: Sateng

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Bruk ikke skyllemiddel. For å sikre maksimal levetid for materialet heng det til tork eller bruk tørketrommel på lav varme.



CE Medisinsk utstyr i klasse 1






## EasyRoll glidelaken Hvitt

Det økonomiske alternativet til vårt WendyLett-system. Forskjellen er at EasyRoll er uføret og består av en glideflate som er laminert på et laken. EasyRoll-systemet er tilgjengelig i en rekke versjoner og størrelser med ulike funksjoner som er tilpasset for å sikre at du kan finne den beste løsningen for dine behov.

- **Markerings-sømmer for enklere plassering av lakenet**

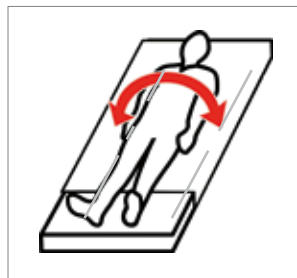

### Produktoversikt for EasyRoll glidelaken / hvitt

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
41801PS	EasyRoll glidelaken	80	100	180	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
41802PS	EasyRoll glidelaken	80	140	180	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
41803PS	EasyRoll glidelaken	80	200	180	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
41901PS	EasyRoll glidelaken	90	100	200	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
41902PS	EasyRoll glidelaken	90	140	200	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
41903PS	EasyRoll glidelaken	90	200	200	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411051PS	EasyRoll glidelaken	105	100	215	75	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411052PS	EasyRoll glidelaken	105	140	215	75	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411053PS	EasyRoll glidelaken	105	200	215	75	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411201PS	EasyRoll glidelaken	120	100	230	90	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411202PS	EasyRoll glidelaken	120	140	230	90	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411203PS	EasyRoll glidelaken	120	200	220	90	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -

**Materiale:** Sidedeler: bomull/polyester Glideflater: duchesse (polyester)

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk toymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.



CE Medisinsk utstyr i klasse 1



## EasyRoll glidelaken Hvit- og blåstripet

Det økonomiske alternativet til vårt WendyLett-system. Forskjellen er at EasyRoll er uføret og består av en glideflate som er laminert på et laken. EasyRoll-systemet er tilgjengelig i en rekke versjoner og størrelser med ulike funksjoner som er tilpasset for å sikre at du kan finne den beste løsningen for dine behov.

- **Markerings-sømmer for enklere plassering av lakenet**



### Produktoversikt for EasyRoll glidelaken / hvit- og blåstripet

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Laken	Lengde på laken	Glidesone
418011	EasyRoll glidelaken	80	100	180	50	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
418021	EasyRoll glidelaken	80	140	180	50	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
418031R	EasyRoll glidelaken	80	200	180	60	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
419011	EasyRoll glidelaken	90	100	190	60	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
419021	EasyRoll glidelaken	90	140	190	60	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
419031	EasyRoll glidelaken	90	200	190	60	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
419031R	EasyRoll glidelaken	90	200	90	70	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
4110511	EasyRoll glidelaken	105	100	205	75	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
4110521	EasyRoll glidelaken	105	140	205	75	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
4110531	EasyRoll glidelaken	105	200	205	75	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
4110531R	EasyRoll glidelaken	105	200	105	85	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
4112011	EasyRoll glidelaken	120	100	220	90	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
4112021	EasyRoll glidelaken	120	140	220	90	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	
4112031	EasyRoll glidelaken	120	200	220	90	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		HMS nr.	-	

**Materiale:** Sidedeler: bomull/polyester Glideflater: duchesse (polyester)

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.



## EasyRoll glidelaken med sklissikker kant

EasyRoll glidelaken med sklissikker kant har bremsende overflater på sidene av glideflaten og er forsterket med silikon for å hindre at brukeren glir ut av sengen.

Glidelakenet trekkes på madrassen, og strikken gjør at glidelakenet sitter godt fast rundt madrassen. Egnert for personer med redusert mobilitet og/eller sterke smerter ettersom det gir god støtte ved vending dersom du ligger rett på lakenet. EasyRoll kan eventuelt brukes i kombinasjon med et stikkklaken eller et glidestikkklaken som et teknisk hjelpemiddel for pleiere som vender/reposisjonere pleiepasienter i sengen.




### Produktoversikt for EasyRoll glidelaken med sklissikker kant

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Laken	Lengde på laken	Glidesone
51901FAH	EasyRoll glidelaken med sklissikker kant	90	100	180	50	Hvit- og blåstripet	Glidelaken	Bremseflate i silikon	HMS nr.	-	
51902FAH	EasyRoll glidelaken med sklissikker kant	90	140	180	50	Hvit- og blåstripet	Glidelaken	Bremseflate i silikon	HMS nr.	-	
519031RAH	EasyRoll glidelaken med sklissikker kant	90	200	90	70	Blå/Hvit	Glidelaken	Bremseflate i silikon	HMS nr.	-	


**Materiale:** Sidedeler: bomull/polyester Glideflater: duchesse (polyester)

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.

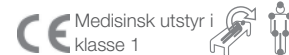

## EasyRoll glidelaken med barriere

EasyRoll glidelaken med barriere legges som et vanlig laken rett på sengen, sengelakenet festes under madrassen. Glidelakenet med væskebarriere brukes når det er risiko for lekkasje. Barrierelaget er fuktsikkert og forhindrer at væske sprer seg til underliggende sengetøy/madrass. Røde markørstriper gjør det enklere å sjekke at glidelakenet er riktig plassert.

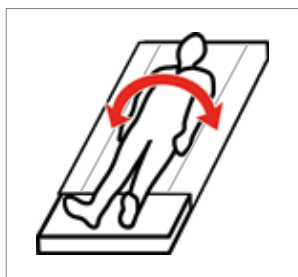

### Produktoversikt for EasyRoll glidelaken med barriere

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning	Laken	Glidesone
42901PS	EasyRoll glidelaken med barriere	90	100	200	60	Hvit/blå	Glidelaken med barriere		HMS nr.	-	
42902PS	EasyRoll glidelaken med barriere	90	140	200	60	Hvit/blå	Glidelaken med barriere		HMS nr.	-	


**Materiale:** Polyester Barriere: PU Absorberende lag: Polyester

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Vask før første gangs bruk. Må ikke renses. Må ikke kloses. Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.



## EasyRoll 2Way Stikkelaken

EasyRoll 2Way stikkelaken brukes i kombinasjon med EasyRoll glidelaken. Stikkelakenet plasseres direkte oppå glidelakenet, og brukeren ligger på stikkelakenet. Kombinasjonen av glidelakenet og stikkelakenet er et svært godt hjelpemiddel ved vending av en pasient som ligger i sengen. Ved å gripe i stikkelakenet og trekke, kan brukeren enkelt flyttes til ønsket posisjon.

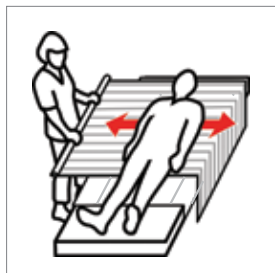

### Produktoversikt for EasyRoll 2Way stikkelaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
2101S	EasyRoll 2Way stikkelaken	-	140	200	-	Blå- og hvitstripet	Stikkelaken	Markørstriper viser draretingen

Glideretning →

HMS nr. →

**Materiale:** Duchesse, bomull/polyester


**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Vask før første gangs bruk. Tørkes ved maks. 70 °C.



## EasyRoll Inco 2Way Glidelaken

EasyRoll Inco 2Way glidelaken er et absorberende inkontinestreck med barrierelag som forhindrer lekkasje. Undersiden av produktet har også et lavfriksjonsbelegg (glidende stoff) som gjør det lett å gli i sengen. Det vil si at det blir lettere for pleierne å snu pasienten.

EasyRoll Inco 2Way glidelaken har tre håndtak på hver side for best mulig grep ved bevegelse av pasienten sideveis.

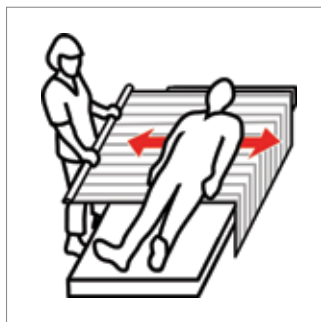

• Dette produktet brukes uten glidelaken under

### Produktoversikt for EasyRoll Inco 2Way glidelaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
10991	EasyRoll Inco 2Way	-	90	185	-	Hvitt/rødt	Glidelaken	2x3 håndtak

Glideretning →

HMS nr. →


**Materiale:** Duchesse Barriere: PU Absorberende lag: Polyester/rayon

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Vask før første gangs bruk. Tørkes ved maks. 70 °C.



## EasyRoll 4Way Glidestikkklaken

Glidestikkklaken plasseres direkte oppå et glidelaken, med glideflatene mot hverandre. EasyRoll glidestikkklaken er et teknisk hjelpemiddel for helsepersonell for enkel vending/omposisjonering av en bruker som befinner seg i sengen. Når man vender brukeren, frigjøres glidestikkklakenet fra madrassen. Pleieren tar tak i glidestikkklakenet ved brukerens hofter og skulder og sørger for å fylle hendene med stoffet. Deretter, med rette håndledd, leier pleieren seg bakover slik hans eller hennes vekt utøver kraft på lakenet. Hvis det finnes to pleiere, kan den andre hjelpe til ved å presse ned på brukerens skulder og hofter på motsatt side og skyve. Dermed vendes brukeren. Etter vendingen stappes glidestikkklakenet inn på begge sider av madrassen.

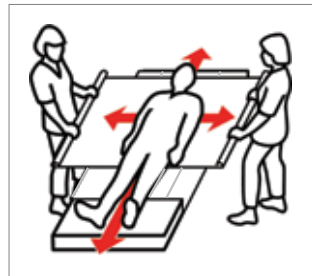

### Produktoversikt for EasyRoll 4Way glidestikkklaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning
4011S	EasyRoll 4Way glidestikkklaken	-	140	210	-	Hvit/blå	Glidestikkklaken		HMS nr.
4011L	EasyRoll 4Way glidestikkklaken	-	200	200	-	Hvit/blå	Glidestikkklaken		HMS nr.
4011S1	EasyRoll 4Way glidestikkklaken	-	150	200	-	Hvit- og blåstripet	Glidestikkklaken		HMS nr.
4111T	EasyRoll 4Way glidestikkklaken	-	140	115	-	Hvit/blå	Glidestikkklaken (med underliggende sengestopper)	2 x 9 håndtak	HMS nr.
4111LT	EasyRoll 4Way glidestikkklaken	-	200	115	-	Hvit/blå	Glidestikkklaken (med underliggende sengestopper)	2 x 13 håndtak	HMS nr.

**Materiale:** Duchesse, bomull/polyester

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Vask før første gangs bruk. Tørkes ved maks. 70 °C.



Medisinsk utstyr i klasse 1



### Produktoversikt for EasyRoll 4Way glidestikkklaken, Inco

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning
10992-5	EasyRoll 4Way glidestikkklaken, Inco	-	140	200	-	Hvitt/rødt	Glidestikkklaken	2 x 5 håndtak	HMS nr.

**Materiale:** Duchesse Barriere: PU Absorberende lag: Polyester/rayon

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Vask før første gangs bruk. Tørkes ved maks. 70 °C.



Medisinsk utstyr i klasse 1





## EasyRoll putevar

EasyRoll putevar (4303) med glideflate har lav friksjon sideveis, noe som øker mobiliteten for nakken og skuldrene. Det gir også lavere friksjon på baksiden av hodet og ved ørene. EasyRoll putevar med barriere (4304) har et barrierelag på innsiden som beskytter det mot smuss og fuktighet, og det fungerer også som en middbarriere. Trekket er forsterket ved at putevaret kan lukkes med en glidelås. Dette putevaret har ingen glidefunksjon.



### Produktoversikt for EasyRoll putevar

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning
4303	EasyRoll glideputevar	-	50	60	-	Hvitt	Putevar	Glideflate med lav friksjon	HMS nr. -
4304	EasyRoll putevar med barriere	-	50	60	-	Hvitt	Putevar	Barrierelag	HMS nr. -

**Materiale: 4303:** Glideflate: Duchesse (100 % polyester) Bakside: Bomull/polyester **4304:** Barrierelag Polyuretan Område: Bomullsjersey

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner.

Vask før første gangs bruk. Tørkes ved maks. 70 °C.



**CE** Medisinsk utstyr i klasse 1

## EasyRoll Underpad med sengestropper

EasyRoll Underpad madrassstrekk brukes til å absorbere væske i sengen når brukeren er inkontinent. Trekket absorberer omtrent 1–2 liter/m<sup>2</sup> og har et laminert barrierelag som hindrer at væske trenger gjennom til annet sengetøy. Madrassstrekket er sterkt og godt egnet ved vending/reposisjonering av pasientene i sengen. Ved flytting/posisjonering av brukerne, må du holde i absorpsjonsdelen, siden sidedelene ikke er egnet til å trekke i og reposisjonere. Brukt sammen med et glidelaken, får man en utmerket produktkombinasjon av hjelpemidler for inkontinens og reposisjonering.



### Produktoversikt for EasyRoll Underpad med sengestropper

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Barrierelag
80011B	EasyRoll Underpad	80–90	80	180	–	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper	HMS nr. -	<input checked="" type="checkbox"/>
80011P	EasyRoll Underpad	80–90	80	180	–	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper	HMS nr. -	<input checked="" type="checkbox"/>
80011-1	EasyRoll Underpad	80–90	85	180	–	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper	HMS nr. -	<input checked="" type="checkbox"/>
80011PL	EasyRoll Underpad	80–90	90	210	–	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper	HMS nr. -	<input checked="" type="checkbox"/>
80011PS	EasyRoll Underpad	90	70	190	–	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper	HMS nr. -	<input checked="" type="checkbox"/>

**Materiale:**

**80011B:** Sengeflate: Bomull/polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester

**80011P:** Sengeflate: Polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester

**80011-1:** Sengeflate: Bomull/polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester

**80011PL:** Sengeflate: Polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester

**80011PS:** Sengeflate: Duchesse, bomull/polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester/rayon

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Kan tørketromles ved 70 °C. Må ikke renses. Må ikke kleses. Ikke bruk tøymykner. Vask for første gangs bruk for å aktivere absorbenten.





## EasyRoll Underpad med sengestropper /ekstra beskyttelse

EasyRoll Underpad madrassstrekk brukes til å absorbere væske i sengen når brukeren er inkontinent. Denne modellen har en ekstra absorberende funksjon. Madrassstrekket er sterkt og svært godt egnet for bruk ved vending/reposisjonering av pasienter i sengen. Når trekket brukes sammen med et glidelaken, får man en utmerket produktkombinasjon av hjelpemidler for inkontinens og reposisjonering.



### Produktoversikt for EasyRoll Underpad med sengestropper/ekstra beskyttelse

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
80019	EasyRoll Underpad	90/	120	180	-	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper	Barrierelag <input checked="" type="checkbox"/> HMS nr.

**Materiale:** Sengeflate i bomull/polyester. Absorberende lag av polyester/rayon. Væskebarriere av polyuretan.  
**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Kan tørketromles ved 70 °C. Må ikke renses. Må ikke kleses. Ikke bruk tøymykner. Vask før første gangs bruk for å aktivere absorbenten.



## EasyRoll Underpad uten sengestropper

Madrassstrekk brukes som absorberende beskyttelse i sengen for inkontinente brukere. Trekket absorberer ca. 1-2 liter/m<sup>2</sup> og har et laminert barrierelag som hindrer at væske trenger gjennom til annet sengetøy. Madrassstrekket er sterkt og svært godt egnet for bruk ved vending/reposisjonering av pasientene i sengen. Ved flytting/posisjonering av brukerne, må du holde i absorpsjonsdelen, siden sidedelene ikke er egnet til å trekke i og reposisjonere. Ved bruk sammen med et glidelaken oppnås en svært bra produktkombinasjon av hjelpemidler ved inkontinens og reposisjonering. På grunn av lakenets høye absorpsjonsevne opplever brukeren en bedre følelse av tørrhet fordi produktet sjelden anvendes opp til sin maksimale absorpsjon.



### Produktoversikt for EasyRoll Underpad uten sengestropper


Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
80017-1	EasyRoll Underpad	80-90	85	90	-	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk uten sengestropper	Barrierelag <input checked="" type="checkbox"/> HMS nr.
80017P	EasyRoll Underpad	80-90	85	90	-	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk uten sengestropper	Barrierelag <input checked="" type="checkbox"/> HMS nr.
80018P	EasyRoll Underpad	80-90	150	90	-	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk uten sengestropper	Barrierelag <input checked="" type="checkbox"/> HMS nr.
80018	EasyRoll Underpad	80-90	150	90	-	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk uten sengestropper	Barrierelag <input checked="" type="checkbox"/> HMS nr.

**Materiale:** Polyester Barriere: PU Absorberende lag: Polyester  
**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Kan tørketromles ved 70 °C. Må ikke renses. Må ikke kleses. Ikke bruk tøymykner. Vask før første gangs bruk for å aktivere absorbenten.



## EasyRoll Underpad med glidelaken

EasyRoll Underpad med glidelaken brukes på samme måte som EasyRoll Underpad, men har ergonomiske sidedeler og brukes til beskyttelse i sengen for inkontinente brukere og som et hjelpemiddel ved reposisjonering. Trekket absorberer omtrent 1–2 liter/m<sup>2</sup> og har et laminert barrierelag som hindrer at væske trenger gjennom til annet sengetøy. Underlaget er sterkt og svært godt egnet for bruk ved vending/reposisjonering av pasienter i sengen. Glideflaten på bunnen gir en utmerket produktkombinasjon av hjelpemidler for inkontinens og reposisjonering.

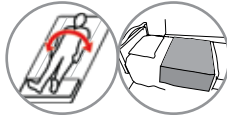


### Produktoversikt for EasyRoll Underpad med glidelaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
80010P	EasyRoll Underpad med glidelaken	80–90	80	180	–	Hvitt	Madrasstrekk med sengestopper, glideflate på undersiden	Barrirelag <input checked="" type="checkbox"/> HMS nr.

**Materiale:** Sengeflate i polyester. Absorberende lag av polyester/rayon. Væskebarriere av polyuretan. Glideflate av duchesse.

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Kan tørketromles ved 70 °C. Må ikke renses. Må ikke kloses. Ikke bruk tøymykner. Vask før første gangs bruk for å aktivere absorbenten.

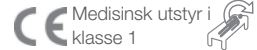

## EasyRoll madrassbeskytter

Madrassbeskyttere beskytter madrassen mot fuktighet, f.eks. ved inkontinens, eller mot midd, eller de fungerer som generell beskyttelse for madrassen/madrassovertrekket. Madrassbeskytteren har et barrierelag i bunnen for å forhindre at fuktighet siver gjennom. Denne fungerer også som en middbarriere.



### Produktoversikt for EasyRoll madrassbeskytter

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
90.200J01	EasyRoll madrassbeskytter	90	200	90	–	Hvitt	Madrasstrekk	 Art. nr. 90.200J01
105.200J01	EasyRoll madrassbeskytter	105	200	105	–	Hvitt	Madrasstrekk	 Art. nr. 105.200J01
120.200J01	EasyRoll madrassbeskytter	120	200	120	–	Hvitt	Madrasstrekk	 Art. nr. 120.200J01

**Materiale:** Sengeflate i bomullsersey. Væskebarriere av polyuretan.

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Kan tørketromles ved 70 °C. Må ikke renses. Må ikke kloses. Ikke bruk tøymykner.





---

## SystemRoMedic™

### Over 30 år i enkelhetens tjeneste

System RoMedic er Direct Healthcare Groups unike forflytningskonsept som er markedets bredeste og mest komplette utvalg av smarte, lettanvendelige og sikre hjelpemidler for alle typer pasientforflytninger og manuell håndtering.

Filosofien bak vårt konsept er et fokus på å forhindre og redusere yrkesskader, samtidig som brukerne kan føle større grad av uavhengighet og verdighet.

Med en unik kombinasjon av opplæring og et komplett utvalg av effektive forflytningshjelpemidler tilbyr vi forbedringer av både arbeidsmiljøet og pleiekvaliteten. Samtidig gir systemet betydelige kostnadsbesparelser.

I mer enn 30 år har vi utviklet SystemRoMedic for å tilby enkle løsninger med utmerkede resultater, og en enklere hverdag for både brukere og personell i helsesektoren.

### **Direct Healthcare Group tilbyr løsninger og støtte som øker uavhengigheten for funksjonshemmede eller eldre, samtidig som det blir lettere for dem som pleier dem.**

*Direct Healthcare Group-gruppen er et av de ledende helserelaterte selskapene i Europa med egne produksjonsenheter og salgsorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Kina, Canada og USA. Direct Healthcare Groups produkter distribueres også av partnere i mer enn 40 land rundt om i verden. Vårt brede utvalg av kvalitetsprodukter inkluderer et komplett, lett-anvendelig forflytningssystem og andre hjelpemidler for pasient-håndtering samt baderooms- og toalettprodukter.*



Brastadveien 60, 3425 Reistad  
Tlf.: 21 01 44 70  
www.directhealthcaregroup.com  
info.no@directhealthcaregroup.com