



Scan for at
besøge websiden

Dyna-Form® Static Air HZ

INSTALLATION

1. Før madrassen tages i brug, skal det sikres, at sengen ikke har skarpe kanter, der kan beskadige madrassen.
2. Placér madrassen i sengen med DHG-logoet i hovedenden og fod-symbolet i fodenden. Sørg for, at lynlåsen er lukket, og at lynlåsens afdækning dækker lynlåsen helt.
3. Kontrollér at sengens madrassyrr er indstillet korrekt til madrassens mål.
4. Luftcellerne i hælområdet kan være flade, hvis madrassen har været sammenrullet. Disse fyldes igen ved at trykke gentagne gange på luftcellerne midt i madrassen.
5. Madrassen har et integreret luftsystm uden pumpe eller elektriske dele, så servicering er ikke nødvendig.
6. Max. brugervægt 254 kg
7. Risikokategori/tryksår: meget høj risiko

RENGØRING

Brug rent, varmt vand og neutralt rengøringsmiddel.

Ved let tilsmudning kan overtrækket aftørres med en 0,1% hypochloritopløsning (1000 ppm).


Brug opløsning på 1% hypochlorit (10.000 ppm) ved kraftig tilsmudsning.

Sørg for, at betrækket skylles med rent vand ved hjælp af en ikke-slibende klud til engangsbrug og derefter tørres grundigt.

Testet og godkendt til vask i vasketunnel.

VASK

Betrækket kan maskinvaskes ved maks. 80°C og lufttørres (anbefalet) eller tørretumbles ved maks. 40°C i op til 10 minutter.

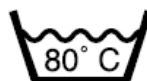

VASKES VED 80°



TØRRETUMBLES
VED LAV VARME