

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

Static Air HZ Static Air HZ EVAQ

Bruksanvisning



Static Air HZ

Static Air HZ EVAQ

Static Air HZ (Heel Zone) har ett överdrag av polyuretan-multi-strech som andas samtidigt som det är vattentätt. Madrassen består av en kombination av förstklassigt CMHR-skum, det vill säga flamskyddsbehandlad högelastisk polyeter och en lufthålsstruktur som säkerställer utmärkt tryckavlastning och samtidigt bidrar till ökad patientkomfort och produktlivslängd. Static Air HZ finns även anpassad med handtag och band med spännen för att fungera även vid evakuering, då kallad Static Air HZ EVAQ.

Innehåll

1. Allmänt	4
1.1 Symboler	4
1.2 Symbolguide	4
2. Användning	5
2.1 Avsedd användning	5
2.2 Användning av madrassen	5
2.3 Repositionering av patienten	5
2.4 Evakuering	6
3. Rengöring och skötsel	10
3.1 Vid lättare nedsmutsning	10
3.2 Vid svårare nedsmutsning	10
3.3 Torkning	10
3.4 Inspektion	10
4. Underhåll	10
5. Efter användning	10
5.1 Förvaring	10
5.2 Transport	10
5.3 Återanvändning	11
5.4 Avfallshantering	11
6. Kvalitet & tester	11
7. Tekniska data	11

1. Allmänt

Tack för att du köpt denna madrass från Gate. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och kontakta oss om du har några frågor om användningen eller underhållet av Static Air HZ.

Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten. Informationen i bruksanvisningen är viktig att förstå för att produkten ska kunna användas och underhållas på rätt sätt.

Förvara bruksanvisningen tillsammans med produkten så att den kan användas som referens vid behov. Se till att alla som ska använda produkten får en regelbunden utbildning i hur produkten ska användas.

Produkten får ej modifieras utan tillåtelse från producenten.

1.1 Symboler

Varningar

Varningar indikeras i den här manualen med hjälp av symboler. Varningssymbolen kombineras med en rubrik som beskriver graden av fara.



VARNING

Indikerar en riskfylld situation, som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.



OBS!

Indikerar en riskfylld situation, som kan resultera i lättare skada, eller skada i mindre omfattning, om den inte undviks.



VIKTIGT

Indikerar en riskfylld situation, som kan resultera i sakskador, om den inte undviks.

1.2 Symbolguide

Madrasssymboler:



2. Användning

2.1 Avsedd användning

Static Air HZ kan användas förebyggande och vid behandling t o m sårkategori 3.

Madrassens konstruktion bygger på att brukaren med en viss regelbundenhet vänder sig i madrassen. Detta skapar då en cirkulation av luft från sätesdel till hälavlastningsdel. OM patientens status är "Mycket begränsad" alternativt "Orörlig" så behövs en ökad uppsikt av hälavlastningsfunktionen så att denna är tillräckligt luftfylld. Kontroll bör göras minst en gång/dag.

Om man vid kontroll över tid upplever att hälavlastningsdelen är tom på luft så är ej denna produkt lämplig att använda för aktuell patient.



VARNING

Val av madrass ska göras av sjukvårdspersonal.

2.1 Användning av madrassen



OBS!

Innan madrassen används första gången eller efter förvaring/transport, lägg madrassen plant på sängen i minst 2 timmar. För att aktivera madrassens, vik den på mitten och lägg tryck. Ett pysande ljud ska höras från ventilerna, som signalerar att madrassens luftceller fylls.

Kontrollera att de nedersta cellerna i madrassen är luftfyllda innan madrassen tas i bruk.

Säkerställ före användning att sängen inte har några vassa kanter som kan skada madrassen. Placera madrassen i sängen med Direct Healthcare Services-logotypen uppåt och i huvudändan av sängen. Se till att blixtlåset är stängt och att låset helt täcks av skyddsfliken. Lägg ett tunt bomulls- eller linnelakan löst över madrassen och se till att eventuella veck slätas ut.

Använd inte elektriska filter, fårskinn eller andra material kan minska effekten av madrassens tryckreducerande egenskaper. Använd lakan av bomull eller linne. Var försiktig vid användande av glidbrädor och andra förflyttningshjälpmedel så att inte madrassen skadas. Vänligen rådfråga ansvarig sjukvårdspersonal innan annat överdrag än vanligt bomulls- eller linnelakan används.

Säkerställ att madrassen inte skadas av vassa kanter eller liknande vid användning av medicintekniska hjälpmedel såsom glidbrädor eller annat patientförflyttningshjälpmedel.



VARNING

Den sida av madrassen som har tryck ska alltid vara vänd uppåt. Säkerställ att fotändan av madrassen (markerad med en illustration av två fötter på överdraget) är vänd mot sängens fotända och det område där patientens fötter kommer att vila. Säkerställ att avståndet mellan madrassens övre kant och sidoräckets högsta punkt är minst 22 cm.

2.3 Repositionering av patienten



VIKTIGT

Static Air HZ erbjuder inte bara excellent tryckavlastning, utan bidrar också med ökad patientkomfort och högre produktlivslängd. För att undvika tryck som kan leda till vävnadsskador och möjlig sårbildning är det i kombination även väsentligt med lägesändringar av patienten.

2.4 Evakuering

Överdraget är utrustat med handtag på madrassens alla sidor. På långsidorna finns även säkerhetsremmar för stadig fixering av patienten. Dessa ska vara ihopkopplade längs långsidorna när de inte används.



Vid eventuell evakuering är det viktigt att brukaren är fastspänd med säkerhetsremmarna över bål och ben, samt att spännet är ordentligt knäppt. Armarna skall vara innanför säkerhetsremmarna. Spänn banden så att madrassens kanter böjs upp runt brukaren. Använd handtagen i fotändan av madrassen vid evakuering.

Följ dessa steg:



1

Knäpp loss de två banden som är monterade längs madrassens långsidor.



2

Lägg banden över brukaren, ett vid bröstet och ett vid benen, och knäpp ihop på båda sidorna.

Om brukaren har en filt eller liknande, kan banden spännas över den.

BRUKSANVISNING



3

Spänn åt banden så att brukaren ligger stadigt på plats. Madrassen ska böjas lätt.



4

Se till att brukaren ligger stadigt och fastspänd innan madrassen dras ur sängen.



5

Ta tag i handtagen i madrassens fotända och rotera mot sängens mitt, så att madrassen befinner sig till viss del utanför sängen.



6

När madrassens fotända är utanför sängen, lyft ner madrassen på golvet.



7

Evakuera brukaren genom att fortsatt dra i madrassens handtag vid fotändan.

Om behov av extra draghjälp uppkommer, använd även handtagen madrassens långsida.



8

Även vid evakuering i trapp används handtagen i fotändan.

3. Rengöring och skötsel

Tillvägagångssättet vid rengöring av madrassen avgörs utifrån smutsighetsgraden och patientens känslighet.

3.1 Vid lättare nedsmutsning

Vid lättare nedsmutsning rengör madrassen med varmt vatten och mildt rengöringsmedel (tex. handdiskmedel). Vid behov kan madrassen dock torkas med hypokloritlösning (1,000 ppm). Var noga med att rengöra överdraget med rent vatten och en engångstrasa som inte repar, samt att eftertorka ordentligt. Säkerställ att ventilationen är tillräcklig. Desinfektionsmedel typ. DAX, Virkon, Perform eller liknande kan användas vid behov.

3.2 Vid svårare nedsmutsning

Vid svåra fall av nedsmutsning bör madrassöverdraget först rengöras med rengöringsmedel och vatten och därefter med en lösning med 1 % hypoklorit (10,000 ppm). Skölj väl med rent vatten och en fuktig engångstrasa som inte repar. Säkerställ att ventilationen är tillräcklig.

3.3 Torkning

Överdraget går vid behov att tvätta i maskin i 85°C samt torktumlas i max 75 grader. Överdraget måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka på madrassen.

3.4 Inspektion



WARNING

Kontrollera överdragets in- och utsida samt dess blixtlås regelbundet, för att säkerställa att ingen skada uppkommit. Om det finns tecken på fläckar, smuts eller rivskada bör även skummadrassen kontrolleras.

4. Underhåll

Vi rekommenderar översyn av madrassen mellan varje ny användare och/eller en gång om året. Kontrollera att överdraget och dess blixtlås är helt, samt att madrassens zoner inte är skadade. Om madrassen har ett evakueringsöverdrag, kontrollera att alla remmar, handtag och fästen är hela.

5. Efter användning

5.1 Förvaring



OBS!

Man bör vara två personer som lyfter/bär madrassen. Madrassen kan komma till skada vid felaktig förvaring. Madrasserna bör inte förvaras på golvet, utan i ett rent och torrt utrymme. Förvara inte madrasserna i närheten av element. Madrasserna bör, om möjligt, förvaras i ett skyddande hölje.

5.2 Transport



OBS!

Var uppmärksam vid hantering av madrasserna så att överdraget inte utsätts för skada. Man bör vara två personer som lyfter/bär madrassen. Undvik kontakt med vassa föremål, skrovliga ytor och liknande. Släpa inte madrassen.

5.3 Återanvändning

Produkten är lämpad för återkommande användning. Hur många gånger produkten kan användas beror på hur ofta och på vilket sätt produkten används. Rengör produkten grundligt och enligt riktlinjerna före återanvändning.

5.4 Återvinning/Kassering

Madrassen lämnas till återvinningscentral och sorteras som brännbart avfall.

Förbrukad pump lämnas till återvinningscentral och sorteras som elektronikavfall.

6. Kvalitet & tester

6.1 Produktens livslängd

Produkten har en beräknad livslängd på 8 år förutsatt att underhåll och och hantering utförs på rekommenderat sätt.

7. Tekniska data

Riskkategori	Förebyggande och vid behandling t.o.m. sårkategori 3.
Brukarvikt	0-254 kg
Garanti	5 år
Mått	Bredd: 80/90/105/120 cm Längd: 200/210 cm Höjd: 15 cm
Produktvikt	Ca. 10 kg (vid 90 cm)
Brandhärdighet	SS8760001
Färg	Röd, Blå vid evakueringsöverdrag
Tål Hypokloritlösning	1,000 ppm utspädd eller 0,1 % (eller enligt lokala riktlinjer för infektionskontroll)

BRUKSANVISNING

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 08-557 62 200

Direct Healthcare Group AB

Torshamnsgatan 35 | S-164 40 Kista

info.se@directhealthcaregroup.com

www.directhealthcaregroup.com

Datum: 2021-06-03