

DEFINITIVT BÄTTRE



Evario one

Den kostnadseffektiva sjukhussängen

Internationell upplaga

STIEGELMEYERGROUP



Evario one

Den kostnadseffektiva sängen för det dagliga kliniska arbetet



Dina avgörande fördelar

För att minska stress och fysisk belastning i det dagliga sjukhusarbetet måste de flesta medicintekniska produkter ha samma styrkor:

- **Säkerhet**
- **Enkel användning**
- **Optimalt stöd för patienter och vårdpersonal**

På dessa väsentliga fördelar koncentrerade vi oss när vi utvecklade Evario one. Den helt motordrivet justerbara sjukhussängen kombinerar många hjälpsamma funktioner, avlastar personalen och stödjer ett kostnadseffektivt arbete.

Moderna sidoskyddssystem och individuella manövervarianter uppfyller en lång rad krav. Evario one kan användas nästan universellt.

Innehåll

Ekonomiska fördelar	4	Komfort för patienterna	14
Produktutveckling	5	• Enkel sängjustering med "Manöverpanel light"	14
Fördelar för vården	6	• Ergonomisk manövrering av handkontrollen	14
• Det delade ¾-sidoskyddet	6	• Undersängsbelysning	15
• Det kontinuerliga ¾-sidoskyddet	7	• Ytterligare komfort	15
• Ergonomiskt arbete på höfthöjd	8	Säker hygien	16
• Mobilisering för snabbare återhämtning	8	Teknisk service	17
• Fallprevention på natten	9	Tillbehör	17
• Plats för tillbehör	9	Ytterligare användbara produkter	18
Individuella manöverkoncept	10	Utrustning och tillval	19
• Enkel styrning med "Manöverpanel light"	10	Tekniska data	22
• Manövrering med ergonomisk handkontroll	10	Stieglmeyer-gruppen	23
• CPR och lågt huvudläge med upplåsningsmagnet	10		
• Höjdjustering med fotbrytare	10		
• Manövermodul	11		
• Snabb nödjustering	11		
• Bra körbarhet även i små utrymmen	12		
• Enkel patienttransport	12		
• Medicinska sänglägen	13		
• Förlängning för säng och för underbensstöd	13		



Variant med delat sidoskydd

Skydd och mobilisering

- **Liggyta (madrassmått):**
87 x 200 cm
- Ytterbredd mindre än 1 m
- Delat ¾-sidoskydd
- Uppställda sidoskydd i huvudändan kan tjäna som mobiliseringsstöd
- Styrning med handkontroll, integrerade manöverpaneler eller manövermodul



Variant med kontinuerligt sidoskydd

Platsbesparande i små rum

- **Liggyta (madrassmått):**
87 x 200 cm
- Ytterbredd mindre än 1 m
- Kontinuerligt ¾-sidoskydd
- Styrning med handkontroll eller manövermodul
- Påhängt tillbehör är alltid synligt



»Alla investerings-beslut innebär en ekonomisk risk. Jag tittar därför på den långsiktiga användbarheten och naturligtvis på priset. Produkter utvecklade i Tyskland har vad det gäller kvalitet och livslängd med rätta ett enastående rykte.«

Henry Jones
Företagsledning

Vårt erbjudande

- Testad kvalitetssäng
- Låga följdkostnader tack vare lång hållbarhet
- Vårdare kommer att uppskatta snabb och enkel hantering
- Medicinteknik och intern teknik gynnas av låg känslighet för fel och goda hygienegenskaper
- Service efter köpet garanteras

Ekonomiska fördelar tack vare hög kvalitet

Stieglmeyer är den ledande tyska tillverkaren av sjukhussängar och har kombinerat tradition med innovation sedan år 1900. Mer än 120 års erfarenhet, nya idéer och exceptionella kvalitetsstandarder kännetecknar också den kostnadseffektiva Evario one. Tack vare dess långa livslängd och få reparationsarbeten sparar den in kostnader under hela användningscykeln.

I vårt utvecklingscenter i Herford har alla komponenter testats långt utöver standardkraven för att bekräfta deras hållbarhet. Den intelligenta designen förebygger potentiella skador på sängen – exempelvis genom den permanent integrerade, fallsäkra manöverpanelen.

LINAK  Inside
WE IMPROVE YOUR LIFE

Power från Danmark – i våra sjukhussängar installerar vi högkvalitativa drivenheter från LINAK, den ledande internationella leverantören av elmotorlösningar för sängar och möbler. På LINAK testas alla produkter rigoröst och överensstämmer med internationella medicinska standarder. Samtidigt förbrukar de endast en liten mängd energi, sparar kostnader och skyddar miljön.



▲ Tillvalet bromssignal förhindrar att en obromsad säng slits ur kontakten ur väggens när den rullar iväg.



▲ Stötfångarkoner och -hjul minimerar risken för skador vid kollisioner under körning och höjjustering.

Produktutveckling Vi testar utöver standarden



Belastningstest huvud- och fotdelar

- En klo fästes mitt på huvuddelen som utövar högt tryck.
- Sängen är säkert fixerad så att den inte kan röra på sig.
- Vid 100 genomgångar utsätts huvuddelen för en tryckkraft på 500 newton (motsvarar här ca 51 kg) under 30 sekunder vardera och dras fram och tillbaka.
- Fästbultar och andra delar måste klara testet utan några skador.



Belastningstest hjul

- Sängen belastas med 1 400 newton (motsvarar ca 143 kg) och placeras obromsad på rulldynamometern.
- Dynamometern simulerar en 5 timmars non-stop-körning.
- Det får inte uppstå några skador på hjul, bromsar eller andra konstruktionsdelar.



Belastningstest liggyta och drivenheter

- Sängen belastas med vikten av dess säkra arbetsbelastning (250 kg).
- Alla justeringar som anges i bruksanvisningen, som ställer vissa krav, körs i uthållighetstester med 3 000 cykler.
- Därefter måste alla justeringar fortsatt vara möjliga. Drivenheterna och sängens hållfasthet får inte vara försämrade.



Belastningstest sidoskydd

- En pendel som väger 25 kg träffar sidoskyddet 25 gånger från ett 1,60 m avstånd.
- Sidoskyddet måste därefter fungera felfritt. Det får inte uppstå några skadade eller lossade delar.



Belastningstest handkontroll

- Handkontrollens knappar manövreras i 250 000 cykler.
- Detta motsvarar mångfaldigt det antal som kan förväntas under sängens livstid – om ryggestödet justeras ofta utgår man från ca 24 000 justeringar.
- Handkontrollens måste därefter fungera felfritt.

Fördelar för vården

Lätt och säker användning av sidoskydd



▲ Det delade $\frac{3}{4}$ -sidoskyddet kan lossas och sänkas utan ansträngning med en hand.



▲ Det räcker att bara sänka en del i mitten av sängen för att patienten ska kunna ta sig i och ur sängen obehindrat.



▲ Det kontinuerliga $\frac{3}{4}$ -sidoskyddet kan snabbt låsas upp och sänkas med aktiveringsmekanismen i fotänden.



▲ De smala stängerna rör sig lätt och tyst – och ger fri sikt över rummet.

Det delade $\frac{3}{4}$ -sidoskyddet

Enhandsmanövrering i varje situation

Det måste vara möjligt för en vårdare att snabbt sänka sidoskyddet i vardagen – komplicerade mekanismer eller fastklämda delar skulle vara en enorm börda. Med vårt delade $\frac{3}{4}$ -sidoskydd sänker vårdaren bekvämt och tyst bara sängens mittdel med en hand så att patienten kan kliva upp. För noggrann vård kan delen i huvudänden sänkas lika enkelt.



Enhandsmanövrering



Tystgående



▲ Det delade $\frac{3}{4}$ -sidoskyddet erbjuder ett skydd i enlighet med gällande standard och täcker en stor del av liggytan. Vid mycket oroliga patienter kan man välja ett utfyllnadsstycke till fotändan för att stänga luckan.

Det kontinuerliga $\frac{3}{4}$ -sidoskyddet

Enkel sänkning och uppställning

Utrymmet runt sjukhussängen är värdefullt, särskilt i mindre rum, eftersom det behövs för nattduksbord, för att mobilisera patienten och för terapierbjudanden. Det kontinuerliga $\frac{3}{4}$ -sidoskyddet på Evario one kräver inget extra utrymme för nedsänkningen. Det fälls enkelt ner parallellt med sängen. Dess smala stänger gör att patientens blick kan vandra fritt in i rummet eller ut genom fönstret.



▼ Även när sidoskyddet är nedsänkt är ett upphängt tillbehör tydligt synligt.



▲ Om så önskas säkerställer ett utfyllnadsstycke i fotändan ett skydd utan luckor.

»Jag älskar att hjälpa människor och det gör jag helst i ett högmotiverat team. Sjukhussängen Evario one som vi använder varje dag stöttar oss enormt i vårt arbete!«

Laila Tamin
Stationsledning

Vårt erbjudande

- Lätt, intuitiv manövrering
- Lätt att rulla och styra, elektriskt justerbar
- Kan ställas in för olika långa patienter och personal, även lämplig för höga kroppsvikter
- Individuellt anpassningsbara tillbehör
- Lätt att desinficera

Ergonomiskt arbete på höfthöjd




Ryggbesvär är ett av de allvarligaste hälsoproblemen bland vårdpersonal. Med sin höjjustering på upp till 82 cm gör Evario one att även mycket långa personer kan arbeta i ett ryggvänligt upprätt läge på höfthöjd.

Muskuloskeletala besvär står för 20 % av sjukskrivningsdagarna för vårdpersonal.

Hälsorapport 2019 från sjukförsäkringskassan
Techniker Krankenkasse

▲ Den optimala individuella arbetshöjden kan justeras steglöst med något av manöverelementen eller med fotbrytaren.

Mobilisering för snabbare återhämtning

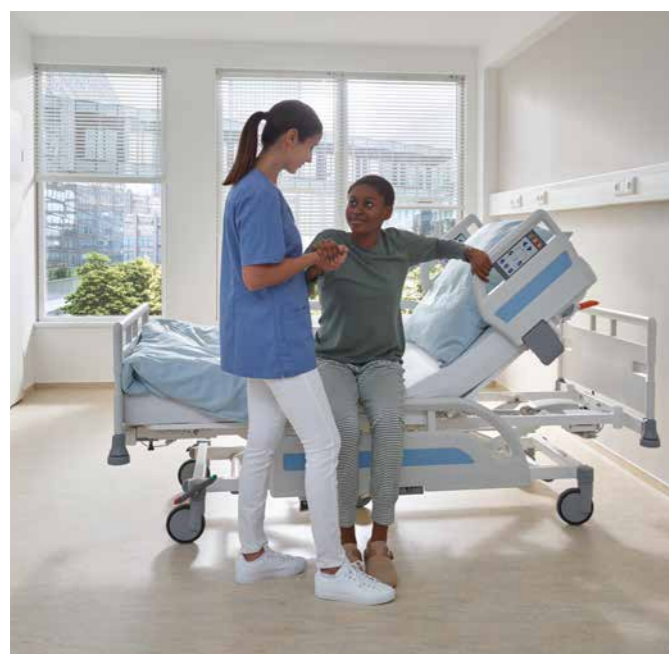


Att försöka sitta och gå tidigt påskyndar ofta återhämtningen avsevärt. Den steglösa höjjusteringen och de mobiliseringsfrämjande sidoskydden gynnar denna process.

DEFINITIVT BÄTTRE
Tidig mobilisering lönar sig för alla

Både patienten och sjukhuset profiterar av tidig mobilisering. Patienterna får ofta därefter en högre livskvalitet och behöver enligt studier betydligt mindre smärtstillande mediciner. Sjukhuset sparar in upp till 1 200 euro per dag vid en förkortad vistelse. Evario one betalar sig alltså snabbt.

▲ Olika långa patienter drar nytta av en individuell, ergonomisk uppstigningshöjd.

Fallprevention på natten

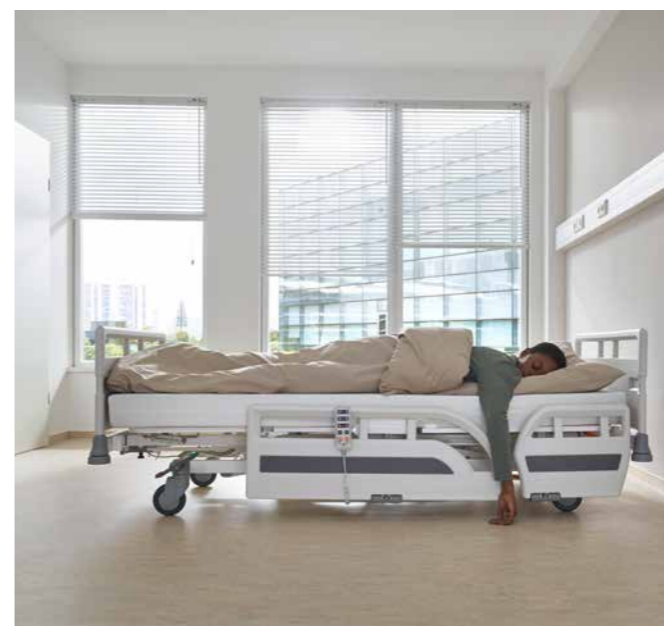

▲ Det låga lägсталäget minskar fallhastigheten vid en fallolycka. Skaderisken minskar avsevärt.

Patienter med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar bör skyddas mot fallskador på natten – även utan frihetsbegränsande åtgärder. Det låga lägstaläget på Evario one på endast 36 cm minskar risken vid ett fall avsevärt.



▲ Delen i huvudändan på det delade sidoskyddet stöder patienten som ett mobiliseringsstöd när hen lämnar sängen.

Plats för tillbehör – för en optimal skötsel



För att ge patienten bästa möjliga vård måste apparater och tillbehör få tillräckligt med utrymme och kunna fästas i exakt definierade positioner. De smala försörjningsbyglarna som tillval på långsidorna av Evario one erbjuder stor flexibilitet i vardagen. Sidoskydden och huvud- och fotdelarna är också idealiska för att fästa tillbehör. Skräddarsydda hjälpmedel som våra korgar för syre- eller urin-flaskor ger ett optimalt utbud från en enda källa.

◀ Tillvalen försörjningsbyglar och praktiska grepplistor möjliggör modern patientvård från alla håll.

Individuella manöverkoncept

Vårdpersonal och patienter behöver bekväma och säkra manöveralternativ för sängen. Vår "Manöverpanel light" erbjuder skräddarsydda lösningar både på in- och utsidorna. Fokus på de riktigt viktiga funktionerna underlättar manövreringen avsevärt. Alternativt kan en överskådlig handkontroll med ergonomiskt bekväma knappar väljas. En praktisk upplåsningmagnet gör att vårdaren snabbt kan aktivera alternativen för CPR och Trendelenburg. Om personalen har händerna fulla kan sänghöjden även justeras med fotpedalen.

Enkel styrning med "Manöverpanel light"

Skräddarsydda komfort- och vårdfunktioner finns tillgängliga för vårdpersonal och patienter på ut- och insidan av "Manöverpanel light". Om så önskas kan panelen integreras i de delade sidoskydden.



Manövrering med ergonomisk handkontroll



▲ Den intuitiva handkontrollen är tillgänglig för båda typerna av sidoskydd och kan alltid enkelt hängas upp inom räckhåll.



▲ Funktionsknapparna med mörkblå bakgrund är lätta att förstå i alla situationer.

CPR och lågt huvudläge med upplåsningmagnet



◀ CPR-funktionen och chockläget är integrerade i handkontrollen och aktiveras med en upplåsningmagnet. I en nödsituation kan vårdpersonalen reagera på några sekunder, utan att lämna vårdplatsen.

▶ Om vårdpersonalen har händerna fulla kan liggytan även bekvämt höjas och sänkas med hjälp av en fotbrytare. I stressiga situationer är detta en avsevärd avlastning.

Höjdstyrning med fotbrytare



Manövermoduler

Förutom panelen eller handkontrollen gör en utdragbar modul som är integrerad i fotändan att sängen kan styras säkert. Den större manövermodulen M erbjuder mycket komfort, medan den sparsamma manövermodulen S ger en praktisk reduktion till väsentliga funktioner.



Manövermodul M

◀ Generöst arrangerade knappar säkerställer ett stressfritt arbete när manövermodul M används. Båda manövermodulerna sitter i den utdragbara sängklädeshyllan och kan vid behov fästas på fotdelen.



Manövermodul S

◀ På den sparsamma manövermodulen S visas tydligt alla viktiga styrmöjligheter.

Snabb nöjustering

Vid återupplivning blir Evario one ett viktigt hjälpmedel. Chockläget kan aktiveras omedelbart med den lättillgängliga nödspaken eller manöverelementen i huvudändan. Snabbt avtagbara gavlar ger fri tillgång till patienten.



◀ De orange färgade nödknapparna på den yttre "Manöverpanel light" gör att vårdpersonalen kan agera snabbt, utan att ta blicken från patienten.

▶ Ännu snabbare kan CPR-läget ställas in mekaniskt med nödspaken under liggytan.



◀ För bättre åtkomst till patienten kan huvud- och fotdelarna låsas upp och tas bort utan verktyg.

Bra körbarhet även i små utrymmen




Med sina platsbesparande mått är den kostnadseffektiva Evario one mycket väl lämpad att använda i delade rum. Exakt manövrering är viktigt för att avlasta personalen och för att undvika kollisioner. Med sina moderna hjul är det lätt att styra sängen. Tillvalet ett femte hjul gör att det blir lättare att köra i snäva kurvor.

Tillvalet bromssignal varnar om den obromsade sängen fortfarande är ansluten till uttaget. Detta förhindrar kabel- och väggskador vid bortrullning.



DEFINITIVT BÄTTRE
Fördelar med ett femte hjul

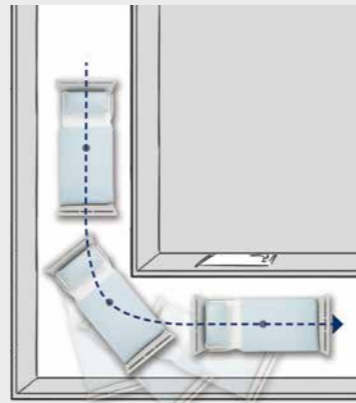

Om sängen styrs snabbt i en kurva med en patient i kan höga centrifugalkrafter uppstå. Det femte hjulet håller Evario one säkert i rätt spår och förhindrar att den glider åt sidan.

Enkel patienttransport

Som den perfekta följeslagaren till Evario one kan det lätta nattduksbordet Quado enkelt hängas på huvudgaveln och skjutas med när en patient ska flyttas.

▼ Allt efter önskemål kan Quado transporteras med på huvud- eller fotdelen. Endast en vårdare krävs för att flytta patienten.



Medicinska sänglägen



Alla sängjusteringar med en säker arbetsbelastning på 250 kg även i batteridrift



◀ Cardiac Chair-positionen avlastar hjärtat och stärker cirkulationen.

▶ Fowler-positionen gör andningen lättare och förbättrar syresättningen.



◀ Nedfällning till det låga fotläget kan göra det lättare att svälja och förhindra aspiration.



▶ Trendelenburg-positionen kan mildra effekterna av en chock.



Auto Stop: Liggytan stoppar åter i horisontellt läge efter fällningen, utan att sängen behöver köras ner helt.

Förlängning för säng och för underbensstöd

För att erbjuda längre patienter mer liggkomfort kan vårdpersonalen mycket enkelt aktivera tillvalet sängförlängning. Först dras sängramen ut utan verktyg. För att förlänga liggytan kan ett utfällbart underbensstöd eller en iläggingsbar förlängningsdel väljas.



▲ Sängramens förlängning kan låsas upp och dras ut utan verktyg.



▲ En utfällbart metallbygel förlänger underbensstödet på begäran.



▲ För att förlänga madrassen erbjuder vi en skraddarsydd stoppningsdel.

»Diagnosen gjorde mig väldigt upprörd och jag var förtvivlad. Vårdpersonals hjälp och det välgörande interiören hjälpte mig mycket. Jag kände mig väl omhändertagen på kliniken!«



Tara Olumide
Patient

Vårt erbjudande

- Säng som kan justeras efter kroppsstorlek
- Bekväm justering av sängen via manöverpanel eller handkontroll möjlig
- Undersängsbelysning säkerställer säkerhet på natten
- Delat sidoskydd kan användas som mobiliseringsstöd


Komfort för patienterna

Enkel sängjustering med "Manöverpanel light"




Patienter kan alltid lätt nå "Manöverpanel light". De enkla justeringsmöjligheterna är också lätta att förstå för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

◀ "Manöverpanel light" är alltid på ögonhöjd för patienten.

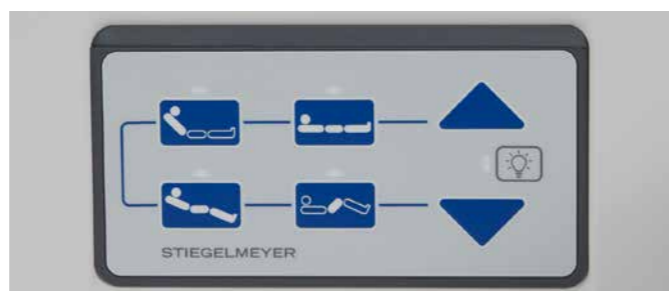

Ergonomisk manövrering av handkontrollen

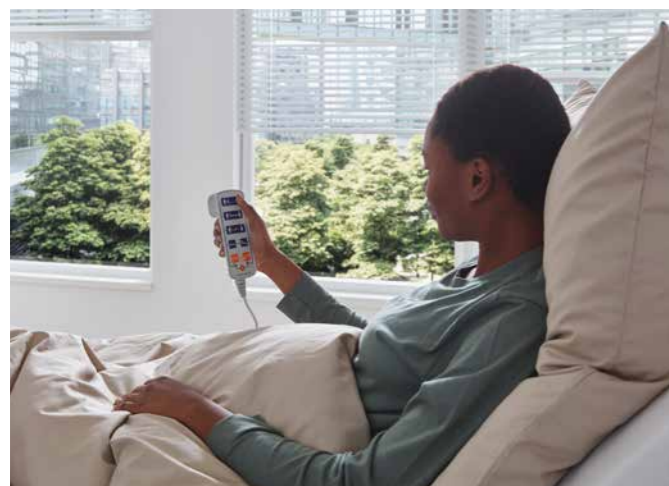

Den ergonomiska handkontrollen med sina intuitiva symboler är omedelbart förtrogen för alla patienter och skapar en positiv känsla av säkerhet.



▲ Nödjusteringar kan endast aktiveras med en magnet, så att patienten aldrig har tillgång till vårdnivån.

Undersängsbelysning



Tillvalet undersängsbelysning är ett stort plus när det kommer till fallprevention. Den visar patienter vägen på natten, utan att störa andra sovande patienter.

Nästan en tredjedel av patientfallen på sjukhus sker när patienter ska gå på toaletten på egen hand.

Veit Kinne och Jörg Klewe, HeilberufeScience

▲ Undersängsbelysningen visar patienten vägen genom rummet på natten.

Ytterligare komfort



En bra image utåt ökar lönsamheten för varje företag – Evario one och nattduksbordet Quado bidrar avgörande till detta. Med en bekväm sittställning, bekväm sängförlängning och sidoskydd som man kan se igenom skapar sängen en trevlig hotellatmosfär utan extra kostnader. Med valfria USB-portar och monitorfästen blir Quado till ett mediacentrum för patienten.

◀ Sittställningen och nattduksbordet Quado är en idealisk kombination för måltider eller avkopplande läsning.



▲ Sängförlängning.



▲ Bra sikt när sidoskydden är uppställda.



Om Quado transporteras med sängen när en patient flyttas, kan patienten ta med sig sina personliga tillhörigheter, utan att behöva packa om och inventera.

◀ Det påhängbara Quado gör det avsevärt mycket lättare att flytta en patient.

»Varje tillverkare vars produkter kan bevisas minska riskerna får ett bra betyg av mig under provtagningsprocessen. På Evario one kontrollerade vi hygienegenskaperna: Efter noggrann desinfektion fanns inga patogener eller bakterier kvar.«



Maria Abbet
Hygienist

Vårt erbjudande

- Platt design med goda hygienegenskaper
- Dold kabeldragning
- Liggytans delar kan tas bort för bearbetning
- Rent och snyggt understativ för enkel rengöring

Säker hygien

Enkel manuell bearbetning

Säker, validerbar hygien är viktigare än någonsin i pandemitider. Evario one gör manuell bearbetning enklare för hygienspersonal tack vare dess design med få nischer. Det sparar tid, fysisk ansträngning och mänskliga resurser.



▲ Inga otillgängliga nischer på sänggavlar och sidoskydd.



▲ Plan liggyta med enkel borttagning av plastkåpan.



▲ Enkel transport av sängbordet Quado för bearbetning.



▲ Ordentlig kabeldragning.

Teknisk service



▲ Evario one med lågt underhåll gör arbetet för de interna teknikerna enklare



▲ Styrningen och batteriet är lätt åtkomliga i huvudänden av sängen.

Från leveransen av sängen till slutet av användningen kan du räkna med förstklassigt stöd från vårt serviceteam. Hit hör exempelvis

minst 15 års leverans av reservdelar från och med köpet av sängen. Stiegmeyers produkter är därför alltid en säker investering i framtiden.

Vi stödjer dig och dina interna tekniker med alla nödvändiga inspektioner och underhåll. Detta arbete kan utföras utan ansträngning, framför allt tack vare den lättillgängliga styrningen av sängen.

Din återförsäljare ger dig gärna råd om våra lokala serviceerbjudanden.

»Tid är den viktigaste komponenten hos oss. Produkter och reservdelar måste komma snabbt. Jag föredrar produkter som även är snabba och enkla att underhålla och reparera. På Evario one är alla komponenter mycket lätta att komma åt.«



George Schumacher
Intern tekniker

Tillbehör



▲ En namnbricka gör det lättare att tilltala patienten. Standardskenor kan hängas i runt hela sängramen.



▲ Korgen för urinflaskan kan enkelt hängas på plastsidoskyddet.



◀ IV-ställning möjliggör en exakt försörjning.



▲ Stabil och säker: korg för syrgasflaska.



▲ Lyftbåge med handtag gör det lättare att placera sig i sängen.

Funktionerna hos Evario one kan enkelt utökas med originaltillbehör från Stiegmeyer. På så sätt passar sängen på nästan alla avdelningar.

Ytterligare användbara produkter för att komplettera din Evario one

Detta kanske du också är intresserad av!

Nattduksbord Quado



▲ Det tunna nattduksbordet Quado är idealiskt för dagligt bruk på sjukhus i rum med litet utrymme. När sängbordet inte behövs kan det enkelt och tyst fällas ner. Alternativt kan Quado även användas som medicin-, rengörings- eller avdelningsvagn. Flera Quados kan skjutas in i varandra för att spara plats.

Soreno eco



◀ Nattduksbordet Soreno eco övertygar med sitt rymliga, mångsidiga förvaringsutrymme. Det finns med och utan nedfällbart sängbord.

Växeltryckssystem Novacare



▲ Växeltryckssystemet Novacare skyddar patienter från punkttryck och minskar risken för decubitus.

Madrasser

Stieglmeyer erbjuder en passande madrass för alla behov. Dra nytta av modern decubitusprofilax och en exakt anpassning till liggytans justeringar. Exempelvis är Z1-modellen extra flexibel tack vare sin vågiga skärning.



Utrustning och tillval

Huvud- och fotdelar



Design Intercontinental

- Tillverkad av PP-plast
- Huvud- och fotdelar kan tas bort helt
- Särskilt lätt att rengöra
- Skydd mot oavsiktlig borttagning

Sidoskydd



Kontinuerligt ¾-sidoskydd

- Skyddshöjd ca 38 cm över liggytan
- Tyst sänkning
- Fri genomsikt för patienten



Delat ¾-sidoskydd

- Tyst sänkning med enhandsaktivering
- Skyddshöjd ca 39 cm över liggytan
- Delat sideskydd av höghållfast plast
- Enkel, kraftstött manövrering med dämpad rörelse
- Omfattande klämskydd

Liggytor



Liggyta med lameller

- Material pulverlackerade metallameller
- Lätt att rengöra



Liggyta av lameller med PP-överdrag

- Material pulverlackerade metallameller med plastkåpor
- Plastkåporna kan enkelt tas bort för enkel rengöring
- Med urtag för bältssystem

Hjul



Cover-hjul

- Diameter 125 mm
- Höjjusteringsområde för liggytan ca 36–80 cm
- Understativets markfrigång ca 15,3 cm



Integralhjul

- Diameter 150 mm
- Höjjusteringsområde för liggytan ca 38–82 cm
- Understativets markfrigång ca 17,3 cm



Femte hjul

- Diameter 125 mm

Bromspedal



Bromspedal i plast

- Plast
- Pedalytor med färgmärkning
- Snabb och intuitiv manövrering



Metallbygelbroms, huvudändan

- Metall, pulverlackerad
- Trampa ner för att bromsa
- Lyft upp bygeln underifrån för att lossa bromsen

Stötfångare



plast

- Diameter 80 mm
- Material: polyamid (PA6)
- Inklusive stötfångarkon

Manöverelement



Manöverpanel light

- Integrerad i det delade ¾-sidoskyddet på båda sängsidorna
- Praktiska justeringsmöjligheter för patienter (insida) samt vård- och teknisk personal (utsida)
- Förinställda sänglägen
- Snabb aktivering av CPR-funktionen



Handkontroll

- Handkontroll med spärrfunktion för vårdpersonalen
- Enkel manövrering av sängen
- Direkt aktiveringsbara nödjusteringar
- Inkl. sittposition



Manövermodul S

- Kan förvaras på sängklädeshyllan när den inte används
- Funktioner som kan manövreras och spärras individuellt
- Inställning av Trendelenburg- och CPR-positionen



Manövermodul M

- Visning av spärrstatus för de enskilda funktionerna inkl. transport- och behandlingsposition
- Spärrning och manövrering av alla individuella funktioner
- Nödinställningar
- Minnesfunktioner
- Batteriladdningsindikator



Fotbrytare

- Enkel höjdjustering av sängen med foten

Elutrustning



Undersängsbelysning

- Kan aktiveras via handkontroll eller manöverpanel
- Diskret, bländfritt ljus för orientering i mörker



Bromssignal

- En signal ljuder när nätkontakten inte dras ur och bromsen lossas
- Skydd mot skador och oavsiktlig bortrullning av sängen

Ytterligare utrustning



Tillbehörsbygel

- Möjliggör plastbesparande montering av extrautrustning på sängens sidor



Integrerad förlängning för underbensstöd

- Mer komfort vid sängförlängning
- När bygeln fälls ut förlängs underbensstödet



Sängförlängning

- Integrerad förlängning kan dras ut på några ögonblick
- Förlänger liggytan med 18 cm



Utfyllnadsstycke sideskydd

- Material svetsad stålörskonstruktion
- Kan klickas fast på skruvfästet utan verktyg




Vinkelkniv

- Lättavläst gradskiva
- Säker inställning av liggytan för medicinska sänglägen

Färger och dekorer

För att anpassa Evario one till ditt individuella inredningskoncept erbjuder vi ett urval av 6 dekorer från Stieglmeyer-kollektionen.

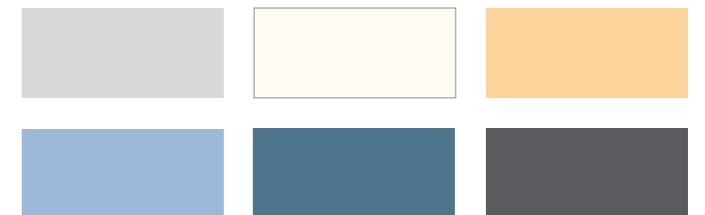

Utrustning och tekniska data

Utrustning / tillval	
Sidoskydd	
Kontinuerligt ¾-sidoskydd	✓
Delat ¾-sidoskydd i plast	0
Design huvud- och fotdelar	
Intercontinental	✓
Grundfärg	
Kristallvit	✓
Dekontaminering, skyddsgrad	
Manuell bearbetning IPx4	✓
Liggytor, 4-delade	
Liggyta av metallameller	✓
Liggyta av metallameller med PP-överdrag	0
Stötfångare	
4 plast, runt om	✓
Hjul	
Cover-hjul Ø 125 mm	✓
Integralhjul Ø 150 mm	0
Femte hjul Ø 125 mm	0
Bromspedal	
2 x plast med färgmärkning, 2 x metall	0
2 x plast med färgmärkning	✓
Spårhjulposition	
Huvudändan höger	✓
Huvudändan vänster	0
Fotändan höger	0
Fotändan vänster	0
Sängens mitt	0
Manöverelement	
Handkontroll med spärrfunktion	✓
Integrerad manöverpanel light	0
Integrerad manöverpanel light + handkontroll med spärrfunktion	0
Manövermodul S på sängklädeshylla	0
Manövermodul M på sängklädeshylla	0
Fotbrytare för höjdjustering	0
Ytterligare utrustning	
2 fästen vardera för IV-ställning vid huvud- och fotändan	✓
Femte hjul	0
Sängklädeshylla	0
Förlängning för underbensstöd	0
Integrerad sänförlängning	0
Vinkelkniv	0
Tillbehörsskenor på sidan	0
Fäste för lyftbåge	
2 hylsor för lyftbåge av runt rör vid huvudändan	✓
Elutrustning	
Undersängsbelysning	0
Bromssignal	0
Batteri	
Bly-gel-batteri	0

Tekniska data	
Mått och vikt	
Yttermått	99,7 x 214 cm
Liggyta (madrassmått)	87/90 x 200 cm
Sängförlängning	18 cm
Uppdelning av liggytan	76 – 21 – 32 – 52 cm
Längdutjämnning av ryggstödet	4 cm
Säker arbetsbelastning	250 kg
Maximal patientvikt	ca 240 kg
Markfrigång understativ	15,3–17,3 cm
Tjänstevikt	ca 130 kg
Skyddshöjd kontinuerligt ¾-sidoskydd	38 cm
Skyddshöjd delat ¾-sidoskydd	39 cm
Justeringsområden	
Fällning till lågt huvudläge	15,5°
Fällning till lågt fotläge	15,5°
Liggytans höjd (cover-hjul Ø 125 mm)	ca 36–80 cm
Liggytans höjd (integralhjul Ø 150 mm)	ca 38–82 cm
Vinkel ryggstöd	70°
Vinkel lårstöd	32°
Vinkel sträckta ben högt läge	11°

✓ = standard 0 = tillgänglig som tillval

Tekniskt och visuellt utförande skiljer sig från de andra Evario-modellerna



Värdebevarare Framtidsdesigner

STIEGELMEYERGRUPPE

Värdebevarare

Vårt företag grundades år 1900 i Herford och har varit familjeägt sedan dess. Respekt och ansvar gentemot våra kunder, anställda och partners är grunden för vårt dagliga arbete. Med utgångspunkt i sådana värden och många års erfarenhet erbjuder vi våra kunder världen över högkvalitativa produkter, lösningar och tjänster inom vård och hälsa.

Framtidsdesigner

För att hantera de snabba förändringarna inom vård och hälsa, utvecklar vi alla våra produkter själva. Innovationer och visioner för framtidens vård är målet med vårt arbete. Vi står i ständig kontakt med våra kunder så att vi kan hjälpa dem i det vardagliga arbetet. Att förverkliga morgondagens trender redan idag är en framgångsrik tradition hos oss.

Vår expertis

Sjukhus

Vårdhem

Vård i hemmet

Bekväma sängar

Objektmöbler

Service



Stiegelmeier-gruppen är din internationella partner för sjukhus och vårdinrättningar, och med varumärket Burmeier för vård i hemmet. Vi hjälper våra kunder med praktiska produkter, lösningar och tjänster som vi utvecklar fortlöpande.

- Grundades 1900 och är fortfarande familjeägt
- Över 1 100 anställda över hela världen
- Tillverkning av alla kärnprodukter i egna fabriker
- Produktutveckling och produktion i Tyskland
- Service, utbildning och processoptimering hos kunden
- Internationella certifieringar och export till mer än 60 länder
- Distributörer i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen och Sydafrika

Våra varumärken





STIEGELMEYERGROUP

Huvudkontor/Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Hitta din kontaktperson på vår webbplats:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com