



# TR 4200 Atlas Junior

## Duschvagn för tunga brukare

Hygiene Equipment  
Designed for People

### Atlas Junior - Duschvagn för dina speciella behov



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDD 93/42EEC.

TR reserves the right to make design changes and/or improvements without notice.



Sidogrindarna kan fällas vid överflyttning och fällas upp för säker transport



Liggytan kan vinklas för bra avrinning alternativt Trendelenburgläge



Duschvagnen Atlas är utvecklad för att ge utrymme och bärighet för Era mest krävande vårdtagare. Atlas kan användas vid duschning, som skötvagn eller behandlingsvagn. Möjligheterna är många.

Vårdtagaren kan på ett säkert sätt flyttas från säng till Atlas och åter.

Frigången på vagnens underrede tillåter överföring från de flesta mobila lyftar. Båda sidogrindarna kan fällas helt vilket underlättar överflyttningen.

Via handkontrollen kan liggytan höjas och sänkas tack vare de två kraftiga ställdonen. Med handkontrollen styrs även vinklingen av liggytan (max 4 grader i båda riktningarna) för att ge bra avrinning vid duschning alternativt Trendelenburgläge. En ljudsignal indikerar när liggytan är i plant läge.

Sidogrindarna kan ställas i tre olika lägen (upprest, horisontellt alternativt hängande) för att ge god säkerhet och underlätta överflyttningen.

Liggytan har avvisarhjul i varje hörn. Alla fyra hjulen är låsbara via fotreglage (centrallåsning). Samma reglage reglerar även riktningsspärren för rakstyrning.

TR 4200 levereras med batteriladdare, avloppsslang och huvudkudde. Två olika kilkuddar finns som tillbehör.



**TR EQUIPMENT**



# TR 4200 Atlas Junior

## Duschvagn för tunga brukare

Hygiene Equipment  
Designed for People



### Funktioner

Via handkontrollen styrs de två kraftfulla ställdonen som tyst och enkelt höjer och sänker liggplattan.

Handkontrollen styr även tippningen av liggyta i båda riktningarna. Vid behov kan tippningen användas som "Trendelenburg" läge.

Tack vare liggytans höjdställningsalternativ får vårdaren alltid en bekväm arbetshöjd.

En summerton ljuder när liggytan är i horisontellt läge.

Vid transport genom trånga passager fälls sido-grindarna enkelt inåt och reducerar duschvagnens bredd.

Liggytan har avvisarhjul i alla fyra hörn för att skydda dörrar och vägpassager. Som standard levereras duschvagn med en flamsäker madrass, 1 m avlopp med töjbar avloppsslang samt kudde.

TR 4200 är tillverkad av varaktigt och tåligt material såsom pulverlackerat rostfritt eller elförzinkat stål som underlättar enkel rengöring och effektivt underhåll. Madrasen är löstagbar.



Bekvämt fotreglage för rakstyrning, transportläge och bromsning av hjul.

### Specifikationer

Längd	2150 mm
Bredd	740 mm
Höjd	535-835 mm
Max belastning	270 kg
Chassi - Material	Pulverlackad rostfritt stål
Hjul	Broms på samtliga hjul samt riktningsspätt via central fotkontroll
Hand kontroll	För höjjustering samt tiltning
Madras, kudde	Flamsäkert material
Batteri	Laddningsbart, 24 V, 2 x 7Ah

### Tillbehör:


Kilkudde (580\*600\*140) 15°

Kilkudde (580\*600\*280) 30°

Blå madrass och kudde (standard grå)

Längre avloppsslang 2,5 mm (standard 1 m)

### Mått (mm)

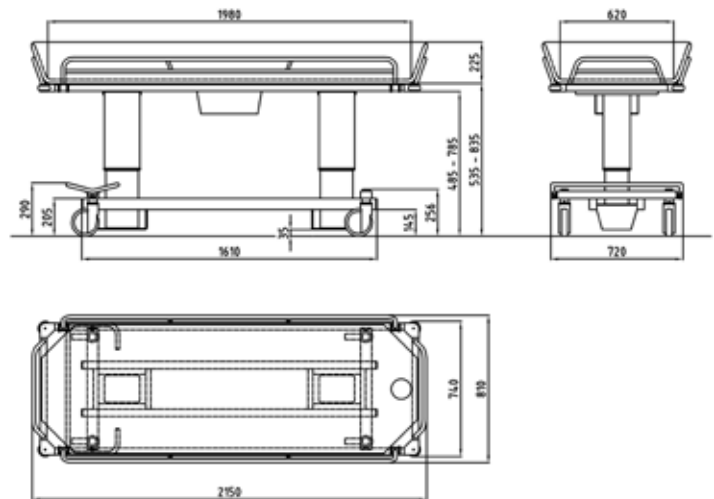

### Head office

TR Equipment AB, Sweden  
Phone: +46 140 38 50 60  
info@trequipment.se  
www.trequipment.com

### DISTRIBUTÖR SVERIGE

Gate Rehab Development AB,  
Tel: 0371-318 00  
info@gaterd.se  
www.gaterd.se



TR EQUIPMENT