



Inleiding

Beschrijving

Gebruik

Onderhoud

Jaarlijkse inspectie

Onderdelenlijsten

Garantie bepalingen



Tracey

Inhoud

1	Inleiding	
1.1	De Tracey tillift	3
1.2	Aandachtspunten	4
1.3	Technische gegevens	5
2	Beschrijving	
2.1	Overzicht Tracey	6
2.2	Controle box	7
2.2.1	Noodstopknop	
2.2.2	Elektrische nood-neer bediening	
2.2.3	Display	
2.3	Handbediening	8
2.4	Hefmotor	9
2.5	Batterij	
2.5.1	Levensduur batterijen	
2.6	Batterijlader	10
2.6.1	Opladen van batterijen	
2.7	Onderstel	11
2.7.1	Afstellen pootverstelling	
2.8	Wielen	
2.9	Juk	12
2.10	Tilbanden	
2.10.1	Baleinen	13
2.10.2	Bevestiging aan de tillift	
2.10.3	Soorten en maatvoering	
2.10.4	Tabel standaard tilbanden	14
2.10.5	Was instructie	15
3	Gebruik	
3.1	Ingebruikname	16
3.2	Tilband aanbrengen	
3.2.1	Tilband zittend aanbrengen	
3.2.2	Tilband liggend aanbrengen	
3.2.3	Toiletband aanbrengen	17
3.3	Tillen	18
3.3.1	Tillen naar het toilet	
3.4	Rijden	19
3.4.1	Draaien met de lift	
3.5	De zorgvrager uit de lift halen	
4	Onderhoud	
4.1	Planning van onderhoud	20
4.1.1	Dagelijks onderhoud	
4.1.2	Wekelijks onderhoud	
4.1.3	½ Jaarlijks onderhoud	21
4.1.4	Jaarlijkse inspectie en onderhoud	
4.2	Storingen zoeken en verhelpen	22
4.3	Verwijdering onderdelen	
4.4	Onderdelenlijsten Tracey	23
5	Appendix	
5.1	Garantiebepalingen	27
5.2	Over United Care	
5.3	Contact	
5.4	EG- Verklaring van overeenstemming	28

Voorwoord

Dit handboek

Het doel van dit handboek is om zorgverleners de Tracey te kunnen laten bedienen en eenvoudig (preventief) onderhoud te kunnen uitvoeren.

Dit handboek gaat in op de volgende aspecten van het werken met de Tracey:

- Beschrijving van de delen van de Tracey
- Beschrijving van de werking van de Tracey
- Stap-voor-stap tilinstructies
- Onderhoud van de Tracey

Naast dit handboek bevindt zich aan de lift een Quick Reference. Dit blad bevat een verkorte beschrijving, veiligheidsvoorschriften en aandachtspunten voor het bedienen van de Tracey.

Gebruikte symbolen



Attentie punt



Let op hoogspanning



De fabrikant van het product



Leest eerst het handboek alvorens de lift te bedienen



De Tracey tillift voldoet aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen, en heeft een CE-markering.

Inhoud van de verpakking

Verwijder de verpakking van de Quinty en neem de lift van de pallet en controleer of de onderstaande delen aanwezig zijn:

- De Tracey tillift
- Eén of twee batterijen
- Een batterijlader (met beugel en netsnoer)
- Eventueel een tilband
- Een handleiding
- Quick reference kaart (hangt aan de lift)
- Logboek

1.1 De Tracey tillift

De Tracey is een tilbanden lift bedoeld om een passieve transfer te verzorgen voor zorgbehoevende personen. De zorgbehoevende/zorgvrager neemt plaats in een tilband dat aan het juk van de tillift wordt gekoppeld. De zorgvrager kan in een zittende of liggende houding worden gebracht om een comfortabele transfer te maken van b.v. een stoel naar bed.

De Tracey kan onder andere worden gebruikt bij de volgende soorten transfers

- Van en naar stoel, rolstoel.
- Van en naar toilet.
- Van en naar douche-bad-toiletstoel.
- Van en naar bed, brancard.
- Van en naar de vloer.

De Tracey is een compacte wendbare lift met een grote reikwijdte. Ze tilt personen vanaf de grond tot een zeer hoge tilhoogte. Het juk kan versteld worden van een zittende naar een liggende positie. Het unieke is dat het juk in een vaste stand meedraait met de beweging van de hefarm. De tilband wordt door middel van clips aan het juk gekoppeld.

De poten van het onderstel zijn traploos elektrisch in breedte te verstellen voor betere positionering om b.v. stoelen en rolstoelen.

De bediening van de Tracey is erg eenvoudig.



De te verwachten levensduur, bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden en afgezien van hijsbanden, tilbanden en batterijen, is 10 jaar (100.000 transfers) bij onderhoud volgens voorschrift.

1.2 Aandachtspunten



- De Tracey is ontworpen om in combinatie met een passende tilband, zorgvragers te tillen en te verplaatsen en mag als zodanig ook alleen voor dit doel worden gebruikt. Elk ander gebruiksdoel is niet toegestaan.
- Het bedienen van de lift is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.
- Het is niet toegestaan met de Tracey een gewicht te tillen van meer dan de maximaal toegestane belasting. Dit staat vermeld op de arm van de lift.
- Het is niet toegestaan om samen met de zorgvrager iets anders (bijvoorbeeld een stoel of rolstoel) op te tillen.
- Controleer bij het tillen altijd of er voldoende ruimte boven de lift is. Controleer bij het passeren van een deurkozijn ook altijd of er voldoende ruimte boven de hefarm is.
- Controleer bij het aanrijden en het verrijden van de lift altijd vooraf of de ruimte, waar de transfer plaats gaat vinden, vrij is van obstakels.
- Behandel de lift met zorg en zorg voor een schone nette werkomgeving.
- De lift mag niet worden gebruikt op hellende vlakken met een hellingshoek van meer dan 5 graden.
- Batterijen opladen dient altijd te geschieden in een goed geventileerde, droge ruimte. Laders dienen te worden aangesloten volgens de geldende installatievoorschriften.
- Gebruik de Tracey alleen met een door United Care geleverde tilband, neem bij voorgenomen gebruik van een ander soort tilband altijd contact op met United Care.
- Het bevestigen van de clips van een tilband aan het juk van de Tracey dient zorgvuldig te gebeuren, het niet juist aanbrengen van een clip kan het uit de lift vallen van een zorgvrager en daarmee ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
- De hefmotor van de lift is alleen bedoeld voor het omhoogduwen van de hefarm, en daarmee het tillen van de zorgvrager, en mag nooit als steun of als handgreep worden gebruikt.
- Trekken, duwen of trappen (met handen of voeten) aan motoren kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.
- De Tracey dient minimaal één keer per jaar periodiek geïnspecteerd te worden.
- Service en onderhoud aan de lift is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.
- Het repareren en/of vervangen van delen van de lift is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.
- Gebruik voor service en reparatie alleen originele, door United Care, geleverde onderdelen.
- Indien er vervormingen zijn opgetreden aan de lift door foutief gebruik of door transport, dan mag deze niet meer worden gebruikt en dient retour te worden gezonden aan de leverancier.






1.3 Technische gegevens

Specificaties Tracey

Totaal gewicht	58 kg
Maximale tilcapaciteit	200 kg
Geluidsdruk	Belast heffen 48 dB
Geluidsdruk	Belast potenspreider 52 dB


Specificaties elektrische delen

Hefmotor	24Vdc 10A , IP65 10% inschakelduur
Controle box, Jumbo Care	24Vdc 10A max IP65, EN60601-1 10% inschakelduur
Handbediening, Jumbo Care	HB3, open bus, IP65, 6 functies
Batterij	Pb 24Vdc, 2.9A, 74Wh Li-ion 25.6Vdc, 3.3Ah, 84Wh IP65, EN60601-1
Batterijlader	Primair 100-240Vac 50/60Hz, 400mA, Zekering 1,5A 250V
	Secundair 29,5Vdc, 19W max IP65, EN60601-1

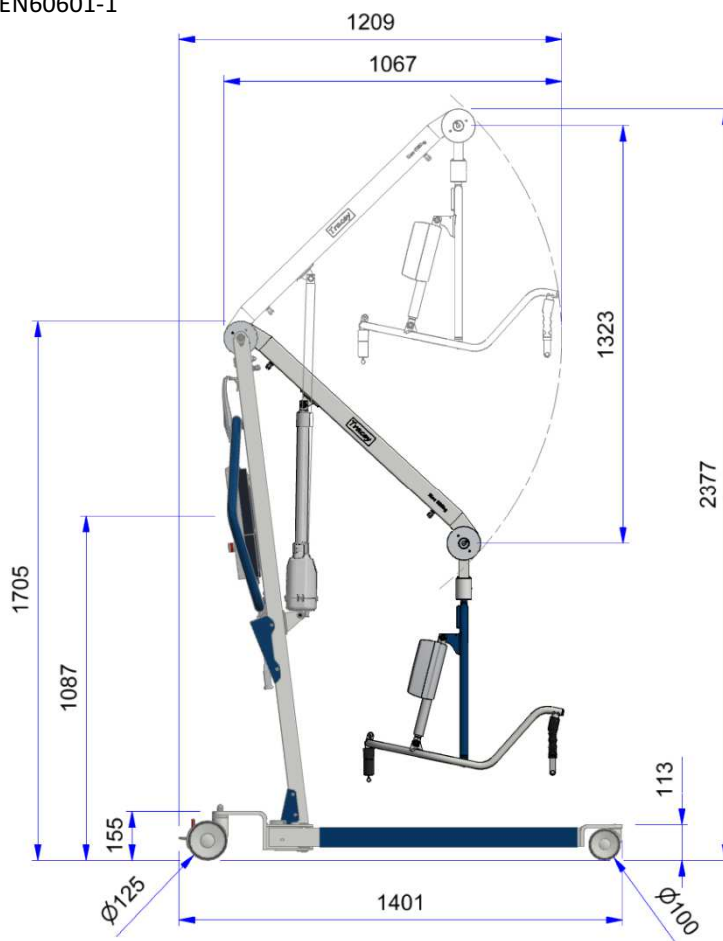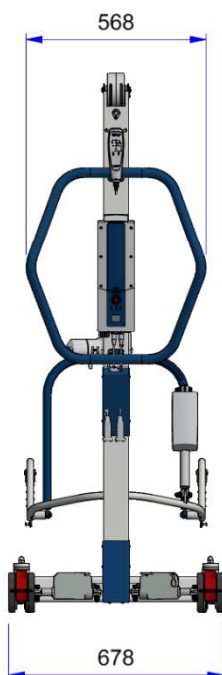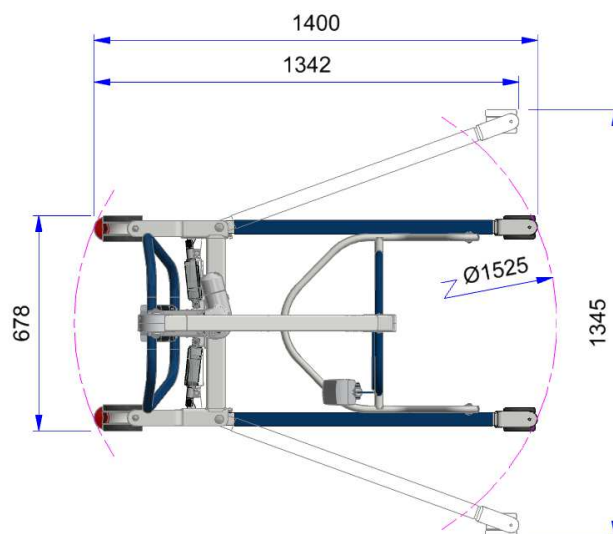

2.1 Overzicht Tracey

De volgende onderdelen worden in een eigen sectie nader beschreven.

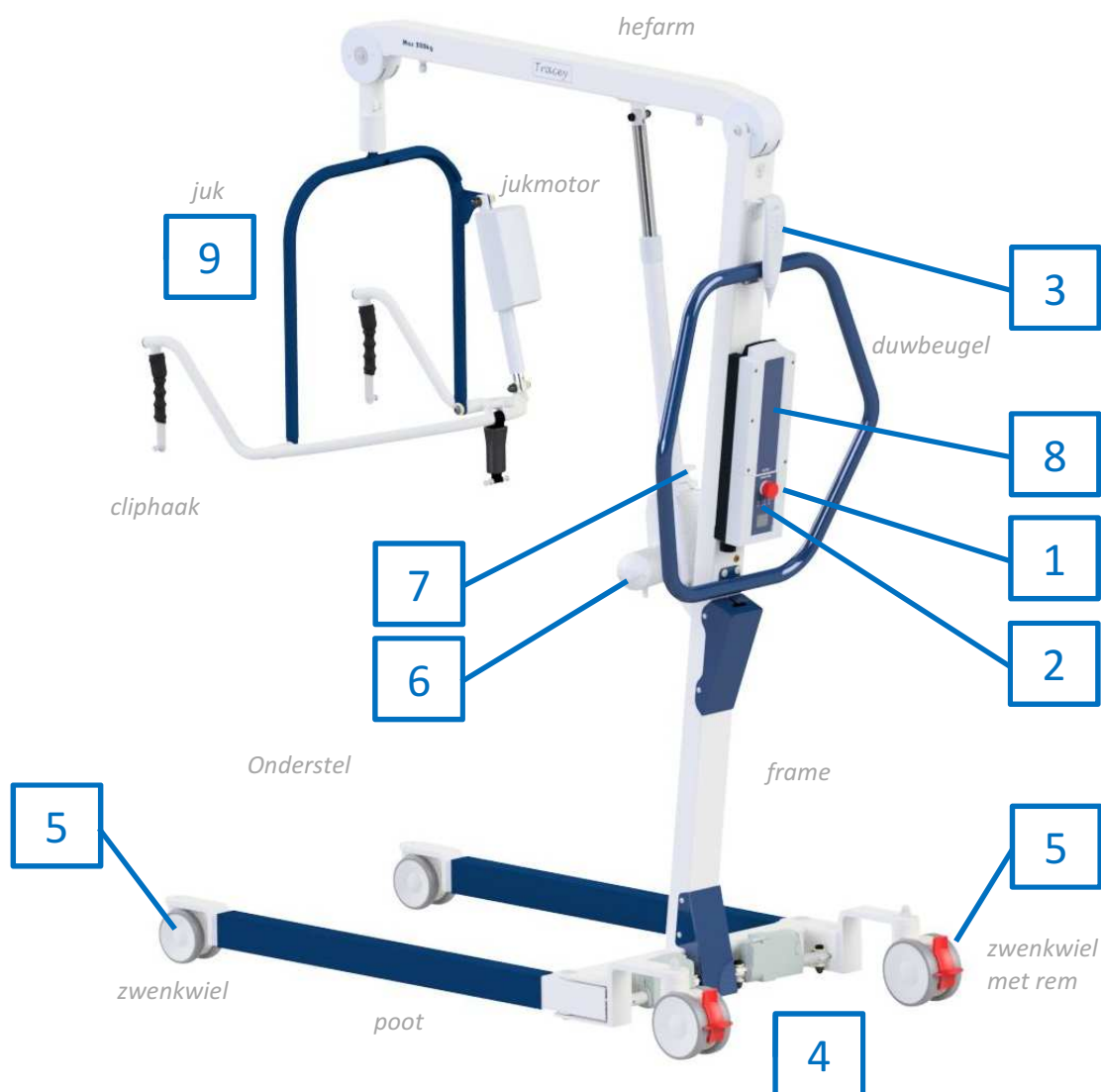


1	Controle box	\$2.2	blz. 7
2	Electrische nood-neer	\$2.2.2	blz. 7
3	Handbediening	\$2.3	blz. 8
4	Potenspreider	\$2.7	blz. 11
5	Wielen	\$2.8	blz. 11
6	Hefmotor	\$2.4	blz. 9
7	Mechanische nood-neer	\$2.4	blz. 9
8	Batterij	\$2.5	blz. 9
9	Juk	\$2.9	blz. 12
10	Tilband	\$2.10	blz. 12

2.2 Controle box

De besturing (controle box) van de Tracey zit aan het frame aan de bedienkant van de lift. Hierin zitten de handbediening en de motoren geplugd. De controle box zorgt voor de aansturing, eind stop en overstroom beveiliging van de motoren.

Op de box zit een rode noodstop waarmee je de lift aan en uit zet, en in noodsituatie de stroomtoevoer kunt verbreken (§2.2.1).
Onder de noodstop zit de elektrische nood-neer bediening om in noodgevallen de lift naar beneden te kunnen sturen (§2.2.2 en ook §2.4).
Daaronder zit het scherm waar je de batterij status, bedrijfsuren en servicecontrole status kunt aflezen (§2.2.3).
Onderop de controle box kunnen de motoren en handbediening worden gestoken.

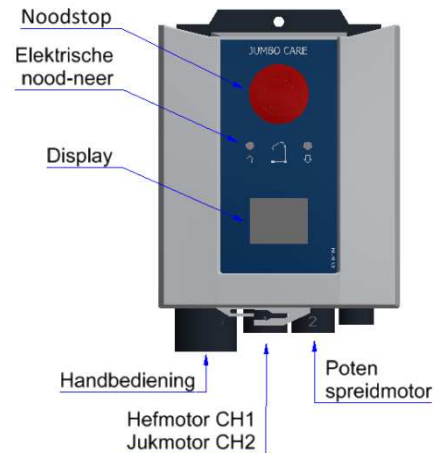

2.2.1 Noodstopknop

Door het indrukken van de rode noodstopknop zal de accustroom worden verbroken en zal de lift onmiddellijk stoppen met bewegen. Tevens wordt de noodstop ook gebruikt om de lift aan en uit te zetten.

Om de noodstop te activeren druk je de rode noodstopknop in.
Om de noodstop op te heffen, draai je de rode noodstopknop met de klok mee zodat deze weer, naar de niet-ingedrukte stand, terugschiet.



Druk de noodstop in als je de lift wegzet. Dit voorkomt dat de batterijen langzaam ontladen.

2.2.2 Elektrische nood-neer bediening

De elektrische nood-neer bediening wordt gebruikt als er een storing of defect is, buiten de controle box of batterij om. De noodbediening schakelt de rem van de motor af en maakt gebruik van de laatste restspanning van de batterij om de arm te laten zakken, dit werkt dus alleen als de batterij geplaatst is.

Steek met de punt van een pen, potlood of ander dun voorwerp in de opening/venster EMERGENCY ↓.
De lift zal de arm naar beneden laten lopen met de overgebleven rest stroom van de accu.

2.2.3 Display

Op de box zit een scherm. Hierop kun je de batterijstatus aflezen



Batterij status


Wanneer het pictogram volledig is ingekleurd is de batterij vol. Laadt de batterij op wanneer deze onder de helft raakt. Dit voorkomt lege accu's en verlengt de levensduur ervan.



Gebruik en service indicatie.

Dit komt in het scherm wanneer je de knop omhoog even kort indrukt.

Hier kun je aflezen hoeveel de lift gebruikt is en wanneer deze moet worden onderhouden (zie de volgende bladzijde).

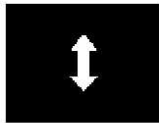

Hierachter kun je aflezen hoeveel cycli de hefmotor heeft gemaakt.
Eén cyclus van de hefmotor staat voor: minimaal 5 sec met meer dan 1.5A stroomafname, en minimaal 2 sec teruggestuurd.



Hier kun je aflezen hoeveel de hefmotor is gebruikt in stroom per seconde (Ampère x seconde).
Dit is een goeie weerspiegeling hoeveel de motor totaal heeft gelopen.



Hier kun je achter aflezen hoe vaak de lift meer getild heeft dan het maximale tilvermogen.



Hierachter kun je aflezen hoe lang geleden de lift voor het laatst is gekeurd (dagen).
Bijvoorbeeld 90/-, betekent dat de lift 90 dagen geleden is gekeurd.

Het is mogelijk om een service interval in te stellen. Er staat dan bv 90/360 op het scherm (360 ≈ één jaar). De lift dient dan over 270 dagen opnieuw te worden gekeurd. Wanneer de dagteller de 360 dagen bereikt gaat er een lampje branden op de handbediening en controle box. De lift dient dan te worden gekeurd en de monteur kan dit vervolgens resetten. Het instellen van de service interval moet gedaan worden door United Care.

2.3 Handbediening

De lift wordt bediend met een handbediening. Door het krulsnoer, aan de handbediening, kun je tijdens het tillen naast de zorgvrager staan. De handbediening wordt gebruikt om:

- De lift omhoog of omlaag te bewegen.
- Poten elektrisch te spreiden.
- Het elektrisch juk van lig naar zit positie te bewegen

De bedieningsknoppen staan hieronder afgebeeld



Hefarm omhoog



Hefarm naar beneden



Juk liggen




Juk zitten



Poten spreiden



Poten sluiten

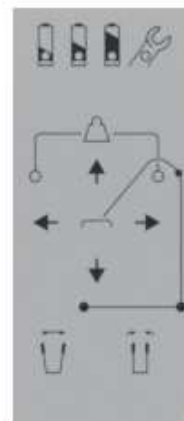


Aan de achter kant van de handbediening zit een bevestigingshaak om deze op of aan de lift te kunnen hangen. De krulsnoer is uit te wisselen en dus ook los leverbaar. Trek de krulsnoer altijd beheerst uit de handbediening! Te hardhandig verwijderen van het krulsnoer kan de handbediening beschadigen en valt niet onder eventuele garantie.

2.4 Hefmotor

De Tracey is voorzien van een sterke en erg stille motor met kogelomloop spindel en veiligheidsmoer. De motor wordt aangesloten op de controle box. Onderin de controle box, poort 1, wordt eerst een splitterkabel gepluigd die deze poort in tweeën splitst om een derde motor uitgang mogelijk te maken.

Op de motor zit een **mechanische nood-neer bediening**. Trek deze omhoog bij noodgevallen. De zorgvrager zal gecontroleerd naar beneden gaan. Deze nood-neer heeft altijd iets gewicht nodig om te kunnen zakken.

De opgegeven levensduur van de motor is 10.000 cycli of 4.200.000 Amp x sec (zie §2.2.3).

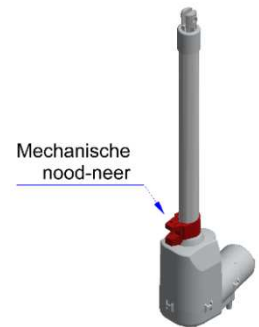

2.5 Batterij

Er zijn twee soorten oplaadbare batterijen verkrijgbaar. Lood houdende (Pb) batterijen en Lithium-Ion (Li-ion) batterijen. Standaard zit er een of twee Pb Batterijen bij de lift. Pb Batterijen zijn goedkoper in aanschaf en hebben de eigenschap dat als de batterij bijna leeg is de lift altijd nog is te gebruiken met de rest stroom. Deze accu's gaan redelijkerwijs 2 à 3 jaar mee.

Li-ion batterijen hebben ongeveer 5x langere levensduur, zijn lichter, milieuvriendelijker en kunnen langer ongebruikt liggen. De zelfontlading is minimaal. Wanneer een Li-ion batterijen leeg is, is er ook geen restspanning meer aanwezig om de transfer af te maken.



De Li-Ion batterij valt, na een week niet gebruiken en niet geladen, in een slaapstand. Deze is uit de slaapstand te halen door hem kort op de lader te zetten.

De batterij is voorzien van een eenvoudig bevestigingsmechanisme. Aan de achterzijde van de accu zit een handgreep waarmee je de batterij op de Tracey vergrendelt en ontgrendelt. Dit gaat het best door de handgreep van de batterij tijdens het plaatsen aan de bovenzijde in te drukken zodat de vergrendeling open staat bij plaatsing.

Aangeraden wordt om twee batterijen te gebruiken: één in de lift en één aan de lader, zodat er redelijkerwijs altijd een opgeladen batterij aanwezig is.



Zorg altijd dat de batterij voldoende is opgeladen voordat je de lift gaat gebruiken.



2.5.1 Levensduur van de batterijen

Capaciteit

Het aantal tilbewegingen dat met een volledig opgeladen batterij gemaakt kan worden, is afhankelijk van de duur van de tilhandelingen, het getilde gewicht en de conditie van de batterij.

Om de levensduur te verlengen is het raadzaam om in normaal gebruik de batterij altijd boven de 50% vol te houden. Je kunt de batterij eens per jaar (1/2 jaar) tot 25% (of net er onder) te ontladen en vervolgens volledig op te laden. Dit komt ten goede aan de levensduur en de kracht van de batterijen.

LET OP!! Het te ver ontladen van een batterij is weer nadelig voor de capaciteit.

Zelfontlading

Een batterij dat voor een langere tijd niet wordt gebruikt loopt leeg. Dit geldt voor de batterij in de tillift én voor de reservebatterijen los van de lift. De batterij kan hierdoor stuk gaan of minder tilhandelingen met een vol opgeladen batterij doen.



Aangeraden wordt om elke batterijen minimaal eenmaal per week op te laden.

2.6 Batterijlader (32106680)

Batterijen voor de Tracey worden opgeladen met behulp van de mee geleverde batterijlader. Deze batterijlader bevindt zich los van de tillift. Batterijen worden op dezelfde manier op de batterijlader geplaatst als op de controle box van de tillift.

Zowel de pB batterijen als de Li-ion batterijen kunnen met dezelfde lader worden opgeladen. In de Li-ion batterijen zit een print, die er voor zorgt dat de zelfde batterijlader kan worden gebruikt.

Het is aan te bevelen om de lader aan de wand te bevestigingen. Hiermee voorkom je schade aan lader, snoer en batterij door verschuiven, vallen etc. Ook is dan duidelijk waar de lader is en raak je hem niet kwijt.



Bij de batterijlader is ook een netsnoer meegeleverd. Een kant past in de lader en de andere kant past in het stopcontact. Steek eerst de stekker in de lader vervolgens de stekker in het stopcontact. Plaats pas daarna de batterij op de lader.

2.6.1 Opladen van de batterijen

Om een zo lang mogelijke levensduur van de batterijen te waarborgen is het van belang de batterijen regelmatig volledig op te laden. Aangeraden wordt om dit minimaal eenmaal per week te doen. Je kunt op de batterij indicatie van de controle box zien hoe vol de batterij is.



Laad de batterij na de transfer op zodra de batterij-indicator aangeeft dat het laadniveau onder de 50% is gekomen. Als de batterij-indicator aangeeft dat het laadniveau onder de 25% is gekomen is het raadzaam de batterij op te laden voor verder gebruik.

Laad de batterij op volgens onderstaande procedure:

- Sluit de batterijlader aan op het lichtnet.
- Het indicatielampje 'on' zal gaan branden.
- Neem de batterij uit de tillift en plaats deze op de lader.
- Het laden van de batterij zal automatisch beginnen.
- Tijdens het laden brandt het lampje 'charge'.
- Als de batterij volledig is opgeladen zal het lampje 'charge' uitgaan.
- Houd rekening met een oplaadtijd van ca. 8 uur.



Druk de noodstop in als je de lift wegzet. Dit voorkomt dat batterijen leeg worden getrokken door de controle box.

2.7 Onderstel

De beide poten kunnen worden gespreid om ruimte te krijgen voor b.v. een stoel. De poten zijn elektrisch traploos te verstellen door de knoppen op de handbediening. Maak de transfers zoveel mogelijk met de poten in de smalle stand om schade aan lift of zijn omgeving te voorkomen.



2.7.1 Afstellen pootverstelling



Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is om de poten te spreiden. Als de poten klem komen, kan dit schade aan de lift of zijn omgeving opleveren.

De poten van de Tracey spreiden met twee gelijke motoren die elk één poot spreiden. De motoren zitten vast aan het frame met twee beugeltjes. Deze beugels zijn iets te verstellen door de sleufgaten. Eén bout is zichtbaar en de andere zit achter de blauwe kap tussen de spreidmotoren. De overblijvende ruimte op de poten in de smalle stand kan worden verwijderd met de stelschroeven aan de binnenkant van het frame. Dit moet wel het einde van de motorslag zijn !!

De motoren worden gekoppeld achter de blauwe kap tussen deze motoren. Werken de motoren verkeerd om t.o.v. de handbediening, draai dan de polen van de desbetreffende motor om (blauw-bruin).

2.8 Wielen

De lift heeft vier zwenkwielen, voor $\varnothing 100$ en achter $\varnothing 125$ mm geremd. De rem van het achterwiel remt het wiel in de rol- en in de draairichting. Bedien de rem met de punt van de voet. Doe dit altijd met beleid.



De wielen hebben een erg lage rolweerstand door de volledig kogel gelagerde draaipunten. Het vanuit stilstand verrijden van de lift kost het minste kracht als de wielen van het onderstel al in het verlengde van de rijrichting staan.

2.9 Juk

De Tracey is voorzien van een elektrisch verstelbaar juk. Het juk is een constructie waaraan de tilband, waarin de zorgvrager plaatsneemt, wordt bevestigd doormiddel van clips. Het juk zit vast en draait in dezelfde draaiende beweging met de hefarm mee, zodanig dat het juk altijd recht blijft.

Het juk wordt in een zittende of liggende houding gebracht door het verstellen van de motor. Hiermee kan de zorgvrager in de gewenste houding worden geholpen, hetgeen prettig is bij zorgvragers met een slechte heupstabiliteit. Het elektrisch juk wordt bediend met twee knoppen op de handbediening.



2.10 Tilbanden

Bij het tillen neemt de zorgvrager plaats in een hangmatvormige tilband en wordt met clips of lussen aan het juk bevestigd. Er bestaan verschillende soorten en maten tilbanden, elk met hun eigen toepassing (blz.16). Sommige zorgvragers mogen alleen getild worden met een bepaald soort tilband.

Gebruik de Tracey in combinatie met een door United Care geleverde tilband. Neem bij voorgenomen gebruik van een ander soort tilband even contact op met United Care.

Gebruik altijd een goed passende tilband. Het model staat in het label dat aan de tilband is genaaid. Hierop staat het type, model, maat, serienummer enz. Laat het label altijd aan de band zitten.



Volg altijd de gemaakte afspraken over het soort tilband waarmee de betreffende zorgvrager getild moet worden op. Controleer de tilbanden regelmatig op slijtage.



Controleer voor gebruik de band en clips op beschadigingen. Controleer voor het tillen en tijdens het tillen of de clips goed zitten.

2.10.1 Baleinen

De tilband dient de zorgvrager te ondersteunen in zowel een zittende als een liggende houding. Voor extra ondersteuning van het hoofd en de nek moeten er twee kunststof baleinen, in de daarvoor bestemde sleuven aan de hoofdzijde, te worden geplaatst (figuur 16)




2.10.2 Bevestiging aan de tillift



*Lees deze aanwijzingen aandachtig door voordat u de tilband gebruikt.
Controleer de band altijd op beschadigingen en slijtage.
Het is ESSENTIEEL dat u volledig begrijpt hoe de tilband moet worden opgehangen aan het juk.*

UCP-clip (C)

- 1 Houd de strip van de clip met één hand vast, en trek het grote gat van de clip over de kop van het ophangpunt, controleer of de band (waar de clip mee aan de tilband zit) niet gedraaid is.
- 2 Pak de band onder de clip van de tilband en trek deze naar beneden
- 3 Trek de clip van de tilband zover dat het ophangpunt in de beveiliging valt. Het ophangpunt zit nu opgesloten in het gat boven in de clip.

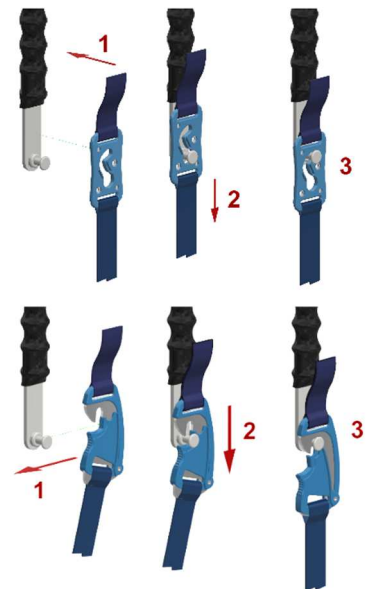

iQ clip (Q)

- 1 Zorg voor het aanbrengen (en loshalen) van de clip dat de spanning van de tilband af is. Houd de clip met één hand vast, en duw de vergrendeling open met de duim. Je kunt de clip ook over de pen heen drukken i.p.v. eerst te openen. Controleer of de band, waar de clip mee aan de tilband zit, niet gedraaid is.
- 2 Haak de clip over het ophangpunt en trek hem naar beneden. De clip klikt vast.
- 3 Nu zit de clip vast en geborgd. Door de spanning op de band kan de clip nooit losgaan. Half monteren is hier niet meer mogelijk.

2.10.3 Soorten en maatvoering

Verschillende mensen, gebruik en transfers vragen om verschillende tilbanden. Een overzicht van de mogelijke soorten tilbanden en hun inzetbaarheid is weergegeven in de tabel blz.14-§2.10.4.

Bij de maatvoering van de tilbanden spelen de volgende zaken een rol: gewicht, lengte en omvang van de zorgvrager, mate van stabiliteit van de heup, pijn, amputatie etc.



Standaard United Care tilbanden hebben een maximaal tilgewicht van 230 kg (mits anders is aangegeven).


De laatste cijfer en letter van het artikelnummer staan voor de maatvoering (X) van een tilband en de soort ophanging (Y). De maatvoering gaat van 0 tot 6 (zie 2.10.4 blz. 14). De maat wordt ook aangegeven door de kleur van de clips en het label in de tilband. Daarnaast wordt de ophanging aangeduid met C (UCP-clips), Q (iQ-clips) of P (lussen).

2.10.4 Tabel standaard tilbanden

X = Maataanduiding: 0 t/m 6

Y = Ophanging:
C = 4x clips UCP
Q = 4x iQ-clips
P = 4x lussen

	Code	Maat	Kruin-Stuithoogte
Paars	0	XXS	45-60 cm
Bruin	1	XS	60-80 cm
Rood	2	S	80-87 cm
Geel	3	M	85-90 cm
Groen	4	L	90-97 cm
Blauw	5	XL	95-102 cm
Oranje	6	XXL	102-106 cm

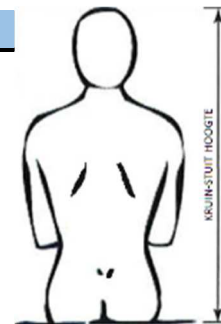

Soort tilband	Art.nr.	Eigenschappen
Standaard tilband Materiaal: Polyester	3010905X Y	De standaard tilband wordt bij korte transfers gebruikt. Wij adviseren de zorgvrager niet langer dan een uur op deze band zitten.
Standaard Net tilband Materiaal: Polyester netstof	3010904X Y	Laat de zorgvrager niet langer dan tijdens bad gebruik op deze band zitten. De stof van deze band heeft grote mazen waardoor deze sneller droogt.
Standaard Ezeslyde tilband Materiaal: Polyester silk	3010150X Y	Laat de zorgvrager niet langer dan een uur op deze band zitten. Het gladde materiaal maakt aanbrengen van de band extra makkelijk, m.n. voor rolstoelgebruik.
Verblijfsband Materiaal: Polyester 3D stof	3010910X Y	
Verblijfsband Plus Materiaal: Polyester 3D stof	3010910X Y	De zorgvrager kan op deze band de hele dag comfortabel blijven zitten. Dit is mogelijk omdat het materiaal zacht is en ademend is.
Verblijfsband Comfort Materiaal: Bamboe stof & Polyester	3010187X Y	De zorgvrager kan op deze band de hele dag comfortabel blijven zitten. Dit is mogelijk omdat het materiaal zacht is en ademend is. Let op, stof kan wel kwetsbaar zijn.
Toiletband de Luxe Materiaal: Polyester stof	3010960X Y	Verwijder de band na de transfer van de zorgvrager uit de stoel. Toiletbanden zijn alleen veilig te gebruiken bij zorgvragers met voldoende schouderfunctie en rompstabiliteit.
Tilband Net anti-spasme Materiaal: Polyester netstof	3010193X Y	Laat de zorgvrager niet langer dan tijdens bad gebruik op deze band zitten. De stof van deze band heeft grote mazen waardoor deze sneller droogt. Deze band heeft een bijzondere vorm waardoor een transfer in foetushouding kan worden uitgevoerd.
Verblijfsband anti-spasme Materiaal: Polyester 3D stof	3010902X Y	De zorgvrager kan op deze band de hele dag comfortabel blijven zitten. Dit is mogelijk omdat het materiaal zacht en zuurstof doorlatend. Deze band heeft een bijzondere vorm waardoor een transfer in foetushouding kan worden uitgevoerd.
Verblijfsband Plus anti-spasme Materiaal: Polyester 3D stof	3010912X Y	De zorgvrager kan op deze band de hele dag comfortabel blijven zitten. Dit is mogelijk omdat het materiaal zacht en zuurstof doorlatend. Deze band heeft een bijzondere vorm waardoor een transfer in foetushouding kan worden uitgevoerd.
Verblijfsband Comfort anti-spasme Materiaal: Bamboe stof & Polyester	3010960X Y	De zorgvrager kan op deze band de hele dag comfortabel blijven zitten. Dit is mogelijk omdat het materiaal zacht en zuurstof doorlatend. Deze band heeft een bijzondere vorm waardoor een transfer in foetushouding kan worden uitgevoerd.
Tilband Net amputatie Materiaal: Polyester netstof	3010154X Y	Laat de zorgvrager niet langer dan tijdens bad gebruik op deze band zitten. De stof van deze band heeft grote mazen waardoor deze sneller droogt.
Verblijfsband amputatie Materiaal: Polyester 3D stof	3010155X Y	De zorgvrager kan op deze band de hele dag comfortabel blijven zitten. Dit is mogelijk omdat het materiaal zacht is en ademend is.
Verblijfsband Comfort amputatie Materiaal: Bamboe stof & Polyester	3010158X Y	De zorgvrager kan op deze band de hele dag comfortabel blijven zitten. Dit is mogelijk omdat het materiaal zacht is en ademend is.

2.10.5 Was instructie tilbanden

Elke tilband van United Care heeft een label waarop de was instructies zijn weergegeven. Een dergelijk label wordt getoond in het plaatje rechts. Hierop staat het model, materiaal, maat en soort bevestiging van de tilband. Het serienummer van de tilband zit bovenop de label rechts genaaid.

Hoe de tilbanden kunnen worden gewassen kun je hierop aflezen. Dit kan soms verschillend zijn door gebruik van verschillende soorten materialen.

Voorkomende pictogrammen zijn:



Tilbanden kunnen machinaal gewassen worden op 60 graden (indien anders, zie pictogram).



Band mag alleen in de droger op lage temperatuur



Band mag niet in de droger



Niet geschikt om chemisch te reinigen



Geen bleekmiddelen gebruiken



Band niet strijken



De tilband moet in een waszak worden gewassen.

Controleer de tilbanden voor en na het wassen altijd op eventuele slijtage en gebreken.

Verwijder de kunststof baleinen uit de tilband voordat deze wordt gewassen of gedesinfecteerd.

Gebruik bij het desinfecteren de juiste concentratie als aangegeven op de verpakking van het middel.

Het is van belang dat de tilband in goede staat verkeert. De conditie van een tilband wordt medebepaald door de manier waarop deze wordt gewassen of gedesinfecteerd.

scan voor info

Leverancier: United Care
Bremenweg 5, 9723 TC Groningen
050-3050900 - www.unitedcare.nl

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Max. tilgewicht 230 kg

Model ☐ Standaard band ☐ Verblifsband ☐ Comfortband ☐ Anti-spasme band ☐ Amputatie-band ☐ Longseat band ☐ Toiletband de Luxe ☐ Tilband zonder hoofdsteen ☐ Obesitas band (350kg) ☐ Special	Materiaal ☐ Polyester ☐ Net ☐ 3D ☐ Bamboe ☐ Ezeslyde
Maat XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL ☐	Actieve lift ☐ Lowzone band ☐ Tilvest ☐ Loopvest

Ophanging
 Lussen ☐ Clips ☐ Special ☐

Gebruik de tilband met een passend tijk. Kies de juiste maat en model voor iedere cliënt. Voor gebruik de tilband, clips en lussen controleren op gebreken. Bij gebreken de tilband niet gebruiken.

UniCare Quality Slings bv
Bremenweg 5
9723 TC Groningen 050-3050980

CE
NEN 10535
scan voor info

3.1 Ingebruikname

Controleer de Tracey voor gebruik op de volgende punten:

- Schakel de lift aan door de noodstop rechtsom te draaien
- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.
- Controleer de staat van de tilband en de staat van de clips
- De lift is klaar voor gebruik. Zorg altijd voor een nette en schone werkomgeving.

3.2 Tilband aanbrengen



*Wees op de hoogte of de zorgvrager mag worden getild!
Let erop dat de kunststof baleinen in het hoofdgedeelte van de tilband zijn aangebracht!
Breng de clips en lussen nauwkeurig aan (§2.10.2 - blz.13) !*

Neem de juiste soort en maat tilband. Vertel de zorgvrager bij elke handeling altijd duidelijk wat er gaat gebeuren.

3.2.1 Toiletband aanbrengen

Breng de toiletband op dezelfde manier aan als de standaard band, maar met de volgende aandachtspunten:

- Steek de armen van de zorgvrager door de lussen aan de hoofdzijde van de tilband met de ronde kussentjes onder de oksels (gemarkeerd in de illustratie).
- Breng de beenslips langs de buitenkant van de benen, onder de benen door en beide slips langs de binnenkant weer omhoog.
- Plaats nu de clips (lussen) aan het juk van de Tracey.



Toiletbanden zijn alleen veilig te gebruiken bij zorgvragers met voldoende schouderfunctie en rompstabiliteit. Een toilet band is niet voor langdurig gebruik en dus niet geschikt als algemene tilband.

3.2.2 Tilband zittend aanbrengen

- Breng de tilband achter de rug van de zorgvrager tot op de stoelzitting aan. Laat hierbij de zorgvrager iets naar voren in de stoel zitten.
- Plaats de tilband zo, dat het label met was instructies aan de buitenkant zit.



- Begeleid beide beenslips van de tilband langs de billen van de zorgvrager naar voren.
- Trek hierna beide beenslips licht naar voren. De zorgvrager zit zo al 'in' de tilband.
- Til één been van de zorgvrager op en breng één beenslip van de tilband onder het been door naar de binnenkant van het been.
- Breng vervolgens de andere beenslip op dezelfde wijze aan.
- Trek indien nodig de hoofdzijde van de tilband omhoog tot op de juiste hoogte. De tilband zit nu als een 'kuipstoeltje' om de zorgvrager heen.



3.2.3 Tilband liggend aanbrengen

- Vouw de tilband in de lengte tot de helft een paar keer op. Eén helft opgevouwen en een helft los.
- Draai de zorgvrager op de zij, naar de zorgverlener toe.
- Leg de tilband met de opgevouwen kant tegen de rug van de zorgvrager aan.
- Plaats de tilband zo, dat het label met was instructies aan de buitenkant zit (is op dit moment de onderkant).



- Draai de zorgvrager over de tilband heen op de andere zij.
- Het opgevouwen gedeelte van de tilband komt zo aan de kant van de zorgverlener.



- Rol het opgevouwen gedeelte van de tilband af en trek dit verder in de juiste positie.
- Draai de zorgvrager nu terug op de rug zodat deze op de uitgerolde tilband ligt.
- Til één been van de zorgvrager op en breng één beenslip van de tilband onder het been door naar de binnenkant van het been.
- Breng vervolgens de andere beenslip op dezelfde wijze aan.
- Trek indien nodig de tilband recht zodat de zorgvrager bij het tillen stabiel in de tilband ligt.



3.3 Tillen

Zet het juk, voor het aanrijden, alvast in de positie waarin de zorgvrager getild gaat worden (vier-punts-juk).

- Rijd de lift voorzichtig aan
- Verbreed zo nodig het onderstel met behulp van de pootverstelling om de lift dicht genoeg bij bijvoorbeeld een stoel te kunnen plaatsen.
- Let op! Rijd het laatste stukje rustig!

Tilband bevestigen aan het juk (zie ook §2.10.2, blz.12).

- Zorg ervoor dat de zorgvrager met het gezicht naar het juk gericht is.
- Bevestig de twee clips van de hoofdzijde van de tilband aan de bevestigingspunten van de hoofdzijde van het juk.
- Bevestig vervolgens de twee clips van de beenzijde van de tilband aan de bevestigingspunten van de beenzijde van het juk. Let erop dat de banden van de clips recht zijn aangebracht; de band mag niet gedraaid zitten.



Bij gebruik van een twee-punts-juk dienen de beenslips van de tilband met lussen wel kruislings worden aangebracht. Linker slip aan rechter juk haak en rechter slip aan linker juk haak.

- Controleer de positie van de armen van de zorgvrager. Bij standaard tilbanden de armen van de zorgvrager binnen de tilband plaatsen, b.v. op de schoot van de zorgvrager. Bij toiletbanden moeten de armen van de zorgvrager door de band buiten de tilband steken.
- Neem de handbediening en ga zo dicht mogelijk bij de zorgvrager staan. Beweeg de lift een stukje omhoog zodat er op alle clips spanning komt te staan.
- Controleer nogmaals alle bevestigingspunten.
- Vertel de zorgvrager dat begonnen wordt met tillen.
- Til de zorgvrager omhoog.

3.3.1 Tillen naar het toilet

- Laat, voordat de zorgvrager op het toilet wordt gezet, de broek van de zorgvrager tot aan de knieholte zakken, en laat de broek pas verder zakken nadat de zorgvrager op het toilet is gezet.
- Maak tijdens het toiletteren de toiletband los van de bevestigingspunten van het juk.
- Breng na het toiletbezoek de broek van de zorgvrager weer tot over de knieholte omhoog, til de zorgvrager op en breng de broek vervolgens weer geheel aan.

3.4 Rijden



Til de zorgvrager niet hoger dan noodzakelijk is voor het verrijden van de lift.

- Het verrijden van de lift gaat het eenvoudigst als de zwenkwielen in de juiste richting staan (in het verlengde van de rijrichting).
- Loop tijdens het verrijden met de lift mee.
- Rijd de lift naar de bestemming en til daar pas naar de benodigde hoogte om de zorgvrager in de eindpositie te brengen.
- Tijdens het verrijden van de lift kunnen de poten in de brede of in de smalle stand staan. Gebruik bij voorkeur de smalle stand om te verrijden.

3.4.1 Draaien met de lift

- Vermijd draaien vanuit de rug bij het verdraaien van de lift. Ga tijdens het draaien aan de zijkant van de lift staan en gebruik de arm, het juk en poten om te trekken of duwen.
- Houd met één hand het juk of de hefarm vast en met de andere hand de mast.
- Begin de draaibeweging door met een voet tegen het onderstel te duwen.
- Vervolg de draaibeweging door met de arm die op het juk en op de hefarm rust, om de lift verder te duwen.

3.5 De zorgvrager uit de lift halen

Tillen naar een bed / stoel

Breng de zorgvrager in de uiteindelijk bedoelde positie (liggen of zitten). Positioneer de zorgvrager zo goed mogelijk. Laat de zorgvrager zakken.

- Zorg ervoor dat de zorgvrager goed achter in een stoel wordt geplaatst.
- Zet de lift niet op de rem om de zorgvrager goed te kunnen positioneren.
- Maak alle clips van de tilband los.
- Rijd de lift weg.
- Verwijder de tilband (tenzij een persoonsgebonden band is gebruikt).
- Druk de noodstop in en zet de lift terug waar hi j hoort.
(Laad wanneer nodig de batterij op)

4.1 Planning van onderhoud

De Tracey is zo geconstrueerd dat onderhoud tot een minimum beperkt kan blijven.

Aangeraden wordt om de volgende onderhoudsplanung aan te houden:

Dagelijks en Wekelijks onderhoud kan door de gebruikers gedaan worden.

Het ½ Jaarlijks onderhoud kan worden gedaan door de technische dienst.

De Jaarlijkse inspectie en eventuele reparaties door United Care of een ander daartoe bevoegde instantie.



Neem bij twijfel over de conditie van de lift altijd contact op met de TD of United Care.

4.1.1 Dagelijks onderhoud

De volgende handelingen kunnen door de gebruikers op dagelijks basis worden uitgevoerd.

De lift

- Controleer de status van de batterij. Indien nodig opladen.

De tilbanden

- Gebruik een schone tilband.
- Controleer de staat van de tilband.
- Controleer de aanwezigheid van eventuele baleinen.
- Na gebruik de band ophangen en waar nodig luchten/drogen.

4.1.2 Wekelijks onderhoud

De volgende handelingen kunnen door de gebruikers op wekelijkse basis worden uitgevoerd.

De lift

- Het is aan te raden de lift wekelijks schoon te maken. Het kan het best schoon gemaakt worden met huishoudt schoonmaakmiddel en een goed uitgeknepen vochtige doek.
- Controleer de werking van de noodstop.
- Controleer of alle beweegbare delen gemakkelijk bewegen, zonder hinderlijke bijgeluiden.

De tilbanden

- Controleer of de band moet worden gewassen (§2.10.4, blz.14)
- Controleer de tilband op eventuele beschadigingen aan band of clips, rafelen van stof, loszittende stiksel en naden. Bij waarneming van één deze beschadigingen, de tilband niet meer gebruiken en zodanig verwijderen dat deze niet meer kan worden gebruikt en neem contact op met de leidinggevende/leverancier.

Batterijen

- Het wordt aangeraden om de batterijen minimaal 1x per week op te laden (ook wanneer het niet wordt gebruikt).

Controleer de leesbaarheid van de serienummer sticker, de aanwezigheid van een handboek, quick-reference kaart en logboek.

4.1.3 ½ Jaarlijks onderhoud

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het onderhoud dat de technische dienst elke half jaar aan de Tracey kan uitvoeren.

- Controleer de tilbanden visueel grondig op rafelen – losse naden/stiksels – schade band, en ook de clips van de tilband, bij schade ervan dient de band afgekeurd te worden.
- Controleer de werking van de noodstop.
- Controleer de nood-neer bediening.
- De lift grondig controleren op soepel bewegen van bewegende delen.
- De hefmotor en potenspreider moeten goed en soepel bewegen.
- Schade aan kunststof delen controleren.
- Wielen controleren of ze makkelijk draaien en of de rem goed werkt.
- Alle bouten dienen goed aangedraaid te zijn en dus niet los zitten.
- Controleer de lift vervormingen (lak schade kan een gevolg zijn van eventuele vervormingen).
- Controleer alle functies
- Controleer de bekabeling op zichtbare schade.
- Controleer de oplader (gaan de lampjes daadwerkelijk branden?)
- Controleer of beide accu's goed laden en de behuizing in goede staat is.
- Controleer ook de acculader op werking en of er schade is aan de kabels.



Wanneer de lift niet voldoet aan een of meer van de bovengenoemde punten dient de lift buiten werking gezet te worden en contact opgenomen te worden met United Care.

4.1.4 Jaarlijks inspectie en onderhoud

Volgens de geldende NEN-normen moet een tillift één keer per jaar gekeurd worden. Dit kan worden gedaan door United Care of door een ander daartoe bevoegde instantie. United Care biedt u de mogelijkheid om uw lift eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren, middels de Periodieke Inspectie Overeenkomst. De eerstvolgende inspectiedatum staat op de service controlesticker (zie het figuur hieronder). Deze zit altijd op de lift, nabij de serienummer plaat. Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch contact met United Care opnemen.



De servicecontrole sticker geeft aan op welke datum de volgende Periodieke Inspectie aan de Tracey moet worden uitgevoerd.

De controle box kan zodanig worden ingesteld dat er een service lampje gaat branden wanneer de lift dient te worden onderhouden. Dit dient op aanvraag te gebeuren.



Ook laders dienen elk jaar geïnspecteerd te worden volgens de geldende voorschriften

4.2 Storing zoeken en verhelpen



Service en onderhoud aan de lift is alleen toegestaan door de daartoe aantoonbaar bevoegde personen.



Wanneer de onderstaande storingstabel de klacht niet verhelpt of bij twijfel, gebruik de lift/tilband niet en neem contact op met United Care.

Klacht	Mogelijke oorzaak	Actie
Lift werkt niet	Batterij fout of niet geplaatst. Stekker van de handbediening niet goed in de controle box. Noodstop uit.	Batterij plaatsen. Stekker in Controle box steken. Noodstop rechtsom draaien.
Lift gaat niet omhoog, juk werkt wel	Motor stekker niet goed aangesloten op de controle box.	Snoer in de juiste poort steken van de controle box (poort 1).
Lift gaat wel omhoog, juk werkt niet	Juk stekker niet goed aangesloten op de controle box.	Snoer in de juiste poort steken van de controle box (poort 2).
Lift kraakt	Drooglopen van de lagers.	Een klein beetje kruipolie.
Poot / poten zitten los	Poten afstellen of kogelgewricht of draadstang gebroken.	Poten opnieuw afstellen of kapotte onderdelen vervangen.
Lift heeft weinig kracht	Batterij bijna leeg. Batterij slecht.	Batterij laden. Nieuwe batterij of nieuwe cellen.
Batterij snel leeg	Motor slecht. Batterij slecht.	Motor vervangen. Nieuwe batterij.

4.3 Verwijdering onderdelen

Alle onderdelen die vervangen of verwijderd zijn en dus weggegooid worden, dienen zo milieuvriendelijk mogelijk te worden verwerkt. De delen kunnen ook terug worden gestuurd naar United Care of worden aangeboden aan de servicemonteur. United Care zal er dan voor zorgen dat de onderdelen op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt.


Wanneer u zelf zorgt voor de vernietiging, probeer dan zo veel mogelijk materialen te scheiden. Batterijen inleveren bij een batterijen-inzamelpunt, ijzer bij oud ijzer enz.



*Denk aan ons
milieu*

4.4 Onderdelenlijst


Onderdelentekening Tracey

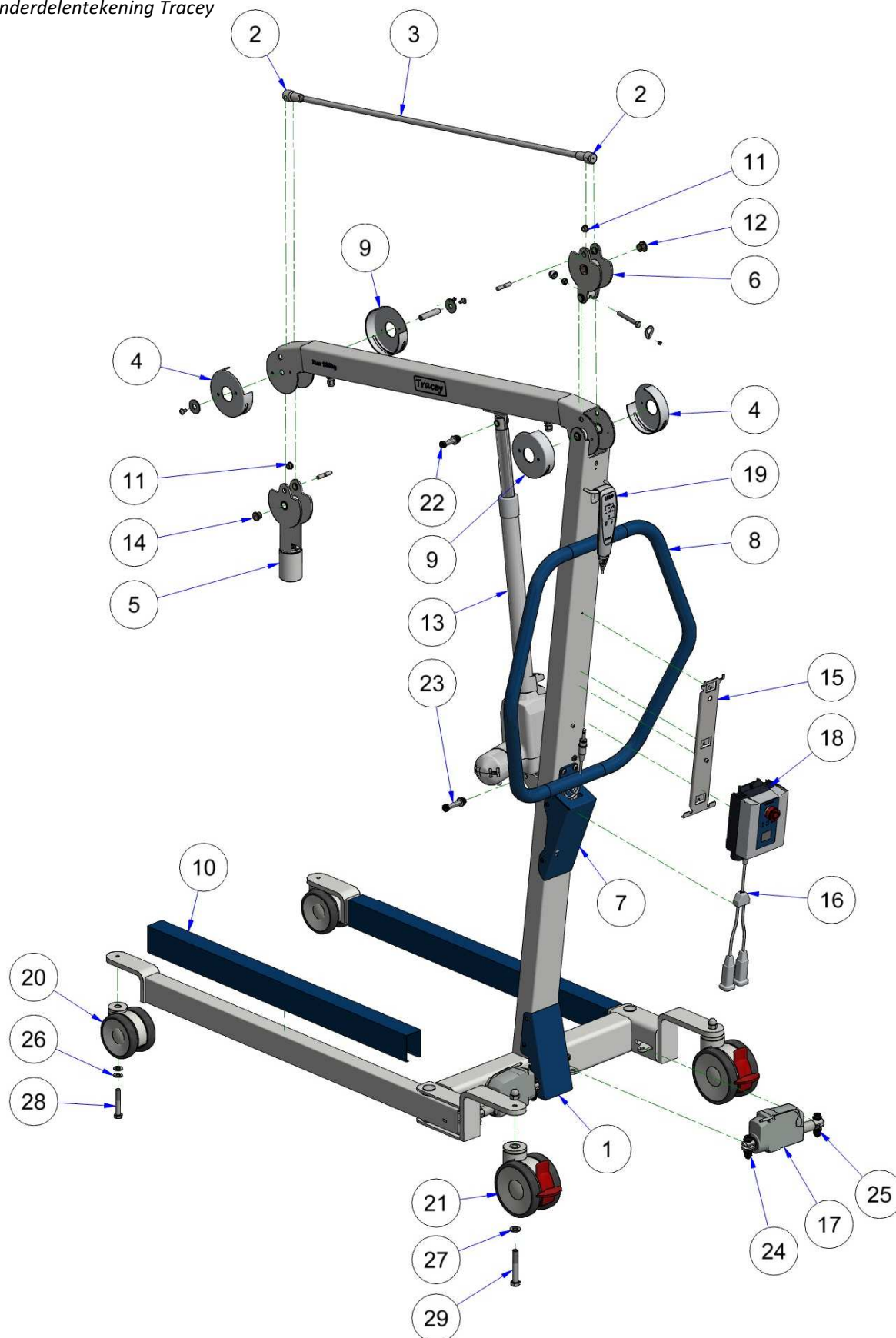

Onderdelenlijst Tracey


pos	naam	art.nr.
1	Koppeldoos potenspreider	22200930
2	Trekstanggaffel	22200960
3	Trekstang	22200970
4	Zijkap hefarm A	22201040
5	Juk koppeling Tracey	22400090
6	Verstelpunt juk	22300180
7	Kabel verzameldoos CB	11203160
8	Duwbeugel	22300050
9	Zijkap hefarm B	22201050
10	Poot beschermkap L=815	22201060
11	Glijlager brons Ø12 x Ø8 x 8	22100390
12	Glijlager Ø18 x Ø16 x 12	22100380
13	Motor La34, slag 400, QR, 90° gaffel	22100360
14	Glijlager Ø14 x Ø12 x 12	10100600
15	Bevestigingsplaat CB	11100360
16	Motor splitterkabel	11100612
17	Motor La23, slag 30	11101440
18	Controle box (CB) – Jumbo Care	11101501
19	Handbediening 6F, Jumbo Care	11101531
20	Zwenkwiel Ø100, Linea, laag	22100170
21	Zwenkwiel Ø125, Linea, geremd	22100181
22	Pasbout set 30mm	11400440
23	Pasbout set 40mm	11400500
24	Pasbout set 26mm	11400390
25	Sluitring M10	11100220
26	Sluitring M12	14100090
27	Zeskanbout M10x60	11100300
28	Zeskanbout M12x75	10101860
*	Schroefdraadborgmiddel middelsterk blauw	11101110

Onderdelen oplader

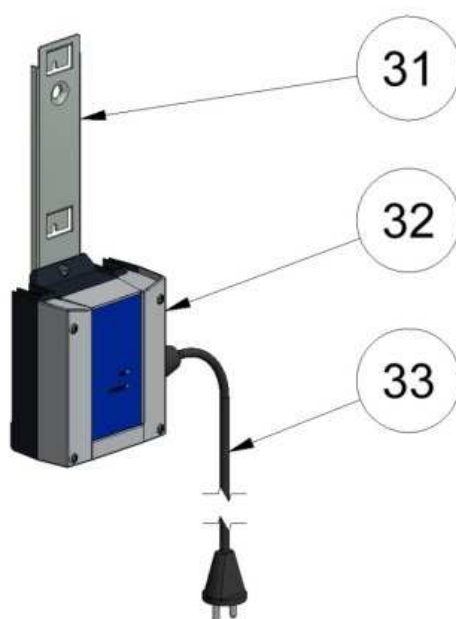

pos	naam	art.nr.
30	Oplader compleet	32106680
31	Bevestigingsbeugel	11100340
32	Batterijlader	31101040
33	Netsnoer	11100350

Onderdelen elektrisch juk

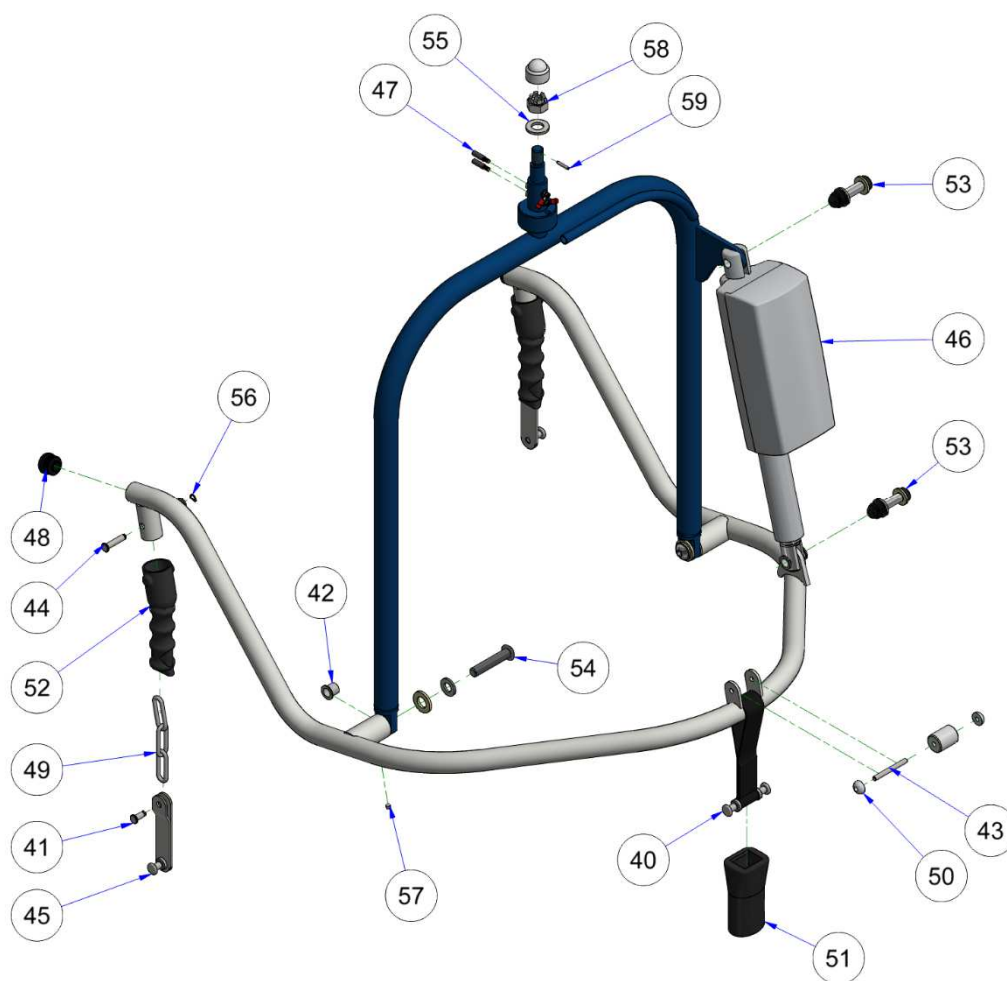

pos	naam	art.nr.
40	Dubbele cliphaak	22300090
41	Cliphaakpen	32200750
42	Draaibus	32200850
43	Band fixeerpen	32200910
44	Kettingpen	32201850
45	Cliphaak	32300150
46	Motor Ia28x slag 150	32100200
47	Koolborstel	32100720
48	Lamellenstop Ø22 wit	32101531
49	Ketting Ø4, 3 schakels	32101760

* Schroefdraadborgmiddel middelsterk blauw 11101110

pos	naam	art.nr.
50	Snelborger Ø5	32101920
51	Beschermrubber	32200790
52	Rubber sleeve	32201400
53	Paspen set 26mm	11400390
54	Bolkopschroef M10x50	17104290
55	Sluitring Ms M12	14100091
56	As borgring Ø6	32101740
57	Stelschroef M5x6 RVS	11100560
58	Kroonmoer M12	32101550
59	Paspen Ø3x16	11100620

5.1 Garantie bepalingen

United Care Products geeft 1 jaar garantie op de Tracey tillift. United Care Products geeft geen garantie op onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage of onzorgvuldig gebruik, zoals wielen, tilbanden en batterijen. Verder is de garantie niet van toepassing op schade of gebreken welke aan de Tracey tillift kunnen ontstaan door verkeerd of onoordeelkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling hiervan ligt bij United Care Products of bij een door United Care Products aan te wijzen vertegenwoordiger. United Care Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het product aan te brengen in afwijking van hetgeen in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Hiervoor is geen verantwoording verschuldigd.

5.2 Over United Care

Het uitvoeren van verplaatsingen in de gezondheidszorg vraagt van veel partijen grote inspanningen en met name van zorgverleners een grote deskundigheid.

United Care is een bedrijf dat zich met diensten en producten richt op mensen die dagelijks betrokken zijn bij de uitvoering van transfers. Daarbij is de mobiliteit van de zorgvrager het uitgangspunt: samen met zorgverleners en zorgvragers wordt gewerkt aan oplossingen die de mobiliteit van de zorgvrager behouden en/of verbeteren. Door aan te sluiten bij, en gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden van de zorgvrager wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van zorg voor de zorgvrager en een verbetering van de kwaliteit van arbeid voor de zorgverlener.

United Care levert daarvoor de volgende producten/diensten:

- Tilliften
- Opstaliften
- Bedliften
- Plafondliften
- Hoog-laag baden
- Po- en douchestoelen
- Douchebrancards
- Overige transfermiddelen
- Accessoires bij transfermiddelen
- Training en advies

De visie, diensten en producten van United Care maken haar een uitstekende partner in de samenwerking met zorgverleners en zorgvragers.

5.3 Contact

United Care Products BV
Bremenweg 5
9723 TC, Groningen
Telefoon 050 - 305 09 00
www.unitedcare.nl
info@unitedcare.nl



5.4 EG- Verklaring van overeenstemming

Wij: United Care Products BV
Bremenweg 5
9723 TC Groningen
Nederland



Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de:

'Tracey' tillift en bijbehorend **elektrisch kantel juk**

waarop deze verklaring betrekking heeft en welke valt onder klasse I van de Europese richtlijn medische hulpmiddelen, in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende richtlijn:

Richtlijn 93/42/EEG

en in overeenstemming is met de volgende normen of andere normatieve documenten:

NEN-EN-ISO 14971
ISO 10535
NEN-EN-60601-1
NEN-EN-60601-1-2 (EMC)
NEN-EN-ISO 15223:2012
NEN-EN 12182:2012

Namens : United Care Products BV,

Plaats en datum : Groningen, 24 mei 2019

Naam en functie : Jan Stevenson, directeur

Handtekening :

