



Verkorte gebruiksaanwijzing



FeelSafe Basic tentbed BT002

**REF** BT002

FeelSafe Basic tentbed incl. bedframe Elbur PB531 (afgebeeld) of PB536 (bedtent, bedonderstel, frame en matrassen zijn los te koop)

LET OP! in spoed situaties is het complete bed per dag te huur, levering 24/7 dus ook op zaterdag, zondag en feestdagen. Bel in dat geval het spoednummer +31 (0)13-523 42 86. Tijdens kantooruren belt u met +31 (0)13-536 38 07

Lees deze instructies zorgvuldig zodat risico's of het ongewenst verlaten van het bed voorkomen kunnen worden.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALS NASLAGWERK.



Human Protection B.V.
Droogdokkeneiland 4
5026 SR Tilburg, Nederland
tel. +31 (0)13-536 38 07

SCAN ME



Scan de QR-code of bezoek
www.humanprotection.nl/instructievideos-human-protection
om de instructievideo van de FeelSafe Basic te bekijken!

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING

Definities	4
1.0 Doel van het hulpmiddel	5
1.1 Beoogde gebruiker	5
1.2 Beoogd doeleind	5
1.3 Indicaties	5
1.4 Contra-indicaties	5
1.5 Beschrijving van het hulpmiddel	6
1.6 Wanneer mag het hulpmiddel niet worden gebruikt?	6
2.0 Procedure bij inzet van het FeelSafe Basic tentbed	7
2.1 Vóór het FeelSafe Basic tentbed wordt gebruikt	7
2.2 Bij het eerste gebruik	7
2.3 Tijdens het gebruik van het FeelSafe Basic tentbed	7
2.4 Beëindiging van het gebruik	7
2.5 Beleid voor dagelijkse controle en vrijheid van de bewoner	7
2.6 Informatie over het gebruik	7
2.7 Montage van het bed	8
2.8 Aanpassingen aan het FeelSafe Basic tentbed	8
2.9 Controlelijst voor eerste gebruik	8
2.10 Training van zorgverleners	8
2.11 Locatie van het bed	8
3.0 Het gebruik van het FeelSafe Basic tentbed	9
3.1 Toegangspanelen	9
3.2 Handbediening van het bed	9
3.3 Vergendelbare en centraal geremde wielen	10
3.4 Comfortmatras en matrascompartiment	10
3.5 Opdekmatras	10
3.6 Transporthandgrepen	11
3.7 Snelsluitingen	11
3.8 Ritsen en trekclipjes	11
3.9 Het openen van de tent bij calamiteiten	11

Definities



Waarschuwing



Medisch hulpmiddel



Catalogusnummer



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik



Eén patiënt - meervoudig gebruik



Fabrikant



Fabricagedatum



Serienummer



Houd droog



Houd weg van zonlicht



Niet steriel



Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is

1. Doel van het hulpmiddel

Het FeelSafe Basic tentbed is een verpleegbed met een tent en een matrassysteem, ontwikkeld om een veilige, gecontroleerde omgeving te bieden voor bewoners die een groot risico lopen op verwondingen wanneer ze uit bed vallen of wanneer ze het bed zonder hulp verlaten. Het FeelSafe Basic tentbed is een passief alternatief voor directe fysieke fixatie. Het bed is bedoeld voor volwassen en pediatrische bewoners met een lengte van ten minste 146 centimeter en een gewicht van 40 tot 165kg.

1.1 Beoogde gebruiker

Dit medisch hulpmiddel is bestemd voor gebruik door medisch professionals.

1.2 Beoogd doeleind

Het FeelSafe Basic tentbed geeft de bewoner een gevoel van veiligheid, comfort en geborgenheid door het aanbieden van bewegings-vrijheid binnen een afgebakende omgeving met minder externe prikkels.

1.3 Indicaties

Het FeelSafe Basic tentbed is geschikt als een humaner alternatief voor fysieke fixatie of sederende medicatie. Het tentbed vergroot niet alleen de veiligheid, maar zorgt tevens voor een gevoel van veiligheid en bescherming. Indicaties voor de inzet van het FeelSafe Basic tentbed kunnen zijn:

- Ernstige osteoporose;
- Een groot risico op fracturen als gevolg van de klinische omstandigheden;
- Onvoldoende spier- en vetweefsel en subcutaan weefsel om de schok van een val op te vangen;
- Musculoskeletale problemen die een onvaste gang veroorzaken of de kracht of biomechanica van de bewoner aantasten;
- Het gebruik van antistollingsmiddelen;
- Een verleden van ernstige trauma's als gevolg van een eerdere val.
- Een verlaagd bewustzijn als gevolg van medicatie of neurale ziekten waardoor de alertheid en balans worden aangetast en/of als gevolg van dementie*
- Visuele of perifere zenuwaandoeningen die van invloed zijn op het bewustzijn of de waarneming van de huidige positie.

Elke bewoner moet over een goedgekeurd ZORGPLAN beschikken voor het FeelSafe Basic tentbed mag worden gebruikt. Het FeelSafe Basic tentbed dient gebruikt te worden overeenkomstig de normen voor zorg en het beleid van een wettelijk geregistreerde medische faciliteit. Ook moet aan alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en Europese richtlijnen worden voldaan.

1.4 Contra-indicaties

Indien sprake is van één of meerdere van de volgende contra-indicaties, gebruik dan het FeelSafe Basic tentbed niet maar neem contact op met de behandelend arts.

- De aanwezigheid van meerdere lijnen, drains en/of slangen;
- De noodzaak van acute respiratoire of cardiale ondersteuning;
- Cardiale of sepsische shock;
- Claustrofobie;
- PICA eetstoornis;
- Agressief, gewelddadig of zelf-destructief gedrag;
- Suïciderisico;
- Patiënt is kleiner dan 146cm of lichter dan 40kg of een lagere BMI dan 17.

1.5 Beschrijving van het hulpmiddel

- **In hoogte verstelbaar verpleegbed onderstel:**

Geproduceerd en geleverd door Elbur Vertriebs GmbH. (Elbur model PB531 of PB536).

Het bed kan zakken tot een hoogte van 57 cm (bovenkant matras), zodat de bewoner eenvoudig kan worden overgebracht. Bovendien kan het bed worden verhoogd tot een hoogte van 92 cm (PB531) of 97 cm (PB536) om het risico op rugklachten of verwondingen van de zorgverlener tijdens het verzorgen van de bewoner te verminderen.

- **Ingesloten matras in een compartiment:**

Helpt het risico op beknelling van de bewoner onder het matras te voorkomen.

- **Tent:**

Het bed wordt omgeven door een rechthoekige grijze tent met een inhoud van twee kubieke meter.

Het materiaal, polyester met PU + FR coating, is licht en huidvriendelijk. De tent bevat twee toegangspanelen, zodat zorgverleners bij de bewoner kunnen. Voor de veiligheid van de bewoner zijn de ritsen voorzien van snelsluitingen.

1.6 Wanneer mag het hulpmiddel niet worden gebruikt?

Het FeelSafe Basic tentbed is niet bedoeld voor gebruik voor:

- Bewoners die zwaarder zijn dan 165kg. Dit is de maximale laadcapaciteit van het bed;
- Bewoners die zijn gediagnosticeerd op enige conditie die tot gewelddadig of zelfdestructief gedrag kan leiden. Dit kan resulteren in zelfverwonding en/of in beschadiging van het FeelSafe Basic tentbed. Wanneer bewoners gewelddadig heen en weer rollen, kan het FeelSafe Basic tentbed kantelen of naar een positie bewegen waarin de bewoner gewond kan raken;
- Bewoners waarbij sprake is van één of meerdere van de in paragraaf 1.4 genoemde contra-indicaties.
- Patiënten die kleiner zijn dan 146cm of lichter zijn dan 40kg of een lagere BMI hebben dan 17.



WAARSCHUWING! Dit tentbed is niet geschikt voor klasse I ruimten zoals een IC afdeling.

LET OP! Vanwege de aard van de diagnoses, het activiteitsniveau of de ongecontroleerde bewegingen van bewoners is het FeelSafe Basic tentbed niet voor iedere bewoner geschikt. Wanneer een bewoner onrustig blijft en/of wordt in het bed, dient men de bewoner direct uit het bed te halen en op zoek te gaan naar een andere oplossing.

2.0 Procedure voor inzet van het FeelSafe Basic tentbed

2.1 Vóór het FeelSafe Basic tentbed wordt gebruikt

- Het FeelSafe Basic tentbed moet worden voorgeschreven door een arts of door de autoriteit die wettelijk is bevoegd om medische hulpmiddelen voor te schrijven;
- Alle zorgverleners moeten voorafgaand aan het gebruik van het FeelSafe Basic volledig worden getraind in het gebruik van het bed;
- Zorg dat u het zorgplan van de bewoner kent en dat u weet hoe nauwkeurig en hoe vaak u de bewoner moet controleren;
- Volg alle instructies, waarschuwingen en aanwijzingen in de uitgebreide gebruiksaanwijzing en alle labels op het FeelSafe Basic tentbed.

2.2 Bij het eerste gebruik

- Controleer de bewoner gedurende de eerste uren zorgvuldig om vast te stellen of het FeelSafe Basic tentbed aan de behoeften van de bewoner voldoet. Controleer of de bewoner comfortabel ligt en goed op het FeelSafe Basic tentbed reageert;
- Human Protection B.V. beveelt controle aan in de kamer gedurende de eerste twee uur en ononderbroken geluidscontrole of visuele controle gedurende de daaropvolgende twee uur.

2.3 Tijdens het gebruik van het FeelSafe Basic tentbed

- Doorloop steeds de lijst “9 Belangrijke controlepunten” in de uitgebreide gebruiksaanwijzing voor u de bewoner alleen laat;
- Controleer de bewoner zorgvuldig om vast te stellen of het FeelSafe Basic tentbed aan de behoeften van de bewoner voldoet. Controleer of de bewoner comfortabel ligt en goed op het FeelSafe Basic tentbed reageert;
- Beoordeel de noodzaak van het gebruik van het FeelSafe Basic tentbed opnieuw wanneer de mentale of fysieke toestand of status van de bewoner verandert. Gebruik het FeelSafe Basic tentbed alleen wanneer er geen minder beperkend alternatief is. Gebruik ALTIJD het minst beperkende hulpmiddel gedurende de kortst mogelijke periode en zoek altijd naar een minder beperkend alternatief;
- Haal bewoners die claustrofobisch zijn of worden uit het FeelSafe Basic tentbed;
- Haal de bewoner onmiddellijk uit het FeelSafe Basic tentbed wanneer er een risico op zelfverwonding of verwonding van anderen bestaat, wanneer het bed kantelt of wanneer de bewoner het FeelSafe Basic tentbed probeert te beschadigen.

2.4 Beëindiging van het gebruik

- Voor de bewoner wordt overgeplaatst naar een gewoon bed of naar een verpleegbed moet hij worden beoordeeld en gecontroleerd;
- Raadpleeg de medische verklaring, het zorgplan, het medisch team of het beleid van de instelling voor instructies over het verplaatsen van de bewoner.

WAARSCHUWING!



Gebruik het FeelSafe Basic tentbed **NOOIT** wanneer de tent, toegangspanelen of ritsen zijn beschadigd. Controleer **ALTIJD** de tent en ritsen voor u de bewoner onbewaakt achterlaat. Wanneer u deze waarschuwing niet naleeft, kan de bewoner het bed ongewenst verlaten wat kan resulteren in een valpartij met verwondingen.



Belang van controle. Laat een bewoner **NOOIT** onbewaakt achter zonder goede bewaking. Wanneer u de toestand van de bewoner niet controleert overeenkomstig het veiligheidsbeleid van uw instelling, de medische verklaring of het ZORGPLAN, kan dat ernstige gevolgen hebben.

Beëindig het gebruik van het bed direct wanneer de bewoner onrustig wordt of blijft bij gebruik van het bed.

2.5 Beleid voor dagelijkse controle en vrijheid van de bewoner:

Controleer de toestand van de bewoner overeenkomstig het veiligheidsbeleid van uw instelling, de medische verklaring of het ZORGPLAN. Leg aan de bewoner en aan de familie van de bewoner uit hoe de oproepknop werkt.

Volg de instructies in het ZORGPLAN met betrekking tot het bieden van dagelijkse vrije momenten voor de bewoner. Houd rekening met de behoeften ten aanzien van: voeding, beweging, wandelen, ontspanning, toiletbezoek en verzorging.

2.6 Informatie over het gebruik

Instructies voor instellen en gebruik

Om veilige montage en veilig gebruik te garanderen, bevat ieder FeelSafe Basic tentbed deze handleiding voor gebruikers.

Bewaar dit document in het opbergzakje aan het voeteneinde van het bed, zodat u het in de toekomst kunt raadplegen.



2.7 Montage van het bed

Neem het hoofdstuk over de montage instructies iedere keer door wanneer u het bed monteert of als u de tent na een reiniging oprijt. Wanneer het FeelSafe Basic tentbed niet op de juiste wijze wordt gemonteerd, kunnen er verwondingen bij de bewoner ontstaan.

2.8 Aanpassing van het FeelSafe Basic tentbed



WAARSCHUWING! Pas het FeelSafe Basic tentbed **NOOIT** om enige reden aan.

- Voeg **NOOIT** bedhekken of planken aan het hoofd- of voeteneinde van het FeelSafe Basic tentbed toe. Hiermee vergroot u het risico op **BEKNELLING** en ernstige verwonding van geagiteerde of agressieve bewoners die in aanraking komen met deze onderdelen;
- Gebruik **NOOIT** een hulpmiddel, zoals een sluitstrip of hangslot, om de ritsen van de panelen dicht te maken. Gebruik alleen de meegeleverde snelsluitingen. U dient **ALTIJD** snel bij de bewoner te kunnen in een noodgeval;
- Voeg **GEEN** andere dan de door Human Protection aanbevolen accessoires aan het FeelSafe Basic tentbed toe (zie pagina 28 voor een overzicht van accessoires).

2.9 Controlelijst voor eerste gebruik

Controleer **ALTIJD** of het FeelSafe Basic tentbed goed functioneert. Voer een volledige visuele inspectie van het bed uit voor u bewoners voor het eerst op het bed plaatst. Controleer of:

- Het bed schoon en niet bevuild is;
- Het bed goed is gemonteerd en of alle onderdelen in goede staat zijn;
- Het tentframe niet is gebogen of gebroken;
- Alle ritsen gemakkelijk kunnen worden geopend en veilig kunnen worden gesloten en of er geen ruimtes of openingen zijn wanneer er druk op de rits wordt toegepast;
- Het metalen tentframe volledig is beschermd en of alle schuimdelen op hun plaats zijn en onbeschadigd zijn;
- De tent niet is gescheurd en of de panelen geen slijtage, dunne plekken of kapotte stiksels vertonen;
- Het netsnoer (indien gebruikt) zo is opgeruimd dat er geen struikelgevaar is.

LET OP! Gebruik het FeelSafe Basic tentbed **NOOIT** wanneer het tentframe is gebogen of gebroken, wanneer de tent is versleten of beschadigd en wanneer de ritsen niet gemakkelijk geopend en goed gesloten kunnen worden.

2.10 Training van de zorgverlener

Zorg dat iedere zorgverlener vóór hij/zij het FeelSafe Basic tentbed gebruikt, volledig is opgeleid in alle toepasselijke beleidsregels van de zorginstelling met betrekking tot vrijheidsbeperking en alle relevante Nederlandse en Europese wetgeving zoals bijvoorbeeld de wet Zorg en Dwang. Neem kennis van en volg de:

- Instructies voor de gebruikers in de uitgebreide gebruiksaanwijzing;
- Waarschuwingen en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing;
- Labels op het FeelSafe Basic tentbed;

Human Protection B.V. raadt u aan om de hierboven genoemde items gedurende de eerste maand wekelijks door te nemen.

2.11 Locatie van het bed

Zorg dat de kamer groot genoeg is om ruimte te bieden aan het FeelSafe Basic tentbed.

- De ruimte dient voorzien te zijn van een 220V stopcontact, op een gemakkelijk bereikbare positie nabij het bed.
- U dient in noodgevallen voldoende ruimte te hebben om eenvoudig bij het bed te kunnen en om de bewoner eenvoudig uit het bed te kunnen halen;
- Plaats het FeelSafe Basic tentbed zo dat de bewoner zichzelf niet kan verwonden aan muren, meubels of andere voorwerpen wanneer hij/zij zich binnen de tent bevindt;
- Zorg dat het netsnoer niet in de weg ligt en geen struikelgevaar vormt.
- De ruimte onder het bed moet vrij blijven.

3.0 Het gebruik van het FeelSafe Basic tentbed

3.1 Toegangspanelen

Het FeelSafe Basic tentbed is voorzien van twee toegangspanelen met ritsen:

Elke rits is voorzien van een trekklipje waarmee u de rits kunt openen en sluiten en kan worden gesloten met een snelsluiting.

De zijpanelen kunnen volledig worden geopend, zodat u eenvoudig bij de bewoner kunt. Aan de bovenzijde zit klittenband, dit kunt u gebruiken om de zijpanelen omhoog te houden wanneer ze zijn geopend.

De rits aan het toegangspaneel van het voeteneinde is voorzien van een dubbele runner om het geleidelijk afbouwen van de vrijheidsbeperking mogelijk te maken. Wanneer deze rits (gedeeltelijk) open wordt gelaten, kan de zorgvrager zelf het tentbed verlaten.



LET OP! Het open laten van een toegangspaneel kan risico's met zich mee brengen, er moet daarom weloverwogen besloten worden of dit bij de zorgvrager op een verantwoorde wijze mogelijk is.

3.2 Handbediening van het bed



Hoogteverstelling van het ligvlak (omhoog of omlaag). Door middel van de handbediening kan het bed in hoogte versteld worden. Met de sleutel, die bij levering is bevestigd aan het snoer, kan de verstelling worden vergrendeld. Raadpleeg de pictogrammen op de bediening voor meer informatie. Wanneer het bed is ontgrendeld, ziet u een groen stipje boven het vergrendelingsmechanisme. Wanneer het bed is vergrendeld, ziet u een geel stipje.

Neem contact op met Human Protection B.V. als u reservesleutels nodig heeft.

LET OP! Afhankelijk van de uitvoering is het mogelijk dat uw handbediening niet is voorzien van de mogelijkheid tot vergrendeling. Is deze functie wel wenselijk, neemt u dan contact met ons op!

Ook moet u het bed in de laagste stand plaatsen wanneer de bewoner onbewaakt achterblijft. Bovendien kan het bed worden verhoogd tot een hoogte van 92 cm (PB531) of 97 cm (PB536) om het risico op rugklachten of verwondingen van de zorgverlener tijdens het verzorgen van de bewoner te verminderen.



Bij PB531:

LET OP! Wanneer het bed volledig in de laagste stand wordt geplaatst komen de geïntegreerde wielen uit de poten, zodat het bed verplaatsbaar is. Zorg dat de wielen volledig zijn ingetrokken wanneer u de cliënt alleen laat.

Houdt de bediening van het bed buiten het bereik van de bewoner. De beugel aan de achterzijde van de handbediening van het bed kan worden gebruikt om de handbediening aan de bevestigingsriem te hangen.



LET OP! Laat de handbediening NOOIT achter in de tent wanneer de bewoner onbewaakt is.

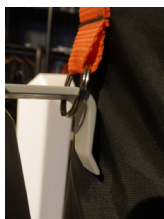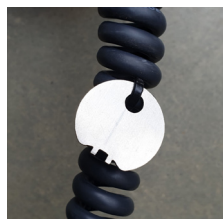

3.3 Vergrendelbare zwenkwielen

Het FeelSafe Basic tentbed is voorzien van vier vergrendelbare zwenkwielen. Vergrendel de zwenkwielen vóór u bewoners overplaatst, zodat het risico op ongewenste bewegingen van het bed wordt voorkomen. De wielen zijn centraal geremd.

PB531:

Wanneer de vier wielen volledig zijn ingetrokken staat het bed op de rem. Druk hiervoor de knop omhoog in totdat het bed stevig op de poten staat. Om het bed te kunnen verplaatsen, druk de knop omlaag in.



PB536:

Ontgrendel de zwenkwielen om het bed te verrijden. Draai de zwenkwielen richting de matrassteun onder het bed en druk vervolgens aan het hoofdeinde van het bed met uw voet op de rem om de vier zwenkwielen te vergrendelen. Druk de rem met uw voet omhoog om de zwenkwielen te ontgrendelen.



LET OP! Zorg dat u altijd alle zwenkwielen vergrendelt tijdens het verzorgen van de bewoner en tijdens het verplaatsen van bewoners van en naar het bed.

3.4 Comfortmatras en matrascompartiment

Het FeelSafe Basic tentbed is voorzien van een gesloten matrascompartiment. (zie afbeelding). Het compartiment biedt ruimte voor een matras met de volgende afmetingen: 90 cm x 200 cm x 12 cm.

Het matras heeft een incontinentiehoes met een rits. U dient deze hoes NIET te verwijderen. Het FeelSafe Basic tentbed is NIET geschikt voor luchtmatrassen.



LET OP! U kunt het risico op BEKNELLING of verstikking als volgt verminderen:


- Gebruik NOOIT een matras met andere afmetingen dan die waarvoor het compartiment werd ontworpen. Wanneer u een kleiner matras gebruikt, ontstaan er openingen tussen de tent en het matras. Wanneer u een groter matras gebruikt, wordt de stof uitgerekt, waardoor de rits beschadigd raakt;
- Gebruik geen matras dat lager is dan twaalf centimeter;
- Plaats NOOIT een ander matras dan het door Human Protection B.V. meegeleverde opdekmatras (max 5 cm hoog, 90 x 200 cm) in de tent.

3.5 Opdekmatras

Op het matrascompartiment en dus in de tent ligt een dun opdekmatrasje.

Plaats NOOIT een andere matras, dan het Human Protection 5cm opdekmatras, in de patiëntruimte van het tentbed, dit kan leiden tot verstikking.

Dit opdekmatrasje kan gebruikt worden om het bed op te maken

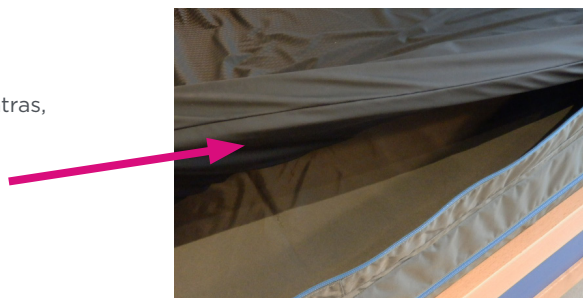

3.6 Transporthandgrepen

Wanneer u het bed van de ene locatie naar de andere verplaatst, dient u de transporthandgrepen te gebruiken. Voordat het verpleegbed wordt verplaatst, dienen de volgende veiligheidsregels in acht te worden genomen:

- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en bevestig deze aan het daarvoor bestemde klittenband van de tent;
- Controleer de technische staat van de wielen;
- Zorg ervoor dat het ligvlak zich in de laagste positie bevindt;
- Ontgrendel de centrale beremming van de wielen.

Na het verplaatsen:

- Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact;
- Het netsnoer moet uit de buurt blijven van bewegende delen van het verpleegbed, tijdens gebruik en transport.

Voorbeelden van gebruikstoepassingen zijn: het laden en lossen uit een transportvoertuig, het vervoeren van het bed vanuit de opslagruimte van de zorginstelling naar de kamer van de bewoner en het verplaatsen van het bed van de ene ruimte naar de andere.

U vindt de handgrepen op alle hoeken van het bed.

U kunt de hoogte van de handgrepen aanpassen door de hoogte van het bed aan te passen. Gebruik hiervoor de handbediening.

U kunt het bed al duwend of trekkend verplaatsen.

3.7 Snelsluitingen

Iedere rits bevat een snelsluiting. De gespen vormen een extra beveiliging om te voorkomen dat de bewoner het tentbed zelf open krijgt. Duw de twee zijden samen en trek aan de clip om de snelsluitingen te openen. Duw de twee zijden om de snelsluitingen te sluiten. U hoort een klikje wanneer de sluitingen zijn gesloten.

Trek ALTIJD aan de clip nadat u de snelsluiting gesloten hebt om te controleren of de snelsluiting daadwerkelijk dicht is (zie afbeelding).

Beschadigde of niet werkende snelsluitingen dienen onmiddellijk te worden vervangen!

Belt u daarvoor met Human Protection B.V. via telnr. +31 (0)13-536 38 07.



WAARSCHUWING! Controleer vóór u het bed verlaat of de snelsluitingen op alle toegangspanelen van het FeelSafe Basic tentbed veilig zijn gesloten. Wanneer u dit niet doet, kan de bewoner vallen of het bed zonder begeleiding verlaten. Dat kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

3.8 Ritsen en trekclipjes

• Inspecteer de ritsen op bobbeling of foute uitlijning. Test of alle ritsen makkelijk geopend en veilig gesloten kunnen worden en of er geen ruimtes of openingen zijn wanneer druk op de rits wordt toegepast.

• Wanneer een runner is beschadigd (zie afbeelding hiernaast), kan de rits niet goed meer worden gesloten.

• Gebruik ALTIJD de trekclipjes van de ritsen om panelen te openen en te sluiten.
Trek de panelen NOOIT open: daardoor kunnen het stof en de ritsen beschadigd raken.

• Gebruik het bed NOOIT wanneer een runner is opengebogen of wanneer het trekclipje ontbreekt of is gebroken.
Bel voor reparaties met Human Protection B.V. via telnr. +31 (0)13-536 38 07.

• Gebruik het bed NOOIT wanneer een rits beschadigd of onjuist gesloten is.



WAARSCHUWING! Verlaat het bed van de bewoner NOOIT als niet alle ritsen van de panelen goed zijn gesloten. Test ALTIJD alle ritsen over de gehele lengte door op het paneel naast de rits te duwen. Zo kunt u controleren of ze goed zijn gesloten en of het toegangspaneel niet onder druk wordt geopend.

3.9 Het openen van de tent bij calamiteiten

Probeer bij calamiteiten altijd eerst de tent te openen op de normale wijze, door middel van de rits van het zijpaneel. Mocht deze rits weigeren dan kunt u uitwijken naar de rits van het andere zijpaneel. Mocht het andere zijpaneel moeilijk bereikbaar zijn of mocht ook deze rits weigeren, dan kunt u een (verband)schaar gebruiken om het gaas van het FeelSafe Basic tentbed kapot te knippen.

