



COBI REHAB
The Positioning Company

XXL-Rehab Eclipse

XXL-Rehab handleiding rolstoel - De Eclipse

Gebruik

Max 270 / 450 kg

Gebruikershandleiding

NL

Ideaal gebruik voor:

- Gebruikers met overgewicht.
- Ziekenhuizen.
- Verpleeghuizen.
- Thuis.



at forkorte rørene til ønsket længde med en

nedstryger eller rørskærer.

Gebruiksaanwijzing van de XXL-Rehab handmatige rolstoel – De Eclipse

VOORZICHTIG

Dit product mag niet worden gebruikt zonder de juiste instructies van een zorgverlener.

Als het product wordt gebruikt voor personen die meer wegen dan het maximum draagvermogen kan het product worden beschadigd.

Cobi Rehab aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade of letsel veroorzaakt door onjuiste installatie, montage of gebruik van dit product.

Als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met Cobi Rehab. Gebruik GEEN vervangende onderdelen.

Cobi Rehab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of ongevallen die zich voordoen na reparatie door servicepersoneel zonder schriftelijke toestemming van Cobi Rehab.

 Lees voor het gebruik van de XXL-Rehab Eclipse deze instructies zorgvuldig door om juist gebruik te garanderen. Let hierbij vooral op de waarschuwingen gemarkeerd met 

Bedenk ook dat om letsel bij de gebruiker te voorkomen, de rolstoel alleen mag worden bediend door getrainde zorgverleners of assistenten of door

Gebruik

XXL-Rehab Eclipse is een unieke handmatige rolstoel waarvan het ontwerp en de configuratie-opties uniek zijn voor de behoeften en het lichaamstype van gebruikers met overgewicht.

De rolstoel heeft een tijdloos ontwerp. Hij is bedoeld voor gebruikers tot 270 kg (versterkte versie voor gebruikers tot 450 kg). Hij is geschikt voor gebruikers met verschillende diagnoses.

De rolstoel kan worden aangepast wat betreft zitdiepte, zitkanteling, rugleuninghoek en zithoogte.

De XXL Rehab Eclipse-rolstoel kan binnen en buiten worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om de rolstoel te gebruiken bij temperaturen tussen -5 graden en +40 graden Celsius, omdat het materiaal anders minder comfortabel aanvoelt.

 Het gebruik van het product voor personen die meer dan 270 kg/450 kg wegen kan een risico van kantelen of met zich meebrengen van de rolstoel.

Speciale opmerkingen

 **WAARSCHUWING/OPGELET** — opmerkingen zoals gebruikt in deze handleiding, zijn van toepassing op gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

Het transporteren van een gebruiker beveiligd in de rolstoel in een gemotoriseerd voertuig.

XXL-Rehab raadt het transport af van rolstoelgebruikers in de XXL-Rehab Eclipse-rolstoel in een gemotoriseerd voertuig.