


## Højdebegrænser til guldmann gb4 plejeseng


Ved montering af Vendlet V5 eller Vendlet V5+ på guldmann's gb4 plejeseng opstår der typisk det problem, at Vendlet-systemets aktuatorer støder mod sengens hjul eller fodbremse, når sengen sænkes til lav højde.

Vendlet har derfor udviklet en højdebegrænser, der kan monteres på et af Vendlet-systemets aktuatorben. Højdebegrænseren består af et beslag, en switch og to kabler. den sikrer, at sengens nedadgående bevægelse stopper, inden Vendlet-systemets aktuator rammer sengens hjul eller fodbremse.

### monteringsvejledning

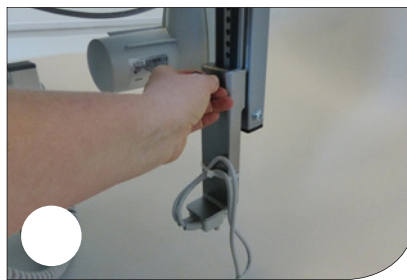

1. Højdebegrænser bestående af et beslag, en switch og to kabler (varenr. 6000040).
2. Før beslaget op i skinnen på bagsiden af et af de aktuatorben, der sidder i sengens hovedende. 3. træk den sorte knap ud og lad beslaget falde i hak i anden nederste hul.

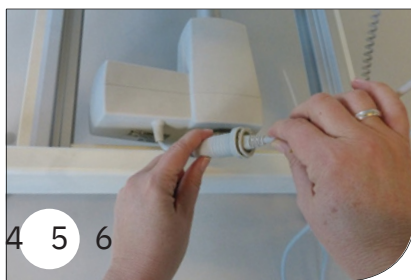

4. i sengens nederste ramme sidder sengens højdeaktuator. afmonter strømstikket til sengens højdeaktuator. 5. sæt han-stikket fra switchen i hun-stikket på sengens højdeaktuator. 6. sæt hun-stikket fra switchen i han-stikket fra sengens kontrolenhed.

tjek om beslaget er monteret korrekt ved at sænke sengen forsigtigt, indtil switchen rører gulvet. når switchen rører gulvet, skal senges nedadgående bevægelse slå fra.