

Periodisk inspektion av Handicares SystemRoMedic™ lyftselar

Den periodiska inspektionen för lyftselar baseras i huvudsak på standarden ISO 10535:2006, "Hoists for the Transfer of Disabled Persons" (Lyftar för personer med funktionshinder). Standarden kan innehålla fler detaljerade moment än vad som anges i checklisten/protokollet för den periodiska inspektionen och det kan därför vara lämpligt att också läsa standarden i samband med besiktningen.

Enligt standardens bilaga, B, "Periodic inspection" bör lyftseldarna inspekteras med det tidsintervall som bestäms av tillverkaren, dock minst var 6:e månad. Om lyftseldarna används eller tvättas oftare än normalt krävs tätare inspektioner.

Periodisk inspektion bör genomföras av en person som är lämplig och väl kvalificerad och som har god kännedom om konstruktion, användning och skötsel av lyftseldar.

Anmärkning

Handicares SystemRoMedic™ lyftseldar inspekteras och märks med antingen:

1. Observeras, 2. Åtgärdas eller **3. Tas ur bruk.**

1. Observeras betyder att lyftseldan inte har någon skada som stör användandet men att man bör hålla extra koll på den under kommande inspektioner.

2. Åtgärdas betyder att lyftseldan har en skada som kan påverka användandet och att den därför behöver åtgärdas.

3. Tas ur bruk innebär att lyftseldan har en skada som medför skada för brukaren om den används. Lyftseldan skall då tas ur bruk.

Besiktningpunkter

Varje moment som besiktas bockas av i protokollet, i rutan till vänster. Eventuella kommentarer skrivs på raderna till höger.

Inspektera produktetiketten

Etiketten som sitter på baksidan av lyftseldan har en del märkningar som skall gå att utläsa vid inspektion; maxlast, artikelnummer, serienummer, storlek, tillverkningsår och tvättråd. Om märkningarna inte går att utläsa är detta en skada som skall observeras och bör åtgärdas.

Inspektera lyftband och sömmar

Kantband, sömmar och lyftöglor skall inspekteras noggrant för att upptäcka hål, revor, rispor, lösa trådar och annat slitage som medför tvivel om lyftseldens styrka. Upptäcks denna typ av skador på lyftseldan skall denna tas ur bruk och kasseras.

Inspektera tyget

Tyget skall inspekteras för att upptäcka slitage, hål, revor, lösa trådar, fransning samt förändring i färg och styvhet. Upptäcks denna typ av skador på lyftseldan skall denna tas ur bruk och kasseras.

Inspektera dokumentation

Kontrollera bruksanvisningen så att det är den senaste och mest aktuella bruksanvisningen för just din lyftseld. Den senaste versionen kan alltid laddas ner från vår hemsida www.handicare.se.

Rutiner

Vi rekommenderar att lyftseldarna alltid inspekteras efter tvätt samt/eller minst var 6:e månad. Inspektion skall ske enligt detta dokument. Längst ned i checklisten/protokollet för den periodiska inspektionen finns plats att fylla i datum och signatur för inspektionen.

Vi har tagit fram en märklapp, NameTag, som kan märkas med datum för senaste inspektion ("Last inspection"), och som kan fästas på lyftseldan för att uppmärksamma alla användare om när den senaste inspektionen är gjord.

Checklista - Periodisk inspektion av Handicares SystemRoMedic™ lyftselar

Lyftsmodell:	Avtalsnr:
Art.nr:	Företag/organisation:
Serienr:	Adress:
Tillv. år:	Postnr:

Anmärkning: 1. Observeras 2. Åtgärdas 3. Tas ur bruk

Checklista

Inspektera produktetiketten

Kontrollera att det går att utläsa:

<input type="checkbox"/> Maxlast	_____
<input type="checkbox"/> Artikelnummer	_____
<input type="checkbox"/> Serienummer	_____
<input type="checkbox"/> Storlek	_____
<input type="checkbox"/> Tillverkningsår	_____
<input type="checkbox"/> Tvättråd	_____

Kommentarer:

Inspektera lyftband och sömmar

Kontrollera om hål, revor, rispor och annat slitage finns på:

<input type="checkbox"/> Kantband	_____
<input type="checkbox"/> Lyftöglor	_____
<input type="checkbox"/> Sömmar	_____

Inspektera tyget

Kontrollera om slitage, hål, revor, lösa trådar,
fransning eller färgförändring och styvhet förekommer

Inspektera dokumentation

Kontrollera att gällande bruksanvisning finns tillgänglig

Datum/ signatur:	_____	Datum/ signatur:	_____
Datum/ signatur:	_____	Datum/ signatur:	_____
Datum/ signatur:	_____	Datum/ signatur:	_____

I enlighet med ISO 10535:2007 Annex B-Periodic inspection
Inspektion bör utföras minst var 6:e månad och/eller efter tvätt.

Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner kostnadsfritt från www.handicare.se