

RisePorto[™]
System**RoMedic**[™]

Den nya generationen

Säkra och flexibla lyftlösningar för alla
miljöer och situationer.

Var som helst öoverallt

RisePorto är en bärbar taklyftsmotor med ovanligt små yttermått och extremt låg vikt. Samtidigt är den både stark och säker och mycket enkel att använda för att skapa säkra och flexibla lyftlösningar som kännetecknas av prestanda, enkelhet och komfort.

Två modeller för alla situationer, brukare och behov

RisePorto finns i två modeller med olika lyftkapacitet. RisePorto300 är avsedd för brukare som väger upp till 140 kg och RisePorto450 är avsedd för brukare som väger upp till 205 kg. Tillsammans med korrekt utprovade lyfttillbehör ger RisePorto trygga, bekväma och individuellt anpassade lyft av brukare i samband med sittande eller liggande förflyttningar till och från säng, rullstol eller toalett. RisePorto har ett stort lyftintervall och erbjuder möjlighet till både låga och mycket höga lyft, vilket gör den till en utmärkt lösning också för lyft från golv samt för gå- och ståträning. RisePorto kan också användas för smidiga förflyttningar av brukare från ett rum till ett annat.

För alla skensystem

RisePorto kan användas med alla typer av skenor, både i fast installerade skensystem (enkla skensystem med eller utan kurvor och växlar, eller skensystem med full rumstäckning) och i fristående lyftställningar. Med hjälp av ett monteringshandtag, som finns som tillbehör, monterar man enkelt lyftmotorn i önskat skensystem eller flyttar den mellan olika skensystem och rum när man har behov av att lyfta på olika platser.

För alla miljöer och i alla typer av rum

Designen och egenskaperna hos RisePorto gör lyftmotorn till ett perfekt hjälpmedel för hemvård, institutioner och andra typer av boenden, men RisePorto fungerar faktiskt lika bra i alla miljöer. Den kan användas i alla typer av rum där det finns behov av att lyfta och förflytta brukare från en plats till en annan. I små rum, där bristen på utrymme gör det svårt att använda mobila lyftar, är RisePorto en perfekt lösning.

Kompakt format och låg vikt

RisePorto har ovanligt små yttermått och extremt låg vikt. Den behändiga storleken ger många praktiska fördelar och, tillsammans med den moderna och eleganta designen av lyftmotorn, bidrar den också till skapandet av professionella och funktionella vårdmiljöer med en mänsklig och harmonisk atmosfär.

RisePorto är ett modernt och stiligt alternativ som ger säkra och flexibla lyftlösningar för alla situationer. Eftersom samma lyftmotor kan användas på flera olika platser får den också hög nyttjandegrad, vilket i sin tur förebygger manuella lyft och arbetsrelaterade skador och olyckor.





Integrerade bärhandtag för smidig transport



Integrerad, hopfällbar lyftbygel

RisePorto har en modern och elegant design med rena former och släta ytor. Designen är snygg på ett diskret sätt och dessutom, vilket är viktigare, är den riktigt smart. RisePortos design erbjuder ett flertal funktionella och praktiska fördelar som gör lyftmotorn mycket enkel både att använda och att hålla ren.

Snygg
og smart

Integrerad, hopfällbar lyftbygel

RisePorto har en lyftbygel som är integrerad i lyftmotorn. Lyftbygelns krok, som sitter på kortsidorna av lyftmotorn, är hopfällbara vilket både förenklar användning, förflyttning och all annan hantering och skapar förutsättningar för smidig och kompakt förvaring. En magnet säkrar krokarnas position i hopfällt läge. I utfällt läge är lyftbygelns av standardbredd och därmed lämplig för de allra flesta brukare och situationer. De flexibla urkrokningskydderna gör det möjligt att både kroka på och ta bort lyftselar på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. De förhindrar också, på ett effektivt sätt, att lyftöglorna kryper ut ur lyftbygelns.

Integrerade bärhandtag för smidig transport

Två ergonomiska, integrerade bärhandtag erbjuder smidig hantering vid transport av lyftmotorn mellan olika skensystem. Handtagen är också utmärkta för medhjälparen att hålla i och styra med samtidigt som han/hon förblir nära brukaren under lyftproceduren.

Rum-till-rum-ögla



Kontrollpanel på lyftmotorn



Rum-till-rum-ögla

RisePorto är utrustad med en ögla som, tillsammans med ett lyftband för rum-till-rum-förflyttningar som finns som tillbehör, används för enkla förflyttningar av brukare mellan olika rum och skensystem.

Ergonomisk handkontroll

RisePorto är mycket enkel att manövrera, antingen via den medföljande handkontrollen eller direkt på själva lyftmotorn. Detta gör det möjligt för medhjälparen att vara nära brukaren för en ökad upplevelse av säkerhet, trygghet och komfort under hela lyftproceduren.

Den ergonomiska och användarvänliga handkontrollen har tydligt märkta och intuitivt placerade knappar som används för att slå på och av samt för att höja och sänka lyftmotorn. Handkontrollen är mycket enkel att ansluta, ta bort eller byta ut utan verktyg.

Kontrollpanel på lyftmotorn

De enkla och tydligt märkta knapparna för höjning och sänkning av lyftmotorn på framsidan av kåpan kan användas som ett komplement till handkontrollen. Kontrollpanelen har också symboler som tänds för att indikera batteristatus och behov av service.



Säker og praktisk

RisePorto väger bara 5,8 kg. Det behändiga formatet och den låga vikten ger många praktiska fördelar och underlättar avsevärt såväl montering och nedmontering som transport och förvaring av lyftmotorn. RisePorto har också tystgående, mjuka rörelser och många säkerhetsfunktioner för maximal komfort och trygghet, både för brukaren och för medhjälparen.



Vridbar åkvagn (360°)


RisePorto används tillsammans med en vridbar (360°) åkvagn som beställs separat. Åkvagnen gör det möjligt för lyftmotorn att snurra runt under användning vilket effektivt förhindrar vridning av lyftbandet.

Extra åkvagnar gör det enklare att flytta en taklyftsmotor från ett rum eller skensystem till ett annat. I kombination med Room transfer strap, ett lyftband för rum-till-rum-förflyttningar som också finns som tillbehör, underlättar extra åkvagnar även förflyttningar av brukare från ett rum till ett annat.



Bekvämt och säkert

Alla modeller av RisePorto är utrustade med manuell nödstopp samt med både elektrisk och manuell nödsänkning. RisePorto har också överbelastningskydd och fallskydd samt en funktion som automatiskt stannar motorn om lyftbandet inte belastas. Lyftmotorn erbjuder dessutom mjuk start och stopp för ökad trygghet och komfort för brukaren.

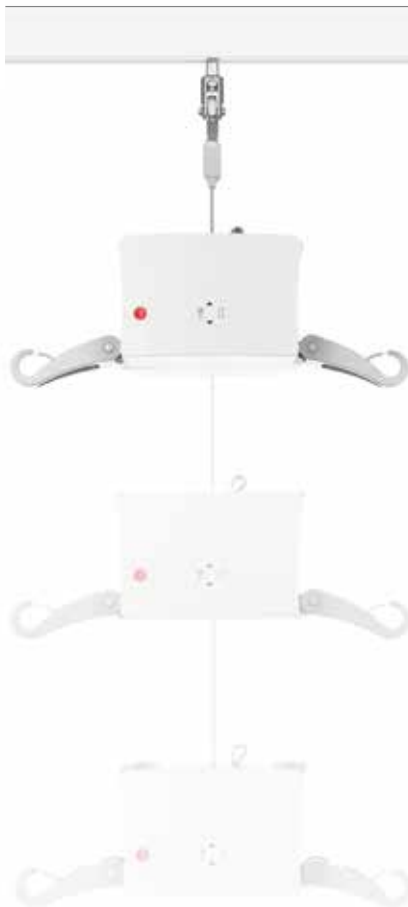

Effektiv styrning av lyftbandet

RisePorto är utrustad med en funktion för effektiv styrning av lyftbandet. Denna funktion förhindrar oavsiktlig vridning av lyftbandet samtidigt som den minimerar förslitningen och förlänger lyftbandets livstid. Totalt sett sparar den både tid, pengar och bekymmer.



Inbyggt batteri med hög kapacitet och lång livstid

RisePorto är utrustad med ett inbyggt, miljövänligt NiMH-batteri med hög kapacitet. Batteriet ger många timmars användning innan det behöver laddas. En lampa på lyftmotorn indikerar, tillsammans med ljudsignaler, när batteriet behöver laddas. Laddningskontakten är lättillgängligt placerad på sidan av lyftmotorn, som kan laddas på plats i skenan. För att spara på batteriet och ytterligare reducera behovet av laddning, men också för att säkerställa att lyftmotorn alltid är laddad och redo för användning, stänger RisePorto automatiskt av sig själv efter 15 minuter utan aktivitet.

Diagnostik

En speciell mjukvara, som finns som tillbehör, gör det möjligt att, med hjälp av en PC, få tillgång till ytterligare information om lyftmotorn, till



exempel antal drifttimmar och utförda lyft, antal överlast, statistik på utförd service etc.


PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
50200016	RisePorto300	Komplett med handkontroll och laddare, SWL 140 kg
50200015	RisePorto450	Komplett med handkontroll och laddare, SWL 205 kg

Åkvagn beställs separat.

TILLBEHÖR

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
50200014	Trolley 360 RisePorto	Vridbar åkvagn (360°) för RisePorto
50200004	Room transfer strap	Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 300 mm
70200021	Room transfer strap	Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 700 mm
70200022	Room transfer strap	Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 800 mm
70200023	Room transfer strap	Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 900 mm
70200024	Room transfer strap	Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 1000 mm
50200017	Handle for mounting	Monteringshandtag, 750 mm
70200053	Lift strap extension	Förlängningsband, 370 mm
70200054	Lift strap extension	Förlängningsband, 570 mm
70200055	Lift strap extension	Förlängningsband, 670 mm
70200056	Lift strap extension	Förlängningsband, 770 mm
70200057	Lift strap extension	Förlängningsband, 870 mm
70200058	Lift strap extension	Förlängningsband, 970 mm
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik, USB-minne och kabel

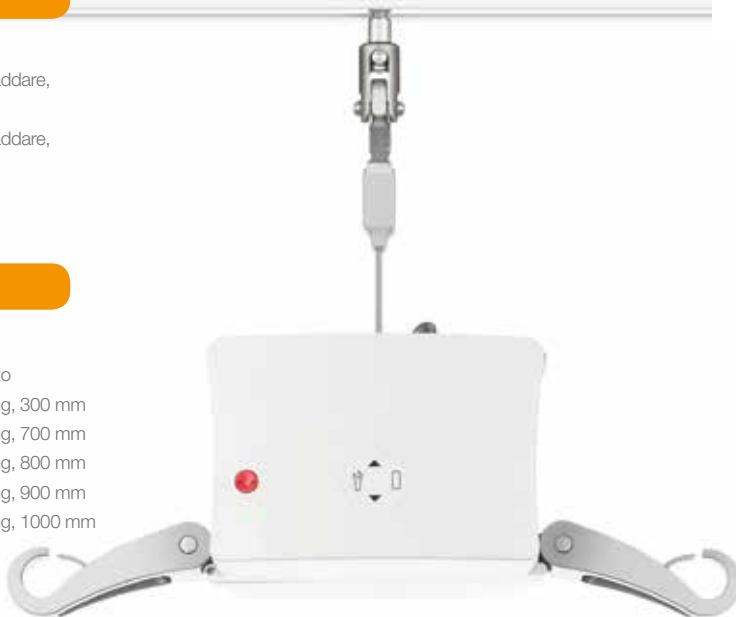

TEKNISK INFORMATION

Safe working load, RisePorto300:	140 kg
Safe working load, RisePorto450:	205 kg
Material, chassi:	Aluminium
Material, kåpa:	Flamsäker ABS-plast
Material, lyftbygel:	Aluminium
Mått, längd x bredd x höjd:	288 x 152 x 153 mm
Inbyggnadshöjd:	270 mm
Vikt:	5,8 kg
Förflyttning längs skenan:	Manuell
Lyftbygel:	Integrerad, hopfällbar
Lyftbygel, bredd:	458 mm
Handkontroll:	Elektrisk, 4 knappar
Lyftintervall:	1700 mm
Lyfthastighet, utan belastning:	30 mm per sek
Lyfthastighet, med belastning:	18-23 mm per sek
Ljudnivå, med belastning:	57 dB(A)
Nödsänkning:	Elektrisk och manuell
Nödstopp:	Manuell
Batteri:	NiMH 26,4V 2,7 Ah
Skyddsklass, lyftmotor:	IPX3
Skyddsklass, handkontroll:	IPX4



RisePorto uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Skensystem

Handicares SystemRoMedic™ sortiment erbjuder stationära lyftsystem både för fast installation i tak och/eller vägg (MilkyWay) och som fristående lösningar (Castor och Helena).

Lyftselar

I SystemRoMedic™ finns också ett brett urval av funktionella och bekväma kvalitetslyftselar anpassade för säkra, bekväma och individuellt anpassade lyft i olika lyftsituationer. Lyftselarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Det finns också särskilda lyftselmodeller i XXXL och XXXXL för extremt stora och tunga brukare.

Besök www.handicare.se för mer information eller kontakta oss för att beställa ditt exemplar av vår lyftselbroschyr.



SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.



handicare

Maskinvägen 17,
972 54 Luleå
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se