

ReTurn7400™

SystemRoMedic™

Gepatenteerd ontwerp*
Lage opstaladder,
geschikt voor minder lange
volwassenen en kinderen
Activeert de zorgvrager
Voorkomt zwaar tillen
voor de zorgverlener



Veilig en actief gaan staan en verplaatsen – zonder zwaar te tillen

ReTurn7400 is een gebruiksvriendelijk en zeer effectief hulpmiddel bij het gaan staan en verplaatsingen, maar ook bij revalidatie. ReTurn7400 maakt het mogelijk om veilig en actief te gaan staan en helpt bij verplaatsingen van en naar bed, rolstoel of toilet. De ReTurn7400 kan ook worden gebruikt om een zorgvrager verder naar achteren in de stoel of rolstoel te zetten. Zorgverleners kunnen met de ReTurn7400 gemakkelijk verplaatsingen uitvoeren zonder zwaar te tillen. Bij zorgvragers die nog enige kracht over hebben stimuleert de ReTurn7400 het natuurlijke bewegingspatroon bij het gaan staan, terwijl tegelijkertijd de spieren en functionele mogelijkheden sterker worden. Daardoor is de ReTurn7400 een ideaal hulpmiddel bij revalidatieklinieken en een zorgvrager die ReTurn7400 thuis gebruikt kan normaal thuis blijven wonen met de hulp van slechts één zorgverlener.



handicare

ReTurn7400



De ReTurn7400 en ReTurn7500 hebben dezelfde stabiele onderplaat waardoor het mogelijk is om te wisselen tussen lage en normale ladders om in meer behoeften te kunnen voorzien en om zo goed mogelijk gebruik te maken van het product.

PRODUCTSPECIFICATIE

Artikelnr.	Product	Beschrijving
7400	ReTurn7400	Draai- en transferplatform, compleet met lage opstaladder
7401	Rising ladder, laag	Voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001 en voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001
7501	Rising ladder, standaardhoogte	Voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001 en voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001
7501i	Rising ladder, standaardhoogte	Met opening voor het vasthaken van ReTurnBelt, voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001 en voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001



Verschillende modellen van ReTurn bieden oplossingen voor alle mogelijke situaties en zorgvragers

Het basisprincipe achter ReTurn is dat zorgvragers de eigen kracht en mogelijkheden gebruiken en verbeteren. Alle ReTurn-modellen helpen daarom de zorgvrager te activeren en moedigen het natuurlijke bewegingspatroon van de zorgvrager aan.



Op www.handicare.com vindt u meer informatie over verschillende modellen van ReTurn en alle accessoires.

Gebruiksvriendelijk en zeer veelzijdig

ReTurn7400 is een handmatig hulpmiddel bij het gaan staan en verplaatsen, het is zeer gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, zowel voor zorgvrager als zorgverlener. ReTurn7400 is ook een veelzijdig product dat op een groot aantal verschillende manieren gebruikt kan worden, zowel om zorgvragers veilig en efficiënt te assisteren bij het opstaan en het herpositioneren vanuit zit, als voor korte verplaatsingen binnenshuis. Daarnaast is ReTurn7400 ook een uitstekend trainingshulpmiddel, waardoor het een ideaal hulpmiddel is bij revalidatie.

De ReTurn7400 heeft een lage opstaladder die ideaal is voor minder lange volwassenen en voor kinderen. Deze uitvoering is ook geschikt voor speciale zorgsituaties, zoals in een röntgenapparaat. De ReTurn7400 is bedoeld voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 150 kg.

Ontzettend gemakkelijk te manoeuvreren

De ReTurn7400 heeft een uniek, gepatenteerd* ontwerp waarmee het draai- en transferplatform ontzettend gemakkelijk te manoeuvreren is. De ReTurn7400 is soepel en gemakkelijk te rollen, te draaien en te zwenken op alle oppervlakken, zelfs bij weinig ruimte. Het apparaat is gemakkelijk dicht bij een bed, rolstoel of toilet te zetten en het kost minimale inspanning om ReTurn7400 te verplaatsen, zelfs met een zwaardere zorgvrager.

Stabiele en veilige onderplaat

Dankzij een laag zwaartepunt en een breed onderliggend steunvlak, met wielen op alle hoeken is de onderplaat stabiel en veilig te gebruiken. Twee grote, vaste en vergrendelbare middenwielen zorgen ervoor dat de ReTurn7400 gemakkelijk te rollen en stabiel te sturen is. Tegelijkertijd maken de zwenkwielen op de hoeken het manoeuvreren gemakkelijk.

De opstaladder biedt ruimte voor een natuurlijk bewegingspatroon en voor nabijheid

De ReTurn7400 is uitgerust met een opstaladder die onderaan volledig open is, terwijl het bovendeel op een groot aantal manieren beetgepakt kan worden, inclusief een centrale "krachtgreep". De opstaladder leunt voorover, bij de zorgvrager vandaan, waardoor zorgvragers voldoende plek hebben om dicht bij het hulpmiddel te komen om omhoog te "klimmen" en/of om zichzelf omhoog te trekken tot een staande positie. Zorgvragers worden ook door de ladder ondersteund bij statraining en verplaatsingen. Het ontwerp biedt zorgverleners ook voldoende werkruimte om zo zeer dicht bij zorgvragers te kunnen blijven om hen vanuit verschillende hoeken te kunnen ondersteunen.

De onderbeensteunen kunnen verticaal en horizontaal ingesteld worden. Ze kunnen ook gedraaid worden om de steunen gemakkelijk aan te passen aan het lichaam van de zorgvrager. Hierdoor is het ook mogelijk om dezelfde ReTurn7400 te gebruiken voor meerdere personen.

De ReTurn7400 is, voor eenvoudiger transport en opslag, eenvoudig te monteren en demonteren.

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting	150 kg
Totale hoogte	995 mm
Onderplaat, lengte x breedte x hoogte	685 mm x 570 mm x 40 mm
Gewicht	16,5 kg

*) Patent: SE-0300528-7

Ingeschreven Gemeenschapsmodel: RCD-529631-1

ACCESSOIRES

Door ReTurn7400 te combineren met verschillende accessoires kan de zorgvrager extra steun krijgen een groter gevoel van veiligheid tijdens het opstaan, de statraining en het verplaatsen. De keuze voor accessoires is afhankelijk van de situatie en de functionele mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager.

Artikelnr.	Product	Beschrijving
6031--6038	ReTurnBelt**	Maat XXS--XXXL
6133--6136	ReTurnBelt, afveegbaar	Size S--XL
6233--6236	ReTurnBelt, wegwerp, niet-geweven	Size S--XL
6061	SupportStraps	Accessoire voor riemen
7250	HeelStrap	Voor ReTurn7400/7500
7215	Padding for leg support	Voor ReTurn7400/7500
0954	Bag	Voor ReTurn7400/7500

**) Patent: SE-0401517-8



handicare

Handicare
Weteringweg 5-9
2641 KM Pijnacker
Tel: 015 - 369 54 40
Fax: 015 - 369 71 64
www.handicare.com
info.LS@handicare.com

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfer-situaties.

Transfers, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

Begeleiden, bij het mobiliseren. **Tillen** manueel en mechanisch.