

**MilkyWay**<sup>™</sup>  
SystemRoMedic<sup>™</sup>

**Komplett, enkelt och säkert**




handicare



# MilkyWay


## -obegränsade möjligheter

En stationär lyftlösning, bestående av en taklyftsmotor som monteras antingen i ett fast installerat skensystem i taket eller i en fristående lyftställning, är ett ergonomiskt utmärkt alternativ som eliminerar behovet av manuella lyft och som gör det möjligt för medhjälparen att alltid välja den bästa arbetsställningen i samband med lyft. Dessutom finns lyftsystemet alltid på plats, det upptar minimalt med utrymme och det är mycket lättmanövrerat. Ytterligare en fördel är att man får ett stort lyftområde med möjlighet till både låga och mycket höga lyft.

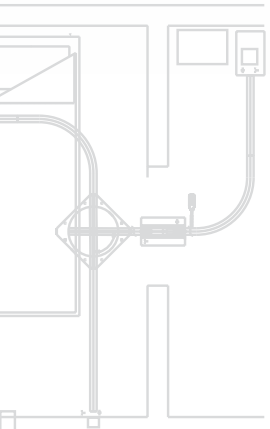

Handicares SystemRoMedic™ MilkyWay är ett komplett, enkelt och säkert skensystem för fast installation i tak och/eller på väggarna. Varje MilkyWay skensystem designas individuellt och i nära samarbete med kunden för att anpassas efter de givna förutsättningarna och för att uppfylla ställda krav. Tillsammans med valfri taklyftsmotor och rätt lyfttillbehör erbjuder MilkyWay obegränsade möjligheter till utveckling och anpassning av den perfekta stationära lyftlösningen för alla miljöer, rum och lyftbehov.

### För alla typer av skensystem



Ett färdigt MilkyWay skensystem kan se ut och fungera på väldigt många olika sätt. Ett enkelt skensystem kan användas för att underlätta förflyttningar exempelvis till och från en säng och en rullstol. För ökad rumstäckning, flexibilitet och användbarhet kan det enkla skensystemet byggas ut med kurvor och växlar. Ett rumstäckande skensystem är rätt lösning när de exakta punkterna för var lyftbehoven kan komma att uppstå inte kan definieras i förväg. Ett enkelt skensystem kan också, med hjälp av ett elektriskt styrt växelsystem, kopplas ihop med ett rumstäckande skensystem. Kombinationer av det slaget används ofta för att möjliggöra manövrering av en taklyftsmotor mellan olika rum, till exempel från sovrum till badrum.

### Alla delar som behövs, men inte fler

MilkyWay är ett komplett skensystem som tillvaratar och gör det mesta av just dina förutsättningar. Det innehåller alla delar som behövs för att skapa individuellt anpassade, säkra och flexibla lösningar men, för enkelhetens skull, inte fler.

### Raka skenor och skenkurvor

I MilkyWay finns raka skenor med tre olika skenprofiler och i många längder från 1600-7000 mm. Skensystemet inkluderar också skenkurvor i 15°, 22,5°, 45° eller 90° varianter. Alla skenor och skenkurvor är förberedda för skenladdning.

### Växlar

Växlar används för att skapa ökad rumstäckning, flexibilitet och användbarhet genom att koppla ihop en skena eller ett skensystem med en annan/ett annat för att göra det möjligt för taklyftsmotorn att åka mellan de två skenorna/systemen. I MilkyWay finns spårväxlar, karusellväxlar och skenväxlar för alla typer av skensystem.

### Takfästen och pendlar

MilkyWay erbjuder flera olika möjligheter för installation av raka skenor och skenkurvor i taket. Bland annat beroende på faktorer som takets höjd och konstruktion kan man välja mellan att använda takfästen och/eller höjddjusterbara pendlar av olika slag.

Takfästen är ett ekonomiskt alternativ som enkelt kan installeras dikt i betong. Med pendlar kan skenan installeras i höga tak samtidigt som avståndet mellan skena och golv ändå blir rätt (2300 mm).





## Väggfästen

På samma sätt erbjuder MilkyWay flera olika alternativ för installation av skensystem på väggarna. Även här beror valet av fästet på väggens konstruktion och material samt vilken last fästet ska bära.

## Material och ytbehandling

MilkyWay raka skenor och skenkurvor är tillverkade av pulverlackerat aluminium medan alla vägg- och takfästen samt pendlar etc är tillverkade av pulverlackerat stål. Alla pulverlackerade MilkyWay delar är som standard vita (RAL9010) men de kan också, som tillval, fås i andra färger eller helt olackerade.



## Strömtillförsel

MilkyWay kan installeras med skenladdning vilket innebär att en konstant strömtillförsel (24 V DC) finns inbyggd i skenan. Taklyftsmotorn kan då försörjas med ström hela tiden, överallt i skensystemet och ingen separat laddningsstation krävs.

Ett MilkyWay skensystem kan givetvis också, som alternativ, installeras med en eller flera laddningsstationer för taklyftsmotorn på utvalda platser i skensystemet.

## Enkelt att installera

MilkyWay erbjuder flexibilitet i alla avseenden. Det ger många möjligheter vid design samtidigt som det gör skensystemet mycket enkelt att installera. MilkyWay skensystem måste alltid installeras av kvalificerad och auktoriserad personal och i enlighet med instruktioner utfärdade av Handicare AB. MilkyWay har utvecklats för att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna. Skensystemet bör besiktas och säkerheten utvärderas en gång om året.

## Ett fast installerat taklyftssystem är rätt lösning när man:

- har permanenta eller ofta återkommande lyftbehov
- har begränsat med utrymme
- vill kunna anpassa möbleringen fritt efter situation och behov
- vill skapa optimala arbetsförhållanden samt förebygga belastningsskador och olyckor i samband med förflyttningar
- vill ha en lösning som är enkel för medhjälparen att använda
- vill tillhandahålla bästa möjliga vårdkvalitet och samtidigt ge brukaren en känsla av trygghet, kontroll och värdighet

MilkyWay är en prisvärd och samtidigt långsiktig lösning med maximal anpassning, flexibilitet, enkelhet och säkerhet.





## Välj taklyftsmotor efter de aktuella lyftbehoven

MilkyWay kan användas tillsammans med många olika taklyftsmotorer. Vilken som är den rätta beror på behovet av lyftkapacitet, den miljö och de situationer som lyftsyttemet ska användas i samt, givetvis, på brukarens behov. Besök gärna vår hemsida, [www.handicare.se](http://www.handicare.se), för mer information.



Art. nr.	Produkt
50100039	RiseBasic300M, SWL 138 kg
50100040	RiseBasic440M, SWL 200 kg
50100057	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, SWL 205 kg
50100051	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity, SWL 205 kg
50100058	RiseAtlas450T, SWL 205 kg
50100052	RiseAtlas450T, med SmartPark-funktion, SWL 205 kg
50100059	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem, SWL 285 kg
50100060	RiseAtlas625T, SWL 285 kg
50100053	RiseAtlas625T, med SmartPark-funktion, SWL 285 kg
50200012	RisePorto300, bärbar taklyftsmotor, SWL 140 kg
50200011	RisePorto450, bärbar taklyftsmotor, SWL 205 kg

### Mer information

Välkommen att kontakta oss för mer information om MilkyWay skensystem. Med utgångspunkt i just dina förutsättningar och behov hjälper vi dig att skapa den perfekta lyftlösningen.

