
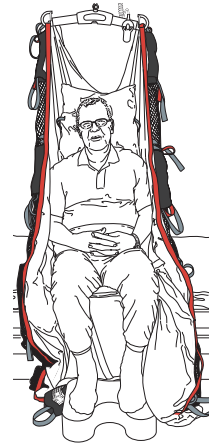
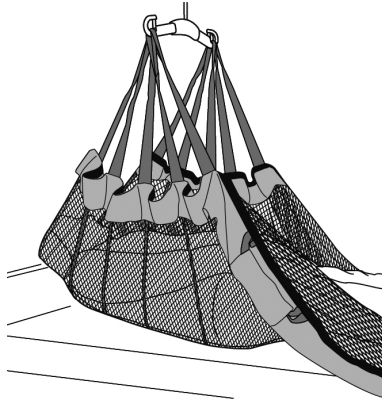


SafeHandlingSheet

SystemRoMedic™

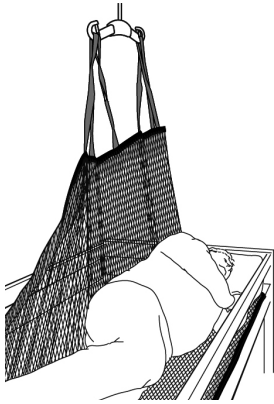

Max: 300 kg, 400kg, 570 kg

SafeHandlingSheet är ett lakan som kan användas till mobil eller stationär lyft vid positionering i säng. Den är utformad med fjorton upphängningspunkter, sju på vardera sida om brukaren. SafeHandlingSheet är utformad för att tillgodose behov av att positionera brukare i säng.

I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av lyft och för brukare med olika behov. Lyftselarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av lyftsituationen och brukarens behov.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



Läs alltid manualen


Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.

Produktbeskrivning av SafeHandlingSheet

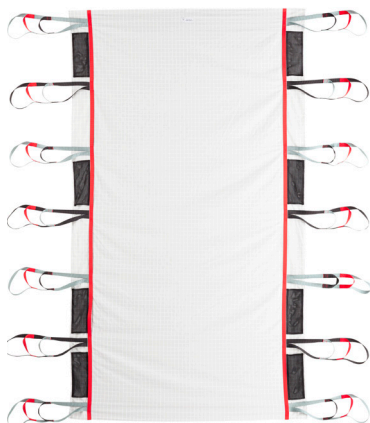

SafeHandlingSheet är utformad med lyftband på vardera långsida. Lyftbanden är vartannat grått och vartannat svart för att underlätta för medhjälparen.

På lyftbanden finns tre öglealternativ som även de har varierande färg, grått, rött och svart.

SafeHandlingSheet är märkt med en dekal som visar vilken sida som skall placeras uppåt på sängen. "This side up".


Dekalen är även placerad så att den visar mitten på lakandet.

SHSheet L Polyester nät/WendyLett4Way



När positioneringen är klar bäddas banden in under madrassen eller placeras i fickorna på sidorna.


SHSheet L Polyester nät

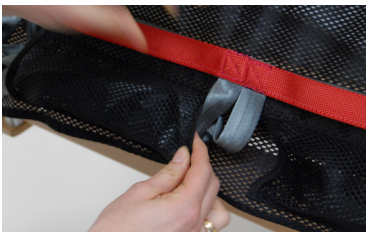

Tips!

- Bädda gärna med vanligt lakan ovanpå SafeHandlingSheet.
- Placera brukaren mitt på SafeHandlingSheet för att få ett jämnt lyft.
- Överskottet av tyget bäddas in i fotändan för att finnas tillgängligt om brukaren glider ner i sängen och flera förflyttningar högre upp i säng behöver göras.
- Taklyft med travers rekommenderas.
- Om möjligt, tänk på att flytta sängen i första hand istället för att skjuta/dra brukaren då han/hon lättat från underlaget.


Användning av SafeHandlingSheet

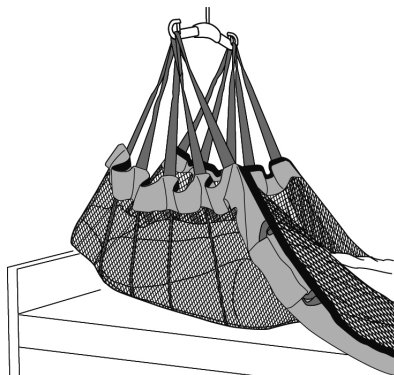

Högre upp i säng:

De fem översta banden på vardera sida (eller så många som behövs för att täcka in friktionspunkterna) hakas på lyftbygeln.

Starta höjningen av lyften och för brukaren högre upp i sängen när friktionspunkterna lättar från underlaget.

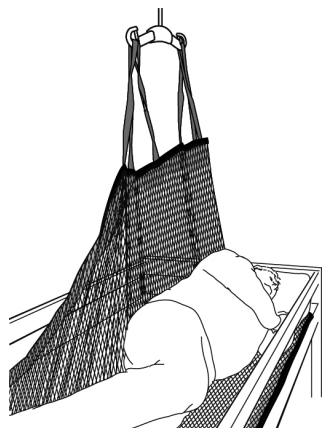

Vändning i säng:

För att brukaren skall hamna mitt i sängen efter vändning rekommenderas att först göra ett lyft (se: Högre upp i säng) i sidled mot ena kanten av sängen för att sedan genomföra vändningen.

Koppla de fyra till fem mest centrala banden på ena sidan av SafeHandlingSheet på lyftbygeln. Medhjälpare eller sänggrind på båda sidor för ökad säkerhet. Starta vändningen.

Byte av SafeHandlingSheet:

Vid byte av SafeHandlingSheet görs ett lyft enligt tidigare beskrivning. Då brukaren lättat från underlaget läggs ett nytt SafeHandlingSheet in under brukaren.


Gör sedan en vändning (se: Vändning i säng) med det nya lakanet och rulla/tryck ner det gamla lakanet bakom ryggen på brukaren, sänk ner på rygg igen. Gör nu en till vändning med det nya lakanet men åt motsatt håll och dra bort det gamla lakanet.

Uppresning - sittande på sängkanten

Obs! Brukaren skall klara av att sitta på sängkanten för att denna uppresning skall vara lämplig.


Sänk sängen så att brukaren får stöd under sina fötter när han/hon sitter på sängkanten.

Är sängen ej tillräckligt låg, använd en fotpall.

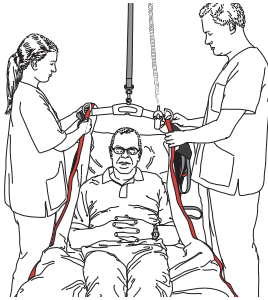

Förbered brukaren på uppresningen.

Höj ryggstödet på sängen och placera de översta handtagsbanden på lyftbygeln.

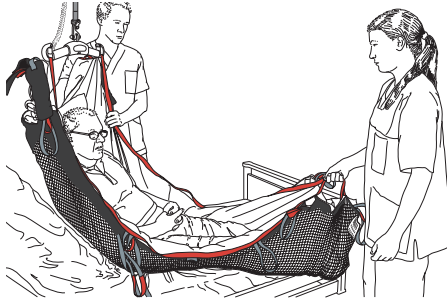

En medhjälpare greppar handtagen vid fotändan.

Starta uppresningen genom att höja lyften.

Medhjälparen förflyttar brukarens ben över sängkanten och ner på golvet.

Säkerställ att brukaren sitter stadigt på sängkanten. Knä och höft skall vara i samma nivå.

Placera lämpligt stå eller gästöd framför brukaren för uppresning till stående.



Produkt	Art nr	Mått	Material	Maxvikt
SHSheet L poly nät	47522007	240 x 115	Polyesternät: Luftigt och ventilerande material	300kg / 661 lbs.
SHSheet XL poly	47502008	240 x 115	Polyester: Slitstarkt material med låg friktion	400kg / 900 lbs.
SHSheet XXL poly/ förstärkt	47502009	240 x 130	Polyester: Slitstarkt material med låg friktion	570kg / 1250 lbs.
SHSheet L Poly nät/ WendyLett4Way	47542007	240 x 115	Polyesternät: Luftigt och ventilerande material WendyLett4Way: Ligggyta med lakansväv	300kg / 661 lbs.

Skötselråd:

Läs på lyftselens märketikett.



Använd inte sköljmedel.

Undvik torktumling för ökad livslängd.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

