

REF 60800001
StandUp med strömkabel

REF 60800002
StandUp, med batteri



SWL: 160 kg



StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande eller stående om de ramlat. Den används endast till personer som inte är allvarligt skadade och som klarar sig själv efter att de blivit hjälpta upp från golvet. StandUp är hopfällbar och utrustad med bärrem för enkel transport.

I Handicares produktserie SystemRoMedic ingår bland annat lyftar och lyftselar. SystemRoMedic innebär en helhetssyn på förflyttningar uppdelat i fyra kategorier: överflyttning, positionering, stöd och lyft.



Kontroll av funktion

Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftstolen. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Före användning:

Kontrollera att lyftstolen är rätt monterad.




Läs alltid manualen

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lyften får bara användas av personer som fått utbildning i hanteringen av lyften.

Montering av StandUp

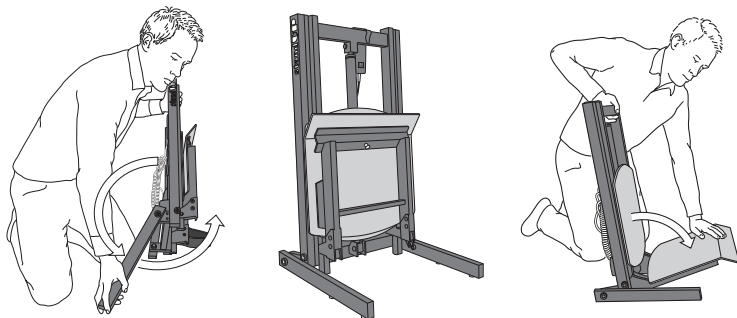

Fäll ut de två benen och vrid dem 3/4 varv så att de pekar framåt och så att ryggdelen står stabilt.

Lägg ner sittdelen.

StandUp med strömkabel: Sätt i strömkabeln i ett nätuttag.

Nu är StandUp klar att användas. Prova att köra sittdelen upp och ner en gång för att se att allt fungerar som det ska och att StandUp får ström.

Demontering av StandUp

StandUp med strömkabel: Samla ihop strömkabeln och fäst den på baksidan av StandUp.

Fäll upp sittdelen.

Vrid tillbaka de två benen 3/4 varv.

Slutlig inspektion

Kontrollera att inga delar ligger kvar i emballaget.

Inspektera lyftstolen för att upptäcka eventuella tecken på skador.

Inspektera alla anslutningar, skruvar och bultar.

Kontrollera att lyftstolen är rätt monterad.

Tag handkontrollen, tryck på uppknappen och kör sitsen hela vägen upp. Tryck sedan på nedknappen och kör sitsen hela vägen ned.

Testa lyftstolens funktion genom att lyfta en person (ej brukaren).

OBS!

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Att använda produkten



Viktig information

- Lyftstolen skall monteras i enlighet med monteringsanvisningar som tillhandahålls av Handicare.
- Lyftstolen får endast användas på plant golv.
- Lyftstolen är endast avsedd för inomhusbruk.
- Lyftstolen får aldrig användas utan att benen är utfällda.
- Lyfttillbehören skall vara rätt utprovade i förhållande till brukarens behov och funktioner.
- Maxlasten får under inga omständigheter överskridas. Se på dekalen på lyftstolen.
- Lyftstolen får ej vara i direktkontakt med vatten eller användas under dusch och bad.
- För optimal funktion skall lyftstolen inspekteras regelbundet. Se kapitlet Underhåll.
- Garantin gäller bara om personal godkänd av Handicare reparerar eller ändrar någonting i lyftstolen.

Laddning av batteri (StandUp med batteri)

Ladda lyften efter användning så att du alltid är säker på att lyftens batteri är fulladdat.

Laddningsprocedur:

Koppla in laddningskabeln i eluttaget.


Den gula LED-lampan indikerar att batteriet laddas.

Laddningen avbryts automatiskt vid fulladdat batteri.

OBS!

Innan lyften tas i bruk första gången måste den laddas i 4 timmar.

Ladda batterierna regelbundet för maximal livslängd. Vi rekommenderar laddning varje dag lyften används.

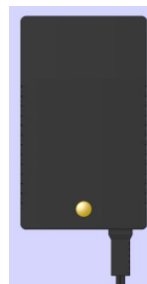


Handkontroll

Höjning/sänkning

Markeringar på knapparna anger riktning.

Rörelsen avstannar så snart man släpper knapparna.

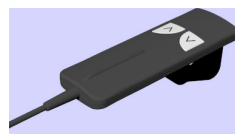

Användning

StandUp är enkel att använda då någon ramlat och ska upp från golv. Försäkra dig om att brukaren inte ådragit sig allvarligare skador innan användning.

Montera StandUp enligt beskrivningen på sida 2.

Hjälp brukaren till sittande ställning och placera fötterna på en AntiSlip. Placera sedan StandUp bakom ryggen och hjälp brukaren upp på sittdelen. Detta kan göras på två olika sätt:





1. Placera exempelvis SitWalk under stussen och dra brukaren upp på sittdelen. Om möjligt, be brukaren att trycka ifrån.
2. Använd exempelvis SitWalk under stussen och hjälp brukaren att gå "stjärtgång" upp på sittdelen. Om möjligt, be brukaren att trycka ifrån.

Arbeta alltid med rak rygg och raka armar, lätt böjda knän och i gångställning. Använd tyngdöverföring för bäst arbetsteknik.

När personen sitter på StandUp så används handkontrollen till att höja personen upp från golvet. Personen kan själv trycka sig upp för att själv kunna styra och känna sig delaktig. Var alltid nära personen under uppresningen för säkerhet och trygghet.

När personen kommit upp till full sitthöjd så hjälp brukaren upp till stående eller gör en överflyttning till exempelvis en stol eller säng.

Nu kan StandUp packas ihop igen och förvaras eller transporteras på enklast sätt.

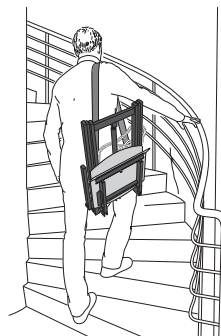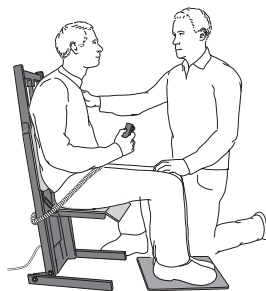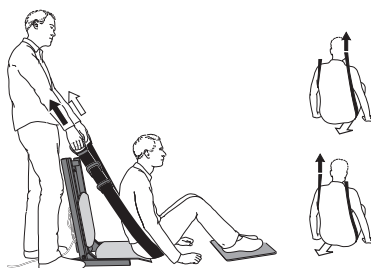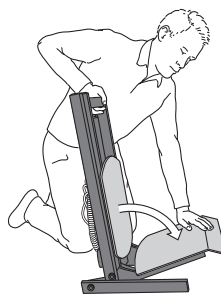

Tillbehör

SitWalk

Ett band med handtag som placeras under stussen på brukaren för att hjälpa denne upp på sittdelen. 245 x 12 cm.



REF: 6085

SpaciousBag

Väska med hjul på ena sidan för förvaring och transport av StandUp med tillbehör. Reglerbara handtag för att även kunna bäras på axlarna..



REF: 00951

AntiSlip

Antihalkmatta som placeras under fötterna på brukaren för bättre fäste. 45 x 38 cm.



REF: 8040

EasySlide/ReadySlide

Glidmatta som kan placeras under stussen på tyngre brukare för att reducera friktionen då brukaren hjälps upp på sittdelen.



EasySlide: 50 x 60 cm, REF: 2010, 2020

EasySlide: 50 x 70 cm, REF: 2011, 2021

ReadySlide: 70 x 70 cm, REF: 11250

Underhåll

Lyften ska genomgå noggrann kontroll minst en gång per år. Kontrollen utförs av auktoriserad personal i enlighet med Handicares servicemanual.

Reparation och underhåll får endast utföras av auktoriserad personal som använder originalreservdelar.

Återvinning

StandUp kan sorteras i metall, plast och elektriskt material för återvinning.

Rengöring och desinfektion

Rengör lyftstolen med varmt vatten eller tvättsprit vid behov. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor då detta kan skada materialen.

Måttbeskrivning



	Cm	Inch
A	74-114	29-45
B	45	17.7
C	44	17.3
D	43	16.9
E	5-44	2-17.3
F	39.5	15.6
G	19	7.5

Teknisk information StandUp med strömkabel

Lyfthastighet:	7,6 mm/s utan belastning.
Input:	230V AC/50Hz/180VA int.10% max2/18 min
Motor:	DC 24V, 4,5 A. IP51.
Drifttid:	10% maximal löpande drifttid på 2/18 minuter. Push: 6000N.
Ljudnivå:	Noise level 48dB(A); measuring method DS/EN ISO 3746, actuator not loaded.
Material:	Aluminium
Skyddsklass:	IPX4
Vikt:	11,5 kg
Förväntad livstid:	10 år
SWL:	160 kg



Apparaten är avsedd för inomhusbruk.



Type B, enligt skyddsgrad mot elektrisk chock.

Produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Teknisk information StandUp med batteri

Lyfthastighet:	7,6 mm/s utan belastning.
Input:	24V 1.3 Ah Laddningsström max. 500 mA
Motor:	DC 24V, 4,5 A. IP51.
Drifttid:	10% maximal löpande drifttid på 2/18 minuter. Push: 6000N.
Ljudnivå:	Noise level 48dB(A); measuring method DS/EN ISO 3746, actuator not loaded.
Material:	Aluminium
Skyddsklass:	IPX4
Vikt:	11,5 kg
Förväntad livstid:	10 år
SWL:	160 kg



Apparaten är avsedd för inomhusbruk.



Type B, enligt skyddsgrad mot elektrisk chock.

Produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

SystemRoMedic™

I 25 år har vi helhjärtat ägnat oss åt utveckling av smarta och lättanvända hjälpmedel för säkra och enkla förflyttningar samt åt att göra livet och arbetet enklare för brukare och personal inom vård och omsorg.

Erfarenhet, innovation och utbildning är grunden för SystemRoMedic, en helhetslösning för alla tänkbara förflyttnings-situationer.

Överflyttning, produkter för förflyttning mellan två enheter

Positionering, produkter för lägesförändring inom samma enhet

Stöd, produkter för stöd vid mobilisering

Lyft, produkter anpassade för lyft

Filosofin bakom SystemRoMedic fokuserar på att minska uppkomsten av arbetsrelaterade skador samtidigt som brukarens upplevelse av självständighet, oberoende och värdighet ökar. Genom en kombination av utbildning, träning och ett komplett sortiment av effektiva förflyttningshjälpmedel erbjuder SystemRoMedic förbättring av både arbetsmiljö och vårdkvalitet samtidigt som signifikanta kostnadsbesparingar kan göras.

Vår mission, att hjälpa människor, har alltid varit och kommer alltid att vara drivkraften bakom våra innovationer. Vi älskar enkla förflyttningar.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com.



handicare

Handicare AB
Veddestav. 15, Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se

Internet: www.handicare.com