

TJEKLISTE VED SLUTKONTROL

Der bør altid foretages en slutkontrol af den samlede monter-
ing. Slutkontrollen udføres ved gennemgang af
nedenstående liste. Listen kan også downloades fra
www.directhealthcaregroup.com/da/.

Hvis der er afkrydsninger i kolonnen "Nej", skal det vurderes,
om VENDLET Standard bør benyttes før forholdet er udbedret.

Tjekliste for slutkontrol	Ja	Nej
Er VENDLET Standard monteret af person med relevant oplæring?		
Overholder den samlede vægt af bruger, VENDLET-system og andet udstyr på/i sengen sengens maksimale belastnings grad?		
Er dimensionelle krav til sengeheste overholdt (længde og højde)? (Side 26)		
Kører begge motorruller frit op og ned?		
Er alle hjørnestolper justeret til samme højde i forhold til madrassen? (Side 26)		
Virker alle nødfir?		
Er alle nylonstropperne fastgjort til sengerammen og alle mellemstænger?		
Er alle nylonstropperne intakte?		
Er alle plastdelene intakte og uden tegn på slid?		
Er alle kabler intakte?		
Kører begge motorruller lagen ind og ud?		
Aktiveres timeren ved 2 tryk inden for 2 sekunder?		
Slår timeren fra efter 90 sekunders inaktivitet?		
Hænger kontrolenheden stabilt?		
Er alle kabler fastgjort til kontrolenheden?		
Er lågene på kontrolenhederne lukket korrekt, og er lågene intakte?		
Er alle kabler fri af gulvet?		
Er glidelagnet monteret ovenpå madrassen og fastgjort korrekt?		
Er træklagnet monteret så det kører over motorrullen?		
Er quick guiden placeret synligt i nærheden af sengen?		
Er manualen til VENDLET Standard udleveret?		
Er plejepersonalet instrueret i brugen af VENDLET Standard og alle dets funktioner?		
Er VENDLET Standard tilmeldt årligt serviceeftersyn?		

Dato: _____

Udført af: _____

Serienr.: _____

Sengemodel: _____

Madrasmodel og dimension: _____

Borger: _____

Adresse: _____

Dato for næste eftersyn: _____